



## Sängens uppresningsstöd GR2 80/ 90 - Bruksanvisning



## 1. Avsedd användning

Sängens uppresningsstöd GR280/90 ger stabilt stöd och hjälper användare att ta sig i och ur sängen. När användaren ligger i sängen kan stödet användas som hjälp för att resa sig till sittande ställning eller för att ändra position i liggande läge.

Produkten är avsedd att användas tillsammans med sängar med metallram, 80 eller 90 cm breda, med rektangulära sidrör i storleken 50 × 20 mm.



Fig.1

## 2. Uppackning

Ta bort förpackningen och kontrollera noggrant att alla delar finns med och är oskadade. Kontakta omedelbart leverantören om någon del saknas eller är skadad och försök inte att installera produkten.

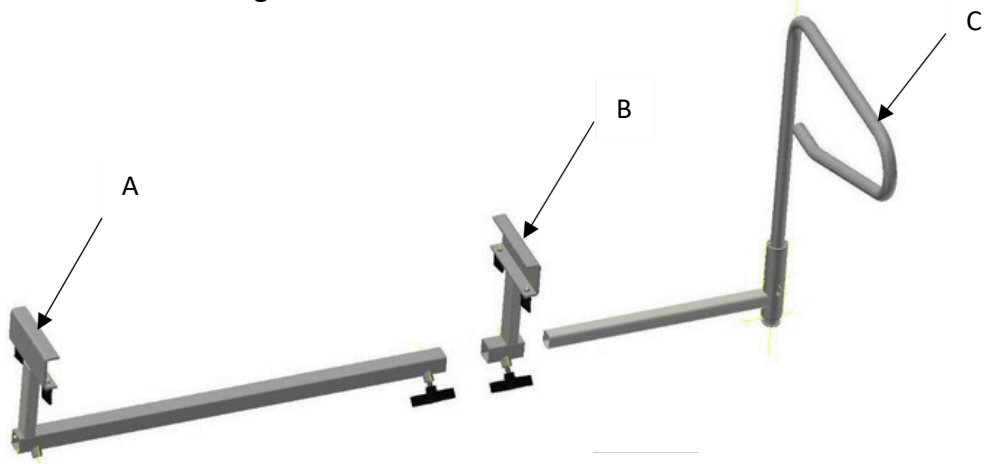


Fig.2

## 3. Maximal användarvikt

Uppresningsstödet är konstruerat för att på ett säkert sätt bära en användare med en maxvikt på 135 kg.

Maxbelastningen inkluderar krafter som uppstår vid:

- uppresning till sittande ställning
- uppresning till stående
- positionsförändring

**Överskrid INTE denna viktgräns.**

## 4. Monteringsanvisningar

Montera samman del A, del B och delen med handtag C. Avståndet mellan del B och del C ska vara högst  $55 \pm 2$  mm (se figur 3). Dra åt alla vingbultar ordentligt.

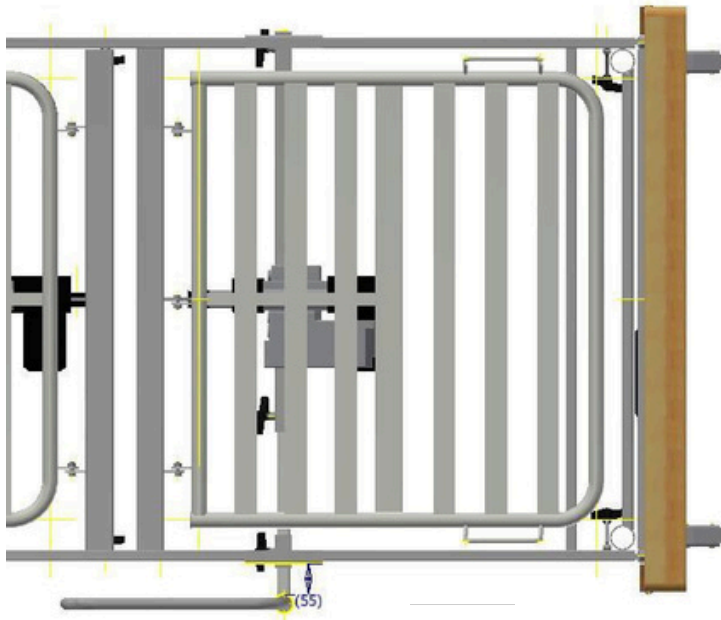


Fig.3

### 5. Installation:

#### **Installera INTE denna produkt på en skadad säng.**

Montera uppresningsstödet på den sida av sängen där personen normalt kliver ur. Placera uppresningsstödet så att användaren kan nå det från liggande position utan att behöva sträcka sig. Avståndet mellan uppresningsstödet och sängens huvudgavel ska vara  $568 \pm 10$  mm (se figur 4).

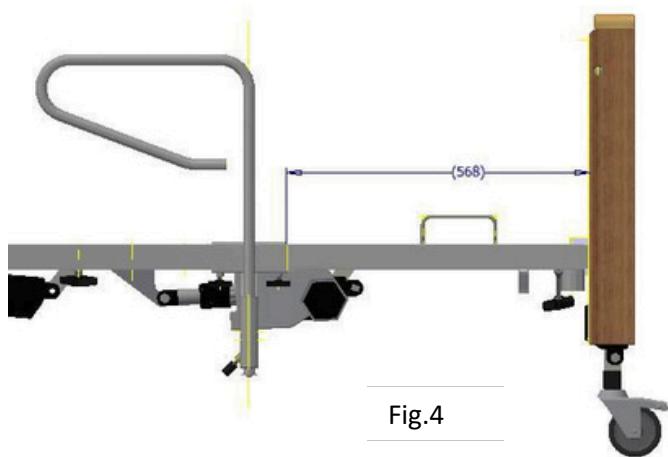


Fig.4

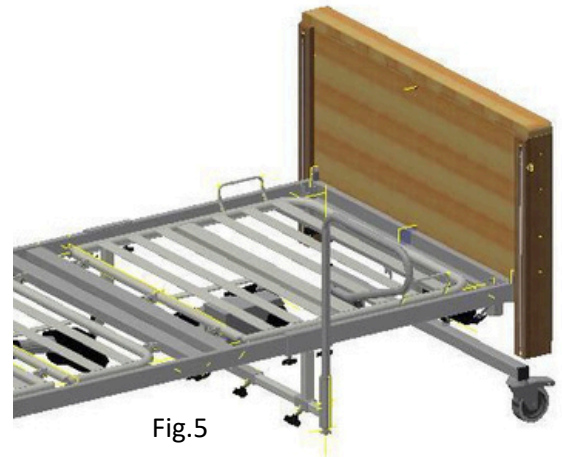


Fig.5

### 6. Hur uppresningsstödet används

Använd handtaget för att resa dig till sittande ställning i sängen.

Lyft handtaget, vrid det 90 grader och tryck nedåt (figur 5).

När du kliver ur sängen, använd uppresningsstödet som extra stöd och för ökad stabilitet när du reser dig upp.

Stå med ryggen mot sängen och med fötterna intill sängens kant. Håll i uppresningsstödet som stöd när du sätter dig på sängens yta.

Lyft handtaget, vrid det 90 grader och tryck nedåt för att låsa det i det läge som visas i figur 4.

Använd uppresningsstödet som extra stöd, för upp benen upp i sängen och inta en bekväm position.

### 7. Underhåll:

**Varje vecka:** Kontrollera att uppresningsstödet är korrekt placerat och att alla bultar sitter stadigt och är ordentligt åtdragna.

**Regelbundet:** Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Alla misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten ska tas ur bruk.

### 8. Rengöring

Rengör uppresningsstödet regelbundet med ett neutralt allrengöringsmedel och varmt vatten.

Kontrollera rengöringsmedlens lämplighet före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor, eftersom dessa kan orsaka permanenta skador på ytan.

Låt produkten torka helt innan användning eller förvaring.

[www.nipim.org](http://www.nipim.org)



NIPI-M  
Znanie 10 str.  
6007 Stara Zagora  
Bulgaria