
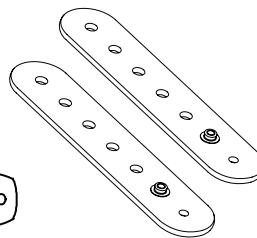
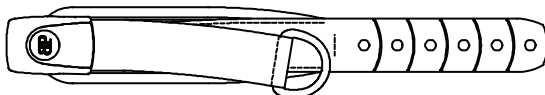


Evoflex®

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

ART NOS. EB205, EB225, EB235, EB275, & EBE100

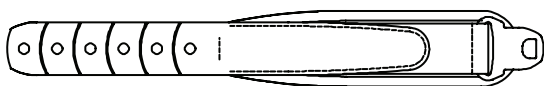

Nämä ohjeet sisältävät tärkeää tietoa Bodypoint Evoflex- lantion kiinnitysvyön ja valinnaisvarusteena saatavan Evoflex-vyöjatkeen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Anna nämä ohjeet käyttäjälle tai hoitajalle ja varmista, että ne on luettu ja ymmärretty.

Valinnaisia Bodypoint-vyön kiinnikkeitä voidaan käyttää pyörätuoliin ja istuinjärjestelmiin kiinnitettäessä.

VAROITUS! Tuotteen asennus ja sovitus tulee tehdä pätevän kuntoutusteknikon toimesta.

KÄYTTÖTARKOITUS:

VAROITUS! Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan henkilön kiinnittämiseen pyörätuoliin tai työtuoliin. Sitä EI ole tarkoitettu kuljetusturvalliseksi, turvavyölaitteeksi tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, jossa sen peittäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Tämän tuotteen väärinkäyttö on kiellettyä ja vaarallista.

VAROITUS! Tämän lantiovyn tulee aina istua tiukasti lantion alaosan tai reisien ympärillä. Pyydä omaa istuinasiantuntijaa näyttämään, miten tuotetta säädetään ja käytetään oikein.

- Löysä vyö saattaa päästää käyttäjän liukumaan alaspäin ja aiheuttaa kuristumisvaaran.
- Tämän vyön avaaminen vahingossa voi päästää käyttäjän liukumaan alas tai putoamaan pyörätuolista.
- Mikäli käyttäjä ei pysty irrottamaan tuotetta itse, saattaa syntyä vaaratilanne, jos käyttäjä liukuu alaspäin tai jää pyörätuoliin kiinni hätätilanteessa.

Mikäli käyttäjän fyysiset tai kognitiiviset kyvyt estävät häntä käyttämästä tätä vyötä turvallisesti, avustajan on oltava aina läsnä vyötä käytettäessä. Varmista, että kaikki käyttäjän avustajat tietävät, miten tuotetta säädetään ja miten se aukaistaan.

VAROITUS! Kuten kaikki uudet istuintuet, tämä tuote saattaa vaikuttaa henkilön istuma-asentoon. Käyttäjien tulee jatkaa normaaleja painetta helpottavia toimintojaan ja ihon kuntotarkastuksia. Ihotarkastuksia ei tule suorittaa ainoastaan niistä kohdista, joissa laite koskettaa käyttäjää, vaan myös kovimman paineen alaisista alueista kuten ristiluun, takareidet ja pakarat. Jos lisääntynyttä ihon punoitusta tai ärsytystä havaitaan, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi tai

istuinasiantuntijaasi. Mikäli näin ei tehdä, voi käyttö aiheuttaa vakavia vammoja, kuten painehaavaumia.

VAROITUS! Jos tuotteen käyttöön liittyen ilmenee vakava häiritsevä vaikutus, siitä tulee ilmoittaa valmistajalle (Bodypoint Inc.) ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

SÄÄNNÖLLISET TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYTARKASTUKSET:

Käyttäjäturvallisuuden varmistamiseksi tämä tuote on tarkastettava säännöllisin väliajoin sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen merkkien varalta. Mikäli tuote ei toimi asianmukaisesti tai jos soljissa, kiinnityskohdissa, vyökankaassa, pehmustuksessa tai ompeleissa näkyy huomattavaa kulumista, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteyttä tavarantoimittajaan, jotta korjaus tai vaihto voidaan suorittaa asianmukaisesti Bodypointissa. Epäpätevät henkilöt eivät missään tapauksessa saa muokata tai korjata tuotetta – se voi aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä!



PUHDISTUS: Konepesu kuumassa vedessä, 60 °C (140 °F). Älä valkaise. Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa tai kuivaus narulla. Älä silitä silitysraudalla. (Tuotteen laittaminen kangaspussissa pesuun auttaa ehkäisemään tuotteen ja pesukoneen naarmuuntumista.)

JÄTE/HÄVITTÄMINEN: Tuote on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan hävittää turvallisesti ilman erityisiä varotoimia käyttöiän lopussa.

TAKUU: Tällä tuotteella on rajoitettu elinikäinen takuu koskien valmistusvikoja ja materiaaleja alkuperäisen ostajan normaalissa käytössä. Takuuasioissa ota yhteyttä Bodypoint-myyjääsi tai Bodypointiin.

Lisätietoja Bodypoint-tuotteista ja Yhdysvaltojen ulkopuolisista jälleenmyyjistä on osoitteessa www.bodypoint.com.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands



Lääkinnällinen
laite




PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: Pakkaus saattaa sisältää yhden tai useamman seuraavista:

Evoflex -lantion kiinnitysvyö sekä:

- (2) M6 x 8 ruuvia
- (2) M6 matalaprofiilista laippamutteria
- (2) aaltojousialuslevyä.

(2) Evoflex-vyöjatketta sekä:

- (2) M6 x 8 mm:n ruuvia
- (2) M6 matalaprofiilista laippamutteria

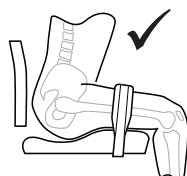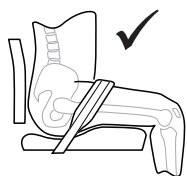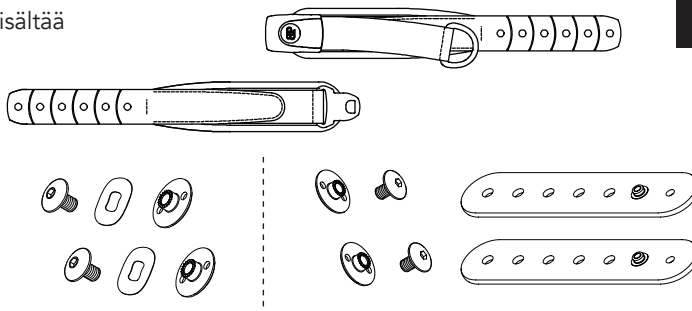


VYÖN PAIKKA


1. Määritä kliinisten tavoitteiden perusteella vyön tehokkain asento ja kulma. Määritä, onko käyttäjän kannalta parasta asettaa vetohihna vasemmalle tai oikealle.
2. Kun säätöhihna on kiristetty, sijoita halutut kiinnityskohdat istuinjärjestelmään tai pyörätuolin runkoon ja valitse sitten kuvassa näkyvistä asennusmenetelmistä.
3. Lisää tarvittaessa Evoflex-vyöjatke kiinnityskohtiin ylettymiseksi.

KIERTÄMISEN RAJOITTAMINEN

Lisää jännitystä ja rajoita kiertämistä mukana toimitetulla aaltojousialuslevyllä. Jätä aaltojousialuslevy pois jännityksen alentamiseksi ja kiertämisen helpottamiseksi.

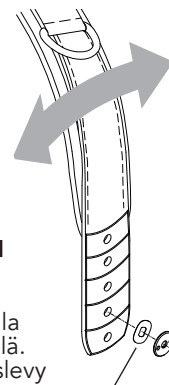


ASENNUSVAIHTOEHDOT

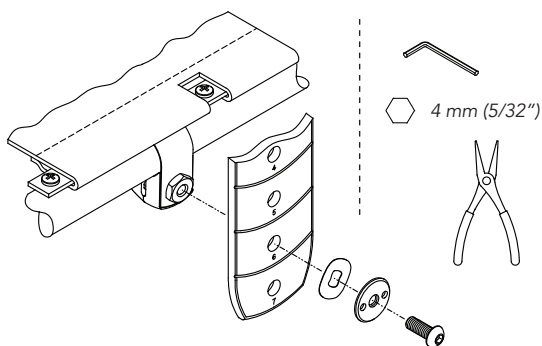

SANKAKIRISTIN TAI RUNKOKIRISTIN


(tarvitaan tuotenro HW320 tai HW310)

Kytke kiinnitin istuimen putkeen. Kiinnitä vyö kiinnikkeeseen mukana toimitetulla M6-ruuvilla.

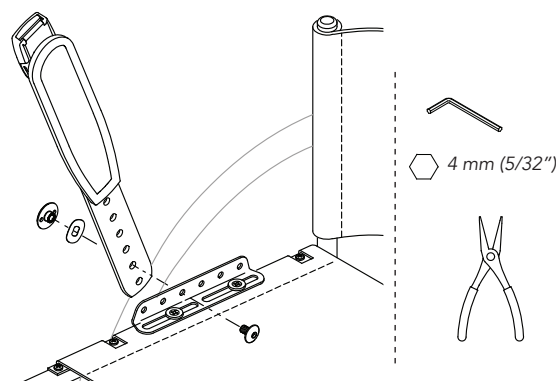


ISTUIMEN KIINNITYSKANNAKE

(tarvitaan tuotenro HW200-20 tai -90)

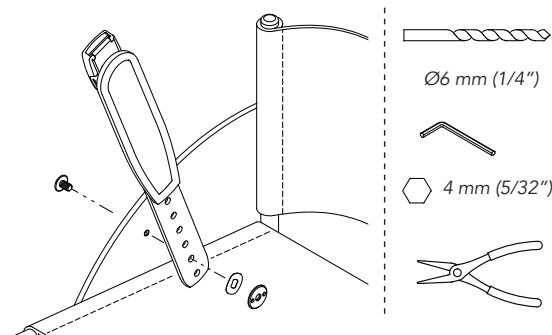

SUORA ASENNUS SIVUSUOJUUKSIIN

Poraa 6 mm:n (1/4") reikä tai käytä olemassa olevaa reikää/hahloa vyön kiinnittämiseen toimitettuja kiinnittimiä käyttäen.

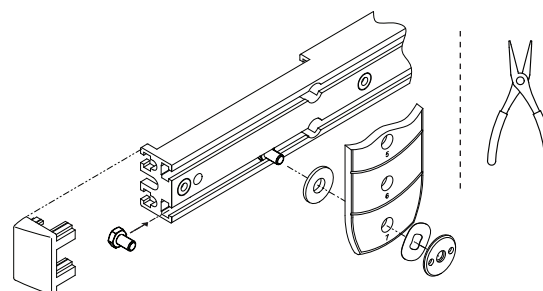

T-URAKIINNITINSARJA


(tarvitaan tuotenro. HKA6-12 tai HKA10-14)

Käytä Evoflex-sarjan aaltojousialuslevyä ja matalaprofiilista laippamutteria sekä T-urakiinnitinsarjan pulttia ja aluslevyä.

EVOFLEX-VYÖJATKEEN ASENNUS (VALINNAINEN)

Kiinnitä vyöjatkke Evoflexiin. Aluslevy ei käytetä.

fi

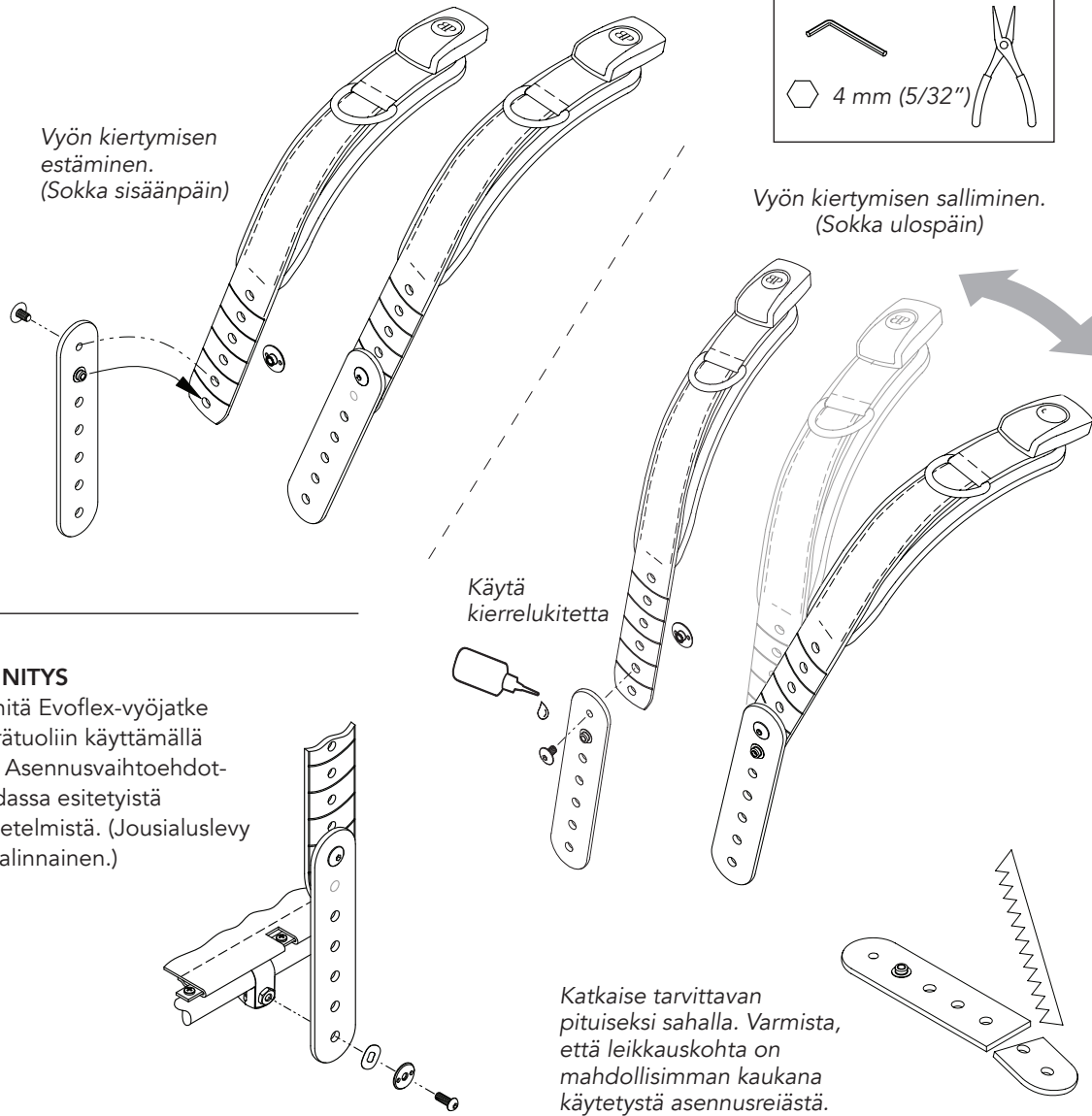

KIINNITYS

Kiinnitä Evoflex-vyöjatkke pyörätuoliin käyttämällä yhtä Asennusvaihtoehdotkohdassa esitetystä menetelmästä. (Jousialuslevy on valinnainen.)

VYÖN SÄÄTÖ

Oikein säädettyinä ja kiristettynä vyö istuu tiiviisti ilman löysyyttä, jotta käyttäjä pysyy hyvin kiinnitettynä. Käytä vetohihnaa päivittäisiin säätöihin, kuten vaatteiden vaihtamisesta johtuviin mukautuksiin. Jos pituussäätö on tarpeen hyvää istuvuutta varten tai jos vyö on irrotettava puhdistusta varten, tämä voidaan tehdä vyön pään hihnoilla.

TURVALLISUUSTARKISTUS

Kun käyttäjä on kiinnitetty pyörätuoliin, tarkista vyön istuvuus pyytämällä käyttäjää nojaamaan eteenpäin ja sivulta toiselle. Tarkista seuraavat seikat:

1. Solki ja säätöhihnat toimivat normaalisti.
2. **Mukavuus:** tarkista mahdolliset ärtymysalueet.
3. **Asento:** mikäli tuki on liian korkealla tai alhaalla, säädä kiinnityskohtia.
4. **Osuminen muihin laitteisiin:** vaihda tarvittaessa kiinnityskohtien sijaintia.
5. Siirrä tuolia käyden kaikki liikeradat läpi; tuolin kallistaminen, kokoontaitto ja pyörittäminen. Tarkista mahdolliset häiriöt ja sijoita kiinnityskohdat uudelleen tarpeen mukaan.

