






John GmbH turva- ja erikoisvyöt

Pura tuote pakkauksesta ja lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista. Tee perusteellinen tuotetarkastus ennen tuotteen käyt-

töönottoa. Ole tarkkana kunkin lisäosan asentamisessa, jos vyöjärjestelmä on irti tai löysä, se voi aiheuttaa käyttäjälle kuristumis- tai muun vaaratilanteen.

Vyöjärjestelmiin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Jos tuotetta modifioidaan valmistaja ei ota mitään vastuuta muutoksista johtuvista menetyksistä.

Asennus

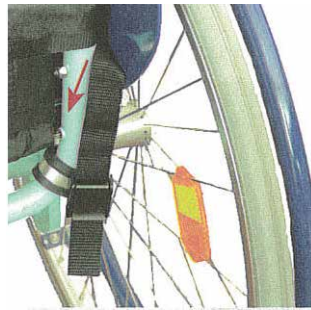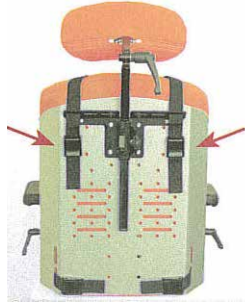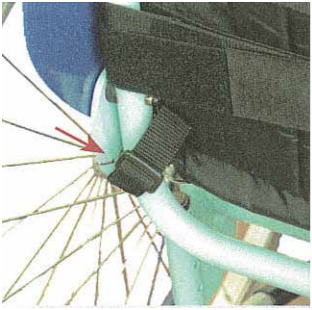

1. vaihtoehto: Asennus pyörätuolin putkiin

Kiinnitä vyöjärjestelmän päät pyörätuolin istuimen sivuputkien ympärille ja kiristä kiristys-soljilla.

2. vaihtoehto: Asennus istuinjärjestelmään klipsikiinnikkeiden avulla

Asenna vyöjärjestelmä lisävarusteena saatavien klipsien ja kiinnikkeiden avulla. Kiinnikkeet kiinnitetään istuimeen ruuveilla tai niiteillä, jonka jälkeen vyön hihnat pujotetaan kiinnikkeiden ja klipsien aukoista, kiristetään sopivaksi ja painetaan klipsit kiinni.

3. vaihtoehto: Asennus pyörätuolin putkiin klipsikiinnikkeiden avulla

Vyöt voi kiinnittää myös lisävarusteena saatavan klipsien ja kiinnikkeiden avulla pyörätuolin putkiin. Kiinnitä klipsikiinnikkeet pyörätuolin takaputkiin, pujota vyön hihnat klipsien läpi ja paina klipsit kiinni.

HUOMIO! TURVALLISUUS!

Varmistaaksesi, että vyöjärjestelmä toimii moitteettomasti ja suojaa käyttäjää pyörätuolissa tai muussa istuimessa, lue käyttöohjeet huolellisesti läpi. Turvavyöjärjestelmät saa asentaa vain terveydenhuoltoalan ammattilainen. **Vyöjärjestelmiä ei saa käyttää turvavöinä ajoneuvossa!**

Pesu- ja huolto-ohjeet

Tarkista tuote säännöllisesti silmämääräisesti muodonmuutosten, kulumisen tai vääntymisten varalta ja vaihda tarvittaessa.

Puhdistus - vähäinen lika

1. Pyyhi päällinen neutraalilla tai miedosti emäksisellä, pintapuhdistusaineella tai esim. 0,1% klooriliuos (1000 ppm) ja lämpimällä vedellä.
2. Huuhtelee päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla..
3. Kuivaa päällinen huolellisesti puhdistusliinalla.

Puhdistus - erittäin likainen

1. Puhdista kaikki ruumiinnesteiden eli veren, virtsan, ulosteiden, syljen, haavaeritteiden ja kaikkien muiden ruumiin eritteiden roiskeet mahdollisimman pian 1% klooriliuksella (10 000 ppm) ja lämpimällä vedellä.
2. Huuhtelee päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla.
3. Kuivaa huolellisesti ennen uudelleen asentamista.

Tuotemateriaalit: Tarkista materiaali-kohtaiset pesuohjeet kunkin tuotteen pesulapusta:

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Neopreeni | kumi |
| 2. | Skai-keinoahka, pehmeä | 11% PES/puuvilla, 89% PVC-yhdistelmä |
| 3. | Litettä kudottu kangas | polyester |
| 4. | Spacer -verkkomateriaali | 100% polyester |
| 5. | Koukku ja lenkki kerros | polyamidi |
| 6. | Hihnat | polyester, polypropylene |
| 7. | Helmanauha | lycra/polyester/pehmeä onttokuituinen puuvilla |
| 8. | Codura | polyamidi, polyuretaani pinnoite |
| 9. | Luonnonkumi | luonnonkumi, ei-allergisoiva |
| 10. | Vetoketju 10) | polyester |
| 11. | Pehmuste 11) | polyester vaahto |
| 12. | Ompelulanka 12) | polyester |

Tuoteversiot:

- Rintakehä-/olkavyöt 6, 7, 10, 12
- 4-pisterintakehävyöt 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
- 2- ja 4-pistelantiovyöt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
- lantiovyöt 1, 4, 6, 7, 12
- 4 ja 5-pistevyöt 1, 4, 5, 6, 7, 12

Varastointi

- Säilytä tuotteita puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
- Säilytä tuotteita suojamuovissa.
- Älä säilytä pattereiden tai muiden lämmityslaitteiden vieressä.
- Suojaa tuotteet suoralta auringonvalolta.
- Tuotteet toimitetaan ei-steriilissä pakkauksessa.



CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi