

VERMEIREN

Freedom - Lagoon - Vintage

KÄYTTÖOHJE



Freedom

(2217, 2217E)



Lagoon

(2219, 2219E)



Freedom

(2217, 2217E)



Vintage

(2219)



Ohjeet jälleenmyyjälle

Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta, ja se tulee toimittaa jokaisen myydyn

tuotteen mukana. Versio: G, 2015-03

Kaikki oikeudet kääntäminen mukaan lukien pidätetään.

Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää missään muodossa (tulosteena, mikrofilmillä tai muulla tavalla) tai käsitellä, kopioida tai jakaa sähköisillä järjestelmillä ilman julkaisijan kirjallista lupaa.

© N.V. Vermeiren N.V. 2015

Sisällys

Esipuhe.....	2
1 Tuotekuvaus.	3
1.1 Käyttötarkoitus	3
1.2 Tekniset tiedot.....	4
1.3 Tuotteen osat	5
1.4 Tuotetietotarran sijainti	5
1.5 Lisävarusteet.....	6
1.6 Symbolien selitykset.....	6
1.7 Turvallisuussäännöt.....	6
2 Käyttäminen	7
2.1 Kolmipyörän kuljettaminen	7
2.2 Jarrujen käyttäminen	7
2.3 Vaihteiden käyttäminen.....	8
3 Asentaminen ja säätäminen	8
3.1 Työkalut.....	8
3.2 Toimitustapa.....	9
3.3 Vääntövoima	9
3.4 Jarrujen säätäminen	9
3.5 Ketjujen säätäminen	10
3.6 Ohjaustangon säätäminen.....	10
3.7 Satulan säätäminen	11
3.8 Renkaan vaihtaminen.....	11
4 Kunnossapitäminen	12
Liite: Sähköavusteiset 2217E, 2219E	21

Esipuhe

Kiitos, että valitsit Freedom-, Lagoon- tai Vintage-kolmipyörän.

Vermeirenin kolmipyörät ovat vuosien kehitystyön ja kokemuksen tulosta. Kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota kolmipyörien huollettavuuteen.

Kolmipyörän käyttöikään vaikuttaa suuresti se, miten pyörästä pidetään huolta.

Tämä käyttöohje auttaa sinua tutustumaan kolmipyörän käyttöön.

Käyttö- ja kunnossapito-ohjeiden noudattaminen on oleellista takuun säilyttämiseksi.

Tämä käyttöohje vastaa viimeisintä tuotekehitystä. Vermeiren pidättää oikeuden muutoksiin ilman velvollisuutta muuttaa tai vaihtaa aiemmin toimitettuja malleja.

Jos tähän liittyen heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

1 Tuotekuvaus

1.1 Käyttötarkoitus

Kolmipyörä on tarkoitettu yhden (1) henkilön käyttöön. Kolmipyörä soveltuu ulkokäyttöön.

Käyttäjä voi ajaa kolmipyörällä yksin.

Erityyppisten kiinnikkeiden ja lisävarusteiden sekä modulaarisen rakenteen ansiosta pyörää voivat käyttää täysipainoisesti myös ihmiset, joilla on:

- jäykät tai vaurioituneet nivelet
- sydämen vajaatoimintaa tai heikko verenkierto
- tasapainohäiriöitä
- kakeksia (kuihtuminen, lihaskudoskato)
- sekä vanhukset.

Kun tuotetta sovitetaan yksilöllisiin vaatimuksiin, tulee huomioida seuraavat asiat:

- kehon koko ja paino (korkeintaan 110 kg mallissa 2217 ja 125 kg mallissa 2219)
- fyysinen ja psyykkinen kunto
- asumistilanne
- ja ympäristö.

Kolmipyörää ei tule käyttää raskaiden esineiden kuljettamiseen. Käytä ainoastaan Vermeirenin hyväksymiä lisävarusteita.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta tai puutteellisesta huollosta tai tämän käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä.

Käyttö- ja kunnossapito-ohjeiden noudattaminen on oleellinen osa takuuehtoja. Näkövammaiset henkilöt voivat saada käytön opastusta jälleenmyyjältä.

1.2 Tekniset tiedot

Seuraavat tekniset yksityiskohdat koskevat kolmipyöräisiä vakioasetuksilla.


Valmistaja	Vermeiren		
Osoite	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout, Belgia		
Tyyppi	Kolmipyörä		
Malli	2217 Freedom	2219 Lagoon, Vintage	
Käyttäjän enimmäispaino	110 kg	125 kg	
Korin enimmäiskuorma	25 kg	25 kg	
Kokonaisleveys	67 cm	76,8 cm	
Kokonaispituus	160 cm	180,8 cm	
Kokonaiskorkeus	98,6–117,4 cm	112,1–130,9 cm	
Kokonaispaino	25,5 kg	27,8 kg	
Suurin turvallinen alustan kaltevuus	7°	7°	
Maavara	9,7 cm	12,5 cm	
Runkoputken korkeus (kyytiin nousu)	17,4 cm	19,4 cm	
Eturenkaan koko	20" x 1,75"	24" x 1 3/8"	
Eturenkaan paine	2,5 – 5 bar	3,5 bar	
Takarenkaiden koko	20" x 1,75"	24" x 1 3/8"	
Takarenkaiden paine	2,5–5 bar	3,5 bar	
Satulan korkeus	70,9–95 cm	78,9–103,0 cm	
Kädensijojen korkeus (maasta mitattuna)	Riippuu ohjaustangon mallista ja putkesta	Riippuu ohjaustangon mallista ja putkesta	
Polkimen korkeus maasta enintään	12,3 cm	15 cm	
Polkimen korkeus maasta vähintään	37,3 cm	45,5 cm	
Satulan ja ohjaustangon välinen etäisyys	37,2–40,1 cm Säädettävyyt: 2 cm	41,7–44,6 cm Säädettävyyt: 2 cm	
Kääntösäde	2,75 m	3 m	
Takavaihteet	3	3 tai 7	
Etuvaihteet	-	-	
Välityssuhde	184 %	184 % / 184 %	
Jarrut	V-jarru edessä Levyjarru takana (taakse saatavilla myös	V-jarru edessä Levyjarru takana (taakse saatavilla myös rumpujarru)	
Käyttö- ja säilytyslämpötila	+ 5 °C – +41 °C		
Käyttö- ja säilytysilmankosteus	30–70 %		

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Mittatoleranssi ± 1,5 cm / 1,5 kg / °.


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Mittatoleranssi ± 1,5 cm / 1,5 kg / °.

Taulukko 1: Tekniset tiedot

1.3 Tuotteen osat

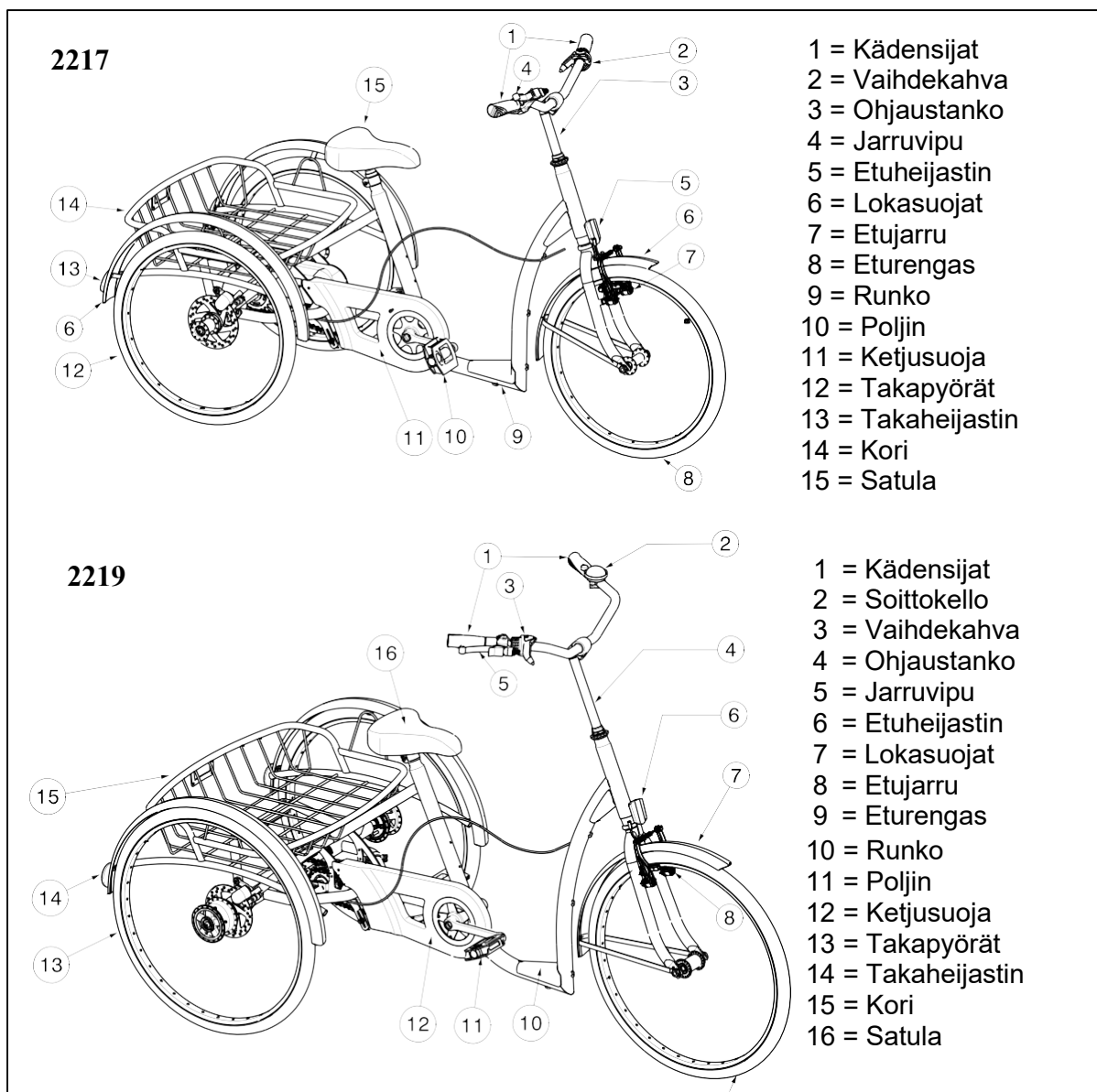

1.4 Tuotetietotarran sijainti

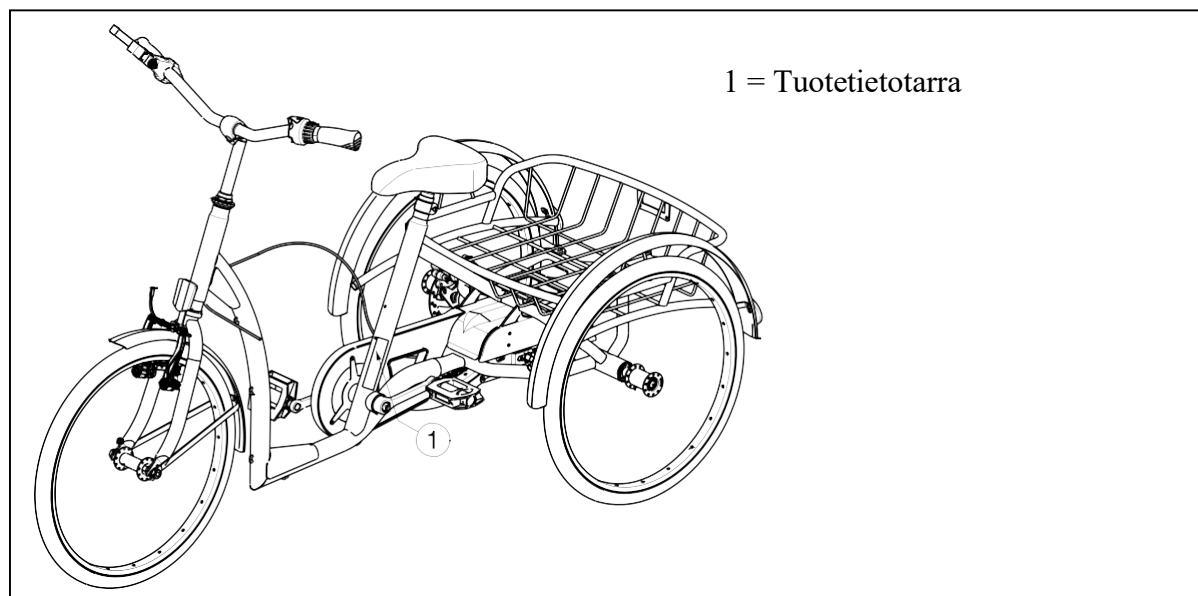

1.5 Lisävarusteet

- Ohjaustangot
- Säädetty kiinnike ohjaustankoon
- Käsituki tai -remmi
- Ohjaustangon lukitusjärjestelmä
- Selkätuki/lantiotuki
- Säädetty satulat
- Satulaputki, jossa iskunvaimennin
- Polkimet, joissa remmit tai jalkatuet
- Levyjarru takapyöriin
- Ajovalot
- Nopeusmittari
- Vintage-kori
- Lukittava tavaralaatikko
- Kainalo- tai kyynärsauvan pidike
- Juomapidike
- Peili

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää lisävarusteista.

1.6 Symbolien selitykset



Enimmäispaino



CE-sertifioitu



Tyypimerkintä

1.7 Turvallisuusohjeet

- ⚠ Vahinkojen ehkäisemiseksi huolehdi, ettei pintojen väliin jää esineitä tai ruumiinosia.
- ⚠ Tutustu siihen, kuinka painopisteen muuttaminen vaikuttaa kolmipyörän käyttäytymiseen esimerkiksi ylä- tai alamäessä, sivulle viettävällä alustalla tai esteitä ylitettäessä.
- ⚠ Kolmipyörällä ajettaessa on noudatettava asianmukaisia liikennesääntöjä.
- ⚠ Kolmipyörällä tai muilla ajoneuvoilla ei saa ajaa alkoholin, muiden päihteiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- ⚠ Mukauta ajaminen vallitseviin sää- ja liikenneolosuhteisiin.
- ⚠ Huolehdi näkyvyydestäsi, kun ajat pimeässä, ja käytä heijastimia sekä valoa. Tarkista myös, että kolmipyörän etu- ja takaosiin kiinnitetyt heijastimet näkyvät hyvin.
- ⚠ Älä koskaan ylitä kolmipyörän enimmäiskuormitusta.
- ⚠ Ole varovainen, kun ajat kuumissa tai kylmissä olosuhteissa (helteellä, pakkasella, jne.) ja ihosi voi koskettaa pyörän osia, sillä kolmipyörän pinnat voivat muuttua polttaviksi tai jäätäväiksi.
- ⚠ Ole varovainen kaarteissa, jotta kolmipyörä ei menetä sivuttaisvakautta.

2 Käyttäminen

Tässä osiossa kuvataan arkikäyttöä. **Nämä ohjeet on tarkoitettu käyttäjälle ja jälleenmyyjälle.**

Jälleenmyyjä toimittaa kolmipyörän sinulle kokonaan koottuna. Sinun tarvitsee säätää ainoastaan ohjaustangon korkeutta. Jälleenmyyjälle tarkoitetut ohjeet kolmipyörän kokoamiseen ja säätämiseen ovat osiossa 3.


2.1 Kolmipyörän kuljettaminen

Paras tapa siirtää kolmipyörää on taluttaa se omien pyöriensä varassa haluttuun paikkaan.

2.2 Jarrujen käyttäminen

⚠ Varoitus! Kuluminen ja mahdollinen lika renkaissa (vesi, öljy, muta, jne.) vaikuttavat jarrujen toimintaan. Tarkista renkaiden kunto ennen jokaista käyttökertaa.

⚠ Varoitus! Jarruja voi säätää, ja ne voivat kulua. Tarkista jarrujen toiminta ennen jokaista käyttökertaa.

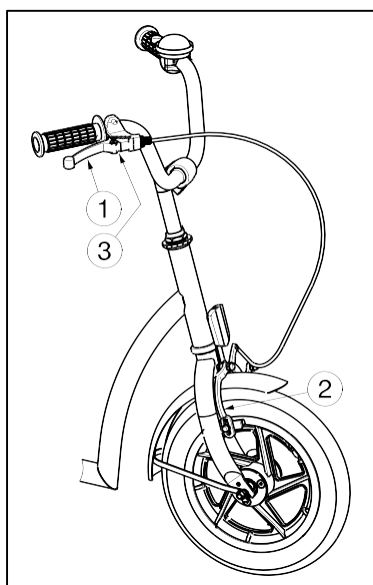

Etujarrun käyttäminen:

1. Purista jarruvipua ① kohti kädensijaa.
2. Jarru ② painuu silloin etupyörää vasten.


Etujarrun vapauttaminen:

1. Päästä irti jarruvivusta ①.

Takapyörän levyjarrua käytetään samalla tavalla kuin etujarrua. Pyörää ostaessa voi valita, haluaako jarruvivun oikean vai vasemman kädensijan yhteyteen.

Seisontajarrun käyttäminen:

2. Lukitse jarrut painamalla levyä ③.

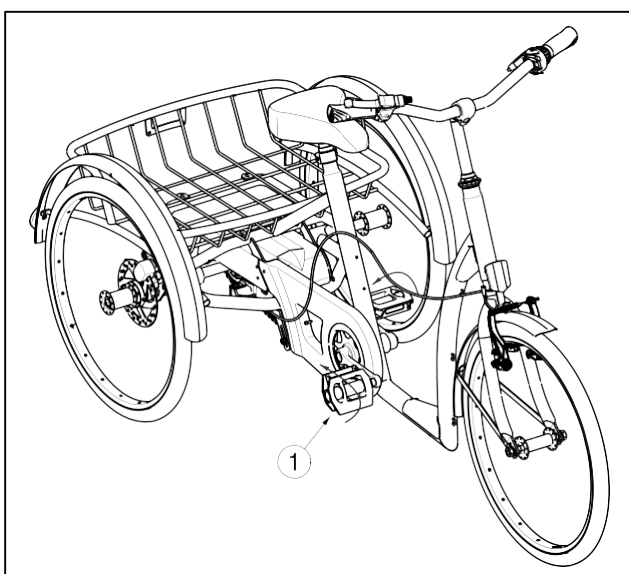

Takapyörien rumpujarrun käyttäminen:


3. Paina polkimia ① taaksepäin.

2.3 Vaihteiden käyttäminen

Kolmipyörän mallit 2217 ja 2219 ovat saatavilla kolmivaihteisena.

⚠ Loukkaantumisvaara! Vaihda vaihteita aina yksi kerrallaan ja polje kevyemmin silloin, kun vaihdat vaihdetta. Jos yrität väkisin vaihtaa vaihdetta samalla, kun poljet voimakkaasti, jalkasi saattavat irrota polkimilta ja kolmipyörä voi kaatua.

Vaihda vaihdetta kiertämällä vaihdekahvaa myötä- tai vastapäivään.

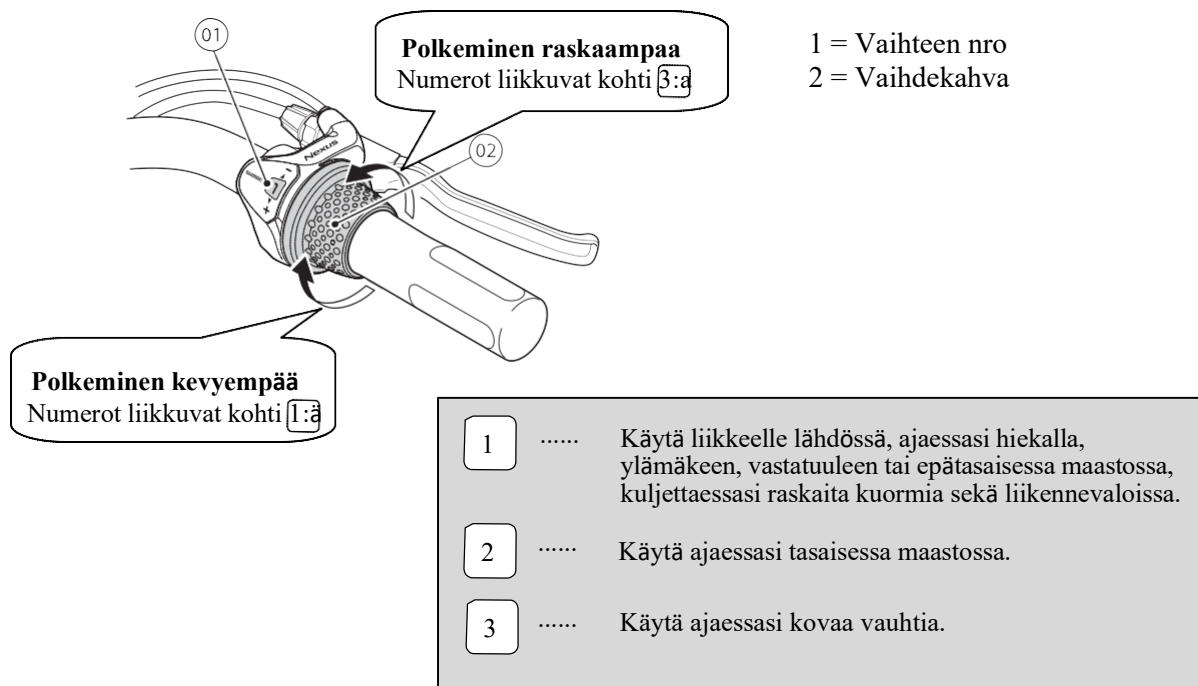

Vain malli 2219 on saatavilla seitsemänvaihteisena.

3 Asentaminen ja säätäminen

Tämän osion ohjeet on tarkoitettu jälleenmyyjälle.

Vermeirenin kolmipyörät 2217 ja 2219 on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Alla selitetään, kuinka kolmipyörän voi säätää käyttäjälle sopivaksi.

Saat tiedon lähimmistä huoltopalveluista tai jälleenmyyjistä ottamalla yhteyttä lähimpään Vermeirenin toimistoon. Lista Vermeirenin toimistoista löytyy tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.

⚠ Varoitus! Väärät asetukset voivat olla vaarallisia. Käytä ainoastaan tässä ohjeessa kuvattuja asetuksia.

⚠ Varoitus! Sallittujenkin asetusten vaihtaminen voi muuttaa kolmipyörän tasapainoa ja aiheuttaa taakse tai sivulle kallistumista.

3.1 Työkalut

Kolmipyörän käyttökuntoon laittamiseen tarvitaan seuraavat työkalut:


- kiintoavain 13 mm
- kuusiokoloavaimet 5 ja 6 mm

3.2 Toimitustapa

Vermeirenin kolmipyöräin toimitukseen kuuluvat:

- runko, jossa on taka- ja etupyörät
- polkimet
- satula
- ohjaustanko ja kädensijat
- soittokello
- kori
- käyttöohje
- lisävarusteet


3.3 Vääntömomentit

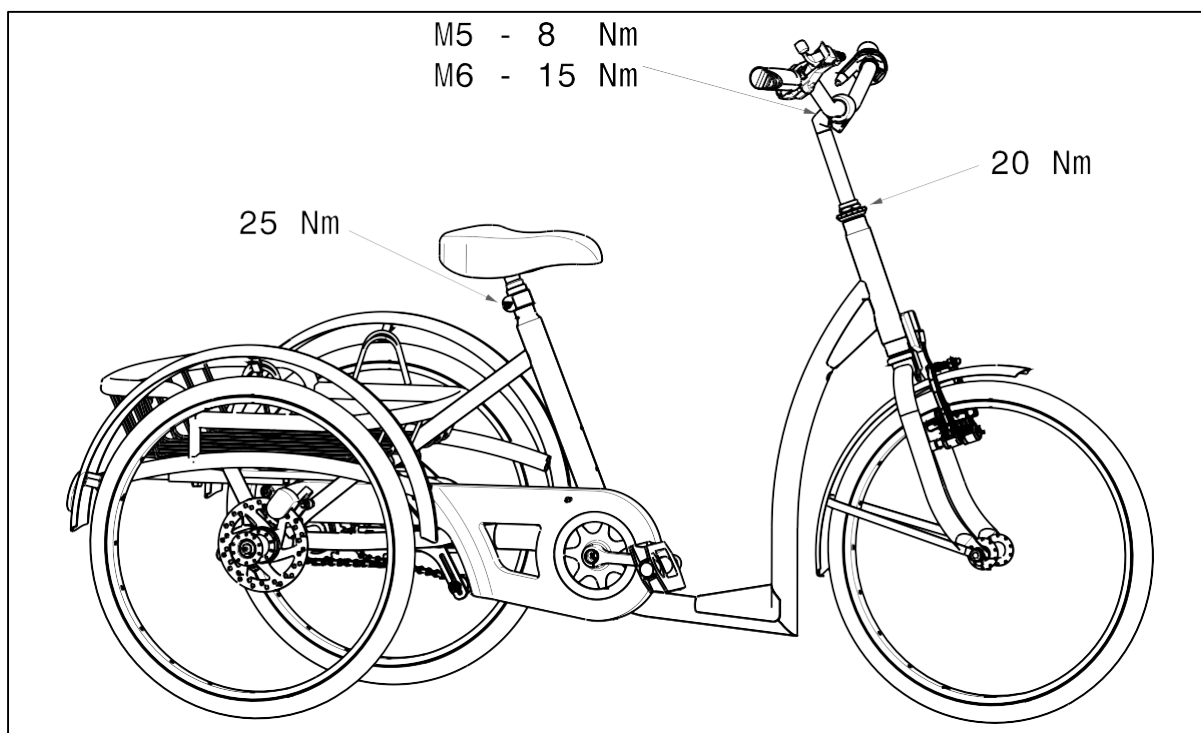


3.4 Jarrujen säätäminen

Säädä jarrut alla olevien ohjeiden mukaan.

1. Säädä jarrun kireyttä jarruvaijerin säätimellä ①.

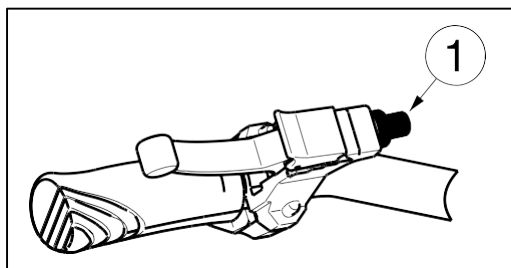

3.5 Ketjujen säätäminen

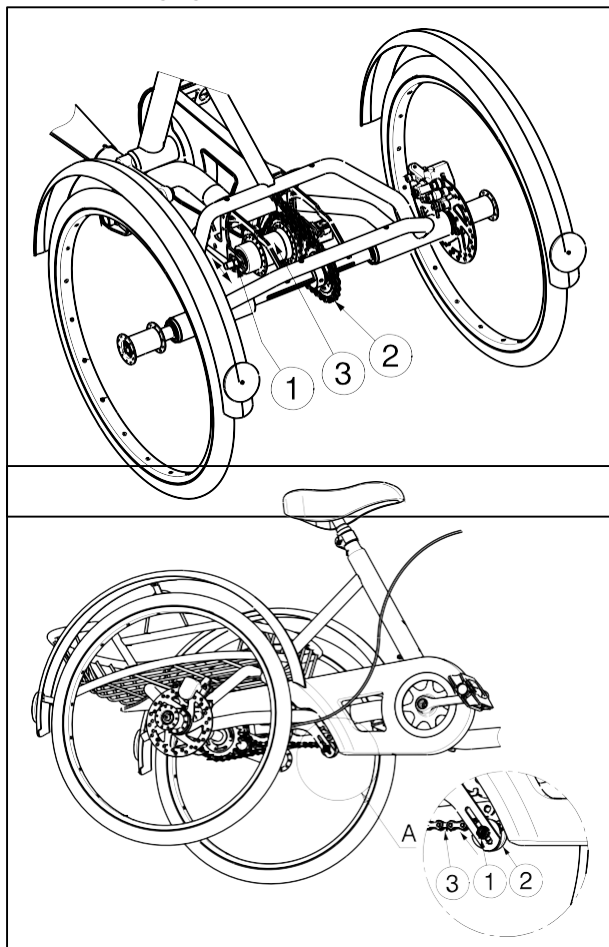

Kolmipyörän pyöriä liikuttaa ketju ②, joka kulkee taka-akselin rattaalla.

Ketjut asennetaan tehtaalla. Ajan kuluessa ketjut saattavat pudota rattaalta.

Torpedo-navan ketjun ② kiristäminen:


1. Löysää mutteri ①. Torpedo-napaa ③ voi nyt liikuttaa kolmipyörän rungolla.
2. Kun paikallaan olevaa ketjua voi liikuttaa $\pm 2,0$ cm, ketjun kireys on oikea.
3. Kiristä mutteri ①.

Voimanvälitysketjun ③ kiristäminen:

1. Löysää mutteri ①. Ketjupyörää ② voi nyt nostaa ylöspäin, jotta ketju ③ kiristyy.
2. Kun paikallaan olevaa ketjua voi liikuttaa $\pm 2,0$ cm, ketjun kireys on oikea.
3. Kiristä mutteri ①.

3.6 Ohjaustangon säätäminen

⚠ Loukkaantumisvaara! Tarkista, että ohjaustanko on kiinnitetty kunnolla, ennen kolmipyörän käyttämistä.

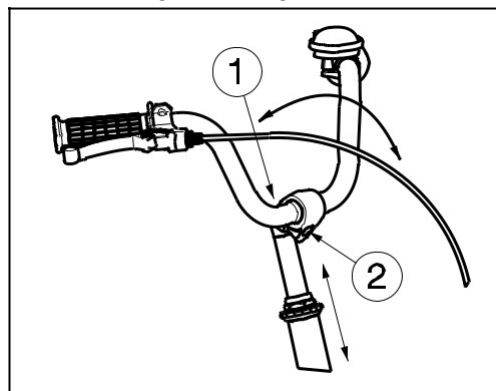

Ohjaustangon korkeutta ja kallistusta voi säätää helposti.

Korkeuden säätäminen:


1. Löysää ruuvia ①.
2. Napauta tangon tyveä kevyesti.
3. Säädä ohjaustangon korkeus niin, että ajoasento on mukava (portaaton säätö ohjaustangon mallista riippuen).
4. Kiristä ruuvi ① kunnolla.

Kallistuksen säätäminen:

1. Löysää ruuvia ②.
2. Säädä ohjaustangon kallistus mukavaan asentoon (portaaton).
3. Kiristä ruuvi ② kunnolla.


3.7 Satulan säätäminen

- ⚠ Loukkaantumisvaara! Älä koskaan säädä satulaa silloin, kun käyttäjä istuu siinä.**
⚠ Loukkaantumisvaara! Tarkista, että satula on kiinnitetty kunnolla, ennen kolmipyörän käyttämistä.

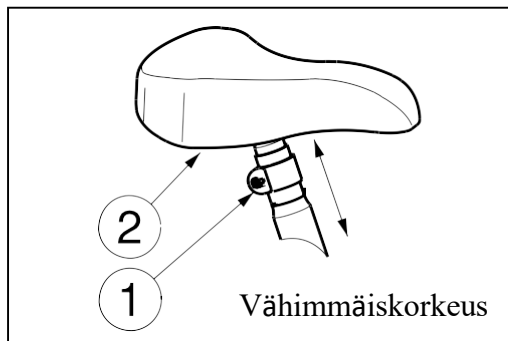

Satulan korkeuden portaaton säätäminen:

1. Löysää ruuvia ①.
2. Säädä satula ② korkeudelle, jossa ajoasento on mukava.
3. Kiristä ruuvi ① kunnolla.

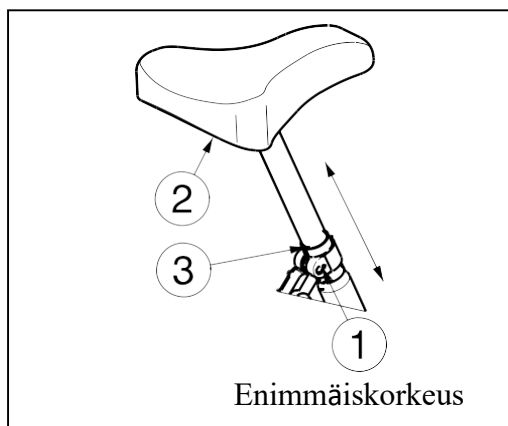

Enimmäiskorkeus on merkitty vaakaviivalla ③.

3.8 Renkaan vaihtaminen

- ⚠ Sisäkumin on oltava tyhjä ennen kuin sen voi poistaa.**
⚠ Renkaan vaihtaminen väärin voi vahingoittaa vannetta.

Lue seuraava ohje ennen renkaiden tai sisäkumien vaihtamista.

Renkaan ja sisäkumin irrottaminen


Tyhjennä sisäkumista kaikki ilma. Työnnä rengasrauta varovasti renkaan ja vanteen väliin ja käännä rengasrauta hitaasti ja varovasti niin, että rauta vetää renkaan vanteen reunan yli. Kuljeta rengasrauta vannetta pitkin ja nosta näin loput renkaasta vanteen reunan yli. Irrota ensin rengas ja sitten sisäkumi varovasti vanteelta.

Vanteen kunnan tarkastaminen

Tarkista, onko vanteen keskiurassa tai renkaan sisäpuolella roskia tai pikkukiviä, ja poista ne. Tarkasta vanteen keskiuran kunto erityisesti venttiilin ympäriltä. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää varaosista, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Renkaan ja sisäkumin asentaminen

- ⚠ Loukkaantumisvaara! Tarkista, että renkaassa on oikea paine.
- ⚠ Loukkaantumisvaara! Asenna rengas huolellisesti niin, että renkaan ja vanteen väliin ei jää esineitä tai ruumiinosia.

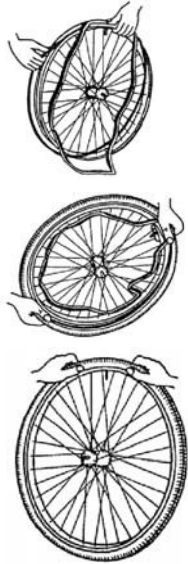

Aseta vannenauha paikalleen venttiiliin yli ennen kuin vedät sen vanteelle. Silloin vannenauha on helppo vetää vanteen päälle. Tarkista, että kaikki pinnojen päät peittyvät (vannenauha ei ole tarpeen, jos vanne on muovia).

Työnnä rengas yhdeltä puolelta vanteelle aloittaen venttiilin vierestä. Työnnä sisäkumin venttiilin varsi läpi vanteen reiästä. Pumpkaa kumiin vähän ilmaa, jotta se pyöristyy, ja työnnä se renkaan sisälle.

Tarkista, että sisäkumi istuu hyvin renkaan sisällä eikä taitu. Jos se taituu, päästä vähän ilmaa ulos ja asettele se paremmin. Kun sisäkumi istuu hyvin, painele renkaan toinen reuna kevyesti vanteelle molemmin käsin aloittaen venttiilin vierestä.

Tarkista molemmilta puolilta, että sisäkumi ei missään kohdassa ole puristunut vanteen ja renkaan reunan väliin. Työnnä ilmaventtiiliä kevyesti sisäänpäin ja vedä se takaisin ulos varmistaaksesi, että rengas on asettunut oikein venttiilin ympärillä.

Pumpkaa aluksi vain sen verran ilmaa, että voit vielä helposti painaa rengasta sisäänpäin peukaloillasi, ja katso, ovatko tarkistusviivat yhtä kaukana vanteen reunalta molemmin puolin rengasta. Jos ovat, rengas on asettunut oikein. Jos eivät, päästä ilma ulos ja asettele rengas uudelleen paikalleen. Nyt renkaan voi täyttää täyteen paineeseen (tarkista enimmäispaine teknisistä tiedoista). Laita täyttämisen jälkeen venttiilin korkki paikalleen.

Vain ammattilainen voi taata oikean kokoonpanon. Takuu on voimassa vain, jos huolto- tai korjaustyöt suorittaa jälleenmyyjä.

Kun täytät renkaita, tarkista aina, että niihin tulee oikea paine. Oikea paine lukee renkaiden sivussa.

Käytä ainoastaan säännösten mukaista pumppua, joka näyttää paineen baareina. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin valmistajan toimittaman pumpun käytöstä.

4 Kunnossapitäminen

Kolmipyörien kunnossapito-ohje löytyy Vermeirenin sivuilta osoitteesta www.vermeiren.be.



Lokasuojia ei ole kiinnitetty.








Ole varovainen, kun poistat kolmipyörää pakkauksesta. Kiinnitä ensimmäiseksi lokasuojat!

Muista suorittaa turvallisuustarkastus: kun olet kiinnittänyt lokasuojat, tarkista, että ne ovat kunnolla kiinni.



Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita!

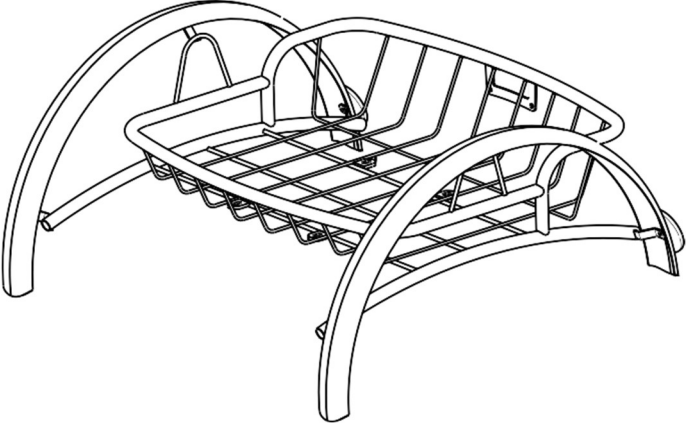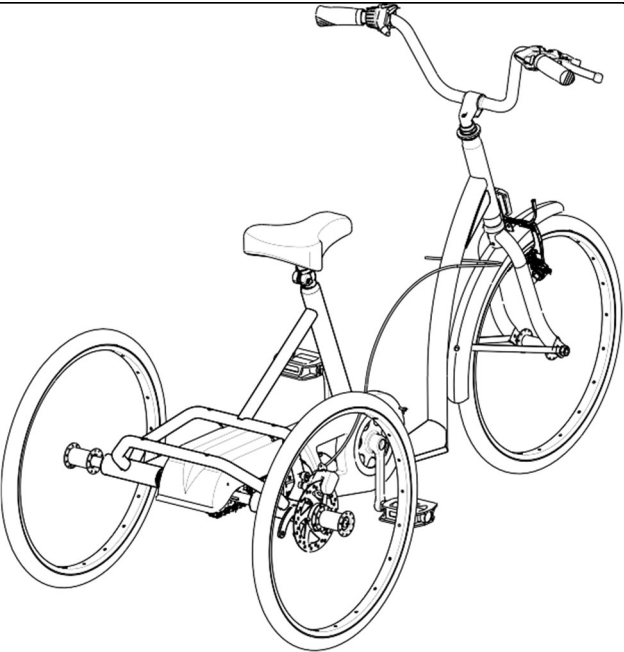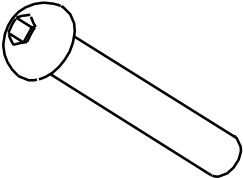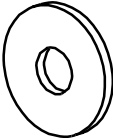1		1	
4		4	
4		4	

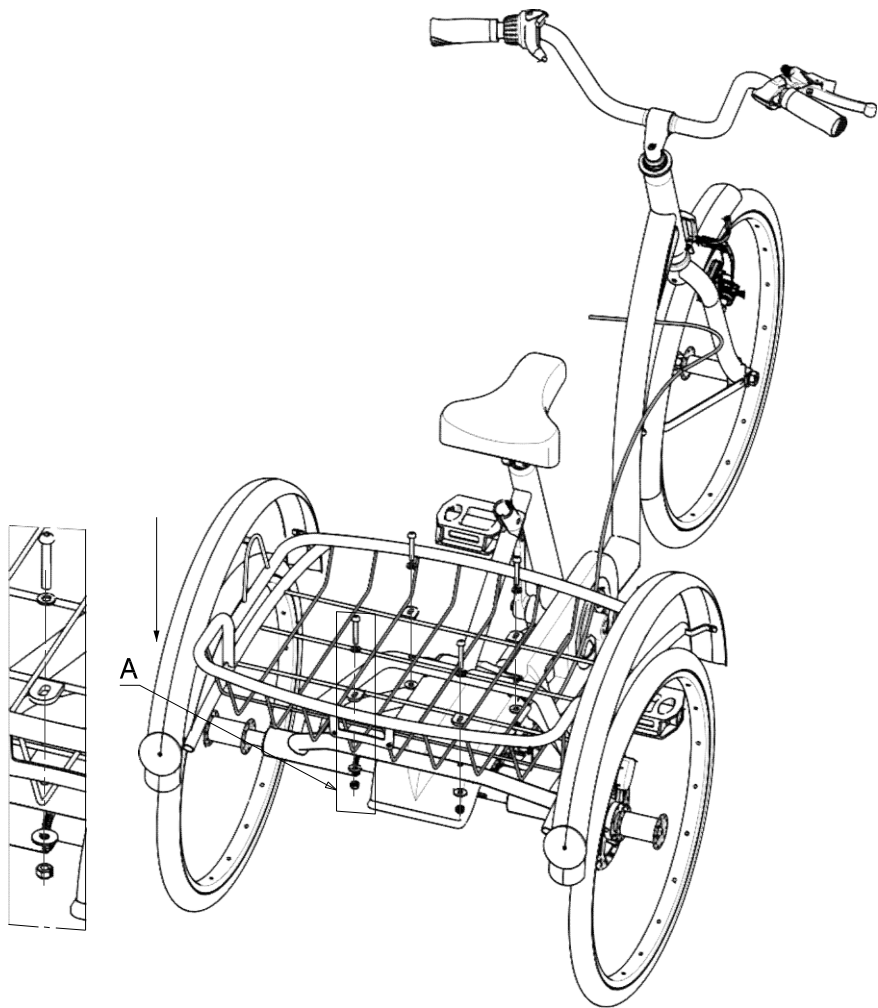



Lokasuojia ei ole kiinnitetty.








Ole varovainen, kun poistat kolmipyörää pakkauksesta. Kiinnitä ensimmäiseksi lokasuojat!

Muista suorittaa turvallisuustarkastus: kun olet kiinnittänyt lokasuojat, tarkista, että ne ovat kunnolla kiinni.



Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita!

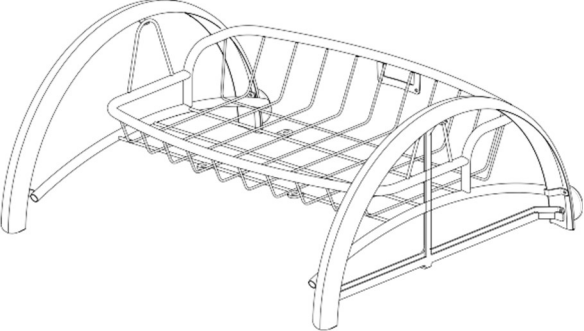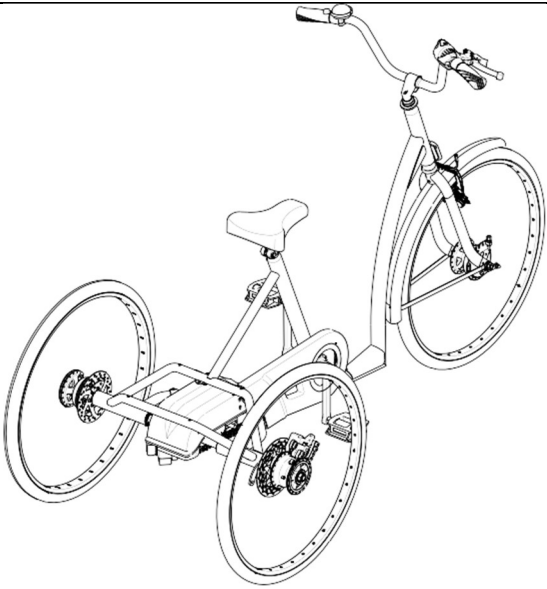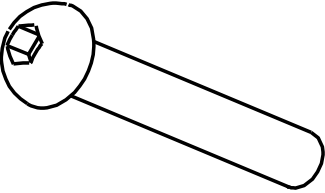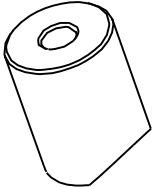1		1	
8		4	
4		4	

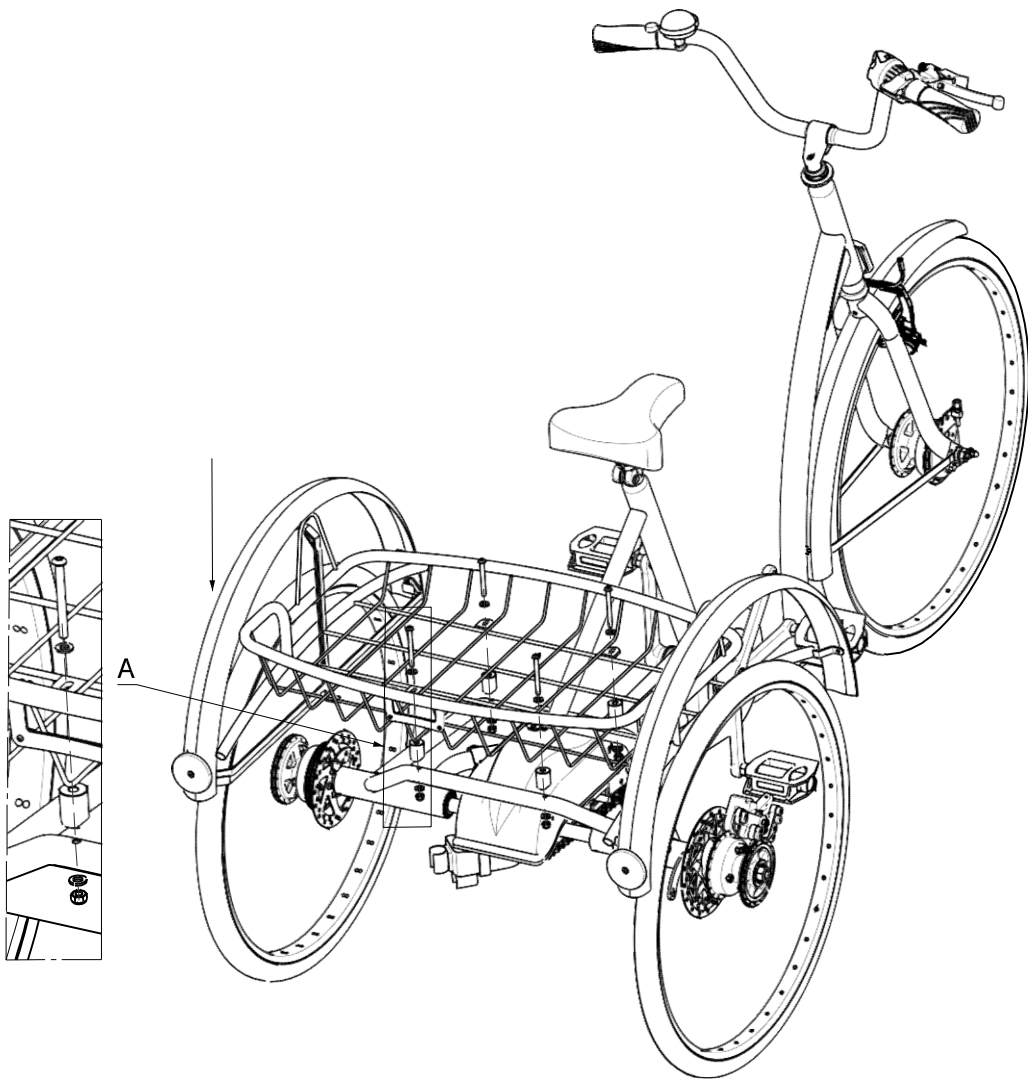

TAKUUTIEDOT

TAKU

Vermeiren tarjoaa 5 vuoden takuun vakiomallisille pyörätuoleille ja 4 vuoden takuun kevyille pyörätuoleille. Sähköpyörätuolien, kolmipyörien, sänkyyden ja muiden tuotteiden takuu on 2 vuotta (takuu 6 kuukautta). Monitoriipyörätuolien takuu on 3 vuotta. Takuu rajoittuu valittujen osien korvaamiseen varaosilla.

EHDOT

Takuun lunastamiseksi B-osa tästä sivusta on toimitettava viralliselle Vermeiren jälleenmyyjälle. Takuu pätee ainoastaan, jos Belgian Vermeiren vaihtaa osat.

POIKKEUKSET

- Takuu ei kata
- tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja
 - kuljetuksen aikana tapahtuneita vahingoista
 - onnettomuudesta aiheutuneita vahinkoja
 - muualla kuin Vermeirenilä tai virallisella jälleenmyyjällä tehtyä purkua, muutoksia tai korjauksia
 - tuotteen normaalia kulumista
 - jos takuukorttia ei toimiteta.



B

Nimi/Name

Osoite/Address

Asuinpaikka/Home

Sähköposti/E-mail

Tuote/Article

Sarjanumero/Serial number

Ostopäivä/Date of purchase

Jälleenmyyjän leima/Dealer

VERMEIREN

TAKUU
WARRANTY



N.V. VERMEIREN N.V.
VERMEIRENPLEIN 1-15
B-2920 Kalminhout

Tel.: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

A

Nimi/Name

Osoite/Address

Asuinpaikka/Home

Sähköposti/E-mail

Tuote/Article

Sarjanumero/Serial number

Ostopäivä/Date of purchase

Jälleenmyyjän leima/Dealer



HUOLTO

Kolmipyörän on huoltanut:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

Leima:

Päiväys:

- Huollon tarkistuslistaa ja lisää teknisiä tietoja voi pyytää lähimmältä jälleenmyyjältä. Lisätietoa löytyy sivuiltamme osoitteesta: www.vermeiren.com.

Kolmipyörät 2217E ja 2219E ovat sähköavusteisia versioita malleista 2217 ja 2019.

1. Tekniset tiedot

Kuvaus	Mitat
Akku	9 Ah
Järjestelmä	36 V
Akun paino	2,4 kg
Käyttölämpötila	0–45°C (normaali varaus) -20–60°C (normaali purkaus)
Säilytyslämpötila	-20–50°C (1 viikko) -20°C–40°C (6 kuukautta) -20°C–35°C (1 vuosi)
Akkulaturi	Katso lisätietoja laturin mukana toimitetusta ohjeesta.
Moottori	250 W, 190 rpm
Avustaa	17 km/h asti
Avustustaso	0+6 (0 = ei avustusta, muilla tasoilla avustus saatavilla)
Toimintamatka	Riippuu useista tekijöistä*
Jarrukytkimet	Jarrutettaessa avustus keskeytetään
Vakio	Toimitetaan levyjarrullisena, 3- tai 7-vaihteisena ja tasauspyörästöllisenä

*Toimintamatkaan vaikuttavat tekijät:

Akun varaustaso, käytetty avustustaso, lämpötila ja tuuliolosuhteet, käyttäjän paino ja korin kuorma, rengaspaine ja renkaiden kunto, käytetyt vaihteet, kiihdytykset, voimansiirtoketjun kunto, tien kunto ja kaltevuus, jne.

2. Turvallisuusohjeet

L Valtuuttamaton huolto, korjaus tai ei-alkuperäisten varaosien käyttö voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ja mitätöidä takuun.

L Noudata kaikkia käyttömaan lakeja ja säädöksiä.

L Harjoittele pyörimistä turvallisella ja vaarattomalla alueella.

L Käytä ainoastaan Vermeirenin toimittamia akkuja ja latureita. Älä käytä laturia muiden akkujen lataamiseen.

L Älä pudota akkua tai laturia. Älä avaa tai muuntele akkua tai laturia.

L Älä koske akkuhappoon.

L Pidä akku poissa voimakkaasta auringonvalosta ja lämmöstä. Varo oikosulkua! Älä käytä akun lähellä metalliesineitä, kuten paperiliittimiä, kolikoita, nauvoja.

L Irrota akku kolmipyörästä ennen pyörän kuljettamista autossa.

L Käytä sähkölaitteita ainoastaan kuivissa sisätiloissa.

L Varmista, että ilma pääsee kiertämään akkukotelossa. Älä peitä laturia, kun lataat akkua.

L Irrota akku laturista, kun se on latautunut täyteen.


L Irrota laturi pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

3. Käyttötarkoitus

Sähkökolmipyörää voi käyttää päällystetyillä teillä sekä tasaisilla hiekkateillä.

Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi maastossa tai maastopyöränä tai minkäänlaiseen hyppimiseen tai kilpa-ajoon.

4. Akun kiinnittäminen ja irrottaminen

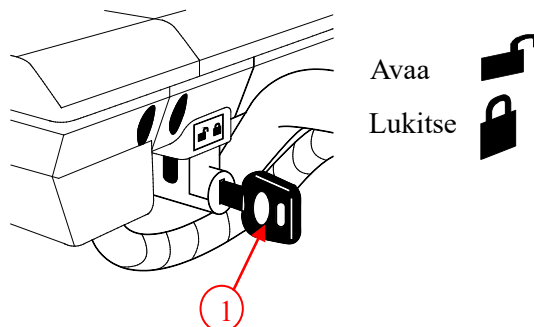


Akun kiinnittäminen

1. Työnnä avain ① lukkoon ja käännä avain avaussymbolin kohdalle.
2. Työnnä akku mahdollisimman syvälle akkukoteloon. Sen voi työntää koteloon vain yhdellä tavalla.
3. Käännä avain ① lukitusymbolin kohdalle.
4. Tarkista, että akku on kunnolla kiinni.
5. Irrota avain ① (älä koskaan irrota avainta, kun pyöräilet).

Akun irrottaminen

1. Työnnä avain ① lukkoon.
2. Käännä avain ① avaussymbolin kohdalle.
3. Vedä akku varovasti irti akkukotelosta.

5. Sähkölaitteen kytkeminen päälle ja pois

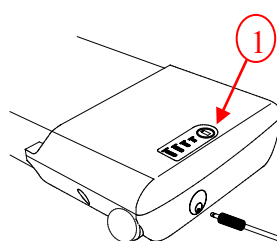


1. Käynnistä tai sammuta sähkölaite painamalla akussa olevaa painiketta ① kahden sekunnin ajan.
2. Ohjausyksikön ledivalot ilmaisevat laitteen tilan.

6. Akun varaustason ilmaisimien


Akun varaustason ilmaisimia on kaksi:

* Yksi sijaitsee akkuyksikössä korin alla kolmipyörän takaosassa.

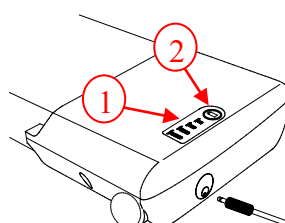

1. Paina painiketta ② akkuyksikössä.
2. Akun varaustason ilmaisimen ledivalot ① ilmaisevat akun varaustason.

*Toinen sijaitsee ohjaustangon ohjainyksikössä kolmipyörän etuosassa.

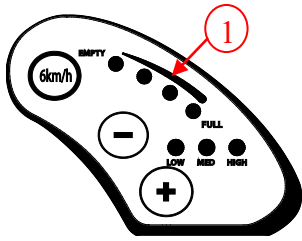

Kun sähköjärjestelmä on kytketty päälle, akun varaustason ilmaisimen ledivalo ① ilmaisevat akun varaustason.


Johdotuksen vuoksi ilmaisinten näyttämät tasot voivat hieman vaihdella. Toimi silloin huonomman varaustason mukaisesti.

7. Akun lataaminen

L VAROITUS: Loukkaantumisvaara! Käytä ainoastaan akun mukana toimitettua laturia akun lataamiseen.

Tarkista, ettei akku ole vaurioitunut aina ennen sen lataamista. Paina akkuyksikössä olevaa painiketta kaksi sekuntia akun käynnistämiseksi. Jos yksikään varaustason ilmaisimen ledivaloista ei syty, akku voi olla vahingoittunut. Jos ainakin yksi varaustason ilmaisimen ledivaloista syttyy, mutta osa jää pimeäksi, lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Älä lataa tai käytä vahingoittunutta akkua, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

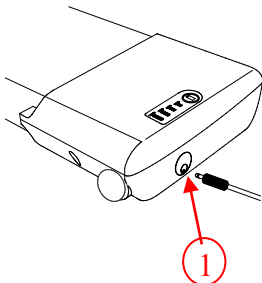

Lataa akku täyteen ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran. Näin varmistat täyden akkukapasiteetin.

Akkua voi ladata milloin vain, kun se on kiinnitetty kolmipyörään tai irrotettu siitä.

Irrotetun akun lataamishjeet

1. Sammuta akku/sähkölaite.
2. Irrota akku akkukotelosta ja varmista, että likaa tai nestettä ei pääse latausreikään.
3. Kytke latauspistoke akkuyksikköön ①.
4. Kiinnitä laturin verkkovirtapistoke pistorasiaan.
5. Laturin ledivalo näyttää latauksen etenemisen: Punainen - latautuu
Vihreä - valmiustila/ladattu täyteen
6. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi pistorasiasta ja akusta.

Laturin käyttöohjeet löydät laturin mukana toimitetusta oppaasta.

8. Pyörän käyttö


Tutustu kolmipyörän toimintaan ennen pyöräilemistä vilkkaasti liikennöidyillä tai mahdollisesti vaarallisilla alueilla tai teillä. Harjoittele ajamista laajalla avoimella alueella, kuten puistossa. Kokeile eri avustustasoja.

Kun avustussjärjestelmä on käynnistetty, sähköjärjestelmä kytkeytyy käyttöön ja avustaa vain polkiessa. Sen tuottama voima riippuu avustustasosta ja siitä, millä voimalla poljet. Kun lopetat polkemisen tai saavutat yli 17 kilometrin tuntinopeuden, avustus kytkeytyy pois automaattisesti. Kun avustus on kytketty pois päältä (avustustaso 0), voit pyöräillä normaalisti.

Avustussjärjestelmän voi käynnistää painamalla +-painiketta ohjaustangon ohjainyksikössä. Avustustasoa voidaan laskea ja nostaa - ja +-painikkeilla ohjaustankoon kiinnitettyssä ohjainyksikössä.

Avustustasoja on seitsemän:

Avustustaso	Ledivalo
0	Ledivalot eivät pala
1	LOW-valo vilkkuu
2	LOW-valo palaa
3	MED-valo vilkkuu
4	MED-valo palaa
5	HIGH-valo vilkkuu
6	HIGH-valo palaa

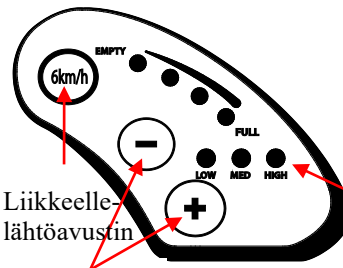

Liikkeelle-
lähtöavustin
Avustustason
vaihtaminen

Avustustasoa
ilmaisevat ledivalot

9. Liikkeellelähtöavustimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä liikkeellelähtöavustin painamalla 6 km/h -painiketta. Avustus on rajoitettu kuuden kilometrin tuntinopeuteen. Liikkeellelähtöavustin voi auttaa myös työntämään pyörää ylämäkeen. Se on kätevä myös jyrkissä käänöksissä.

8. Avaimet

Sähkökolmipyörän mukana toimitetaan kaksi avainta: pääavain ja vara-avain. Avaimissa on tunnisteenä sarjanumero. Säilytä vara-avain turvallisessa paikassa ja kirjoita avaimen sarjanumerot muistiin siltä varalta, että tarvitset uuden.

9. Huoltaminen

Kolmipyörän huolto-ohjeet löydät Vermeirenin tai jälleenmyyjän verkkosivuilta.



Belgia

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Saksa

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Ranska

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Itävalta

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Tel: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Italia

Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.reatime.it
e-mail: info@reatime.it

Sveitsi

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59
CH-3123 Belp
Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Puola

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Espanja / Portugali

Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartellà, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Tšekki

Vermeiren ČR S.R.O.

Nadrazní 132
702 00 Ostrava 1
Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz