

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

Largoo -monitoimiratas

Largoo-monitoimiratas on vaikeavammaisille aikuisille tarkoitettu avustetun liikkumisen apuväline. Se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja sillä voidaan liikkua teillä, poluilla sekä helppokulkuisessa maastossa.

Largoo soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat napakan tuennan vartalolle ja niskalle. Lisätukea saadaan tukityynyjen ja 5-pisteviden avulla. Rattaissa on iskunvaimennus ja istuma-asennon kaltevuuden säätö. Kaikkien mallien kantavuus on 100kg.



Kokoonpanoon kuuluu:

- Runko
- Sade- ja hytтыssuoja
- Vartalotuet
- Varustelaukku
- 10" Tukipyörä
- 20" Renkaat
- Irrotettavat jalkalaudat

Koko	L	XL
Istuinsyvyys	43 cm	45 cm
Istuinleveys	39 cm	49 cm
Selkänojan korkeus	80 cm	80 cm
Rattaiden paino	28 kg	32 kg

Käyttöönotto

Etupyörän kiinnitys

Kallista rattaat selälleen etupyörän asennusta varten. Etupyörä kiinnitetään pika-akselilla. Varmista ensin, että akseli on riittävän löysällä. Aseta akseli etuhaarukan uriin ja kiristä pika-akseli kääntämällä vipua. Mikäli akseli ei kiristy kunnolla, avaa pikalukko ja kiristä ruuvia akselin toisesta päästä.



Tukipyörä

Voit käyttää Largoossa myös 10" tukipyörää. Tukipyörä on kääntyvä, joten sinun ei tarvitse nostaa etupäättä kääntyessäsi. Tukipyörä ei kuitenkaan sovellu maastokäyttöön. Tukipyörän sovite lukitaan etupyörän kiinnikkeeseen pika-akselilla.




Aurinkosuojan säätö

Aurinkosuojan lukitus avataan suojan sivuilla olevista harmaista napeista kummaltakin puolelta. Voit säätää kumpaakin aurinkosuojan kaartaa. Toinen kaarista kiinnitetään työntökahvaan remmillä. Aurinkosuoja lukittuu kääntämällä napit takaisin lukitusasentoon.



Jalkatuet


Jalkatuet asennetaan etuosan pystyputkiin. Aseta jalkatuki osoittamaan sivulle ja työnnä tappi ylhäältä putkeen. Työnnä pohjaan asti ja käännä jalkatuki paikalleen. Jalkatuki lukittuu etuasentoon. Jalkatukea irrotettaessa paina punaista nappia lukituksen avaamiseksi. Käännä tuki sivulle ja nosta.

 **Huomioi, että jalkatuet eivät kestä astumista koko painolla ja ne tulee irrottaa rattaisiin siirtymisen ajaksi.**



Kallistus

Largoossa on veivillä käytettävä kallistus edessä ja takana. Takaosan kallistusta käytetään selkäosan takana olevasta veivistä.

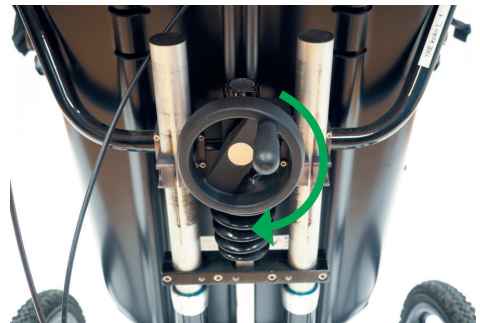

Kallistus

Etuosan kallistus säädetään rattaiden oikealta puolelta.



Vartalotuet ja niskatuki

Kylkituet ja niskatuki kiinnitetään samoihin istuinosan tarroihin. Istuintyynyjä on saatavilla haarakiilalla ja ilman.



5-pistevyöt

5-pistevyöt kiinnitetään asettamalla ensin vasemman ja oikean hihnan metallikiinnikket yhteen. Työnnä kiinnike sitten jalkojen välistä tulevaan turvavyölukkoon.



5-pisteväöiden säädöt

Turvavyöissä on karkea säätö selkäosan takana. Avaa lukitus ja vedä hihnaa haluamaasi suuntaan. Hienompi säätö on etupuolella hihnan päässä. Turvavyölukon hihna on myös säädettävissä istuimen alta.



Sääsuojat

Hyttysverkko kiinnitetään vetoketjulla aurinkosuojan etureunaan. Vetoketjun kummassakin päässä on varmistuksena tarra. Hyttysverkon jalkaosan hihna viedään jalkaosan pohjetukien alta ja toisen puolen lukon läpi. Kiinnitä tarra ja sulje lukko.

Rattaisiin kuuluu myös sadesuoja.

