

Klaimber®

klaimber.fi

LATTIALTA YLÖS HELPOSTI, NOPEASTI JA TURVALLISESTI

Klaimber on henkilönostimena toimiva tuoli, jolla pääset lattialta ylös silloin kun tarve on, vaikka toimintakykysi olisi rajoittunut tai heikentynyt. Nousu tapahtuu ylävartalon kevyellä keino-
liikkeellä, ilman
avustajaa!



- ✓ Lisää omatoimisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä pärjäämistä.
- ✓ Toimii ilman sähköä eikä vaadi avustajaa.
- ✓ Vähentää lähikontakteja ja voi siten vähentää tartuntariskejä nostotilanteissa.
- ✓ Sopii kodin sisustukseen.
- ✓ Toimii myös tavallisena tuolina – Klaimber on apuväline vain tarvittaessa.

MYynti JA VUOKRAUS

CAMP[®]
MOBILITY

✉ info@campmobility.fi

☎ 09 - 350 76 310

🌐 www.campmobility.fi

Valmistaja

KAILAMED



Istuimen nostokorkeus	4 – 54 cm
Käyttäjän enimmäispaino	100 kg
Materiaalit: teräs, pyökki	
(L) 670 x (S) 690 x (K) 770 – 890 mm	

Klaimber® KUINKA KLAIMBER TOIMII?



1
Olet lattialla, etkä kykene nousemaan jalkoja käyttäen ylös, tai vointisi on heikko. Pääset lattiaa pitkin Klaimberin luokse.



2
Voit vetää istuimen kevyesti kädellä alas lattiatasoon, josta istuimeen on helppoa ja turvallista siirtyä.



3
Istuin nousee ylös kevyellä keskivartalon keinuliikkeellä, ilman fyysistä ponnistusta. Käsinojat ovat tarvittaessa tukena.



4
Voit jäädä tuoliin istumaan, nousta istuma-asennosta ylös, tai siirtyä esimerkiksi pyörätuoliin tai sänkyyn. Käsinojat taittuvat pois tieltä.

klaimber.fi

MYynti JA VUOKRAUS
info@campmobility.fi
09 - 350 76 310

CAMP[®]
MOBILITY