



Klaimber®

PIKAOHJE

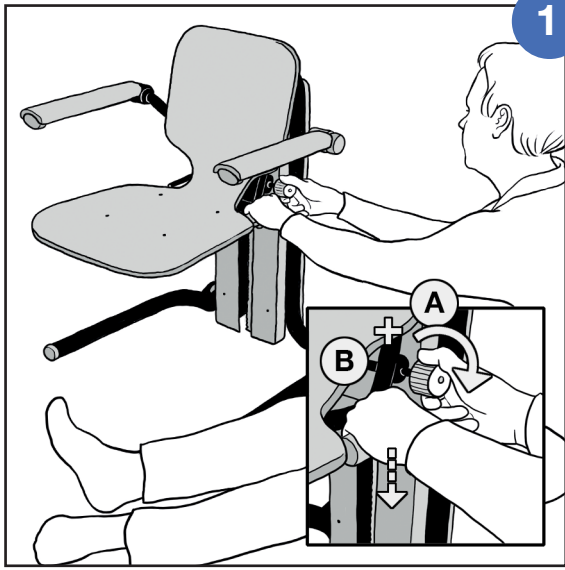

1

Pyöräytä istuimen käyttötilan valitssinnuppia (A) taaksepäin ja pidä nappi käännettynä. Paina samalla laskukahvaa (B) alaspäin. Istuin laskeutuu lattiatasoon.

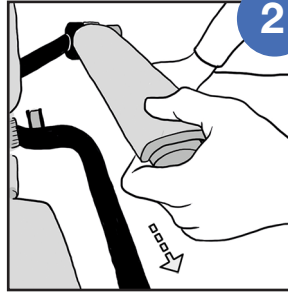

2

Vedä käsinojan vapautinnuppia ja nosta käsinoja ylös istuimelle siirtymisen tieltä.


3

Siirry
istuimelle




4

Vedä käsinojan vapautinnuppia ja laske käsinoja alas. Käsinoja lukittuu ala-asentoon.

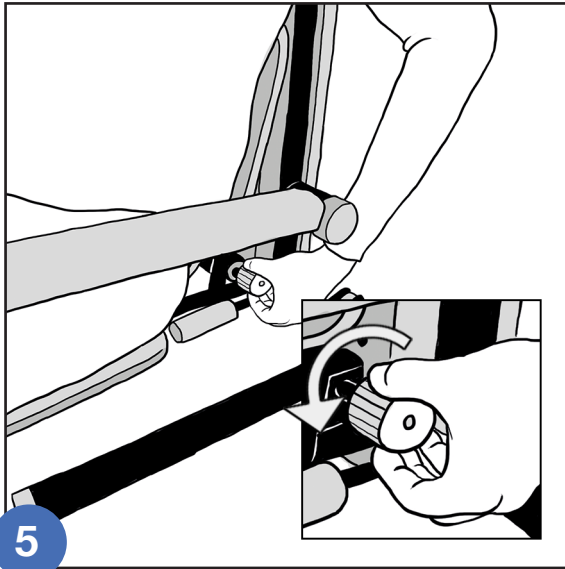


5

Pyöräytä istuimen käyttötilan valitsinnuppia eteenpäin kunnes tunnet istuimen keinuvan.

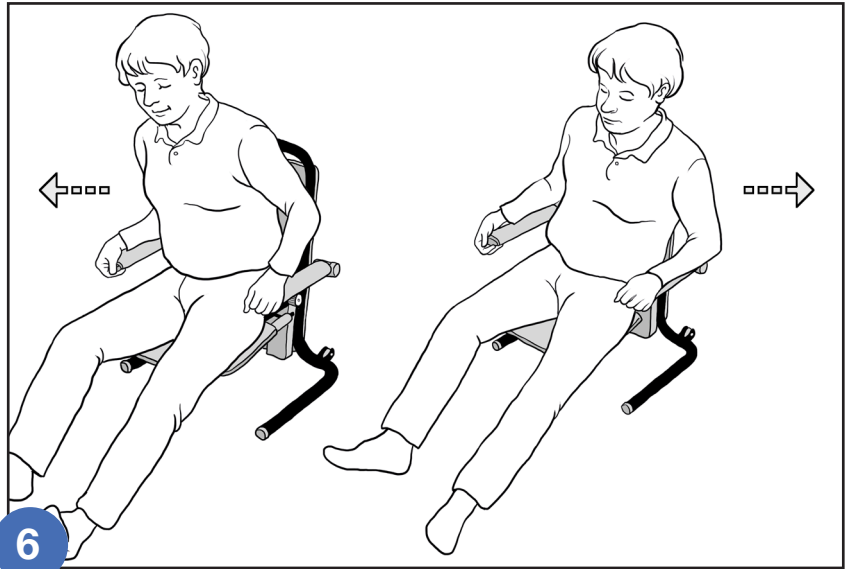

6


Keinuta istuinta sivuttain kallistelemalla ylävartaloasi vasemmalle ja oikealle. Istuin nousee pykälän joka kallistuksella.

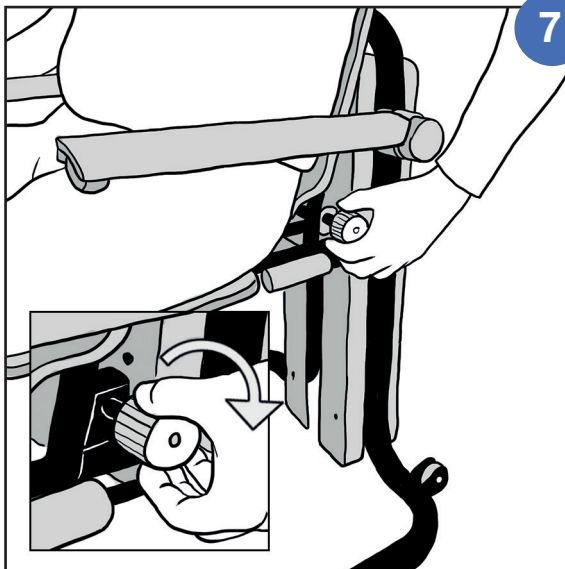

7

Kun olet noussut haluamallesi korkeudelle, pyöräytä istuimen käyttötilan valitsinnuppia taaksepäin. Istuin lukittuu vakaaksi.

Voit jäädä istumaan tai siirtyä Klaimberista esimerkiksi sänkyyn tai pyörätuoliin. Käsinojat voi nostaa ylös pois siirtymisen tieltä.

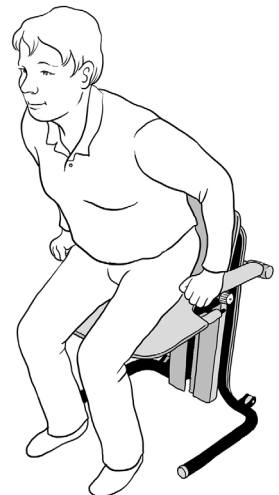

Lisätietoja:
klaimber.fi

KAILAMED