



COBI REHAB®
The Positioning Company

KÄYTTÖOHJE

Bariatrinen potilas- / ruokailutuoli

Erityisesti suunniteltu potilastuoli, joka varmistaa hyvän istumismukavuuden bariatrisille henkilöille. Potilastuoleja käytetään odotushuoneissa, sairaaloissa, laitoksissa sekä yksityisissä kodeissa.

Max. käyttäjäpaino 325 kg. Saatavana kahta eri leveyttä: 61 cm ja 71 cm.



Scan the QR-code and find the product on the Danish AssistData.



Cobi Rehab and Cobi Rehab suppliers comply with the UN conventions on child labour and forced labour as well as ILO 029, C132 and C182.

Sisällys

1. Turvallisuus.....	3
2.Symbolit	4
3.Yleistä	5
4.Käyttö.....	5
5.Asennus.....	5
6.Varastointi	6
7.Puhdistus ja huolto	6
8. Hävittäminen.....	6
9.Takuu	7
10.Tuotetiedot	8
11.Tilaustiedot.....	8

1. Turvallisuus



VAROITUS

Älä käytä potilastuolia ilman, että olet saanut perusteelliset ohjeet koulutetulta henkilöltä tai henkilöltä, joka on saanut ohjeet potilastuolin käyttöön. Tuotteen vääränlainen käyttö voi johtaa käyttäjän loukkaantumiseen.

Potilastuolin käyttö henkilöllä, joka painaa yli 325 kg, nostaa tuolin vioittumisen riskiä.

Lue käyttöohje ennen potilastuolin käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin, jotka on merkitty .

Cobi Rehab pidättäytyy kaikesta vastuusta, jos tuote tai käyttäjä vahingoittuvat sen seurauksena, että tuote on asennettu väärin tai sitä on käytetty väärin.

Ota heti yhteys Cobi Rehabiin, jos osia on vioittunut tai niitä puuttuu. Älä koskaan käytä omia varaosia.

Cobi Rehab pidättäytyy vastuusta vioittumisiin tai onnettomuksiin, jos ne johtuvat korjauksista, joita Cobi Rehab ei ole kirjallisesti hyväksynyt.



TURVALLISUUSOHJEET










Potilastuoli voi kaatua tai rikkoutua, jos max. kuormitus 325 kg ylittyy.












Pintamateriaalin lämpötila voi nousta, jos potilastuoli altistuu ulkoiselle lämmönlähteelle esim. auringolle.

Potilastuolia saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla, jonka max. kaltevuus on 3 astetta. Suurempi kaltevuus lisää kaatumisen riskiä.

Potilastuoli tulee koota oikein ennen käyttöä. Katso osio Asennus.

2. Symbolit

Seuraavia symboleita käytetään tässä käyttöohjeessa ja/tai tuotemerkinnässä.	
	Varoitus!
	Vaatimustenmukainen, Medical Device Regulation, EU 2017/745
	Cobi tuotenumero
	Sarjanumero
	Valmistusvuosi
	Valmistaja
	Lääkinnällinen laite
	Max. kuormitus
	Katso käyttöohjeesta
CE-merkintä on sijoitettuna runkoon. Alla esimerkki CE-merkinnästä.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522				
	XXL-Rehab Patient Chair, 61 0160-061-000			325 KG	MADE IN TAIWAN
	0050810				
	2020		(01)05740000102124(21)0050810		

3. Yleistä

Tässä käyttöohjeessa on tärkeää tietoa potilastuolin käytöstä sekä potilastuolin kohderyhmästä. Ohjeessa on myös paljon määriteltyjä tietoja tuolista.

Käyttöohjeen viimeisin versio löytyy nettisivuiltamme. Tarkista, että sinulla oleva versio on viimeisin.

Jos tarvitset käyttöohjeen, joka on kirjoitettu suuremmalla fontilla, tuote-esite on saatavana PDF-muodossa cobirehab.com, joka voidaan suurentaa haluttuun fonttikokoon.

Voit aina olla yhteydessä Cobi Rehab +45 70252522 tai cobi@cobi.dk, jos haluat lisätietoja tuolista.

Cobi Rehabilla on oikeus muuttaa tuotemäärittelyjä ilman etukäteisilmoitusta.

Potilastuolin UDI-numero on tuotetarrassa, joka on rungon sivussa.

Tuotteen turvallisuustiedotteet ja tuotteen takaisinvedot ovat nähtävillä nettisivuilla.

4. Käyttö

Potilastuoli on todella kestävä tuoli, joka mahdollistaa hyvän istumamukavuuden aina 325 kg painoiselle henkilölle. Potilastuolia on saatavana kahta leveyttä: 61 cm ja 71 cm.

Potilastuolin leveä istuin sekä muotoillut käsituet varmistavat hyvän tilan käsitukien välissä. Istuinsyvyyttä voi säätää kolmeen eri syvyyteen.

Selkä- ja istuinosan muotoilu mahdollistaa käyttäjän istumisen ihan istuinosan takaosassa. Tämä on usein toivottua, kun tuolia käytetään ruokailutuolina.

⚠ Potilastuoli voi kaatua tai rikkoutua, jos max. kuormitus ylitetään.

Potilastuolia käytetään odotushuoneessa, sairaaloissa, laitoksissa ja kotona.

⚠ Potilastuolia saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla, jonka max. kaltevuus on 3 astetta. Suurempi kaltevuus lisää kaatumisen riskiä.

Vasta-aiheet

Valvo käyttäjiä, joilla kognitiivisia rajoitteita.

5. Asennus

Potilastuolin asennus

Potilastuoli koostuu kahdesta osasta, tuolin rungosta sekä selkäosasta.

1. Laita priikka jokaiseen pulttiin. Kiristä selkäosa tuolin runkoon laittamalla neljä pulttia ja priikkaa kummallakin puolella oleviin reikiin. Kaksi kummallekin puolelle. Kiristä ne hyvin mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.

Istuinsyvyyden ja selkäosan säätäminen

1. Istuinsyvyyttä voi säätää kolmeen eri asentoon. Valitse selkäosasta kaksi reikää (etu, keski tai taka) haluttuun istuinsyvyyteen. Katso ohjeet ylhäältä.

Jalkojen korkeudensäätö

1. Jalkojen korkeutta voi säätää kuuteen eri asentoon löysäämällä ja kiristämällä neljää valmiiksi asennettua pulttia jaloissa. Käytä molempia kuusiokoloavaimia säätämiseen.

Käytettävät työkalut

1. Kaksi 5 mm kuusiokoloavainta, neljä kuusiokolopulttia, neljä priikkaa.

Käytön aikana

Selkäosaa voidaan säätää kolmeen eri syvyyteen. Istuinsyvyyden säätö ei vaikuta tuolin vakauteen.

6. Varastointi

Kun potilastuoli ei ole käytössä, varastoi kuivassa paikassa, jossa lämpötila -10 - 40°C.

7. Puhdistus ja huolto

Potilastuolin runko ja istuin puhdistetaan vedellä sekä tavallisella puhdistusaineella.

Desinfiointi

Potilastuoli voidaan desinfioida käyttämällä etanolia 70-85 % tai kloortuotetta min. 1000 ppm ja max. 10000 ppm.

⚠ Desinfioi potilastuoli aina, kun se siirtyy uudelle käyttäjälle. Näin tehden vältetään ristikontaminaatiota ja infektioita.

Paikallisia puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteitä tulee aina noudattaa.

Huolto

Pultit ja prikot tulee tarkistaa säännöllisesti ja tarvittaessa vaihtaa.

⚠ Pulttien ja prikkujen tarkistuksen laiminlyönti voi johtaa vikaan.

8. Hävittäminen

Hävitä käyttämättömät tuotteet ympäristölle turvallisella tavalla.

Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoa hävittämisestä.

Kierrätys

Ota yhteys Cobi Rehabiin saadaksesi tarkempia ohjeita potilastuolin osien kierrätyksestä.

9. Takuu

Cobi Rehab takaa, että potilastuoli toimitetaan ehjänä. Jos vastoin kaikkia odotuksia potilastuolissa havaitaan vika tuotetta vastaanotettaessa, ota yhteys Cobi Rehabiin välittömästi.

Potilastuolin takuu-aika on yksi vuosi ostopäivästä lukien ja kattaa valmistusvirheet tai jos tuote on viallinen sitä vastaanotettaessa. Lasku/kuitti toimii takuutodistuksena.

Takuu ei koske:

- tuotetta, josta sarjanumero, eränumero tms. on poistettu tai merkittävästi vahingoittunut.
- tuotetta, jonka on korjannut epäpätevä henkilö.

9.1 Vaaratilanteet

Raportoi kaikista vaaratilanteista Cobi Rehabille sekä paikallisille viranomaisille.

9.2 Odotetun käyttöiän päätyttyä

Kun odotettu käyttöikä päättyy, on tärkeää arvioida ja tutkia tuote huolellisesti ennen sen käytön jatkamista.

Cobi Rehab ei voi taata tuotteen soveltuvuutta ja turvallisuutta, sillä Cobi Rehabilla ei ole tietoa, miten tuotetta on käytetty, ja miten se on mahdollisesti kulunut.

Takuu ei koske:
- kuluvia osia

Takuu ei ole voimassa, jos Cobi Rehab arvioi, että tuolia on käytetty väärin.

Tuotteen korjaamisesta ja käytetyistä varaosista lähetetään lasku, jos tuotevika johtuu vääränlaisesta käytöstä.



Jos tuotetta ei huolleta, se voi vahingoittaa tuotetta, vähentää sen käyttöikää tai vaikuttaa tuolin käyttöominaisuuksiin.

10. Tuotetiedot

Max. käyttäjätaino	325 kg
Istuinleveys	610/710 mm
Istuinsyvyyden säätö	400-520 mm
Istuinkorkeuden säätö	440-590 mm
Käsitukien etäisyys	650/750 mm
Kokonaisleveys	730/830 mm
Kokonaiskorkeus	790-940 mm
Istuin-/selkä-/käsituet	Polyuretaani
Runko	Pulverilakattu kromimolybdeeniteräs / SAE41-30
Paino (61 cm/71 cm)	16,5/17,5 kg
ISO-luokka	18 09 03 14
Odotettu käyttöikä	7 vuotta
Riskiluokka	I
UDI-DI	5740000102124/574000002131
Basic UDI-DI	5740000100003MY
Pintalämpötila voi nousta, kun potilastuoli altistuu ulkoisille lämmönlähteille esim. auringonvalolle.	

11.

Tilaustiedot

Malli	Item number
Bariatrinen potilastuoli, 61 cm	0160-061-000
Bariatrinen potilastuoli, 71 cm	0160-071-000
Kumitulpat, kumia, 1 kpl	0140-999-112



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



MANUFACTURER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
+45 7025 2522
cobirehab.com