



## Bariatrinen Potilastuoli / Ruokailutuoli

**Erityisesti suurille henkilöille suunniteltu potilas-/asiakastuoli, joka varmistaa hyvän istumismukavuuden bariatrisille henkilöille. Potilastuoleja käytetään odotushuoneissa, sairaaloissa, laitoksissa sekä yksityisissä kodeissa.**

Max. käyttäjäpaino 325 kg. Saatavana 2 eri leveyttä: 61 cm ja 71 cm.



- Lisää säätövaihtoehtoja
- Saatavana 2 kokoa, 610 mm ja 710 mm leveää
- Painokapasiteetti jopa 325 kg
- Minimalistinen design: sopii niin odotushuoneisiin kuin yksityiskoteihin.



## Yleistä

Tämä tuoteseloste sisältää tietoja potilastuolin käytöstä ja tuotteen kohderyhmästä. Se sisältää myös joukon eritelmiä potilastuolista.

Tämän tuote-esitteen uusin versio löytyy valmistajan verkkosivuilta, jossa se voidaan myös skaalata suurempaan kirjasinkokoon.

Voit aina ottaa yhteyttä Cobi Rehabiin, jos haluat lisätietoja potilastuolista.

Cobi Rehab pitää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## Bariatric Patient Chair/Dinner Chair

Potilastuoli on erittäin vahva tuoli, joka takaa hyvän istumamukavuuden jopa 325 kg painaville käyttäjille.

Potilastuolia on saatavana 2 istuinleveyttä, 610 mm ja 710 mm. Potilastuoli on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Potilastuoli on varustettu leveällä istuimella, joka kaarevilla käsinojilla takaa hyvän tilan käsinojien väliin. Istuinsyvyyttä voidaan säätää kolmeen eri syvyyteen.

Selkänöjan ja istuimen muotoilu mahdollistaa sen, että käyttäjä voi istua täysin selkänöjaa vasten, mikä voi olla parempi, kun tuolia käytetään ruokatuolina pöydän ääressä.

Potilastuoleja käytetään odotushuoneissa, sairaaloissa, laitoksissa ja yksityiskodeissa.

Potilastuolia saa käyttää vain tasaisella, kovalla lattialla, jonka kaltevuus on enintään 3°. Suurempi kaltevuus saattaa lisätä kaatumisriskiä.

## Rakenne

Bariatrisen potilastuolin runko koostuu kevyistä teräsputkista, jotka takaavat maksimaalisen vakauden ja kevyen painon. Putket on pintakäsitelty pulverimaalilla.

Käsinojat ulottuvat istuimen pinnan ulkopuolelle, mikä vähentää puristuksiin jäämisen riskiä. Se helpottaa myös hyvän otteen saamista tuoliin istuutuessa ja ylösnoustaessa.

Bariatrisen potilastuolin selkänöjaa voidaan säätää parhaan mahdollisen istuma-asennon saavuttamiseksi. Selkänöjaa voidaan siirtää yhteensä +/- 60 mm.

Kaarevat putket takaavat hyvän istumamukavuuden.

Istuinkorkeus on säädettävissä 440-590 mm.

## Säätö

Potilastuoli koostuu kahdesta osasta, tuolin rungosta ja selkänöjasta. Bariatric-potilastuoli kootaan mukana toimitetuilla pulteilla ja aluslevyillä.

### Istuimen ja selkäosan asennus

Istuinsyvyyttä voi säätää kolmeen asentoon. Valitse selkänöjasta kaksi reikää (edessä, keskellä tai takana) haluttua istuinsyvyyttä varten.

### Jalkojen korkeussäätö

Jalkojen korkeutta voidaan säätää kuuteen asentoon löysäämällä ja kiristämällä jalkoihin esiasennettuja neljää pulttia.

### Käytön aikana

Selkänöjaa voidaan säätää kolmeen eri syvyyteen. Istuinsyvyuden säätö ei vaikuta tuolin vakauteen.

## Puhdistus, huolto ja pitkäaikainen varastointi

Potilastuolin runko ja istuin puhdistetaan vedellä ja tavallisella puhdistusaineella.

### Desinfiointi

Bariatric Patient Chair voidaan desinfioida 70-85 % etanolilla tai min. 1000 ppm ja max. 10000 ppm pitoisella klooripitoisella puhdistusaineella.

### Huolto

Pultit ja aluslevyt tulee tarkastaa säännöllisesti ja vaihtaa tarvittaessa.

### Varastointi

Kun bariatrisen potilastuolin ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa paikassa -10 - 40 °C:ssa.

# Tekniset tiedot

<b>Mittatiedot: mallit 610 mm ja 710 mm</b>	
Max. käyttäjäpaino	325 kg
Istuinleveys	610/710 mm
Istuinsyvyys, säädettävä	400-520 mm
Istuinkorkeus, säädettävä	440-590 mm
Käsitukien väli	650/750 mm
Kokonaisleveys	730/830 mm
Kokonaiskorkeus	790-940 mm
Kokonaispituus (jaloista selkänojaan)	800-1010 mm
Istuin/selkänoja/käsitukipehmusteet	Polyuretaania
Runko	Pulverilakattu kromimolybdeeniteräs /SAE41-30
Paino (610 mm/710 mm)	16.5/17.5 kg
ISO luokka	ISO 18 09 03 14
Tuotteen tekninen käyttöikä	7 vuotta
Riskiluokitus	I
UDI-DI	5740000102124/5740000102131
Basic UDI	5740000100003MY
Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät	EN 12182
Pintalämpötila voi nousta, kun potilastuoli altistuu ulkoisille lämmönlähteille, kuten auringonvalolle.	

## Tilausnumerot

<b>Malli</b>	<b>Valmistajan t.nro</b>
Bariatrinen potilastuoli/ruokailutuoli, 610 mm	0160-061-000
Bariatrinen potilastuoli/ruokailutuoli, 710 mm	0160-071-000
Holkit, 1 kpl	0160-999-100