



CLINNOVA
SEERSMEDICAL

CLINICAL RANGE
BRUKSANVISNING



VARNING

Läs denna bruksanvisning och medföljande dokumentation före användning av produkten för att undvika skador.



Obligatoriskt att läsa bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning avser följande SEERS Medical CLINNOVA™

Clinical -produkter:

CLINNOVA™ Clinical, 2-delade behandlingsstolar

NV2550, NV2560, NV2570

CLINNOVA™ Clinical, 3-delade behandlingsstolar

NV3550, NV3560, NV3570

CLINNOVA™ Clinical Mobile, behandlingsstolar

NV2450, NV2460, NV 2470, NV3450, NV3460, NV3470 NV2650,
NV2660, NV2670, NV3650, NV3660, NV3670

CLINNOVA™ Clinical Multi, behandlingsstolar (1- eller 2-delat benstöd)

NV0465, NV0475, NV0485, NV0495, NV0565, NV0575, NV0585, NV0595
NV0665, NV0675, NV0685, NV0695

CLINNOVA™ Clinical Orthopaedic, behandlingsstolar

NV5455, NV5465, NV5475, NV5485, NV5585D, NV5555, NV5565, NV5575,
NV5585, NV5585D, NV5655, NV5665, NV5675, NV5685, NV5685D

CLINNOVA™ Clinical Phlebotomy, provtagningsstolar

NV9456P, NV9466P, NV9476P, NV9486P, NV9556P, NV9566P,
NV9576P, NV9586P, NV9656P, NV9666P, NV9676P, NV9686P

CLINNOVA™ Clinical Ultrasound, behandlingsstolar

NV9486, NV9486D, NV9496, NV9496D, NV9586, NV9586D, NV9596,
NV9596D, NV9686, NV9686D, NV9696, NV9696D, NV9466, NV9476
NV9556, NV9566, NV9576, NV9656, NV9666, NV9676,

CLINNOVA™ Clinical Gynaecology, behandlingsstolar

NV8453, NV8463, NV8473, NV8483, NV8483D, NV8593D, NV8553, NV8563,
NV8573, NV8583, NV8583D, NV8593D, NV8653, NV8663, NV8673, NV8683,
NV8683D, NV8693D

CLINNOVA™ Clinical GP Gynaecology, behandlingsstolar

NV8443, NV8543, NV8643, NV8443D, NV8543D, NV8643D

INNEHÅLL

1. **ALLMÄNT** – AVSEDD ANVÄNDNING, VARNINGAR OCH OBSERVANDUM

2. **ANVÄNDNING**
 - a. HJUL – INDRAGBARA
 - b. JUSTERINGSBEN
 - c. HJUL – LÅSNING OCH RIKTNINGSBROMSAR
 - d. HJUL – INDIVIDUELL LÅSNING
 - e. HÖJDREGLERING
 - f. VINKELJUSTERING AV RYGGSTÖD OCH BENPLATTA
 - g. VINKELJUSTERING AV RYGGSTÖD OCH BENPLATTA (MODELLER MED 3 ELLER 4 MOTORER)
 - h. FÖRLÄNGNING/FÖRKORTNING AV BENPLATTA (1- ELLER 2-DELAD)
 - i. JUSTERING AV UPPFÄLLBARA ARMSTÖD (MULTI- & DUALMODELLER)
 - j. JUSTERING AV RINGARMSTÖD
 - k. SKÖLJSKÅLAR (GYNAE-MODELLER)
 - l. NEDFÄLLBAR BENPLATTA (GYNAE-MODELLER)
 - m. AVTAGBAR BENPLATTA (GYNAE-MODELLER)
 - n. SIDOSTÖD OCH SKENOR
 - o. PAPPERSRULLHÅLLARE
 - p. JUSTERBARA ARMSTÖD
 - q. BENSTÖD
 - r. FOTKONTROLL

3. **RENGÖRING**

4. **UNDERHÅLL**

5. **GARANTI**

6. **FELSÖKNING**

7. **TEKNISKA DATA**
 - Eltekniska data**
 - Klädsel**
 - Miljö**
 - Transport och förvaring**
 - Symboler**

1. ALLMÄNT

Vi **GRATULERAR** dig till att ha valt en **SEERS MEDICAL CLINNOVA™** -behandlingsstol.


För din egen säkerhet och för att kunna utnyttja produkten i många år framöver är det viktigt att noga följa denna bruksanvisning. **UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA BRUKSANVISNINGEN KAN LEDA TILL ATT GARANTIN BLIR OGILTIG.**

Förvara bruksanvisningen för senare bruk.

Uppgifter som angår produktens användargränssnitt är i **MÖRKGRÅTT**.

AVSEDD ANVÄNDNING:

Clinnova-behandlingsbänkar och -stolar är avsedda att användas av utbildad vårdpersonal för medicinska undersökningar och mindre behandlingsåtgärder. Den högsta tillåtna belastningen är 260 kg.

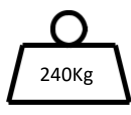

Säker arbetsbelastning (Safe working load)	260 kg
Rekommenderad högsta brukarvikt	240 kg
Säker belastning för tillbehör	20 kg



VARNINGAR!

Varningar hänvisar till risker som kan leda till personskada eller i värsta fall livsfara om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs.

- Se till att elektriskt reglerbara behandlingsstolar inte används i närheten av brandfarliga ämnen, så som anestesigaser.
- **ÖVERSKRID INTE** den högsta säkra arbetsbelastningen.
- Den högsta säkra arbetsbelastningen framgår av produktetiketten.
- Se till att belastningen från patienten fördelas jämnt över hela arbetsytan.
- Se till att hela vikten inte ligger på en sida av stolarna.
- Observera att stolens funktioner startar /stannar när den ansluts till eller kopplas från eluttaget.
- Använd bara tillbehör som är utvecklade och godkända för att användas med denna produkt.
- Låt inte barn leka med behandlingsstolen.
- Håll ett öga på barn i närheten av behandlingsstolen.

 **OBS!**

Observandum hänvisar till omständigheter där det finns risk för att produkten tar skada om bruksanvisningen inte följs.



Se för ytterligare information i denna bruksanvisning.

2. ANVÄNDNING

a. HJUL (INDRAGBARA)



Pedal UPP
Hjulen är indragna och rör sig inte (**OFF**).



Pedal NED
Hjulen är nedfällda och rör sig (**ON**).



Pedal LÅST
Hjulen är nedfällda och låsta (**ON**).



WARNING!

Behandlingsstolen är inte avsedd för transport av patienter. Se till att hjulen är indragna eller låsta innan du flyttar patienten eller börjar behandlingen.

Dra ur elsladden innan du flyttar behandlingsstolen och se till att den inte fastnar mellan delar av stolen.

b. JUSTERINGSBEN



VARNING!

Se till att hjulen är indragna innan du använder justeringsbenen.

1. Säkerställ att hjulen är indragna och inte rör sig.
2. Justera benen genom att vrida dem mot- eller medurs tills stolen står stabilt.
3. Spänn fast benen genom att dra åt muttern.


c. HJUL – LÅSNING OCH RIKTNINGSBROMSAR



RÖD PEDAL NED
Alla hjul är låsta.



PEDAL VÅGRÄTT
Hjulen är INTE låsta.

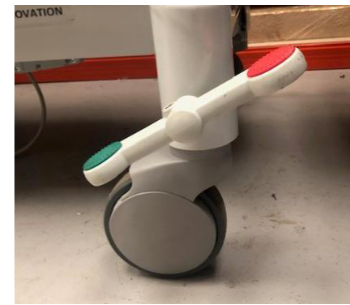

GRÖN PEDAL NED
Riktningsslåset är påslaget.

d. HJUL – INDIVIDUELL LÅSNING



Hjulet är INTE låst.



Hjulet är låst.

e. HÖJDREGLERING

Hydraulisk höjjustering (manuellt justerbara modeller)



1. Höj stolen genom att trampa ned pedalen. Fortsätt trampa tills önskad höjd är nådd.
2. När du vill sänka - lyft upp pedalen med foten håll den upplyft tills stolen har sjunkit till önskad höjd.

Elektrisk höjjustering (eldrivna modeller)



Handkontroll med enriktad styrning



Fotkontroll med enriktad styrning

Höjning av behandlingsstolen

1. Tryck ned knappen UPP på hand- eller fotkontrollen.
2. Släpp knappen när önskad höjd är nådd.
3. När knappen släpps låser sig stolen i aktuell höjd.

Sänkning av behandlingsstolen

1. Tryck ned knappen NED på hand- eller fotkontrollen
2. Släpp knappen när önskad höjd är nådd.
3. När knappen släpps låser sig stolen i aktuell höjd.

f. VINKELJUSTERING AV RYGGSTÖD OCH BENPLATTA (MANUELL)



1. Drag i frigörelsespaken och ställ in ryggstödet eller benplattan i önskad vinkel.
2. Släpp frigörelsespaken. Ryggstödet eller benplattan låser sig i aktuell vinkel.
3. Om du vill ändra vinkeln igen - dra återigen i spaken och ställ in vinkeln.
4. Vinkeln låser sig när du släpper spaken.

VINKELJUSTERING AV RYGGSTÖD (modeller med 2 eller fler motorer)



Du kan ändra vinkeln på ryggstödet genom att trycka på UPP- eller NED-knappen på kontrollen. Håll knappen nedtryckt tills önskad vinkel är nådd. Släpp knappen, och ryggstödet låser sig.

g. VINKELJUSTERING AV RYGGSTÖD OCH BENPLATTA (modeller med 3 eller 4 motorer)



Ändra vinkeln på ryggstödet eller benplattan genom att trycka på UPP- eller NED-knappen för önskad del. Håll knappen nedtryckt tills önskad vinkel är nådd. När du släpper knappen låser sig delen och behandlingsstolen är klar att användas.

h. FÖRLÄNGNING/FÖRKORTNING AV BENPLATTA

(Orthopaedic- och Multi-modeller)



1. Förläng eller förkorta benplattan genom att lossa skruven under benplattan så att den kan skjutas fram och tillbaka. Ställ in benplattan i önskad position.
2. Dra åt skruven så att benplattan sitter stabilt.
- 3.



WARNING!

Se till att benplattan sitter ordentligt på plats innan du börjar behandlingen.

i. JUSTERING AV UPPFÄLLBARA ARMSTÖD



1. Armstöden kan fällas upp eller ned.



2. Vinkeln för armstöden när de är nedfällda kan ändras genom att man vrider på reglerrullen under armstödet tills armstödet ligger i önskad vinkel.

j. JUSTERING AV RINGARMSTÖD



1. Armstödetets fäste sitter i sidan av stolen. I fästet sitter en spak med vilken armstödet kan justeras.
2. För att frigöra spaken - tryck ned knappen mitt på spaken. Vrid på spaken medan du håller knappen nedtryckt.
3. Släpp knappen. Gör på samma sätt med spaken på den motsatta sidan.

k. SKÖLJSKÅL (bara Gynae-modeller)



1. Sköljskålen är lätt att skjuta in på sin plats eller dra ut.

l. NEDFÄLLBAR BENPLATTA (bara Gynae-modeller)



3. Ta tag i benplattan och vänd den 90 grader.



2. Lyft benplattan så att den ligger vågrätt.



1. Skjut knoppen i spåret under benplattan tills stödröret låser sig på plats. Gör på samma sätt på andra sidan.



VARNING!

Den nedfällbara benplattan är INTE avsedd för att användas som säte.
Se till att patienten inte belastar benplattan för mycket.
Benplattan är avsedd att stödja benen när patienten behöver ligga raklång under behandlingen.

m. AVTAGBAR BENPLATTA (bara Gynae-modeller)



- a. Den avtagbara benplattan är avsedd för att stödja benen när patienten behöver ligga raklång under behandlingen.
- b. Fastställ benplattan i fästena och lås den på plats genom att vrida på låsspaken.



OBS!

Den avtagbara benplattan är INTE avsedd för att användas som säte.
Se till att patienten inte belastar benplattan för mycket. Benplattan är avsedd för att stödja benen när patienten behöver ligga raklång under behandlingen.

n. SIDSTÖD OCH SKENOR



VARNING!

- a. Låt inte barn leka med behandlingsstolen.
- b. Håll ett öga på barn i närheten av behandlingsstolen.

Se till att skenorna för sidstöd sitter fast ordentligt innan du börjar använda stolen.



Höj sidstödet genom att vända det upp 180 grader och ställa det i fästena.



Sänk sidstödet genom att dra det upp och fällda det ned 180 grader.

o. PAPPERSRULLHÅLLARE



Gör så här för att sätta pappersrullen i hållaren: tryck hållarens ram utåt så att hållarens axel frigörs.


Sätt axeln i pappersrullens hylsa och sätt den tillbaka på hållaren genom att dra ut ramen en aning. Släpp ramen när axeln sitter på sin plats.

p. JUSTERBARA ARMSTÖD



1. Gör så här för att ändra ställning på armstöden. Lossa spaken under armstöden genom att vrida den moturs.
2. När spaken sitter löst, vänd armstödet till önskad position och dra åt spaken igen.
3. Om du vill höja eller sänka armstödet, lossa spaken i det vertikala armstödsröret.
4. När spaken har lossats - sänk eller höj armstödet till önskad höjd.
5. När armstödet ligger i önskad höjd - dra åt spaken igen.

q. BENSTÖD

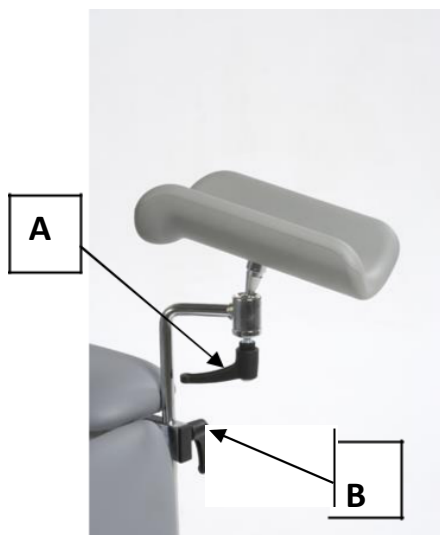

1. Du kan ändra vinkeln på benstödet genom att lossa spaken (A) under benstödet och sedan ställa benstödet i önskad vinkel.
2. Dra åt spaken igen när benstödet är i önskad vinkel.
3. Du kan höja eller sänka benstödet genom att lossa den nedre spaken (B) och sedan ställa benstödet i önskad höjd.
4. Dra åt spaken igen när benstödet är i önskad höjd.
5. Du kan förlänga eller förkorta benstödet genom att lossa spaken på skenan på stolens ram (syns inte i bilden) och skjuta benstödet till önskad position i skenan.
6. Dra åt spaken igen.



WARNING!

Se till att alla låsspakar är åtdragna innan du börjar använda stolen.

Q. FOTKONTROLL



Du kan ändra stolens höjd och vinkeln för ryggstödet och benplattan genom att trampa på motsvarande knapp på fotkontrollen.

3. RENGÖRING



VARNING!

Dra ut nätsladden innan du rengör eller desinficerar stolen.

VARNING!

**BLÖT INTE NED STOLEN OCH ANVÄND INTE SKUR-, BLEK- ELLER IMPREGNERINGSMEDEL FÖR RENGÖRINGEN!
NEDBLÖTNING ELLER BLEKNING KAN LEDA TILL KORROSION OCH FÖRKORTA PRODUKTENS LIVSLÄNGD.**

Rekommenderad rengöringsmetod: SEERS Anti-Bacterial-torkdukar

Den perfekta rengöringen för SEERS-provtagnings- och behandlingsstolar. Varje förpackning innehåller 200 torkdukar med STERiZAR® teknologi som dödar 99,9999 % av bakterier. Torkdukarna är alkoholfria och irriterar därför inte huden, men är lika effektiva som alkoholbaserade torkdukar. Fördelar med SEERS Anti-Bacterial-torkdukar är:

- Alkoholfria. Skadar inte vinylklädseln.
- Framtagna speciellt för rengöring av behandlingsstolar och -bänkar.
- Innehåller STERiZAR®teknologi som dödar 99,9999 % av bakterier, inklusive MRSA, E. Coli och norovirus.
- Lämpliga för de flesta icke-invasiva behandlingsutrustningar.
- Torkar snabbt. Behandlingsstolen kan snabbt användas för nästa patient.
- Motarbetar rostning genom låg fuktutsättning.
- Minskar risken för skada på behandlingsstolar och -bänkar genom att inte utsätta gångjärn och leder för fukt och därmed också rost och slitage.
- Minskad brandrisk tack vare alkoholfrihet.
- Irriterar inte huden.
- Verkar i upp till 30 dagar på hårda ytor.
- Lika effektiva som alkoholbaserade torkdukar.
- Passar för alla delar i SEERS-behandlingsstolar eller -bänkar.



Allmän rengöring:

Torka av damm eller fläckar från klädseln med en fuktig mjuk duk dagligen. Fukta duken med en mild tvållösning och torka varsamt med cirkelrörelser. Lös smuts kan också tas bort med dammsugare. (Använd inte en skaftdammsugare.)

För svår smuts kan du prova en blekmedelslösning med 5 procent blekmedel och 95 procent vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar är lättast att ta bort när de fortfarande är våta. Torka av överflödigt vätska så snabbt som möjligt med en ren, vit, absorberande duk (t.ex. bomull) eller svamp. Använd vid behov varmt vatten. Rengör hela området (exempelvis dyna eller armstöd) där fläcken sitter. Vatten löser upp smutspartiklar och gör det lättare att ta bort fläcken. Efter fläckborttagningen - låt stället torka naturligt. Använd inte hårtork eller liknande för att snabba upp torkandet.

Kaffe, te- eller liknande fläckar: Använd en absorberande vit duk eller en pappersbit. GNUGGA INTE. Låt fläcken suga sig i duken och torka av den från ytan. Torka sedan av resterna av vätskan med en bit vitt mjukt papper med cirkelrörelser.

Bläck, kulspetspenna, avfärgning från jeans, ingrodda fläckar: Fukta fläcken med en lösning med sprit och vatten (1:1) och gnid in vätskan varsamt med cirkelrörelser. Torka sedan av stället med mjukt papper.

Smör, olja och fett: Torka av smutsresterna med ren, vit torr duk. Fukta duken med en mild tvållösning och gnid varsamt med cirkelrörelser. Torka med ren duk.

Tuggummi: Sätt isbitar i en plastpåse och lägg den på tuggummit. Vänta ett par minuter tills tuggummit "fryser" Ta bort det stelade tuggummit.

ANVÄND INTE KEMIKALIER, SADELTVÅL, LÖSNINGSMEDEL, MÖBEPOLERMEDEL, OLJOR, LACKER, SKURMEDEL ELLER AMMONIAK.

Hur ofta stolen behöver rengöras rutinmässigt beror på stolmodellen och hur ofta stolen används:

1. Ställ stolen på en plats där den lätt kan rengöras.
2. Se till att hjulen är låsta eller indragna.
3. Koppla från nätsladden om stolen är eldriven.
4. Rengör handkontrollen med en duk fuktad med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
5. Gör en tvättlösning enligt anvisningarna ovan.
6. BLÖT INTE NED STOLEN. Torka av smutsen.
7. Börja med att torka stolen upptill och fortsätt till delarna under stolen. Akta så att inte frigöringsspackar eller liknande rårar aktiveras.
8. Säkerställ att stolen är helt torr innan du börjar använda den efter rengöringen.
9. Hantera tvättlösningen och rengöringsredskapen enligt anvisningar.
10. Tvätta händerna noga.

DESINFICERING: Gör som ovan men använd en lösning av vatten och natriumhypoklorit (Klorin) i stället för tvål och vatten.

Rengör fläckar och missfärgningar så fort som möjligt, senast inom 24 timmar. Ju längre smutsen hinner reagera med plastytan, desto svårare är den att ta bort.

Obs! Här angivna rengöringsmetoder är bara förslag. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår vid rengöringen. Testa rengöringsmetoden alltid först på ett undanskymt område.

Om du inte är säker på att rengöringsmetoden passar för stolen fråga vår kundtjänst innan du fortsätter.

4. UNDERHÅLL



VARNING!

Koppla från nätsladden före underhåll.

Elunderhåll får bara utföras av behörig personal.

Blå och bruna sladdar får inte anslutas till en jordanslutning (CAN).

Underhållsåtgärder som vårdpersonal kan utföra:	Varje dag	Varje vecka
Kontrollera nätsladden och anslutningssladdarna och hand- och fotkontrollerna för eventuella repor, förslitningar och andra skador. Vid behov byt ut skadade delar.		✓
Kontrollera hjulen visuellt.		✓
Kontrollera nätsladden och eluttaget visuellt.		✓
Kontrollera eventuella tillbehör.		✓
Kontrollera klädseln visuellt.	✓	
Kontrollera att vridstiften är ordentligt fastsatta med e-fästen. ANVÄND INTE STOLEN OM DE SAKNAS!		✓
Kontrollera att den hydrauliska pumpen (endast hydrauliska modeller) fungerar som den ska och inte har läckage.		✓
Kontrollera de gasdrivna funktionerna och de rörliga delarnas funktion i hela deras rörelseområden. Kontrollera även delarnas låsning.		✓

Skulle du upptäcka funktionsfel - kontakta återförsäljaren.

Regelbundet underhåll som utförs av auktoriserad personal:	Minst 1 gång om året
Kontrollera att alla eldrivna funktioner fungerar (t.ex. höjddreglering)	✓
Kontrollera att de manuellt justerbara delarna (ryggstöd, benplatta) fungerar. Kontrollera att de gasdrivna funktionerna fungerar som de ska i delarnas hela rörelseområde. Kontrollera att de polstrade delarna sitter fast på sina platser när frigörelsespaken inte är aktiverad.	✓
Kontrollera nätsladden och strömkontakten. Om kontakten är skadad - byt ut hela sladden.	✓
Kontrollera att alla ledningar är flexibla och inte är snodda eller skadade.	✓
Kontrollera att alla muttrar, bultar och liknande är på sina platser och ordentligt åtdragna.	✓
Kontrollera visuellt eventuella skador. Säkerställ att alla muttrar, bultar och andra liknande delar är med och åtdragna. Om de sitter löst (dvs. går att öppna med handen) - dra åt dem igen med passande verktyg. Akta för att inte dra åt dem för mycket (ett gnisslande ljud kan tyda på att du dragit åt för hårt.)	✓
Kontrollera att alla tillbehör är i ordning. Lägg särskilt märke till fästena och de rörliga delarna.	✓
Säkerställ att strömkontakten sitter ordentligt i kopplingslådan.	✓
Kontrollera att strömkontaktens anslutningar är i ordning (och eventuell säkring är rätt).	✓

5. GARANTI OCH TEKNISK LIVSLÄNGD

SEERS MEDICALs normala garantivillkor gäller även för de produkter som denna bruksanvisning avser. En kopia av garantivillkoren är tillgänglig på begäran. Garantin påverkar inte dina lagliga rättigheter.

För ytterligare information produkter, reservdelar, underhåll eller reparation kontakta din återförsäljare eller tillverkaren:

SEERS Medical Ltd



SEERS MEDICAL Limited

Kenton Road

Debenham

Suffolk

IP14 6LA

Tel: +44 (0)1728 861590

Fax: +44 (0)1728 861868

E-post: info@seersmedical.com

Webbplats: www.seersmedical.com

© **SEERS** MEDICAL Limited 2020

Tillverkad i Storbritannien av **SEERS** MEDICAL Limited.

SEERS MEDICAL Limited utvecklar sina produkter kontinuerligt och förbehåller sig därför rätten att ändra sina produkters material eller tekniska egenskaper utan föregående meddelande.




Teknisk livslängd:

Den tekniska livslängden för produkter som denna bruksanvisning avser är generellt 12 år från tillverkningsdatumet. Med livslängd menas den tidsperiod då produkten bibehåller sin avsedda prestationsförmåga och säkerhet förutsatt att den har använts och underhållits i enlighet med kraven i denna bruksanvisning.

6. FELSÖKNING




Fel	Möjlig orsak	Lösning
Eldrivna funktioner fungerar inte ordentligt.	Nätsladden sitter inte i vägguttaget eller i manöverdosan.	Kontrollera att indikatorlampan lyser på manöverdosan och sladden sitter rätt vid båda ändarna.
	Strömkontaktens säkring har gått	Kontrollera om indikatorlampan lyser på manöverdosan. Om inte, byt ut säkringen.
	Sladdarna på handkontrollen sitter löst.	Kontrollera att sladdarna på handkontrollen eller manöverdosan sitter ordentligt.
	Nätsladden eller handkontrollen är skadad.	Koppla från nätströmmen och kontakta SEERS eller din lokala återförsäljare för reservdelar.
	Den högsta säkra belastningen har överskridits.	Om stolen är överbelastad kan manöverdosan bli skadad. Kontakta SEERS eller din lokala återförsäljare för reservdelar och reparationer.
	Användningstid har överskridits.	Stolens eldrivna funktioner är avsedda att vara påslagna bara korta tider åt gången. Se tekniska data i slutet av bruksanvisningen.
Stolen höjs/sjunker av sig själv.	Hand- eller fotkontrollen sitter fast. Om du har en EPFS-modell, kontrollera att kontrollmekanismens delar inte sitter fast. Säkerställ också att möbler eller andra föremål inte ligger på kontrollen.	Det eldrivna styrsystemet kan ta skada om hand- eller fotkontrollen är påslagen under lång tid. Om knapparna på kontrollen är nedtryckta under lång tid kan kontrollen bli skadad och behöver bytas ut.
Mekaniska fel		
Gnisslande eller knakande ljud	En skruv, mutter eller bult är för hårt åtdragen, eller ett hjul snurrar inte fritt runt.	Lokalisera ljudets källa. Lossa muttern med ¼ varv eller smörj den så att ljudet dämpas.
Hjulen höjs eller sjunker inte.	Stolen är på ett ojämnt underlag.	Stabilisera stolen genom att ställa in justeringsbenet.

7. TEKNISKA DATA – CLINNOVA™ 2-delade & Mobile-behandlingsstolar

Modell nr.	NV2550	NV2560	NV2570	NV2450	NV2460	NV2470	NV2650	NV2660	NV2670
Konfiguration									
Höjdglering	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel
Hjulsystem	Indragbara hjul			Individuellt låsbara hjul			Stora, låsbara och med riktningsslås		
Lägsta höjd	45 cm								
Största höjd	98 cm								
Totallängd	198 cm								
Huvuddelens längd	66 cm								
Benplattans längd	130 cm								
Bredd	70 cm (standard)								
Säker högsta belastning	265 kg								
Klädsel	Vinylytg: 88 % PVC – 12 % bomull								






TEKNISKA DATA – CLINNOVA™ 3-delade & Mobile-behandlingsstolar



Modell nr.	NV3550	NV3560	NV3570	NV3450	NV3460	NV3470	NV3650	NV3660	NV3670
Konfiguration									
Höjdregering	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel
Hjulsystem	Indragbara hjul			Individuellt låsbara hjul			Stora, låsbara och med riktningsslås		
Lägsta höjd	45 cm								
Största höjd	98 cm								
Totallängd	208 cm								
Huvuddelens längd	66 cm								
Mittdelens längd	52 cm								
Benplattans längd	86 cm								
Bredd	70cm (standard)								
Säker högsta belastning	265 kg								
Klädsel	Vinyltyg: 88 % PVC – 12 % bomull								












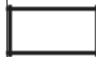






TEKNISKA DATA – CLINNOVA™ Multi-behandlingsstolar (ingen tilt, separata benstöd)

Modell nr.	NV0555	NV0565	NV0575	NV0455	NV0465	NV0475	NV0655	NV0666	NV0675
Konfiguration									
Höjdregering	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel	Hydraulisk + manuell ryggdel	Eldriven + manuell ryggdel	Eldriven + eldriven ryggdel
Hjulsystem	Indragbara hjul			Individuellt låsbara hjul			Stora, låsbara och med riktningsslås		
Lägsta höjd	45cm								
Största höjd	100cm								
Totallängd	185 cm – 196 cm (förlängd)								
Huvuddelens längd	95cm								
Mittdelens längd	52cm								
Benplattans längd	38 cm – 49 cm (förlängd)								
Bredd	70cm (standard)								
Säker högsta belastning	265 kg								
Klädsel	Vinyltyg: 88 % PVC – 12 % bomull								

ELTEKNISKA DATA

Eltekniska data		
	Linak	Timotion
Styrenhet	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2500 mA
Effekt	120 W	32 V, 128 VA,
Standby-effekt	0,5 W	
Intermittent drifttid	10 % max, 2 min PÅ / 18 min AV	
Nätkontakt säkring	5.0 A x 1-	
IP-MÄRKNING	LINAK CONTROL BOX IPX 6 tvättbar	Timotion CONTROL BOX IP 54
Elskyddsklassificering IEC 601-1	Dubbel isolering Linak & Timotion	
Elklass	Klass 2	Klass 1 jordad (Canada)
Typ BF-utrustning		
Miljö		
	Denna produkt bär en symbol med en överkryssad soptunna. Den visar att produkten har kommit ut på marknaden efter den 13/8 2005 och omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Denna symbol på SEERS produkter indikerar att alla elektroniska komponenter inte ska kastas tillsammans med oseparatorat hushållsavfall, utan skall samlas in separat och lämnas in för återvinning enligt gällande lokal miljölagstiftning för avfallshantering. Genom att separera avfall med elektrisk och elektronisk utrustning kommer du att hjälpa till att minimera all potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljö.	

Symboler			
	Högsta säkra belastning		Dubbel isolering (Klass II)
	Växelström		Tillverkare
	Max vikt inklusive säker högsta belastning		Tillverkningsdatum
	Varning/Obs!		Överensstämmer med de viktigaste hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven
	Titta i bruksanvisning		Serienummer
	Typ B-applicerad del		Modellnummer
	WEEE-överensstämmelse. Släng inte som vanligt hushållsavfall.		Sitt inte på en kant med denna symbol.
	Medicinteknisk utrustning		European Authorised Representative = Auktoriserad representant i EU



SEERS MEDICAL Limited

Kenton Road

Debenham

Suffolk

IP14 6LA

UNITED KINGDOM

t: +44 (0)1728 861590

f: +44 (0)1728 861868

e: info@seersmedical.com

w: www.seersmedical.com

Import och distribution i Finland:

Camp Scandinavia OY / Camp Mobility

Patamäenkatu 5

33900 Tampere

t: +358 (0)9 350 76 310

e: info@campmobility.fi

w: www.campmobility.fi

© SEERS MEDICAL Limited 2020



Advena Limited. Tower Business Centre, 2nd Flr.

Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta.



CE-märkningen indikerar att produkten stämmer överens med EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR)



Medicinteknisk utrustning

