



BRUKSANVISNING

Provtagningsstol /

Behandlingsstol med huvudstöd



Denna bruksanvisning gäller för följande SEERS Medical-produkter:



Provtagningsstol
MC6154 & MC6155



Behandlingsstol med huvudstöd
MC6172

INNEHÅLL

1. ALLMÄNT, VARNINGAR OCH OBSERVANDUM
2. ANVÄNDNING
3. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
4. UNDERHÅLL
5. GARANTI

BRUKSANVISNINGAR Provtagnings- och behandlingsstolar		
SIDOR	VERSION	DATUM
ALLA	1.0	09/09/19

1. ALLMÄNT

Vi vill gratulera dig till att ha valt en **SEERS MEDICAL**-produkt. Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning så kommer du kunna använda din stol tryggt i många år. **UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA BRUKSANVISNINGEN KAN LEDA TILL ATT GARANTIN BLIR OGILTIG.** Behåll bruksanvisningen för senare bruk.

VARNINGAR

Varningar hänvisar till risker som kan leda till personskada eller i värsta fall livsfara om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs.

- **ÖVERSKRID INTE** den högsta säkra arbetsbelastningen. Säkerställ att belastningen fördelas jämnt på stolens arbetsyta.
- Låt inte barn leka med stolen.
- Håll ett öga på barn i närheten av behandlingsstolen.
- Stolens reglermekanismer eller hydrauliska system får inte öppnas. De får bara bytas ut av facktekniker. Gasfjädern kan bytas ut av utbildad personal.

OBS!

Observandum hänvisar till omständigheter där det finns risk för att produkten tar skada om bruksanvisningen inte följs.



Se för ytterligare information i denna bruksanvisning.

2. ANVÄNDNING

a. Höjdregering

Stolens höjd regleras med en hydraulisk mekanism som används genom att man trampar på en pedal som sitter i stolens underrede.




b. Armstöd

Alla stolmodeller är utrustade med ringformade armstöd. Vid behov kan de tas av.

Avtagning sker genom att man lossar på skruven under armstödet och öppnar armstödet kullåset genom att trycka på knappen på kullåset. Låset hindrar armstödet från att falla av oavsiktligt.

c. Armstöd för provtagning (MC6154 och MC6155)

1. För att ändra på armstödet vinkel vrid på spaken (A) och ställ in armstödet i önskad position.
2. Lås spaken igen.
3. För att ändra armstödet höjd - lossa spaken (B) och ställ in armstödet på önskad höjd.
4. Lås spaken igen.
5. För att justera armstödet avstånd från sitsen - lossa spaken (C) och skjut armstödet glidfäste till önskat ställe på skenan.
6. Lås spaken igen.

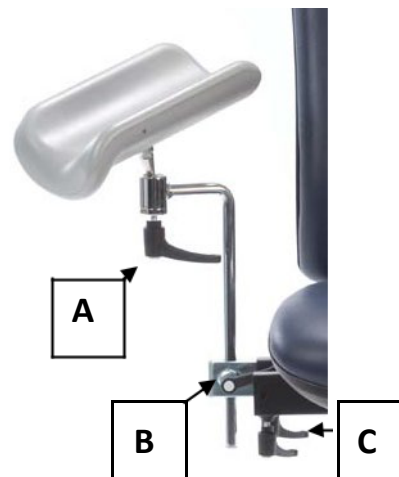

d. Inställbart huvudstöd (MC6172)

Modellen MC6172 har ett huvudstöd för exempelvis ögonundersökningar. Huvudstödet höjd och lutningsvinkel kan justeras. Det görs genom att man manuellt drar huvudstödet uppåt eller varsamt trycker det mot eller från patientens huvud. Inga spakar behöver öppnas.

3. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

ANVÄND INTE SKUR-, BLEK- ELLER IMPREGNERINGSMEDEL VID RENGÖRINGEN!
**IMPREGNERING ELLER BLEKNING KAN LEDA TILL KORROSION OCH FÖRKORTA
PRODUKTENS LIVSLÄNGD**

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV KLÄDSELN

- Rengör klädselns vinylyta regelbundet för att den ska bibehålla sitt utseende och smuts och föroreningar inte ska gro in.
- Fläckar, läckage och smuts ska avlägnas omedelbart för att de inte ska hinna missfärga ytan.
- Använd en torkduk fuktad i tvållösning eller fläckborttagningsmedel avsett för vinylytg. Använd bara vita torkdukar.
- Lack, starka rengöringsmedel, tvättmedel, xylenerbaserade lösningar, aceton eller metyletylketon (MEK) skadar ytan och försvagar materialet. Användning av sådana rengöringsmedel sker på produktägarens ansvar.

Rekommenderad rengöringsmetod: SEERS Anti-Bacterial-torkdukar

Den perfekta rengöringen för SEERS-provtagnings- och behandlingsstolar. Varje förpackning innehåller 200 torkdukar med STERiZAR® teknologi som dödar 99,9999 % av bakterier. Torkdukarna är alkoholfria och irriterar därför inte huden, men är lika effektiva som alkoholbaserade torkdukar. Fördelar med SEERS Anti-Bacterial-torkdukar är:



- Alkoholfria. Skadar inte vinylklädseln.
- Speciellt framtagna för rengöring av behandlingsstolar och -bänkar.
- Innehåller STERiZAR®teknologi som dödar 99,9999 % av bakterier, inklusive MRSA, E. Coli och norovirus.
- Torkar snabbt. Behandlingsstolen kan snabbt användas för nästa patient.
- Motarbetar rost genom låg fuktutsättning.
- Minskar risken för skada på behandlingsstolar och -bänkar genom att inte utsätta gångjärn och leder för fukt och därmed också rost och slitage.
- Minskad brandrisk tack vare alkoholfrihet.
- Irriterar inte huden.
- Verkar i upp till 30 dagar på hårda ytor.
- Lika effektiva som alkoholbaserade torkdukar.
- Passar för alla delar i SEERS-behandlingsstolar eller -bänkar.

Fläckborttagning:

Steg 1: Torka av vätskan med en fuktig, vit duk eller en mjuk borste. Rengör stället med en lösning av 1 del neutral flytande tvål och 1 del vatten. Torka med en duk fuktad med rent vatten.

Steg 2: Fukta fläcken med starkt rengöringsmedel (utan upplösningsmedel och icke-avfärgande). Torka av med en vit duk eller en mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka.

Steg 3: Fukta fläcken med en lösning av 1 del ammoniak och 1 del vatten eller 1 del blekmedel och 4 delar vatten. Skölj med rent vatten och torka.

Steg 4: Prova ta bort fläcken med industribensin (tändvätska). Skölj noga med rent vatten och torka.

Steg 5: Fukta fläcken med en lösning av 1 isopropylalkohol och 1 del vatten. Om det inte hjälper - prova med bara isopropylalkohol. Skölj noga med rent vatten och torka.

Obs!: Använd för steg 4 eller 5 en mjuk vit bomullsduk fuktad med rengöringsmedlet och gnid med cirkelrörelser (cirka 10 gånger). Torka med en annan mjuk bomullsduk och kontrollera resultatet. Stegen 2-5 rekommenderas inte för daglig rengöring.

4. UNDERHÅLL

1. Kontrollera stolen visuellt varje dag före användning.
2. Rutinmässiga underhållsåtgärder eller reparationer får endast utföras av utbildad fackpersonal.
3. Kontrollera den hydrauliska mekanismen (pumpen) och säkerställ att den inte läcker.

5. GARANTI

SEERS MEDICALS normala garantivillkor gäller även för de produkter som denna bruksanvisning avser. En kopia av garantivillkoren är tillgänglig på begäran. Garantin påverkar inte dina lagliga rättigheter.

För ytterligare information om produkter, reservdelar, underhåll eller reparation - kontakta din återförsäljare eller tillverkaren:

SEERS Medical Ltd

Kenton Road
Debenham
Suffolk
IP14 6LA
Storbritannien

Tel: +44 (0) 1728 861 590


Fax: +44 (0) 1728 861 868

info@seersmedical.com

www.seersmedical.com

CE-märkningen indikerar att produkten stämmer överens med EU-förordningen om medicintekniska produkter.

EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

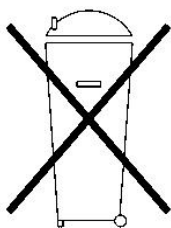



SEERS MEDICAL Limited

Kenton Road

Debenham

Suffolk

IP14 6LA

UNITED KINGDOM

t: +44 (0)1728 861590

f: +44 (0)1728 861868

e: info@seersmedical.com

w: www.seersmedical.com

Import och distribution i Finland:

Camp Scandinavia OY / Camp Mobility

Patamäenkatu 5

33900 Tampere

t: +358 (0)9 350 76 310

e: info@campmobility.fi

w: www.campmobility.fi



93/42/EEC



LRQ00001104

