



KÄYTTÖOHJE

Näytteenottotuoli / Päätuellinen potilastuoli



Tämä käyttöohje koskee seuraavia SEERS Medical tuotteita:



Näytteenottotuoli
MC6154 & MC6155



Potilastuoli päätuella
MC6172

SISÄLTÖ

1. YLEISINFORMAATIO – VAROITUKSET & HUOMIOT
2. MITEN KÄYTÄT – KÄYTTÖOHJEET
3. PESUOHJEET
4. HUOLTO
5. TAKUU

Näytteenotto- & potilastuolit – KÄYTTÖOHJEET		
SIVUT	VERSIO	PVM
KAIKKI	1.0	09/09/19

1. YLEISINFORMAATIO

ONNITTELUT SEERS MEDICAL tuotteen hankinnasta. Jos näitä käyttöohjeita noudatetaan, tämä tuote tarjoaa monen vuoden turvallisen käytön. **JOS TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA EI NOUDATETA - TAKUU VOI RAUETA.** Säilytä nämä käyttöohjeet aina saatavilla.

VAROITUKSET!

Varoitukset varoittavat mahdollisista vaaroista, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta oikein!

- **ÄLÄ YLITÄ** turvallista työskentelykuormitusta 150 kg – jotka on jaettava tasaisesti työtasolle (ellei erityistä SWL:ää suositella)
- Lapset eivät saa leikkiä tuolilla missään vaiheessa.
- Valvo riittävästi lapsia tuolin läheisyydessä.
- Mitään säätömekanismeja, jotka tuottavat liike-energiaa (eli hydraulista hissiä) Ei saa peukaloida tai avata, eikä sitä saa vaihtaa kuin koulutettu ammattilainen – kaasuhissi voidaan vaihtaa, mutta sen saa suorittaa vain tehtävään ohjeistettu henkilöstö.

HUOMAUTUKSET

Huomautuksilla identifioidaan tilanteita, jotka voivat johtaa laitteen vikaantumiseen tai vaurioitumiseen, jos ohjeita ei noudateta oikein



Symboli tarkoittaa varoituksia ja huomautuksia, joista lisätietoja on tässä käyttöohjeessa.

2. KÄYTTÄMINEN – KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet

a. Korkeudensäätö

Tuolin korkeutta säädetään hydraulisella hissillä, jota pumpataan manuaalisesti jalalla tuolin jalustassa olevalla vivulla.




b. Käsituet

Kaikissa malleissa on kaksi rengasmallista käsitukea, yksi kummallakin puolella. Nämä auttavat potilasta asettautumaan tai nousemaan tuolista. Tietyille potilaille tai toimenpiteiden ajaksi haluat ehkä poistaa ne. Voit tehdä tämän löysäämällä käsituen alareunassa olevaa puristinkiinnikettä ja painamalla kuulajousipainiketta irrottaaksesi käsituen tuolista. Kuulajousi estää tahattoman käsituen irtoamisen ja lisää potilasturvallisuutta & hoitohenkilöstön turvallisuutta.

c. Näytteenottokäsituet (vain MC6154 & MC6155)

1. Säättääksesi näytteenottokäsituen kulmaa, löysää kahvakiinnikettä (A) ja säädä käsituki haluttuun asentoon.
2. Kiristä kahva takaisin turvalliselle kireydelle.
3. Säättääksesi näytteenottokäsituen korkeutta, löysää kahvakiinnikettä (B) ja säädä käsituki halutulle korkeudelle.
4. Kiristä kahva takaisin turvalliselle kireydelle.
5. Säättääksesi näytteenottokäsituen etäisyyttä, löysää kahvakiinnikettä (C) ja liu'uta krominen liukusäädin sisään tai ulos kiskosta halutulle etäisyydelle.
6. Kiristä kahva takaisin turvalliselle kireydelle.

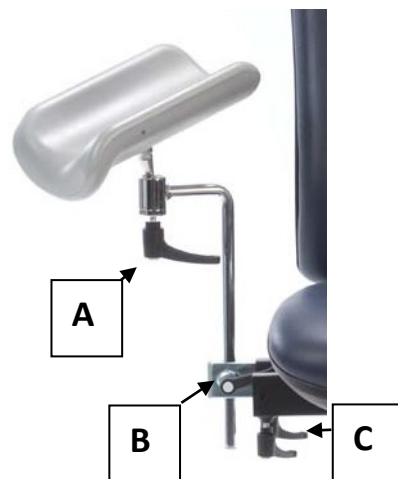

d. Säädettyvä päätuki (vain MC6172)

Päätuellisessa esim. silmätutkimuksiin tarkoitettussa potilastuolissa MC6172 on säädettyvä pää-/niskatuki, jonka korkeutta ja kulmaa voidaan säätää. Tämä ei edellytä minkään löysentämistä, vaan se voidaan asemoida käsin, nostamalla päätukea ylöspäin tuolista ja työntämällä/ vetämällä (varovasti) päätukea kohti potilaan päätä tai poispäin.

3. HOITO- JA PESUOHJEET

VAROITUS!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAAVIA VALKAISUAINEITA TAI KYLLÄSTEITÄ PUHDISTAESSASI TUOTETTA!

JOS TUOTE KYLLÄSTYY / VALKAISTUU PUHDISTUKSEN AIKANA, SE VOI NOPEUTTAA KORROOSIOTA JA LYHENTÄÄ TUOTTEEN KÄYTTÖIÄN PITUUTTA.

HOITO- JA PESUOHJE - VINYYLI

- Vinyylipehmustepinta on puhdistettava säännöllisesti, jotta sen ulkonäkö säilyy ja estetään lian ja kontaminanttien kertyminen.
- Tahrat, vuodot ja likaantuminen on puhdistettava viipymättä, jotta estetään pysyvä värjäytyminen.
- Käytä pehmeitä saippualliuoksessa kastettua puhdistusliinaa tai vinyylidikankaille tarkoitettuja erityisiä puhdistusaineita tahran poistamiseksi materiaalin pinnalta. Poista vain kostealla valkoisella liinalla.
- Lakat, vahvat puhdistusaineet, pesuaineet, ksyleenipohjaiset liuokset, asetonit tai MEK aiheuttavat välittömiä vaurioita ja heikentävät materiaalia. Tällaisten puhdistusaineiden käyttö on tuotteen omistajan omalla vastuulla.

Suosittelava puhdistusmetodi – SEERS Anti-Bacterial puhdistusliinat

Täydellinen ratkaisu SEERS näytteenotto- ja potilastuoleille. Jokaisessa pakkauksessa 200 puhdistusliinaa, joissa on käytetty STERiZAR® teknologiaa, joka tappaa 99.9999% of bakteereista. Pyyhkeet ovat alkoholittomia, joten ne eivät aiheuta ihoärsytystä, mutta ovat yhtä tehokkaita kuin alkoholipohjaiset puhdistuspyyhkeet.



Tuotteen ominaisuudet:

- Alkoholiton - estää verhoiluvinyylin halkeilun
- Suunniteltu erityisesti potilastuolien & hoitotasojen puhdistukseen
- STERiZAR® teknologia, tappaa 99,9999% bakteereista, mukaan lukien MRSA, E-Coli ja Norovirus
- Sopii monenlaisiin ei-invasiivisiin laitteisiin
- Nopea kuivaus minimaalinen seisokki potilaiden välisessä puhdistuksessa
- Estää rungon ruostumista vähäisen kosteusaltistuksen vuoksi
- Vähentää potilastuolien ja hoitotasojen vaurioitumismahdollisuutta, sillä kosteus ei pääse saranoihin tai nivelalueisiin – kaikkein helpoimmin ruostuviin ja kuluviin osiin
- Vähemmän syttyvää alkoholin puuttumisen vuoksi
- Ei ihoärsytystä
- Tehokas jopa 30 päivän ajan kovilla pinnoilla
- Yhtä tehokas kuin alkoholipohjaiset puhdistuspyyhkeet
- Pyyhkeillä voidaan puhdistaa mikä tahansa SEERS-potilastuolin tai hoitotason osa

Hankkiudu eroon tahroista seuraavilla eri tavoilla:

Vaihe 1: Poista ylimääräiset roiskeet kostealla, valkoisella liinalla tai pehmeällä harjalla. Pyyhi 1:1 liuoksella nestemäistä neutraalia saippuaa ja vettä. Huuhtelee puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa.

Vaihe 2: Käytä suoraan (liuotinvapaata ja ei värjävää) väkevää puhdistusainetta. Pyyhi puhtaalla valkoisella liinalla tai pehmeällä harjalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa.

Vaihe 3: Käytä 1:1 sekoitus ammoniakkia ja vettä tai 1:4 sekoitus valkaisuainetta ja vettä. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa.

Vaihe 4: Kokeile teollisuusbenssiiniin (sytytinnesteen) käyttöä. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä ja taputtele pinta kuivaksi.

Vaihe 5: Käytä 1:1-sekoitusta isopropyylialkoholia ja vettä. Jos tahra ei irtoa käytä suoraan alkoholia. Huuhtelee aina huolellisesti puhtaalla vedellä ja taputtele kuivaksi.

Huomautus: Jos puhdistus vaatii vaiheen 4 tai 5, käytä puhdistusaineeseen kyllästettyä pehmeää valkoista puuvillakangasta ja hiero tahraa ympyräliikkeellä noin 10 kertaa. Taputtele kuivaksi toisella pehmeällä puuvillakankaalla ja tarkista tulokset. Vaiheita 2 - 5 ei suositella jokapäiväiseen puhdistukseen.

4. HUOLTO

1. Silmämääräinen tarkastus on tehtävä päivittäin ennen käyttöä.
2. Rutiinihuoltoja tai korjauksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.
3. Tarkista hydraulipumppu (hydraulisten muutosten osalta) että se toimii sujuvasti eikä siinä ole vuotoja.

5. TAKUU

SEERS MEDICAL Limitedin vakiotakuuehdot koskevat tämän käyttöohjeen laitteita. Kopio vakio-takuuehdoista on saatavilla pyynnöstä. Tämä sisältää täydelliset tiedot takuuehdoista, eikä se vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Lisätietoja tästä tuotteesta varaosista, takuusta, huollosta tai korjauksesta saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai suoraan valmistajaan:

SEERS Medical Ltd

Kenton Road
Debenham
Suffolk
IP14 6LA


Tel +44 (0) 1728 861 590

Fax +44 (0) 1728 861 868

info@seersmedical.com

www.seersmedical.com

CE - merkki osoittaa, että tuote on lääkinnällisten laitteiden vaatimusten mukainen.
Declaration of Conformity todistus saatavana pyynnöstä.

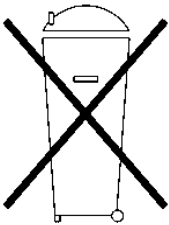



SEERS MEDICAL Limited

Kenton Road
Debenham
Suffolk
IP14 6LA

UNITED KINGDOM

t: +44 (0)1728 861590

f: +44 (0)1728 861868

e: info@seersmedical.com

w: www.seersmedical.com

Maahantuojaja jakelija
Suomessa:

**CAMP SCANDINAVIA /
CAMP MOBILITY**

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

FINLAND

p: +358 (0)9 350 76 310

e: info@campmobility.fi

w: www.campmobility.fi

© SEERS MEDICAL Limited 2019



LRQ00001104

