



MAJ le 25/03/2019

# Kinéris

## Käyttöohje

Suomi



WINCARE  
g r o u p



ASKLÉSANTÉ



## SUOMI

### KÄYTTÖOHJEET

Painehaavojen ennaltaehkäisemiseksi, tulee istuintynnyin paineista säätää 2 tunnin välein, millä estetään verisuonien puristuminen liian kauan samassa asennossa istumalla, joka näin voi aiheuttaa kudosten vuotamista.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Istuintynny on tarkoitettu estämään hankaumia ja painehaavoja pakara-alueilla, jotka ovat kosketuksissa tyynyn kanssa ja tukemaan luiden kosketuspintoja, joka vähentää hankausvoimaa.

### TUOTTEEN VALINTA

Henkilöt, joilla korkean riskiluokan paineahaavariski, mutta ei tasapaino-ongelmia: 1-venttiilinen tyyny.

Henkilöt, joilla korkean riskiluokan paineahaavariski ja tasapaino-ongelmia: 2-venttiilinen tyyny.

### INDIKAATIOT

Henkilöt, joilla korkean riskiluokan paineahaavariski istuma-asennossa, heikentynyt liikuntakyky, aktiivisuus, ihoherkkyys ja/tai paineahaavahistoria.

### KONTRAIINDIKAATIOT

Jo olemassa olevat paineahaavat kontaktialueella (paitsi lääkärin ohjeiden mukaan)

### TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tyyny on asennettava solut ylöspäin. Tyynyä saa käyttää vain mukana tulevan ASKLE SANTE päällisen kanssa. Ilmanpaineen säätö tapahtuu käyttämällä manuaalista pumppua, jossa kiinteä manometri, joka toimitetaan tuotteen mukana. Ilmanpaineen optimaalinen säätö on tehtävä manometrin mukana toimitetun korkeuden / painon vastaavuustaulukon mukaisesti. Kirjoita painearvo käyttöohjeeseen. 2-venttiilisten tyynyjen täyttö tehdään samalla tavalla. Käsin tehtävällä testillä varmistetaan ettei tuotteessa ole vaurioita ja se on täytetty tarkoituksenmukaisesti:

- Istuta potilas aiemmin täytetyn tyynyn päälle
- Säädä ilmanpaine ottaen huomioon yksilön fysiologia (epäsymmetria, lantion vinous) ja ohjeelliset arvot tuotteen mukana toimitetun vastaavuustaulukon mukaisesti.
- Tarkista, että tyynyssä on riittävästi ilmaa asettamalla käsi kämmen ylöspäin pakara-alueen ja pohjan väliin. Riittävästi täytetyssä tyynyssä on turvallinen pneumaattinen pohja, jossa on 1,5 - 2 cm ilmaa pakara-alueen alla.
- Toista tämä toimenpide kaikissa osastoissa.

### TEKNISET TIEDOT

Käyttäjän paino (min.-max)	40 – 150 Kg	
Tuotteen paino	1.5 kg - 2.5 kg koosta riippuen	
Max. ilmanpaine	100 mBar	
Tyynyn materiaali	Neopreeni	
Päällisen materiaali	Polyesteri / Polyuretaani +elastaania pinnassa	
Maximi ilmanpaine (Laboratoire National d'Essai – France) 1g/cm <sup>2</sup> = 0,75 mm Hg	Käyttäjänpaino	Maximi ilmanpaine
	40 kg	43 g/cm <sup>2</sup>
	60 kg	72 g/cm <sup>2</sup>
	80 kg	89 g/cm <sup>2</sup>

Tuote on käsitelty käyttäjälle turvallisella biosidilla. Lue lisää: [www.winncare.fr](http://www.winncare.fr)

### HOITO- / PESUOHJE / DESINFOINTI

Tyyny						
	Moderoitu pesu jopa 90°C	Älä käytä valkaisuaineita	Älä silitä	Ei kuivapesua	Ei rumpukuivausta	Käytä vain hyväksytyjä pintadesinointiaineita
Päällinen						
	Moderoitu pesu jopa 90°C	Maximi kloriini(fluori) pitoisuus 5000ppm	Älä silitä	Ei kuivapesua	Rumpukuivaus sallittu lämpö- rajoituksi	Käytä vain hyväksytyjä pintadesinointiaineita

### VAROITUKSET

Varmista, että ilmaventtiilit on suljettu pesun ajaksi.

Vältä klooripohjaisten liuosten säännöllistä käyttöä.

Neopreenipinta ei saa olla suorassa kosketuksessa syövyttävien tai leikkaavien ainesosien / tuotteiden kanssa.

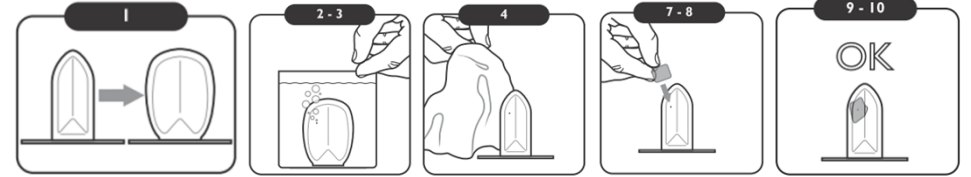
Säädä tyyny tai täyt se uudestaan, jos lämpötilan tai ilmanalan korkeuden välillä on suuria eroja.

Jos käytät tyynyä suihkussa, käytä tyynyä ilman päällistä tai korvaa se kuivalla suojapäällisellä.

### UUELLEEN KÄYTTÖ

Puhdista ja desinifoi tyyny puhdistusaineella / desinointiaineella ennen käyttöä toisella henkilöllä. Suosittelemme vaihtamaan päällisen.

### HUOLTO JA KORJAUS



Huoltotoimenpiteet tulee suorittaa puhtaassa, kuivassa paikassa. Kädet pitää olla on aiemmin pesty saippualla.

Suositus: Kysy tarvittaessa huoltotoimenpiteitä palveluntarjoajaltasi.

1 - Täytä tyyny ylitäytteen.

2 - Upota se kirkaaseen veteen vuotokohtien havaitsemiseksi. Merkkää kohta josta ilmakuplat karkaavat.

Jos tyynyssä on repeämä: katso kohta 5.

3 - Merkkää reikä havaitaksesi vuotokohdan helpommin.

4 - Kuivaa tyyny kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Pinnan tulee olla TÄYSIN PUHDAS ja KUIVA, jotta reikä voidaan paikata onnistuneesti kuminpaikkaussarjalla.

5 - Avaa paikkapussi, joka sisältää 70° kompressoitua alkoholia, ja pyyhi sitä reiän päälle (pinnan tulee olla suurempi kuin 1 euron kolikko).

6 - Odota vähintään 1 minuutin ajan.

7 - Poista kumipaikka kuorestaan koskettamalla tahmeaa pintaa niin vähän kuin mahdollista.

8 - Paina paikka reiän päälle painamalla voimakkaasti. Käytä pyöreää työkalua (esim. teelusikan selkää) aloita keskeltä reunoja kohti, ja jatka kunnes kaikki mahdolliset ilmakuplat paikan sisältä ovat hävinneet.

9 - Laita päällinen takaisin paikalleen.

10 - Säädä tyynyn ilmanpaine pumpun mukana toimitetulla vastaavuustaulukon avulla.

Kuminpaikkaussarja tulee säilyttää 0°C ja 60°C välillä ja käyttää 15°C ja 45°C välillä.

Korjauksen jälkeen, rajoita tyynyn käyttöä 15 päivää. Tämän ajanjakson pitäisi riittää, että sinulle saadaan toimitettua korvaava tuote, jotta voit lähettää korjatun tuotteen Askle-huoltopalveluun.

### KÄYTTÖ- JA VARASTOINTILOSUHTEET

Teleskooppi-ilmakenoilla varustetut pneumaattiset istuintynny on säilytettävä tyhjänä ja tasaisena, poissa suorasta valosta ja liiallisesta kosteudesta.

	Käyttö	Varastointi
Ilman lämpötila	15°C – 45°C	10°C – 50°C
Kosteus	30% - 70%	10% - 90%

### LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

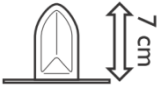

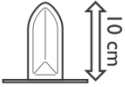

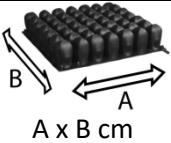



Älä hävitä tuotetta maaseudulle tai hävittämiseen tarkoitettujen kaatopaikkojen ulkopuolelle.


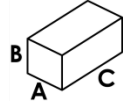

### TAKUU

KINERIS- ja OPTIMAIR-tyynyjen takuu aika on kolme vuotta. Tämä takuu alkaa ostopäivästä jälleenmyyjältäsi. Yhden potilaan käytön yhteydessä takuu koskee pehmustetta ja sen suojapäällistä. Usean potilaan käytön yhteydessä päällisen kesto on yksi vuosi.

Takuu ei kata tuotteen ja sen suojapäällisen normaalia kulumista; se ei korvaa liiallisiä takeita.

Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä aloittaa tarvittavat toimenpiteet valmistajan kanssa joko korjauksen tai vaihdon aloittamiseksi.

								
<b>Kinériss™</b>	V367	0,8 Kg	V3610	36	28,5 x 28,5	40 → 55	30 → 34	30 → 34
	V427	0,9 Kg	V4210	42	28,5 x 33	40 → 65	30 → 34	34 → 38
	V497	1,1 Kg	V4910	49	33 x 33	50 → 60	35 → 38	35 → 38
	V567	1,2 Kg	V5610	56	33 x 37,5	40 → 65	35 → 38	39 → 42
	V667	1,1 Kg	V6610	36	36 x 36	50 → 75	35 → 39	35 → 38
	V647	1,3 Kg	V6410	64	37,5 x 37,5	50 → 75	39 → 42	39 → 42
	V727	1,4 Kg	V7210	72	37,5 x 42	50 → 85	39 → 42	43 → 46
	V817	1,6 Kg	V8110	81	42 x 42	55 → 90	43 → 46	43 → 46
	V907	1,8 Kg	V9010	90	42 x 46,5	85 → 120	43 → 46	46 → 50
	V677	1,3 Kg	V6710	42	43 X 36	50 → 85	40 → 46	35 → 38
	V777	1,4 Kg	V7710	49	43 x42	50 → 85	40 → 46	42 → 45
	V107	2,1 Kg	V1010	100	46,5 x 46,5	110 → 120	47 → 51	46 → 50

	 <b>A x B x C</b>	
	10 x 7 x 17 cm	0,33 Kg

