



Käyttöohje | **Alova™**  
*istuintyyntyt*

Jälleenmyynti Suomessa:

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere  
09-350 76 310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

Valmistaja:

WINCARE  
g r o u p



**ASKLÉSANTÉ**



## KÄYTTÖOHJE FIN

### SUOSITUKSET

Painehaavoja ehkäistään ensisijaisesti muuttamalla kohtia, joihin paine kehossa kohdistuu, eli vaihtamalla kehon asentoa patjalla tai tyynyllä kahden tai kolmen tunnin välein. Tämä mahdollistaa verenkierron kudokseen ehkäisemällä verisuonten puristumista pitkäksi ajaksi kohdissa, joissa luu painaa ihoa.

### KÄYTTÖ

- Tyynyjä, joissa ei ole haarakiila-lantiotukea, suositellaan keskisuuren ja korkean paineenaavariskin ehkäisyyn kliinisen arvioinnin mukaisesti käyttäjille, joilla ei ole tasapainohäiriöitä.
- Tyynyjä, joissa on haarakiila-lantiotuki, suositellaan tasapainohäiriöiden ehkäisyyn kliinisen arvioinnin mukaisesti keskisuuren ja korkean paineenaavariskin yhteydessä. Tarkoitettu erityisesti potilaille, joilla on ollut istuinluiden, ristiluun tai häntäluun painehaavoja.

### ASENNUS

- Jos tyynyä on säilytetty alle 15°C:ssa, poista tyyny pakkauksestaan ja siirrä se 30 minuutiksi kuivaan lämmitettyyn tilaan (yli 15 °C).
- Suojaa tyyny pakkauksen mukana tulleella suojakankaalla. Huolehdi, että suojakankaaseen kiinnitetty BACK (= taakse) -tekstillä varustettu lappu tulee tyynyn takaosaan ja liukuestepinta tyynyn alapinnalle (istuinta vasten). Tuotteen alaosassa sijaitsevan kahva tulee eteen.
- Haarakiila-lantiotuella varustetuissa tyynyissä varmista, että lonkan ulkokiertyjille tehdyt syvennykset ovat tyynyn etuosassa. Haarakiila asetetaan sille tehtyyn taskuun suojakankaan sisään ennen, kuin suojakangas vedetään tyynyn päälle.
- Aseta tyyny istuimeen niin, että istuinluille ja häntäluulle muotoillut syvennykset ovat takana ja lonkan ulkokiertyjille muotoillut syvennykset edessä.
- Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) edellyttää terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan siitä, että asiakas on saanut hänelle parhaiten soveltuvan apuvälineen käyttöönsä. Ennen apuvälineen luovuttamista tulee tarkistaa, että se on käyttökunnossa.

### PUHDISTUS/DESINFIONTI

Promust PU -suojus:



### TURVALLISUUS

- Varmista, että tyyny soveltuu käyttäjän painolle:

Potilaan paino (min.–maks. kg)	Tuotekoodi
30–100	VCAE/M4343
20–80	VCAG3636
30–90	VCAG3841(BP), VCAG4041(BP), VCAG4043, VCAG4340

30–100	VCAG4341(BP), VCAG4343(BP)
30–110	VCAG4343XL
30–120	VCAG4544(BP), VCAG4347(BP), VCAG4540
30–135	VCAG5044BP, VCAG5044XL
	VCAG5044
120–160	VCAG5250, VCAG5450
120–200	VCAG5650, VCAG6050

## SUOJAKANGAS

- Suojaa tyyny täysin kuivalla pakkauksen mukana tulleella suojakankaalla.
- Vältä suojakankaan joutumista kosketuksiin hankaavien tai syövyttävien aineiden tai liuottimien sekä terävien tai leikkaavien esineiden kanssa. Tarkasta suojakankaan kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda suojakangas, jos se on vahingoittunut (reiät, repeämät, pinnan muutokset, kulunut läpikuultavaksi).

## MATERIAALI

- Älä altista vaahtomuovia pitkiksi ajoiksi kosteudelle.
- Tarkista vaahtomuovin kunto säännöllisesti: näkyvät kuopat ALOVA-tyynyn materiaalissa tai epätasainen tai hidas palautuminen alkuperäiseen muotoon ovat merkkejä tyynyn vanhenemisesta, jotka vaikuttavat tyynyn kykyyn ehkäistä painehaavoja.

## SÄILYTYS

- Säilytä ALOVA-tyyny vaakatasossa, suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

## HÄVITTÄMINEN

- Tyyny ja suojakangas tulee hävittää asianmukaisesti – ei polttamalla tai hylkäämällä luontoon.

## TAKUU

Tyynyn taattu käyttöikä on 3 vuotta.

Takuu alkaa tuotteen ostamisesta jälleenmyyjältä. Jos tuotetta käyttää vain yksi käyttäjä, takuu koskee sekä tyynyä että sen suojakangasta. Jos tuotetta käyttää useampi käyttäjä, suosittelemme vaihtamaan suojakankaan 2 vuoden välein. Tämä takuu ei kata tyynyn ja suojakankaan normaalia kulumista eikä korvaa lainmukaista takuuta. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi ja esitä virheellinen tuote. Jälleenmyyjä huolehtii tarvittavista vaihto- tai korjaustoimista valmistajan kanssa.

## TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ

- Viskoelastisesta vaahtomuovista valmistetun ALOVA-tyynyn arvioitu käyttöikä on 4 vuotta.

## TUOTETIEDOT

- Tyyny on valmistettu 100 % viskoelastisesta polyuretaanivaahtomuovista.