

IIRIS

Istuintyyny



Max.kuormitus 150 kg
Konepesu 60°

CAMP
MOBILITY

Käyttöönotto

1. Pura tuote pakkauksesta ja lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista.
2. Aseta istuintyyny pyörätuoliin tai tuoliin siten, että luistamaton alapinta on alaspäin ja tyynyn tunnistelaput ovat taaksepäin.
3. Aseta pehmuste pyörätuoliin mahdollisimman taakse.
4. Varmista alaspäin painamalla, että tyyny pysyy hyvin paikoillaan ja mahdolliset kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

Pesu- ja huolto-ohjeet

Tarkista tuote säännöllisesti silmämääräisesti muodonmuutosten, kulumisen tai puristumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Puhdistus - vähäinen lika

1. Pyyhi päällinen neutraalilla tai miedosti emäksisellä, pinta-puhdistusaineella tai esim. 0,1 % klooriliuos (1000 ppm) ja lämpimällä vedellä.
 2. Huuhtelee päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla..
 3. Kuivaa päällinen huolellisesti puhdistusliinalla.
 4. Irrota tarvittaessa päällinen ja puhdista pehmuste toistamalla vaiheet 1-3.
- HUOM! Sisäpehmustekerroksia ei saa irrottaa toisistaan.

Puhdistus - erittäin likainen

Jos päällinen on erittäin likainen, sen puhdistamiseen suositellaan mietoa puhdistusliuosta 60 °C:n konepesussa. Suuret ruumiinnesteiden roiskeet on ensin imeytettävä ja poistettava paperipyyhkeillä ennen suojuksen pesemistä.

1. Puhdista kaikki ruumiinnesteiden eli veren, virtsan, ulosteiden, syljen, haavaeritteiden ja kaikkien muiden ruumiin eritteiden roiskeet mahdollisimman pian 1 % klooriliuksella (10 000 ppm) ja lämpimällä vedellä.
2. Huuhtelee päällinen puhtaalla vedellä ja puhdistusliinalla.
3. Kuivaa päällinen huolellisesti ennen pehmusteen uudelleen asentamista.

TÄRKEÄÄ!

Tartuntataudeille altistumisen välttämiseksi, tarkista istuintyyny perusteellisesti ja huolellisesti ja puhdista ja desinfioi kaikki veren ja muiden ruumiinnesteiden tahraamat materiaalit.

www.campmobility.fi

Säilytys

- Säilytä istuintyynyä kuivassa ympäristössä.
- Säilytä istuintyynyä suojamuovissa.
- Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa, irti lattiasta, loitolla terävistä kulmista mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.
- Älä säilytä muita esineitä istuintyynyä päällä.
- Älä säilytä istuintyynyä pattereiden tai muiden lämmityslaitteiden vieressä.
- Suojaa istuintyyny suoralta auringonvalolta.

TÄRKEÄÄ!

- Istuintyyny asentaminen pyörätuoliin voi vaikuttaa painopisteeseen ja tehdä tuolista epävakaan, mikä saattaa aiheuttaa vamman tai vaurion.
- Varmista kaikkien säätöjen korjausten ja huoltojen jälkeen ja ennen käyttöä, että kaikki kiinnitysosat ovat kiinni.
- Varmista ennenkäyttöä, että istuintyyny on kiinnitetty kunnolla pyörätuoliin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vamma tai vaurio.
- Pehmuste on tarkoitettu käytettäväksi vain huoneenlämpötilassa. Jos se jätetään alempiin lämpötiloihin, anna sen aina lämmetä huoneen lämpötilaan ennen käyttämistä. Erittäin kylmillä tai kuumilla pinnoilla istuminen voi vaurioittaa ihoa.
- Vältä teräviä esineitä ja altistamista liialliselle lämmölle tai avotulelle.
- Ihon kunto on tarkastettava riittävän usein uusien istuinjärjestelmien asentamisen jälkeen.
- Yhteistyöllä fysioterapeutin, lääkärin ja laitetoimittajan kanssa taataan parhaiten, että istuimen valinta vastaa henkilökohtaisia tarpeitasi.

Tekniset tiedot



13 kokoa

Korkeudet
5 cm tai 7 cm

alk. 0,6 kg



150 kg*



Pesu 60°



*Maksimikuormitus on määritelty olettaen, että tyynyn leveys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi