



John GmbH istuintyyny



Korkeudet:
3 cm ja 5 cm
(ja 10 cm)

Max.käyttäjäpaino 120 kg
Konepesu +60°C

Käyttäminen



Päällisen vetoketju aukeaa
kolmelta sivulta.



Liukumista estävä
AntiSlip -pohjamateriaali

Indikaatiot: Vaahtomuovi-istuintyyny ovat perusistuintyynyjä, jotka on tarkoitettu matalan painehaavariskin omaaville henkilöille pyörätuolin istuintyynyksi.

Käyttäminen:

Suojaa tyyny aina käytössä ollessa mukana tullessa suojapäällisellä. Varmista, että päällinen on hyvin paikallaan ja että se on asennettu tyynyyn oikeinpäin. Pohjassa on liukumista estävä AntiSlip-pohjamateriaali.

Vältä hankaavien, repivien tai kuumuudella sulattavien esineiden tai teräseiden koskettamasta päälli-

John GmbH istuintyyny ovat CE- merkittyjä ja täyttävät EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

seen. Vältä vaahtotyynyn pitkää kosketusta kosteuden kanssa.

Tarkista säännöllisesti tyynyn vaahtopehmusteen kunto: Paineen alla olevan kohdan erittäin hidas palautuminen on merkki tyynyn ikääntymisestä ja ominaisuuksien heikentymisestä.

Jos tyynyllä on useita käyttäjiä suosittelemme suojapäällisen vaihtamista 2 vuoden välein.

Materiaalit

Pehmuste:

Vaahtomuovityynyjen materiaali on tasatiheyksistä polyuretaani (PU) rouhefoamia. John Type VB 100: Tiheys 100kg/ m³

Päällinen:

John Type VB 100 istuintyynyn päällinen on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä, +60°C konepestävää, 100% polyesteriä, "bi-elastic moisture protection"-kangasta.

Pesu- ja huolto-ohje

Puhdistus:

Päällisen voi pestä pesukoneessa +60°C:ssa. Ei silitystä, ei kuivausrumpua eikä valkaisevia pesuaineita. Anna kuivua huolellisesti ennen käyttöä. Tarkista päälliseen kiinnitetty valmistajan pesuohje aina ennen pesua.

Tarvittaessa päällisen ja vaahtomuovipehmusteen voi puhdistaa sumuttamalla tuotteelle neutraalia tai desinfiioivaa pesuaineliosta tai puhdistaa kostetulla siivouspyyhkeellä. Anna kuivua huolellisesti.

Varastointi ja hävitys

Varastointi:

- Säilytä tuotteita puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
- Säilytä tuotteita suojamuovissa mielellään vaakatasossa.
- Älä säilytä pattereiden tai muiden lämmityslaitteiden vieressä.
- Suojaa tuotteet suoralta auringonvalolta.
- Tuotteet toimitetaan ei-steriilissä pakkauksessa.

Hävittäminen:

- Tyynyn arvioitu tekninen käyttöikä on n. 4 vuotta.
- Jos tyynyllä on useita käyttäjiä suosittelemme suojapäällisen vaihtamista 2 vuoden välein.
- Tyyny ja suojapäällinen hävitetään sekajätteessä paikallisten jätteenkäsittelysäädösten mukaisesti.
- Tyynyä ja suojapäällistä ei saa polttaa.



CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi