


EasyUP WC- tukikaidepari

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

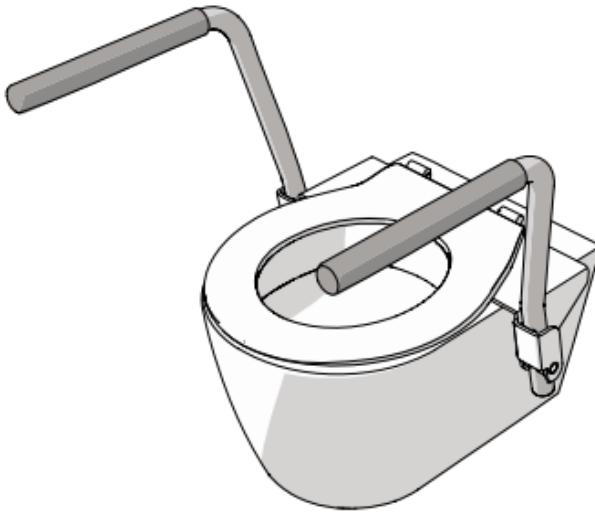

TIETOA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA

Tervetuloa EasyUP -tukikaideparin käyttö- ja asennusoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan liikuntarajoitteisia ja/tai lihasvoimaltaan rajoittuneita henkilöitä käyttämään wc:tä turvallisesti ja itsenäisesti. Se myös helpottaa wc-käynnillä avustavien hoitajien fyysistä rasitusta.

Kieli

Alkuperäinen käyttöohje on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kieliversiot ovat alkuperäisen käyttöohjeen käännöksiä.

Kohdennettu lukijakunta

Tämä käyttöohje on tarkoitettu:

- **Tuotteen käyttäjälle**
- **Tuotteen asentavalle henkilölle**

Käytetyt symbolit

Tämä käyttöohje sisältää turvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen. Jokainen turvallisuusvaroitusta on merkitty varoitussanalla. Varoitussana vastaa kuvatun vaaratilanteen riskitasoa:

Turvallisuussymboli	Riskin taso	Seuraus, jos sitä ei vältetä
 VAROITUS	Matala	Voi aiheuttaa kohtalaisen tai lievän vamman tai vaurioittaa tuotetta.

Osion alussa annetut turvallisuusvaroitukset koskevat koko osiota.

Muut käytetyt symbolit

Tässä käyttöoppaassa on symboleja, jotka osoittavat hyödyllisiä tietoja, jotka täydentävät ohjeita ja kuvia.

Symboli	Merkitys
 HUOMIO	Viestit, jotka eivät liity vaaraan, on merkitty signaalisanalla HUOMIO. Näissä viesteissä ei ole turvallisuusvaroitussymbolia.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuote	4
1.1. Käyttötarkoitus	4
1.2. Kohtuudella ennakoitavissa oleva tahaton käyttö	4
1.3. Yleiset tekniset tiedot	4
2. Kuvaus	5
2.1. Pääosat	5
3. Turvallisuus	6
3.1. Turvaominaisuudet	6
3.2. Tuotteen turvallisuussymbolit ja -merkinnät	6
3.3. Turvallisuusvaroitukset ja -määräykset	6
4. Asennus	7
4.1. Tarvittavat työkalut	7
4.2. Pakkausmateriaalien poisto	7
4.3. Pakkauksen sisältö	7
4.4. Valmistelu	8
4.5. Asennus	9
4.6. Säättäminen	10
5. Käyttö	12
6. Huolto	13
6.1. Varaosat	13
7. Takuu	13
8. Hävittäminen	13

1. TUOTE

1.1. Käyttötarkoitus

EasyUP-tukikaiteiden olennainen tarkoitus on:

- Avustaa liikuntarajoitteisia henkilöitä wc:n käytössä. Tuote auttaa tukemaan käyttäjää wc-istumella.
- Avustaa hoitajia, jotka auttavat liikuntarajoitteisia henkilöitä wc:n käytössä.

Tukikaiteita tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu ja mitä loppukäyttäjä voi odottaa. Jos olennainen tarkoitus menetetään tai se heikkenee, tuote ei enää sovellu käyttäjälle.

1.2. Kohtuudella ennakoitavissa oleva tahaton käyttö

Seuraavaa pidetään ennakoitavana väärinkäytönä:

- Tuotteen käyttö tavalla, joka poikkeaa edellisessä osiossa kuvatusta käyttötarkoituksesta.
- Tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen.
- Tuotteen osien tai turvakomponenttien luvaton irrottaminen tai muuttaminen.
- Valmistajan hyväksymättömien varaosien tai lisävarusteiden käyttö.

1.3. Yleiset tekniset tiedot

Tärkeimmät tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Tyyppikilpi löytyy tukikaiteen takaosasta oikealta puolelta.



Esimerkki tyyppikilvestä

- 1 Valmistajan yhteystiedot
- 2 Tyyppikoodi
- 3 Sarjanumero

- 4 Tuotantopäivämäärä
- 5 Suurin nimelliskuorma


Alla oleva taulukko on täydellinen yleiskatsaus kaikista teknisistä tiedoista:

Tekniset tiedot	Arvo
Tuotteen nimi	EasyUP WC-tukikaidepari
Pituus, leveys ja korkeus	60 x 30 x 50 cm
Paino	4,5 kg
Käyttö- ja varastointilämpötila	-10–60 °C
Käyttö- ja varastointikosteus	20–70 %
Takuu	2 vuotta

2. KUVAUS

2.1. Pääosat

Tämä on yleiskatsaus EasyUP -tukikaiteiden pääosista:

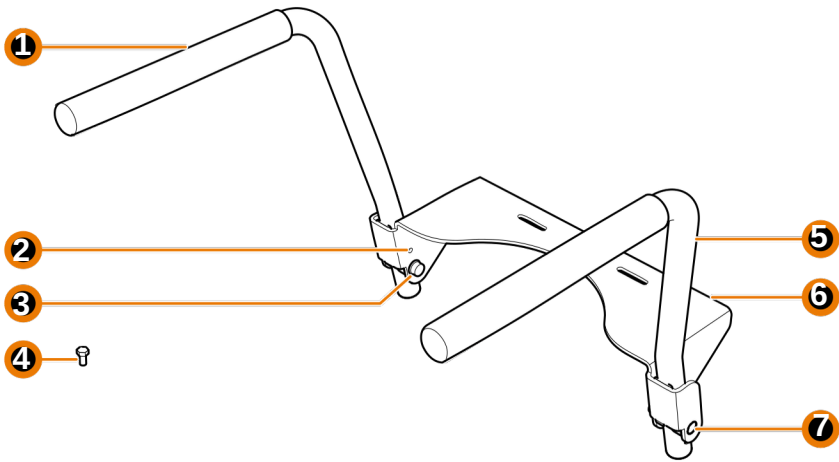

- 1 Oikea käsituki
- 2 Lukituspultin reikä
- 3 Lukkomutterin suojuks
- 4 Lukituspultti

- 5 Vasen käsituki
- 6 Kiinnityslevy
- 7 Pultin suojuks

Saatavana lisävarusteena:
• Pressalit Dania -wc-istuinkansi

3. TURVALLISUUS

3.1. Turvaominaisuudet

Tämän tuotteen turvallisuus on testattu ja se on sovellettavien määräysten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla verkkosivustollamme www.aeroletnl.com.

3.2. Tuotteen turvallisuussymbolit ja -tarrat

Tämä on yleiskatsaus ja selitys kaikista tuotteessa olevista turvallisuussymboleista ja -merkinnöistä.



Enimmäispainomerkintä 150 kg / 330 lbs.

3.3. Turvallisuusvaroitukset ja -määräykset

3.3.1. Yleiset turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

- Vakavan loukkaantumisen tai tuotevaurion vaara. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän pakkauksen ohjeet kokonaan. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja myöhempää tarvetta varten.
- Vakavan loukkaantumisen vaara. Käytä tuotetta ainoastaan tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
- Vakavan loukkaantumisen vaara. Älä koskaan käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vaurioitunut tai viallinen osa välittömästi. Tarkista aina tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä.

3.3.2. Kuljetusta koskevat turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

- Tuotevaurioiden vaara. Älä koskaan pudota tai käsittele tuotetta karkeasti kuljetuksen aikana. Käsittele varoen.

3.3.3. Asennusta koskevat turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

- Tuotteen epävakauden aiheuttama vaara. Vakavan loukkaantumisen riski johtuen huonosti kiinnitetystä wc-istuimesta. Huonosti kiinnitetty wc-istuin voi aiheuttaa käsikuiden epävakauden. Kiinnitä wc-istuin aina tukevasti lattiaan tai seinään. Varmista aina, että tuote asennetaan vakaalle ja tasaiselle pinnalle. Tarkista pinta ennen asennusta.
- Tuotteen epävakauden aiheuttama vaara. Vakavan loukkaantumisen riski johtuen huonosti asennetusta tai haljenneesta wc-istuimen kannesta. Varmista, että kansi on kiinnitetty tukevasti. Käytä vain suositeltua wc-istuimen kantta ja oikeita kiinnitysmateriaaleja.

3.3.4. Käyttöä koskevat turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

- Loukkaantumiswaara. Valvo aina henkilöitä, jotka eivät pysty käyttämään tuotetta itsenäisesti. Tarjoa apua. tarpeen mukaan.
- Loukkaantumiswaara. Älä koskaan ylitä suurinta sallittua painokapasiteettia. Ylikuormitus voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen. Tarkista valmistajan tiedot.
- Lasten turvallisuusriski. Vakavan loukkaantumisen tai tuotevaurion vaara. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Pidä lapset valvottuina.
- Putoamis- tai toimintahäiriövaara. Älä koskaan käytä tuotetta askelmana, tikkaina tai siirtosiltana.
- Tuotteen toimintahäiriön vaara. Älä koskaan aseta raskaita esineitä tuotteen päälle. Liiallinen paino voi aiheuttaa toimintahäiriön. Pidä tuote vapaana lisäkuormista.

• Käsinajan pehmusteen vaurioitumisvaara ja käsinajan pidon heikkenemisen riski. Älä koskaan käytä teräviä sormuksia tuotetta käyttäessäsi. Poista sormukset ennen käyttöä.

3.3.5. Huoltoa koskevat turvallisuusvaroitukset

VAROITUS

• Tuotteen pintojen vaurioitumisriski. Älä koskaan käytä klooria, suolahappoa (kalkin liuottajia) tai hankaavia aineita puhdistukseen. Käytä sen sijaan mietoa saippuaa tai laimennettua valkaisuainetta.

4. ASENNUS

VAROITUS

Tuotteen epävakausvaara. Vakavan loukkaantumisen vaara huonosti kiinnitetyn tai haljenneen wc-istuimen vuoksi. Varmista, että istuin on tukevasti kiinnitetty. Käytä vain suositeltua wc-istuinta oikeiden kiinnitysmateriaalien kanssa.

4.1. Tarvittavat työkalut

EasyUP -tukikaiteiden asentamiseen tarvitaan seuraavat työkalut:

- 13 mm kiintoavain
- 5 mm kuusiokoloavain

4.2. Pakkausmateriaalien poisto

Poista pakkausmateriaali tuotteesta leikkaamalla varovasti teipattuja saumoja pitkin mattoveitsellä varoen painamasta liian kovaa, jotta pinta ei naarmuunnu. Irrota hitaasti kaikki suojaava muovikalvo tai vaahtomuovipehmuste.

4.3. Pakkauksen sisältö


Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomia. Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, ota yhteyttä toimittajaan.

- EasyUP -tukikaiteet
- 2 lukituspulttia
- Lisävaruste (optio): Pressalit Dania wc-kansi

4.4. Valmistelu

Tarkista, että asennuspaikalla on seuraavat vähimmäismitat Easy UP -tukikaiteiden sijoittamista varten:

Mittaus	Mittausvaatimus
Etäisyys A	125–200 mm
Etäisyys B	Maks. 390 mm
Etäisyys C	Vähintään 30 mm
Etäisyys D	Vähintään 100 mm
Etäisyys E	Vähintään 50 mm

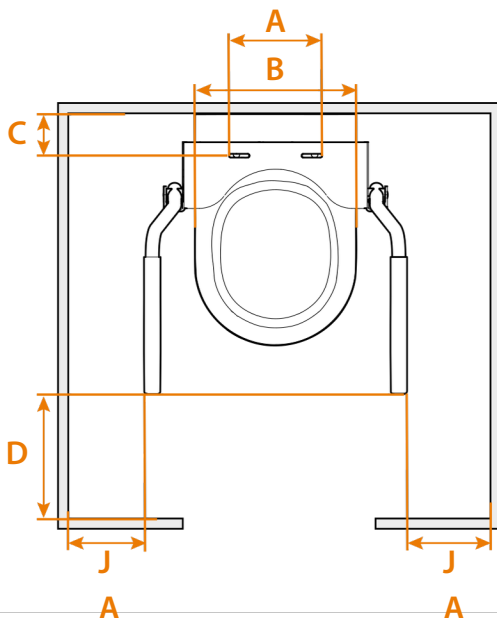


4.4.1. WC-istuimen valmistelu


Irrota wc-istuinkansi wc-pöntöstä. Noudata oman wc-pönttösi käyttöohjetta.

4.5. Asennus

1. Aseta EasyUP -tukikaiteet wc-istuimelle ja kohdista wc-istuimen kiinnitysreiät kiinnityslevyn aukkoihin **6**

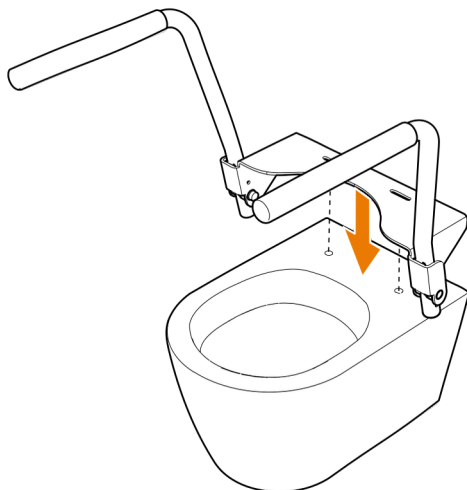


2. Asenna wc-istuinkansi kiinnityslevyn ja wc-istuimen päälle. Noudata Pressalitin käyttöohjetta tai katso asennusohjeet oman wc-istuimesi käyttöohjeesta.

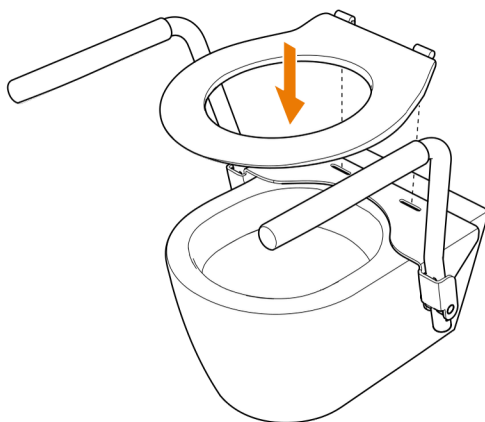

4.6. Säätäminen

4.6.1. Käsitukien korkeus


Vasen käsituki **5** ja oikea käsituki **1** voidaan asentaa kolmeen eri korkeuteen. Käsituen korkeuden muuttaminen:
1. Irrota lukkomutterin suojus **3** ja pultin suojus **7** molemmista käsituista.

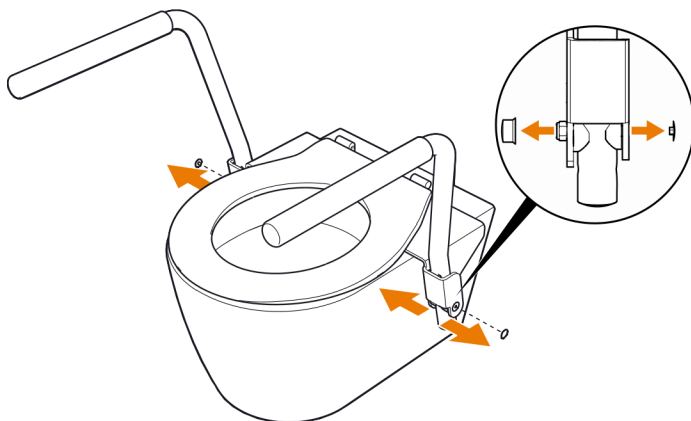


2. Irrota pultti ja lukkomutteri 13 mm:n jakoavaimella ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

HUOMIO

Pidä aluslevyjä paikoillaan estääksesi niitä liukumasta alas.

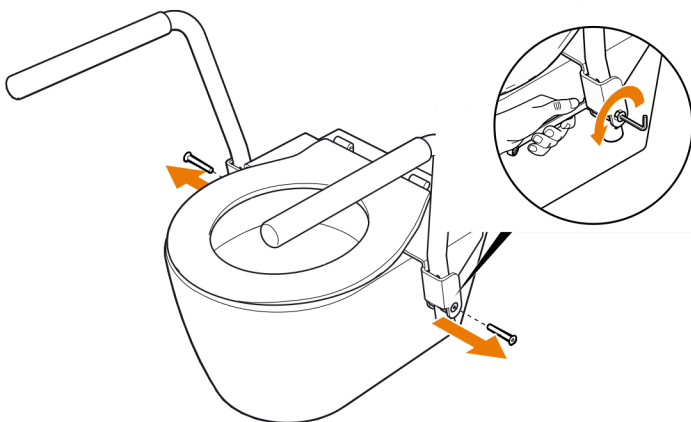

3. Siirrä käsituki haluttuun korkeusasentoon.

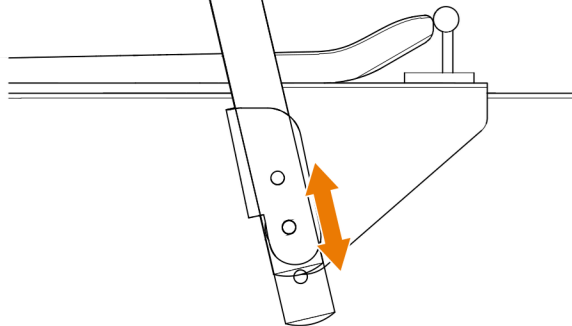

4. Työnnä pultti takaisin kiinnityslevyn, aluslevyjen ja käsituen läpi ja asenna lukkomutteri.

5. Kiristä lukkomutteri 13 mm:n avaimella pitäen samalla pulttia 5 mm:n kuusiokoloavaimella.



6. Toista vaiheet 2–5 toiselle käsituelle.

HUOMIO

Varmista, että molemmat käsituet on asetettu samalle korkeudelle.

4.6.2. Käsitukien lukitseminen

EasyUPin käsituet voidaan lukita, jotta ne eivät käännä taaksepäin. Lukitse käsituet aina, kun käytät päälle asennettavaa bideejärjestelmää, jossa on sivulta tuleva vedenotto. Käsitukien lukitsemiseksi:


1. Aseta lukituspultti ④ kierteitettyyn lukituspultin reikään ②.
2. Kiristä lukituspultti 13 mm:n avaimella.
3. Toista toiselle käsituelle.



5. KÄYTTÖ

Kun EasyUPin käsitukia ei käytetä, ne voidaan taittaa ylöspäin.

1. Paina käsitukien etuosaa taittaaksesi käsituet ylöspäin.

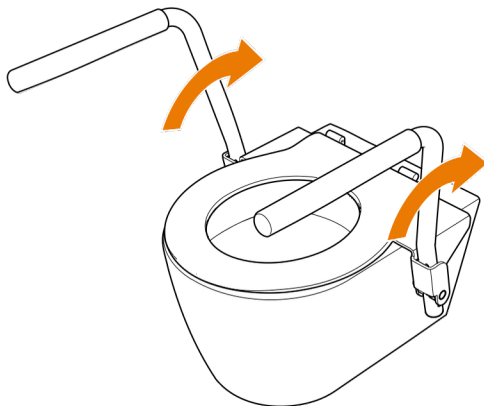

Käsitukien ylöspäin taittumisen estämiseksi käsituet voidaan lukita. Katso käsitukien lukitusohjeet luvusta 4.6.2.

6. HUOLTO

Puhdista tuote säännöllisesti. Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä pesuliinalla, miedolla saippualliuoksella ja lämpimällä vedellä. Pyyhi pinttyneemmät pinnat puhtaaksi laimennetulla valkaisuaineliuoksella ja huuhtelee hyvin ennen kuivaamista. Tarkista säännöllisesti, että wc-istuimen kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ja että kiinnityslevy on tukevasti kiinni wc-istuimessa.

6.1. Varaosat

Varaosia on mahdollista tilata pyynnöstä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään varaosaluetteloa varten.

7. TAKUU

Aerolet takaa Easy UP -tukikaiteiden materiaali- ja valmistusvirheet kahden vuoden ajaksi loppukäyttäjän ostopäivästä. Takuu-aika alkaa joko toimituspäivästä tai asennuspäivästä, kun jälleenmyyjä on suorittanut asennuksen. Tämän takuuajan aikana jälleenmyyjä voi oman harkintansa mukaan korjata tai vaihtaa vialliset osat. Takuun puitteissa korjatut osat tulee palauttaa Aeroletille. Easy UP -tukikaiteiden takuu ei koske seuraavista syistä johtuvia vikoja:

- Käyttäjän suorittama virheellinen tai riittämätön huolto.
- Luvattomat säädöt ja/tai muutokset tai väärinkäyttö.
- Käyttö tuotteen käyttötarkoituksen mukaisten ympäristövaatimusten ulkopuolella.

8. HÄVITTÄMINEN



Erottele ja hävitä tuotteen osat materiaaliensa mukaan asianmukaisiin jätevirtoihin paikallisten määräysten mukaisesti.



Aerolet

Het Lentfert 38, 7547SR Enschede
www.aeroletnl.com

Original manual
v1.0 - 10/2025