

Käyttöohje

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Pluo



Sisällys

Sisältö	1
Esipuhe	2
1 Tuotteesi	3
1.1 Lisävarusteet	3
2. Ennen käyttöä	4
2.1 Käyttötarkoitus	4
2.2 Yleiset turvallisuusohjeet	4
2.3 Suihkutuolin symbolit	4
2.4 Ensimmäinen käyttökerta ja säilytys	5
3. Suihkutuolin käyttö	6
3.1 Jarrut	6
3.2 Käsituki	7
3.3 Jalkatuki	7
3.4 Alusastia	7
3.5 Suihkutuoliin/-tuolista siirtyminen	8
3.6 Suihkutuolin liikuttaminen	8
4. Kokoaminen ja säädöt	9
4.1 Työkalut	9
4.2 Toimitus	9
4.3 Kokoaminen ja purkaminen	9
4.4 Päätuon kiinnitys ja säätö	11
4.5 Istuinkorkeuden säätö (vain 5" malli)	11
4.6 Ylävartalovyön kiinnitys	11
4.7 Etutuon kiinnitys	11
5. Huolto	12
5.1 Huoltokohdat	12
5.2 Huolto-ohjeet	12
5.3 Vianetsintä	13
5.4 Odotettu käyttöikä	13
5.5 Käytön jälkeen	13
6. Tekniset tiedot	14

Esipuhe

Lue tämä käyttöohje huolellisesti; se auttaa sinua tutustumaan suihkutuolisi toimintaan, ominaisuuksiin ja rajoituksiin.

Jos sinulla on vielä kysyttävää tämän käyttöohjeen lukemisen jälkeen, ota rohkeasti yhteyttä myyjääsi, joka auttaa sinua mielellään.

Turvallisuutesi varmistamiseksi ja tuotteesi käyttöiän pidentämiseksi pidä siitä hyvää huolta ja tarkistuta ja/huollata se säännöllisesti.

Tämän tuotteen takuu perustuu normaaliin käyttöön ja huoltoon tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Tuotteen virheellisestä käytöstä tai huollon puutteesta johtuvat vauriot aiheuttavat takuun raukeamisen.

Tämä käyttöohje heijastaa uusimpia tuotekehityksiä. Vermeirenillä on oikeus tehdä muutoksia tämän tyyppisiin tuotteisiin ilman, että sillä on velvollisuutta mukauttaa tai korvata aiemmin toimitettuja vastaavia tuotteita.

Kuvia käytetään tämän käyttöohjeen ohjeiden selventämiseen. Kuvassa olevan tuotteen yksityiskohdat voivat poiketa sinun tuotteestasi.

Verkkosivustoltamme <http://www.vermeiren.com/> löydät aina uusimman version seuraavista tiedoista. Tarkista verkkosivustolta säännöllisesti mahdolliset päivitykset.

Näkövammaiset voivat ladata tämän käyttöohjeen sähköisen version ja lukea sen ääneen tekstistä puheeksi -ohjelmistosovelluksen avulla.



Pyörätuolin käyttöopastus

Käyttäjälle/hoitajalle



Hygienia-apuvälineen huolto-ohje

Jälleenmyyjälle




EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuotteesi

Tämä liikuteltava suihkutuoli, johon on saatavilla lisävarusteena saatava alusastia, on helppokäyttöinen kylpyhuoneissa, ja se on saatavana neljällä kääntyvällä pyörällä tai 24 tuuman takapyörillä.

24" malli edestä

5" malli takaa

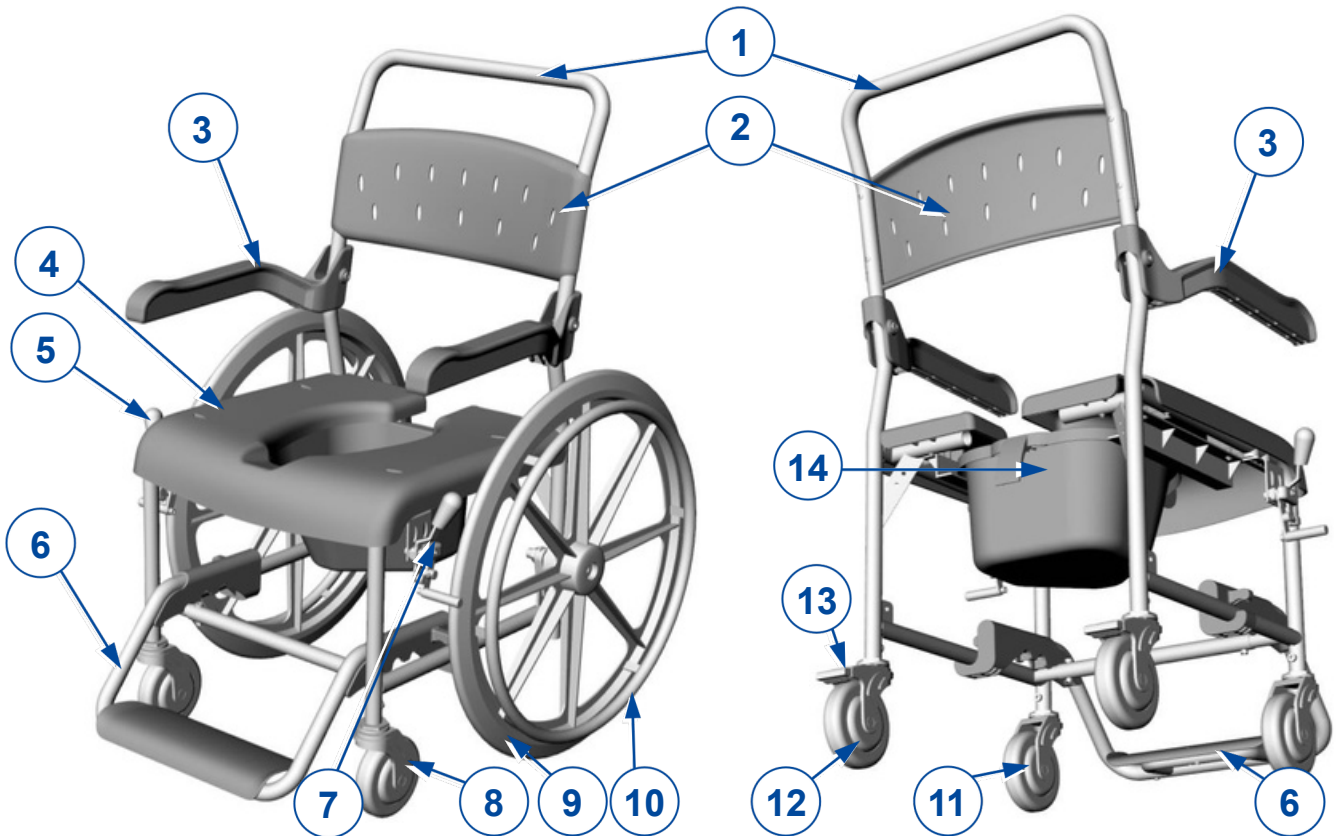

1. Selkäosan runko / työntötanko
2. Selkäosa
3. Käsituki käännettävä
4. Istuin
5. Jarruvipu
6. Jalkatuki
7. Seisontajarru (vain 24" malleihin)

8. Etupyörä suuntalukituksella
9. Takapyörä 24"
10. Kelausvanne (vain 24")
11. Etupyörä suuntalukituksella
12. Takapyörä 5"
13. Seisontajarru (vain 5":lle)
14. Alusastia

1.1 Lisävarusteet

Pluolle on saatavilla seuraavat vaihtoehdot ja lisävarusteet:

1. Istuinkorkeuden säätö (vain 5")
2. Päätuki
3. Ylävartalovyö
4. Turvaliivi
5. PU-istuin ja selkäosa
6. Geeli-istuin
7. Sivutuki
8. Etutuki

2 Ennen käyttöä

2.1 Käyttötarkoitus

Tässä kappaleessa on lyhyt kuvaus suihkutuolin käyttötarkoituksesta. Lisäksi muiden kappaleiden ohjeisiin on lisätty asiaankuuluvia varoituksia. Tällä tavoin haluamme tiedottaa sinulle mahdollisista väärinkäytöksistä.

- Käyttöaiheet ja vasta-aiheet: Suihkutuoli on tarkoitettu henkilöille, joilla on kävelyvaikeuksia tai jotka eivät pysty kävelemään lainkaan. Erilaiset lisävarusteet mahdollistavat täyden käytön ikääntyneille henkilöille ja henkilöille, jotka ovat haalvaantuneita tai joilla on raajojen menetys, raajojen epämuodostumia, jäykkiä tai vaurioituneita niveliä, sydämen vajaatoimintaa ja huonoa verenkiertoa, tasapainohäiriöitä tai kakeksiaa (lihasten heikkenemistä). 5" suihkutuoli on tarkoitettu avustajan käytettäväksi; 24" mallia voi käyttää myös asukas itse.
- Tämä suihkutuoli soveltuu vain sisäkäyttöön kylpyhuoneen tuolina ja kuljetukseen kylpyhuoneeseen ja sieltä pois.
- Tämä suihkutuoli on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan yhden (1) henkilön kuljettamiseen, jonka enimmäispaino on 150 kg. Sitä ei ole tarkoitettu tavaroiden tai esineiden kuljetukseen eikä mihinkään muuhun kuin aiemmin kuvattuun käyttöön.
- Käytä tarvittaessa ainoastaan Vermeirenin hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.
- Lue kaikki suihkutuolisi tekniset tiedot ja rajoitukset kohdasta 6.
- Tämän tuotteen takuu perustuu normaaliin käyttöön ja huoltoon tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Tuotteen virheellisestä käytöstä tai huollon puutteesta johtuvat vauriot aiheuttavat takuun raukeamisen.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS

Loukkaantumis- ja/tai vahinkoriski

Lue ja noudata tämän käyttöohjeen ohjeita. Muuten saatat loukkaantua tai suihkutuolisi voi vaurioitua.

Pidä seuraavat yleiset varoitukset mielessä käytön aikana:

- Älä käytä suihkutuolia, jos olet alkoholin, lääkkeiden tai muiden ajokykyysi vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena. Tämä koskee myös avustajaasi, joka käyttää suihkutuolia.
- Huomaa, että suihkutuoli voi kuumentua tai kylmentyä erittäin kuumaksi tai kylmäksi ympäristön lämpötilan, auringonsäteilyn, lämmityslaitteiden tai puhdistusveden vuoksi. Ole varovainen koskettaessasi sitä.
- Älä nojaa liikaa eteen tai sivulle kaatumisen välttämiseksi.
- Älä seiso jalkatuen päällä.
- Nosta suihkutuolia vain tyhjänä. Tartu suihkutuoliin runkoputkista.
- Tarkista kaikki osat vaurioiden tai halkeamien varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä suihkutuolia, jos se ei ole hyvässä kunnossa. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen mahdollisten korjausten tai osien vaihtoa varten.
- Älä tee suihkutuoliisi mitään muutoksia.
- Noudata hoito- ja huolto-ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä huollosta / ylläpidosta.

Jos tuotteeseesi on liittynyt vakava vaaratilanne, ilmoita siitä Vermeirenille tai erikoisliikkeellesi sekä maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.3 Suihkutuolin symbolit

Seuraavassa luettelossa olevat symbolit koskevat suihkutuoliasi. Symbolit löytyvät asiaankuuluvasta ISO-standardista (ISO 7000, ISO 7001 ja IEC 417).



Käyttäjän enimmäispaino kilogrammoina



Vain sisäkäyttöön



Tyypimerkintä



Puristumisvaara

2.4 Ensimmäinen käyttökerta ja säilytys



VAROITUS

Akun vaurioitumisriski

- Tarkista säilytyksen tekniset tiedot, katso luku 6.

3 Suihkutuolin käyttö



VAROITUS

Loukkaantumisriski

- Lue ensin edelliset luvut ja ota selvää käyttötarkoituksesta. ÄLÄ käytä suihkutuloa, ellei ole lukenut ja ymmärtänyt kaikkia ohjeita.
- Jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, hoitohenkilökuntaan tai tekniseen neuvonantajaan.
- Varmista, että kätesi, vaatteesi, vyösi, soljesi tai korusi eivät jää pyörien väliin tai säädön aikana.

3.1 Jarrut



VAROITUS

Loukkaantumis- ja/tai vahinkoriski


- Älä käytä jarruja suihkutuloa hidastamiseen.

Suihkutuolissasi on kaksi käsikäyttöistä seisontajarrua. Näiden jarrujen tarkoituksena on estää suihkutuloa liikkuminen pysäköinnin aikana.

3.1.1 Seisontajarrut 24"mallille

Jarrujen vapauttaminen [A]:

1. Pidä vannetta tiukasti kiinni toisella kädellä (tai avustaja pitää työntötankoa toisella kädellä).
2. Vedä TOISEN pyörän jarruvipua (10) TAAKSEPÄIN
3. Toista tämä toiselle pyörälle ja pysäköintijarrulle.

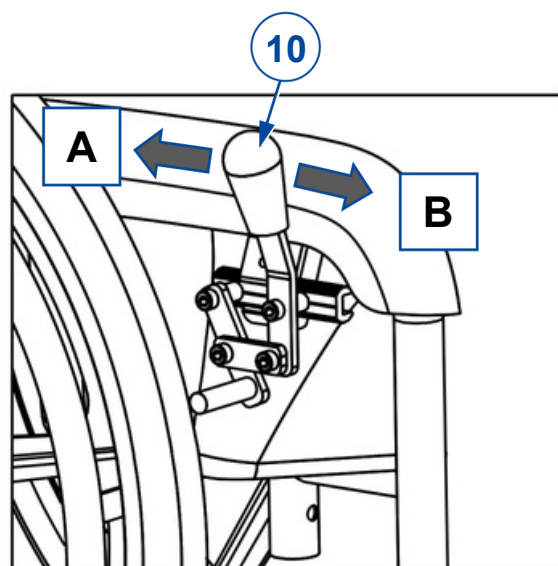

Jarruttaminen [B]:

1. Pidä vannetta tiukasti kiinni toisella kädellä (tai avustaja pitää työntötankoa yhdellä kädellä).
2. Paina TOISEN pyörän jarruvipua (10) ETEENPÄIN, kunnes tunnet selkeän lukkiutumisen.
3. Toista tämä toiselle pyörälle ja pysäköintijarrulle.


3.1.2 Seisontajarrut 5" mallille

Jarrujen vapauttaminen [C]:

Paina jarruvivun yläosaa taaksepäin jalalla.


Jarruttaminen [D]:

Paina jarruvipua jalalla alas pyörää kohti pyörää.

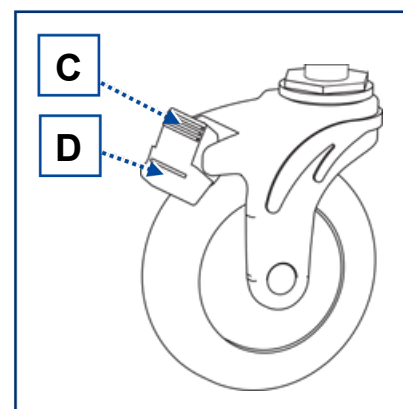

3.2 Käsituki

- Käännä käsituki ylös saadaksesi tilaa siirtymiselle
- Käännä käsituki alas istuaksesi mukavasti

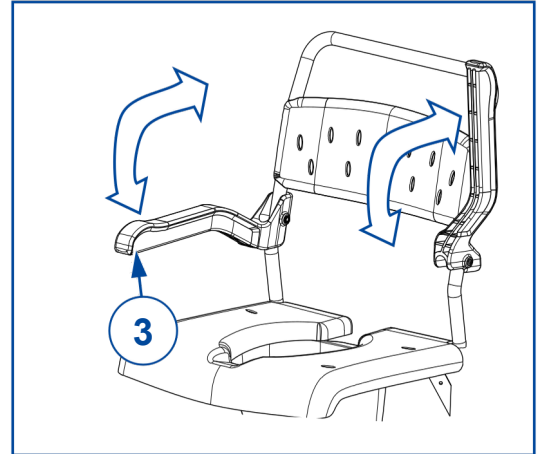


3.3 Jalkatuki

Kääntäminen sisäpuolelle

- Työnnä jalkatukea (6) jalalla sisäänpäin, jotta saat tilaa siirtymisille
- Vedä jalkatukea ulos palauttaaksesi sen.
- Varmista, että etuputki asettuu jalkatuen tuen (25) syvennykseen (valittavissa 3 asentoa).

Irrotus ja asennus

- Irrota vetämällä kiinnike (26) pois rungon putkista vasemmalta ja oikealta puolelta. Siirrä jalkatuki etupyörien rungon putkien välistä.
- Palauttaaksesi, paina jalkatuen kiinnike (26) rungon putkeen vasemmalle ja oikealle puolelle. Varmista, että etuputki asettuu jalkatuen kannattimen (25) syvennykseen.

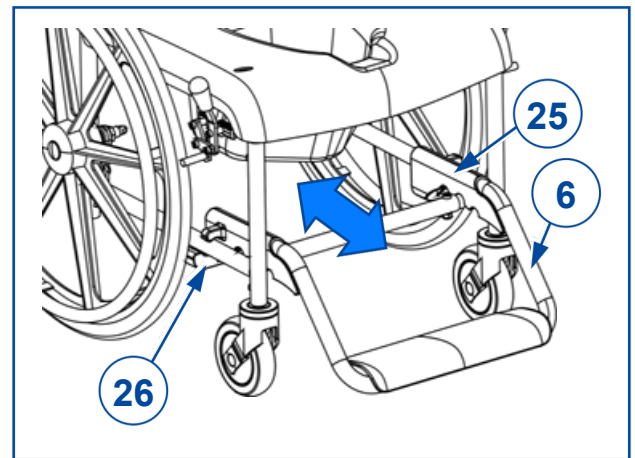


3.4 Alusastia

Asentaminen:

- Aseta alusastia takaosaan siten, että sen reuna lepää kahden ohjaimen päällä.
- Liu'uta astia eteenpäin, kunnes se osuu astian pysäyttimeen.

Irrottaminen:

- Liu'uta astiaa taaksepäin ja tue sitä samalla toisella kädellä.

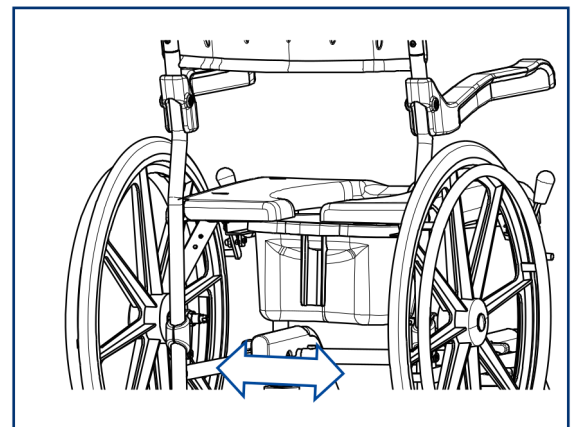


3.5 Suihkutuoliin/-tuolista siirtyminen


VAROITUS
Loukkaantumis- ja vahinkoriski

- Jos et pysty suorittamaan siirtymistä turvallisesti, pyydä jotakuta auttamaan sinua.
- Älä seiso jalkalevyjen päällä siirron aikana.
- Älä nojaa käsitukiin siirron aikana.

Siirtyminen

- Aseta suihkutuolet mahdollisimman lähelle itseäsi istuessasi tuolissa, sohvalla, istuimella tai sängyssä.
- Käännä kääntyvät pyörät ulospäin vakauden lisäämiseksi (katso kuva).
- Kytke jarrut päälle (katso kohta 3.1).
- Työnnä jalkatuki istuimen alle ja nosta toiselta puolelta käsinoja ylös (katso kohdat 3.3 ja 3.1).
- Siirry tuoliin tai tuolista käsivoimin tai avustajan tai nostolaitteen avulla.

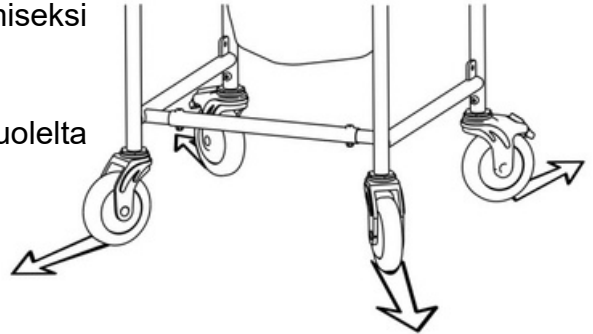

Istuminen suihkutuolessa

- Istu alas istuimelle siten, että alaselkäsi on selkänojaa vasten.
- Asenna käsituki ja/tai jalkatuki takaisin paikoilleen.
- Aseta jalkasi jalkalevylle.
- Varmista, että reitesivät ovat vaakasuorassa; säädä jalkatukea tarvittaessa (katso 3.3).

3.6 Suihkutuolin liikuttaminen



Tietoa kynnysten ja esteiden ylittämisestä löytyy verkkosivuiltamme. Pyörätuolin käyttöohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.


VAROITUS
Loukkaantumis- ja vahinkoriski

- Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että:
 - kaikki osat on kiinnitetty tukevasti, katso § 4.
 - jarrut toimivat oikein, katso § 3.1.
- Pidä jalkasi jalkalaudan päällä.
- Kynnykset ja esteet tulee ylittää takaperin.

4 Kokoaminen ja säädöt


VAROITUS

Loukkaantumis- ja vahinkoriski

- Käytä ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuja asetuksia.

4.1 Työkalut

Suihkutuolin kokoamiseen (purkamiseen) ja säätämiseen tarvitaan seuraavat työkalut:

- Jakoavainsarja nro 13
- Kuusiokoloavainsarja nro 3 - 4 - 5

4.2 Toimitustapa

Pakkaustavasta riippuen runko ja pyörät voivat olla koottuja tai irtonaisina.

Pienissä laatikoissa, joissa runko on irrotettuna, toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:

- Vasen runko käsituella
- Oikea runko käsituella
- Eturungon putki
- Selkänojan runko
- Selkänoja
- Kaksi tukijalkaa kääntyvillä pyörillä, ilman jarruja
- Kaksi tukea, joissa on kääntyvät takapyörät ja jarrut (vain 5" mallissa)
- Kaksi 24 tuuman takapyörää (vain 24" malliin)
- Jalkatukien lisävarusteet
- Käyttöohje

Ennen käyttöä tarkista, että kaikki on mukana ja ettei mikään tuote ole vaurioitunut.


4.3 Kokoaminen ja purkaminen



Seuraava kuvaus selittää tuolin kokoamisen. Purkaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.


1. Yhdistä vasen ja oikea runko etuosasta runkoputkella (17):

- Aseta kuusiokoloruuvit (16) rungon reikiin ja kiristä ruuvit ja mutterit tiukasti.
- Varmista, että rungon osat ovat tukevasti kiinni.

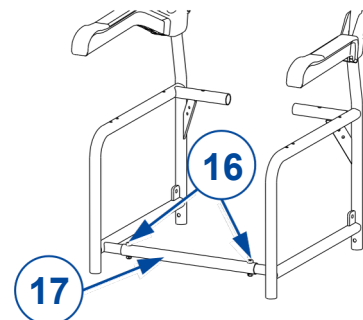


2. Yhdistä vasen ja oikea runko takaosasta selkänojan rungolla (18).

- Liu'uta selkänojan runkoputki (18) sivurunkojen ulkonevien putkien päälle.
- Asenna selkänoja (2) niin, että kaareva puoli on ylhäällä.
- Käytä neljää kuusiokoloruuvia (19) ja kiristä ne tiukasti.

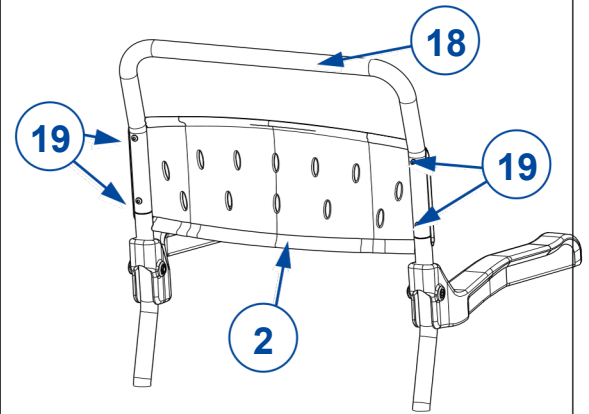


3. Asenna istuin:

- Käännä runko ylösalaisin ja aseta istuinrunko istuimen alapuolelle.
- Varmista, että alusastian pysäytin on etuosassa
- Kiristä 2x3-kuusiokantaruuvit (20) tiukasti.

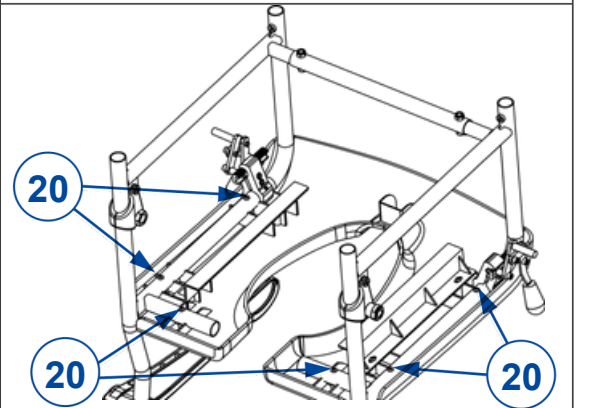


4. Asenna etupyörät (2 kpl):

- Aseta pyörien tukien putken päät rungon putken päihin.
- Kiristä molemmat pyörätuet tiukasti kuusiokolo (21).
- Varmista, että etupyörät ovat tukevasti kiinnitetty.

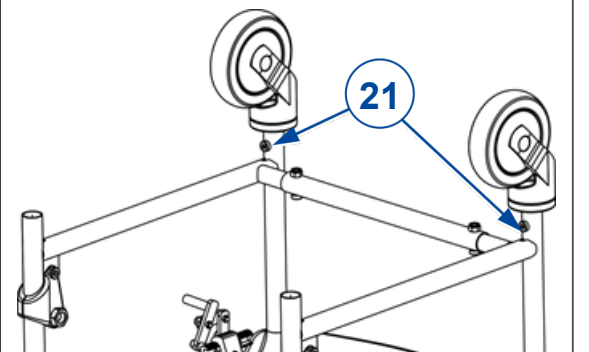


5. Lisää takapyörät:

- Vain 5" mallissa: Asenna molemmat takapyörät jarruineen, katso edellinen vaihe.
- Vain 24" mallissa: Työnnä yhden 24" pyörän kiinnitystappi (22) rungon akselikoteloon, kunnes kuuluu napsahdus. Toista sama toiselle pyörälle.
- Varmista, että takapyörät ovat tukevasti kiinnitetty.

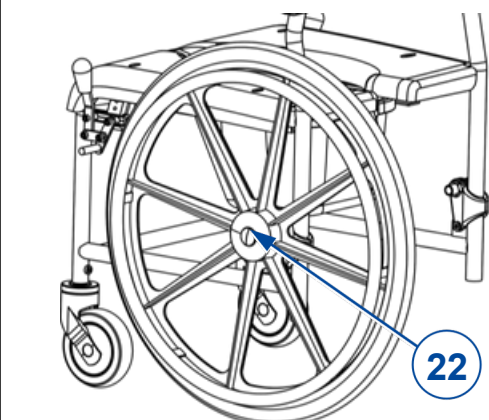

6. Säädä seisontajarru (vain 24" malli):


- Löysää kaksi hylsyruuvia (24).
- Aseta seisontajarru jarrutusasentoon (jarruvipu eteenpäin).
- Liu'uta seisontajarrun tuki (23), kunnes jarrupysäytin painuu rengasta vasten.
- Kiristä kaksi hylsyruuvia (24).
- Varmista, että suihkutuoli pysyy paikallaan, kun jarru on kytketty. Jos ei, toista säätö.
- Toista tämä toiselle seisontajarrulle.
- Varmista, että molemmat jarrutuet (23) on tukevasti kiinnitetty.

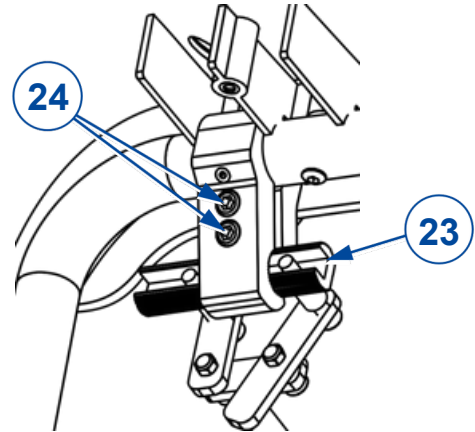

7. Jalkatuen (6) lisääminen, katso 3.3.

4.4 Päätuen kiinnitys ja säätö


1. Löysää kaksi ruuvia päätuen kannattimesta (25).
2. Kiinnitä päätuki selkänojan runkoon (26).
3. Kiristä kaksi ruuvia (25) tiukasti. Varmista, että päätuki on tukevasti kiinnitetty.
4. Löysää käsin säätönuppi (27) säätääksesi päätuki haluttuun korkeuteen ylös/alas. Kiristä nuppi tiukasti.

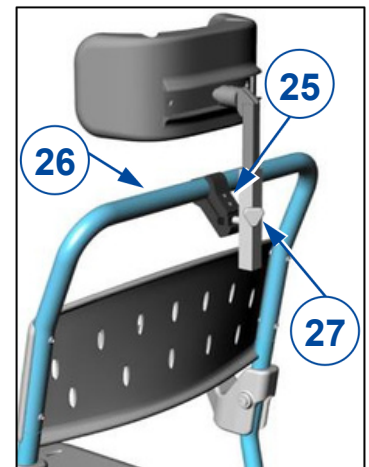

4.5 Istuinkorkeuden säätö (vain 5" malli)

Istuinkorkeutta voidaan säätää 90 mm:n korkeudella (30 mm:n välein).

1. Irrota ruuvi (28) jalasta.
2. Säädä jalka halutulle korkeudelle liu'uttamalla sisäputkea (29) ylös/alas ulkorungon putkessa (30).
3. Kiinnitä ruuvi (28) ja kiristä se tiukasti.
4. Toista muille jaloille. Varmista, että kaikki jalat on kiinnitetty tiukasti ja että ne on asetettu samalle korkeudelle.

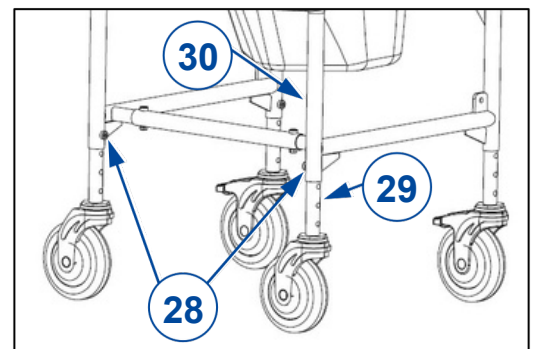

4.6 Ylävartalovyön kiinnitys

Ylävartalovyö kiinnitetään runkoon selkänojan kahdella alemmalla ruuvilla (31).



4.7 Etutuen kiinnitys

Etutuen asentamiseksi liu'uta se käsitukien yli sivusuunnassa toiselta puolelta toiselle.

5 Huolto

5.1 Huoltokohteet



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vahinkoriski

Korjauksia ja osien vaihtoja saavat tehdä vain koulutetut henkilöt, ja laitteessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Vermeirenin varaosia.



Tämän käyttöohjeen viimeisellä sivulla on rekisteröintilomake, johon jälleenmyyjä voi kirjata jokaisen huollon.

Huoltotiheys riippuu käytön tiheydestä ja intensiteetistä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään sopiaksesi yhteisestä tarkastus-/huolto-/korjausaikataulusta.

Ennen jokaista käyttökertaa

Tarkista seuraavat kohdat:

- Kaikki osat: Ehjät ja vahingoittumattomat tai kulumattomat.
- Kaikki osat: Puhdista, katso 5.2.2.
- Pyörät, istuin, jalkatuet, käsitet, jalkatuet, jalkalevyt ja niskatuki (jos sovellettavissa): Hyvin kiinnitetty.
- Pyörien/renkaiden kunto, katso § 5.2.1.
- Jarrujen kunto, katso § 5.2.1.
- Rungon kunto: Ei muodonmuutoksia, epävakautta, heikkouksia tai löysiä liitoksia. Istuin, selkäosa, käsitet, jalkatuet ja niskatuki (jos käytössä): Ei liiallista kulumista (kuten kolhuja, vaurioita tai repeämiä).

Ota yhteyttä jälleenmyyjään mahdollisten korjausten tai osien vaihtoa varten.

Vuosittain tai useammin

Anna suihkutuolisi jälleenmyyjän tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa tai useammin. Vähimmäishuoltoväli riippuu käytöstä, joten siitä tulee sopia yhdessä jälleenmyyjän kanssa.

5.2 Huolto-ohjeet

5.2.1 Vanteet ja renkaat



Jarrujen moitteeton toiminta riippuu renkaiden kunnosta, joka voi muuttua kulumisen ja epäpuhtauksien (vesi, öljy, muta jne.) vuoksi.

- Pidä pyöräsi puhtaina johdoista, hiuksista, hiekasta, maton kuiduista ja saippuajäämistä.
- Tarkista renkaiden profiili. Jos kulutuspinnan syvyys on alle 1 mm, renkaat on vaihdettava. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.

5.2.2 Puhdistus



VAROITUS

Kosteuden aiheuttama vaurioitumisriski

- Älä koskaan käytä letkua tai painepesuria suihkutuolin puhdistamiseen.

Pyyhi kaikki suihkutuolin jäykät osat kostealla liinalla (ei märällä). Käytä tarvittaessa mietoa saippuaa, joka sopii lakatuille ja synteettisille pinnoille.

Suihkutuoli voidaan puhdistaa 85 °C:ssa enintään 3 minuutin ajan.

5.2.3 Desinfiointi

 **VAROITUS** Vaurioitumisriski

Desinfiointia saavat suorittaa vain koulutetut henkilöt. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

5.3 Vianmääritys

Vaikka käyttäisit suihkutuoliasi oikein, teknisiä ongelmia voi silti esiintyä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

 **VAROITUS** Loukkaantumisvaara ja suihkutuolin vaurioitumisvaara

- ÄLÄ KOSKAAN yritä korjata suihkutuolia itse.

Seuraavat oireet voivat viitata vakavaan ongelmaan. Ota siksi aina yhteyttä jälleenmyyjään, jos havaitset jonkin seuraavista poikkeamista:

- Outo ääni;
- Epätasainen kulutuspinnan kuluminen yhdessä renkaista;
- Nykivät liikkeet;
- Pyörätuoli taipuu toiselle puolelle;
- Vaurioituneet tai rikkoutuneet pyöräkokoontimet.

5.4 Odotettu käyttöikä

Suihkutuolin keskimääräinen käyttöikä on 5 vuotta. Käyttöiheydestä, ajo-olosuhteista ja huollosta riippuen suihkutuolin käyttöikä pitenee tai lyhenee.

5.5 Käytön jälkeen

Käyttöiän päätyttyä suihkutuoli on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Paras tapa tehdä tämä on purkaa suihkutuoli osiin kierrätettävien osien kuljetuksen helpottamiseksi.

5 Tekniset tiedot

Alla olevat tekniset tiedot koskevat vain tätä suihkutuolia vakioasetuksilla ja optimaalisissa ympäristöolosuhteissa. Ota nämä tiedot huomioon käytön aikana. Arvot eivät enää ole voimassa, jos suihkutuoliasi on muutettu, se on vaurioitunut tai se on kulunut paljon.

Taulukko 1: Tekniset tiedot

Merkki	Vermeiren-	
Tyyppi Malli	suihkutuoli	
Kuvaus	Pluo	
	Mitat 5" malli	Mitat 24" malli
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg	150 kg
Kokonaispituus	1035 mm	1035 mm
Kokonaisleveys	600 mm	680 mm
Kokonaispituus (säädetty jalkatuki)	720–760–785 mm	910–950–975 mm
Mitat K x L x P taitettuna	1035 x 570 x 570 mm	1035 × 623 × 570 mm
Jalkatuen korkeus ja kulma (säädetty)	90–105–120 mm 4° - 7° - 9°	90–105–120 mm 4° - 7° - 9°
Istuinkorkeus	515 mm*	515 mm
Istuimen syvyys	450 mm	450 mm
Istuimen leveys	480 mm	480 mm
Selkäosan yläosa lattiasta	920 mm	920 mm
Käsituen ja istuimen välinen etäisyys	225 mm	225 mm
Kokonaismassa	9,7 kg	14,0 kg
Raskaimman osan massa	8,0 kg	7,2 kg
Irrotettavien osien massa	24 tuuman pyörä: Jalkatuki: Alusastia:	2,5 kg (kpl) 1,0 kg 0,7 kg
WC-ämpärin tilavuus	9,3 litraa	9,3 litraa
Etupyörän halkaisija	125 mm (2 kpl, kääntyvä, ilman jarruja)	125 mm (2 kpl, kääntyviä ilman jarruja)
Takapyörän halkaisija	125 mm (2 kpl, kääntyvä ja jarrullinen)	600 mm (2 kpl kiinteää, jarruilla)
Kelausvanteen halkaisija	NA	530 mm
Käyttölämpötila	5°C ~ +50°C	
Puhdistuslämpötila	85 °C enintään 3 minuutin ajan	
Säilytyslämpötila	+5 °C ~ +65 °C	
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.		
Mittatoleranssi ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.		
NA = ei sovellettavissa		
* 5" korkeussäädettävä malli: 51/54/57/60 cm		



Tämä tuote (nimi): on tarkastettu

(I), huollettu (S), korjattu (R) tai desinfioitu (D):

Tekijä (leima):	Tekijä (leima):	Tekijä (leima):
Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:
Tekijä (leima):	Tekijä (leima):	Tekijä (leima):
Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:
Tekijä (leima):	Tekijä (leima):	Tekijä (leima):
Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:
Tekijä (leima):	Tekijä (leima):	Tekijä (leima):
Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:
Tekijä (leima):	Tekijä (leima):	Tekijä (leima):
Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:	Työn tyyppi: I / S / R / D Päivämäärä:



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Ohjeet erikoisliikkeelle

Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta ja sen on oltava jokaisen myytävän tuotteen mukana.

Versio: C, 2022-03

Basic-UDI: 5415174 120903Pluo TK

**Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan
lukien käännös.**