

AQUATEC®

Ocean E-Vip



Aquatec Ocean E-VIP sähköisesti kallistettava WC- ja suihkutuoli

Aquatec **Ocean E-VIP** kallistettavassa suihkutuolissa on portaattomasti sähkösäädettyä istuinkorkeus 50-105 cm:n välillä ja sähkösäädettyä istuinkulma (kallistuskulma -5°-35°).

E-VIP on erittäin vakaa jopa äärimmäisessä kallistusasennossa ja korkeimmalla istuinkorkeudella. Helppokäyttöinen käsiohjin istuinkorkeuden ja istuinkulman säätämiseen (vain 4 nappia).

Koteloidut elektroniikkaosat (IPX6): turvallinen käyttö suihkussa. Helpposti ladattava akku, (latausaika 5–6 h), akkua ei tarvitse irrottaa laitteesta latauksen ajaksi. Koko tuoli voidaan konepestä jopa +85 °C:ssa! XL käsituet saatavana jälkiasennettuna.

125 mm umpikumirenkaat, täysjarrupyörät, istuinkulman säätö sähköisesti, istuinosa alapesuaukolla, edessä tai takana, (yhteinen istuin LI/VA), säädetty kangasselkänöjä, irrotettavat, ylöskäännettävät käsinojat, korkeussäädettävät istuinkorkeus ja jalkatuet irrotettavat ja poiskääntyvät jalkalaudat.

Korkeus- ja syvyyssäädettävä päätuki, alusastian kiinnikkeet, turvavyö ja pohjeremmi. Materiaali: Jauhemaalattu, ruostumaton teräs. Max. 150 kg.

CAMP
MOBILITY®

Lisävarusteet



Pehmeä Universal istuin
1526032: Yhtenäinen istuin



Special Soft -istuin
Ergonominen, extra pehmeä istuin, teksturoitu pinta
1531259: sopii malleihin Ocean / Ocean XL / Vip / Vip XL / Dual Vip



Käännettävä Soft -istuin
Hygienia-aukko voidaan asentaa 4 eri suuntaan. Helppo asennus ilman työkaluja.
1544469: sopii malleihin Ocean / Vip / Dual Vip



Turvatanko
Antaa lisäturvaa. Pehmeä pehmuste. helppo asentaa.
10167-10: pituus: 540 mm
XL malleihin: 1470078: pituus: 620 mm



Turvavyöt
Takaa turvallisen asennon. Yksilöllisesti säädettävät. Helppo asentaa. Konepestävä.
1470081: rintavyö, harmaa
1470082: lantiovyö, harmaa



Käsitukien lukitus
Käsitukien lukitsemiseen.
1470077: sopii kaikkiin malleihin.



XL selkäosa
Lisää käsitukien välistä leveyttä 80 mm. Asennussarja Ocean:
1534979 SN14551780 saakka.
1558847 SN14551781 eteenpäin.



Kova selkäosa
Ergonomisesti muotoiltu kiinteä, kova selkäosa on helppo puhdistaa ja kuivata.
1575299 sopii malleihin Ocean / Vip / Dual Vip / E-Vip.



Pehmeä selkäosan tyyny
Antaa lisämukavuutta ja tukea - sopii myös pienille käyttäjille ja nuorille aikuisille.
1558769: sopii kaikkiin malleihin.



Leveät XL käsituet
Lisää leveyttä käsitukien väliin 40 mm kummallekin puolelle. Jälkiasennussarja 1470086: Vip/ Dual Vip / E-Vip (pari).



Reisi- ja amputaatiotuki
Pehmustettu, korkeus- ja kulmasäädettävä. Sopii kaikkiin malleihin.
1556894: vasen
1556893: oikea



Pehmeä Soft -istuin
key hole -hygienia-aukolla
16341: Ocean / Ocean XL / E-Vip
1470075: Vip / Vip XL / Dual Vip.



Soft -istuimen täytepala
key hole -hygienia-aukkoon
16343 :sopii kaikkiin malleihin.



Pehmeä Soft -istuin
pienellä ovaalin muotoisella
hygienia-aukolla
16342: sopii kaikkiin malleihin.



Roiskesuoja
16511: Yksinkertainen snap-
on -roiskesuoja key hole
-muotoiseen Soft-istuimeen.



Reisituki lisäjalkatuella
Pehmustettu, korkeus- ja kul-
masäädettävä. sis. lisäjalkatu-
en. Sopii kaikkiin malleihin.
1546705: vasen
1546439: oikea



Lateraali vartalotuki
Lisää sivuttaistukea istuma-
asentoon. Leveys- ja korkeus-
säädettävä – sopii myös pienille
käyttäjille ja nuorille aikuisille.
1535077: Sopii kaikkiin mallei-
hin.



Ergonominen päätuenpidike
Lisää turvallisuutta ja käyttö-
mukavuutta. Useita säätö-
asentoja (ei sis. pehmustetta).
1531613: sopii malleihin
Vip / Dual Vip / E-Vip.



Pää-/niskatuki (kuvassa niskatuki)
1531465: Päätuki
1531608: Niskatuki
sopii malleihin Vip / Vip XL /
Dual Vip / E-Vip



Kaatumiseste eteen
Antaa lisäturvallisuutta
1535936: sopii malleihin
Vip / Vip XL / Dual Vip



Alusastia
Pituus: 460 mm. sis. kahva ja kansi
10230: Alusastia, sopii kaikkiin malleihin.
1541289: Alusastian kansi
1527985 Alusastianpidike Ocean / Ocean XL
1470076: Alusastianpidike Vip / Vip XL / Dual Vip
1471233 Alusastianpidike E-Vip



Suuntalukittavat pyörät

Yksi pyöristä on varustettu suuntalukittavalla jalkalukituksella.

Poikkeuksellisen laajat säätömahdollisuudet

Riippumatta tarvitseeko hoitohenkilöstön nostaa potilas yli metrin korkeuteen sujuvan pesutilanteen mahdollistamiseksi tai laskea alle 50 cm:n korkeudelle sujuvien tuoliin siirtymisten ajaksi, Aquatec Ocean E-Vip tuolilla kaikki tämä onnistuu kätevästi yhtä nappia painamalla.

Myös tuolin kallistuskulmaa voidaan säätää sähköisesti 35° :een saakka turvallisesti myös potilailla, joilla ylävartalon hallinta on heikentynyt.



Rintakehävyö vakiona

Ocean E-Vip tuolin rintakehävyö varmistaa potilaan oikeanlaisen asennon kaikkien toimintojen aikana.

Vesitiivis ja laitoskonepestävä

Kaikki Ocean E-Vip tuolin sähköosat on suojattu vesitiiviiksi ja ruostumaton teräsrunko mahdollistaa koko tuolin pesun laitospesulaitteilla.



Päätuki vakiona

Miellyttäväkäyttöinen päätuki voidaan säätää syvyyss- ja korkeussuunnassa.

Tekniset tiedot

Lisätietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöopas, on osoitteessa www.campmobility.fi

	Istuinkorkeus	Istuinleveys	Kokonaisleveys	Kokonaissyvyys	Kokonaiskorkeus	Käsitukien väli armrests	Istuimen kallistus	Max. käyttäjäpaino
<i>Ocean E-Vip</i>	500 - 1050 mm	480 mm	730 mm	1010 mm (ilman jalkatukia) 1083 mm (jalkatukien kanssa)	1070 - 1620 mm (ilman päätukea)	470 mm	0° - 35°	150 kg

	Kokonaispaino
<i>Ocean E-Vip</i>	39 kg

Takuu

3 vuoden takuu



Valkoinen

CE



Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella. Voidaan pestä koneellisesti / autoklaavata. 85°C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan.

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com