

Pesutaso, hydraulinen

Selkäosan säädöllä



Pesutaso selkäosan säädöllä

Kaksiosainen pesutaso mahdollistaa selkäosan säädön 0–30° kaasujousella. Pesutason korkeutta voidaan säätää hydraulisesti välillä 48-87 cm.

Vakaa runkorakenne sekä suunta- ja keskuslukittavat pyörät tukevat hallittua käyttöä ja siirtämistä hoitotilanteissa. Alas käännettävät sivulaidat helpottavat potilaan käsittelyä, ja kulmissa olevat törmäyssuojat suojaavat sekä laitetta että ympäristöä.

Patja on muotoiltu siten, että se kerää pesuveden ja ohjaa sen keskellä olevan urituksen kautta hallitusti tyhjennystä varten jalkopäähän. Mukana toimitettava 1,1 metrin poistoletku sekä vakiona oleva niskatyyny tukevat käytännöllistä ja mukavaa käyttöä.

Käyttöaiheet:

- liikuntarajoitteiset potilaat, jotka ovat lähes täysin liikkumattomia ja täysin riippuvaisia muiden avusta.
- potilaan maksimipaino 150 kg
- potilaan pituus 120-190 cm



Selkäosan kulman säätö

Selkäosan kulman säätö mahdollistaa mukavan pesuasennon henkilöille, joille tasainen makuuasento on raskas tai hengitystä haittaava.

Selkäosan kulmaan voidaan muuttaa vaivattomasti puristusvivusta, mikä tekee säädöstä nopeaa ja sujuvaa hoitotyön aikana.



Tekniset tiedot

Patja-alustan leveys	65 cm
Patja-alustan pituus	191 cm
Ulkoleveys (reunakaiteineen)	80 cm
Ulkopituus (reunakaiteineen)	205 cm
Patja-alustan vähimmäiskorkeus	49 cm
Patja-alustan enimmäiskorkeus	88 cm
Max. käyttäjäpaino	150 kg
Suurin sallittu kuorma	200 kg
Pesutason paino	97 kg
Pyörät	Ø 125 mm
Jarrut	Keskuslukitus
Pesuveden lämpötila max.	85°



Materiaalit ja rakenne

- Runko: jauhemaalattu teräsputki
- Väri (runko): valkoinen

Puhdistus ja desinfiointi

- Pesutaso on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen käytön jälkeen.
- Puhdistus vedellä ja tavallisilla pesu- ja desinfiointiaineilla, jotka voidaan levittää kostealla liinalla, tai pestä vesisuihkulla.
- Älä käytä liuottimia, valkaisuaineita tai hankaavia materiaaleja.

Valmistaja: TIMO d.o.o.

Ajdovščina, Pod letališčem 5,
5270 Ajdovščina – Slovenia
info@timo.si
+386 (0) 5/36 89 330



- Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä kuvastossa ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility 2026



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi