

**INDIKAATIOIT**

Tärkein tapa estää painehaavojen syntymistä, on vaihtaa vartalon painepisteitä keskimäärin joka kolmas tunti. Näin rajoitetaan liian pitkäaikaista, samaan kohtaan kohdistuvaa painetta, verenkierron tukkeutumista luukyhmyjen kohdilla ja mahdollistetaan kudostenesteiden kierto. Älä kiristä vuodevaatteita liian tiukasti patjan ympärille, jotta patjan tehokkuus ei kärsi.

TUOTEKUVAUS

Alova-patja on staattinen viskoelastinen vahtomuovipatja painehaavojen ehkäisyyn ja hoitamiseen. Matalan joustavuuden viskoelastinen Alova vahtomuovi antaa pehmeän tuen (VMA/PEDIA/S) tai keskikovan tuen (VMA/PEDIA/M). Näiden yhdistelmä parantaa verenkiertoa ja minimoi painetta makuualueilla.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tarkoitettu henkilöille, joilla madaltunut liikkuvuus ja painehaarviski "normaalista korkeaan riskiluokkaan" (Braden scale -asteikon tai muun soveltuvan luokituksen mukaisesti, fysioterapeutin lausunnosta riippuen) sekä 1- ja 2-luokan painehaavojen hoitoon EPUAP -luokituksen mukaan.

KÄYTTÖSUOSITUKSET JA KONTRAINDIKAATIOIT

Ei erityisiä käyttöön eikä käyttöympäristöön liittyviä kontraindikaatioita. Koska "passiivista" patjaan kohdistuvaa painehäviötä ei ole, myös henkilöt, jotka ovat kevyitä tai joilla on selkärangan alueen vaurioita, voivat käyttää tätä tuotetta.

Patja on suunniteltu asennettavaksi lääkinälliseksi laitteeksi luokitellun hoitosängyn runkoon tähän tarkoitukseen suunniteltuun paikkaan. Patjaa on käytettävä mukana toimitetun päällisen kanssa. Jos käytetään sängyn sivulaitoja, patjan yläosan ja sivulaitojen yläosan välisen korkeuden on oltava vähintään 22 cm. Jos käytössä on useita toimintoja sisältävä vuode, tarkista paineen oikea jakauma.

TEKNISET TIEDOT

	Tuotteet:	
Mallit	VMA/PEDIA/S	VMA/PEDIA/M
Koot	160x80x14 cm	160x80x14 cm
Tiheys ja kovuus puristuksessa	PU VE : 80kg/m ³ 1.8 kPa PU HR :28kg/m ³ 3.0 kPa	PU VE : 80kg/m ³ 1.8 kPa PU HR :28kg/m ³ 3.0 kPa
Min ja max käyttäjätaino	15 - 60 kg	20 - 90 kg
Patjan materiaalit	100% PU (43% VE ja 57% HR)	
Päällisen materiaalit	PA Mesh - pintakäsitelty PU	

PESU-OHJE/DESINFIOINTI

Päällinen	Konepesu 90°C	Max. sallittu klooripitoisuus 5000ppm	Ei saa silittää	Ei kuivapesua	Rumpukuivaus alennetulla lämpötilalla	Käytä vain sallittuja pintapesuaineita / desinfiointiaineita

Toimitettua irrotettavaa päällistä käytetään suojaamaan patjaa kaikilta epäpuhtauksilta. Jos päällinen on vaurioitunut, sitä ei saa korjata itse, vaan se tulee vaihtaa uuteen, eikä patjaa saa käyttää ilman päällistä. Päällinen voidaan pestä ja desinfioida pesukoneessa +90°C:ssa. Päällinen voidaan desinfioida voimassa olevilla EU-alueella hyväksytyillä desinfiointiaineilla (älä käytä syövyttäviä tuotteita). Päällistä ei saa silittää eikä kuivapestä kemiallisesti. Päällisen tarkoituksena on rajoittaa ristikonaminaatioiden riskiä.

Tuote, on käsitelty käyttäjälle turvallisella biosidiaineella. Lisätietoja www.winnocare.fr

PAKKAUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Patja toimitetaan vetoketjulla varustetulla, irrotettavalla päällisellä. Tuote on valmis käytettäväksi välittömästi. Aseta patja päällisen yläpinnalle ommellun etiketin symbolien mukaisesti. Lakanoita ei saa kiinnittää patjaan, jotta patjan vaikutuksen eivät esty toimimasta. Patja tulee asentaa viskoelastinen materiaali päällimmäiseksi.

Viskoelastinen yläosa on merkitty ja helposti tunnistettavissa patjasta. Myös päällinen on merkitty. Kantapääosa on merkitty jalkapohja-symbolilla (ei kaikissa tapauksissa).

KÄYTTÖ

Vältä kosteuden pääsyä vahtomuovipinnalle.

Suojaaj patja systemaattisesti aina käyttäen (kuivaa) mukana toimitettua suojaapäällistä.

Älä päästä suoraan kosketukseen päällisen kanssa mitään pesuaineita, tahrainpoistotuotteita tai liuottimia ja "pinnan lävistäviä" teräviä esineitä.

UUDELLEEN KÄYTTÖ

Puhdista ja desinfioi patja "pesuaine / desinfiointiaine" -yhdistelmällä ennen kuin käytät patjaa uudelleen toisella henkilöllä.

Suosittellemme päällisen vaihtamista.

HOITO- JA HUOLTO-OHJE

Tarkasta säännöllisesti silmämääräisesti vahtomuovin kunto: ALOVA-materiaalin näkyvä kasaanpainuminen ja epätasainen ja hyvin hidaskunto palautuminen ovat merkkejä kulumisesta, jotka heikentävät tuotteen ominaisuuksia painehaavojen ehkäisyyn. Tarkasta vuosittain päällisen kunto, vaahdon tila, päällisen pinta ja saumojen (+vetoketjujen) kunto. Tarkasta rei'ät, repeämät tai vetoketjut ja ulkopinta luonnollisessa päivänvalossa.

KÄYTTÖ- JA SÄILYTYSOLOSUHTEET

Painetta tasaavat patjat tulee säilyttää vaakatasossa, tasaisella pinnalla, suoralta valolta ja kosteudelta suojattuna.

	Käyttö	Varastointi
Lämpötila	15°C – 45°C	-5°C – 60°C
Kosteus	30% - 70%	10% - 90%

HÄVITTÄMINEN

Älä hävitä tuotetta määrättyjen alueiden ulkopuolella.

TAKUU

ALOVA-patjojen takuu aika on 3 vuotta. Takuu alkaa ostopäivästä jälleenmyyjältä. Jos patjaa käyttää yksi potilas, takuu kattaa patjan ja päällisen. Jos patjaa käyttää useita potilaita, päällisen takuu aika lyhenee 1 vuodeksi. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista eikä korvaa oikeudellisia takuita. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on viallinen tuote. Jälleenmyyjä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kanssanne tuotteen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi.

KÄYTTÖIKÄ

ALOVA-patjojen arvioitu tekninen käyttöikä on 6 vuotta.

KÄYTTÄJÄPAINO:

(max) paine mmHg käyttäen suurinta sallittua painoa, mitattu tasaisella alustalla (0 °)

Malli	Max. käyttäjätaino	Pää	Takapuoli	Kantapäät
Patja VMA/PEDIA/M	90 kg	32	31	47

Toimitus sisältää:

- 1 patja
- 1 päällinen
- 1 käyttöohje