



Käyttöohje ja tekniset tiedot

JOSI-Wismi

www.johngmbh.com

Sisältö

JOSI-Wismi	3
Johdanto	3
Käyttötarkoitus	3
Declaration of Conformity	3
Käyttö ja optiot	4
Kontraindikaatiot	4
Takuu	4
Yleiskatsaus ja varustus	4
Turvallisuusohjeet	6
JOSI-Wismin avaaminen	8
Adapterijärjestelmät	10
JOSI-Wismin kokoontaminen	11
Säädöt	13
Painopisteen säätäminen	13
Kaatumisesteet	13
Jousitus	13
Istuinjärjestelmä	14
Turvavöiden säädöt	15
Pyörän vetovarsi	19
Jarrut / Seisontajarru	20
Istuinrunko / -alusta	20
Huolto	21
Tekninen tarkastus	21
Hoito- / pesuohjeet	21
Tekninen käyttöikä ja kestävyys	22
Uudelleenkäyttö	22
Tekniset tiedot	23

JOSI-Wismi

Johdanto

Kiitos laadukkaana John GmbH tuotteen JOSI-Wismin hankinnasta. JOSI-Wismi on täydellinen seuralainen luonnosta nauttimiseen läheistesi kanssa. Siihen voidaan sovittimen avulla helposti ja nopeasti asentaa erilaisia pyöriä tai polkupyörän vetotanko. JOSI-Wismi mukautuu siten erilaisiin maisemaolosuhteisiin. Istuimessa on pehmustettu päällinen. Lisäksi runko voidaan varustaa esim. pehmusteilla jalkatuilla ja päätuella.

JOSI Wismin voi kallistaa jopa 35° (istuinrunko + istuinjärjestelmä)

Ennen kuin käytät JOSI-Wismia, lue läpi tämä käyttöohje ja kaikki muistiinpanot. Tällä tavoin voidaan välttää käyttövirheistä aiheutuvia vaurioita ja voit käyttää JOSI-Wismia optimaalisesti.

Käyttötarkoitus

Mallista riippuen JOSI-Wismi on terapiarattaat tai istuinjärjestelmä + -runko tai istuinrunko, joka sopii lapsille ja nuorille, joilla on vakava liikkumiseen liittyvä vamma tai kyvyttömyys kävellä. Lisäksi JOSI-Wismi on sopiva "maastokäyttöön" ja avaa siten uusia mahdollisuuksia liikkua luonnossa.

Käyttäjän tarpeista riippuen JOSI-Wismiä voidaan käyttää terapiarattaina, juoksurattaina tai polkupyörän perävaununa. Lisävarustevalikoima ja modulaarinen rakenne mahdollistavat kokoonpanon, jota voivat käyttää myös henkilöt joilla on kävelyongelmia / tai ovat kykenemättömiä kävelemään, kuten:

- korkea tai matala lihastonus
- raajojen menetys
- raajavikoja ja / tai epämuodostumia
- nivelkontraktuureja
- nivelvaurioita

Declaration of Conformity / CE-vaatimustenmukaisuus vakuutus

Valmistaja, John GmbH ilmoittaa yksinomaisella vastuullaan, että JOSI-Wismi terapiarattaiden runko on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC vaatimusten mukainen.

Käyttö ja optiot

JOSI-Wismi soveltuu sekä päällystetyille että päällystämättömille teille, pyöriteille ja kävelyreiteille. Suuri etupyörän kallistuskulma tukee off-road-ominaisuutta.

- Lyhyen etuosan ja kääntyvän etupyörän avulla, sitä voi käyttää myös sisätiloissa.

Kontraindikaatiot

Huomioi:

Jos kuljetettavalla on craniocerebraalinen trauma ja / tai kaikki sairaudet, joissa on yliherkkyyttä vaikutuksille, käyttöä polkupyörän perävaununa on vältettävä.

Takuu

Takuuaika vastaa John GmbH:n yleisiä ehtoja:

- 3 vuotta: alumiinirunko
- 1 vuosi: jarrut, jarruvipu ja renkaat

Yleiskatsaus ja varustus (terapiarattaat)

- 12,5 tuuman off-road-eturengas
- 20 tuuman takarenkaat sis. rumpujarrut
- läpiakseli takarenkaissa
- 2 jarruvipua ja paikoitusjarru
- säädettävä jousitus molemmissa renkaissa
- säädettävä ergonominen käsi- / työntökahva
- alumiininen turvarunko
- kokoontaitettavat runko, kuomu ja selkäosa (ilman työkaluja)
- kuomu ikkunalla sis. turvatanko
- 5-pisteturvavyöliivi, pehmustettu, säädettävä (terapiarattaat)
- käsituet, verhoillut
- pehmustetut päälliset (terapiarattaat)
vaahtomuovi pehmusteet, nylon-päälliset
- jalkatuki pohjepohjusteella, säädettävä (optio)
- kaatumiseste, käännettävä (optio)

Turvallisuusohjeet

Lue käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava turvallisuusriskien minimoimiseksi. Lisäksi vaaratilanteiden välttämiseksi tarvitaan varovaisuutta ja tervettä järkeä. Muista tutustua JOSI-Wismiin ennen ensimmäistä käyttökertaasi.



On tärkeää noudattaa teknisiä tietoja (mukaan lukien sallittu kokonaispaino).



Käytä kaatumisesteitä tilatenteesta ja ympäristöolosuhteista riippuen.



Pneumaattisten ilmakumirenkaiden ilmanpaine tulee olla noin 2,5 bar.



Kiinnitä huomiota rattaiden stabiliteettiin ylämäkeen ja maastossa ajettaessa, älä aja suoraan esteitä päin.



Nosta JOSI-Wismiä vain rungosta.



Kiinnitä huomiota painon jakautumiseen äläkä kiinnitä painavia esineitä työntötankoon, joka vaikuttaa painopisteeseen.



Seisauta JOSI-Wismi aina tasaiselle pinnalle ja kytke seisontajarrut päälle.



Käyttäjät on aina kiinnitettävä 5-pisteturvavyöllä.



Älä koskaan jätä kuljetettavaa vartioimatta, vaikka hän olisi kiinnitetty turvavöillä ja jarrut olisi lukittu.



JOSI-Wismi on hyväksytty vain yhden henkilön kuljettamiseen.



Varmista, että kaikki ruuviliitännät, lukot, ja kiinnikkeet ovat turvallisesti lukittu.



Kytke jarrut päälle, aina kun asetat käyttäjää rattaisiin.



Käytä rampeja ja hissejä, kulje portaista vain toisen henkilön avustuksella.



Kiinnitä huomiota ettei sormet jää puristuksiin säädön ja asennuksen aikana.



Kiinnitä huomiota ettei kuljetuksen aikana JOSI-Wismistä ei roiku mitään osaa.















Varmista, ettei JOSI-Wismin ulkopuolella roiku käytön aikana mitään esineitä tai käyttäjän vartalon osia.






Valtuutetun jälleenmyyjän tulee tehdä kaikki säädöt ja asennukset (keskiasennus, turvavyön korkeus jne.). Samoin valtuutetun jälleenmyyjän tulee asentaa lisävarusteet.

Lisäksi, jos käytät Josi-Wismiä polkupyörän perävaununa:

-  *Pneumaattisten ilmakumirenkaiden paine tulee olla 3 baria.*
-  *Vältä tiukkoja käännöksiä ja äkillisiä suunnanmuutoksia.*
-  *Varmista, että vetovarsi on oikein kiinnitetty ja lukittu.
Katso kappale Polkupyörän vetovarsi.*
-  *Tutustu polkupyörän perävaunun ajo-ominaisuuksia ennen kuin kuljetat sillä lastasi.*
-  *Kuljetettavat on aina kiinnitettävä 5-pisteturvavyöllä.*
-  *Käyttäjän on aina pidettävä pyöräilykypärää polkupyörällä vedettäessä.*
-  *Älä käytä terapiapöytää polkupyörän perävaunussa.*
-  *Noudata aina liikennesääntöjä.*
-  *Varmista, että kaikki polkupyörän vetovarren ja adapterin osat on käytössä ja kiinnitetty oikein.*
-  *Älä tee muutoksia kytkentään äläkä mitään muutoksia tuotteeseen.
Perävaunu pidentää jarrutusmatkaa. Aja ennakoiden.*
-  *Noudata aina mukana toimitettuja "Weber-kytkimen" turvallisuusohjeita.*
-  ***Ole hyvä ja lue myös liitteenä olevat käyttöohjeet "Weberin kytkentä".***

Lisäksi, jos käytät istuinjärjestelmää ja JOSI-Wismi-runkoa:

-  *Varmista, että istuinjärjestelmä on tiukasti kiinnitetty adapteriin.*
-  *Tarkista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty JOSI-Wismi-runkoon.*
-  *Varmista, että oikeanlainen adapteri on lukittu oikein.*

JOSI-Wismin avaaminen



1) Avaa etuosa (tarvittaessa)

Avaa etuosa nuolen suuntaisesti.

Huom:

Tarvittaessa työntötanko on ensin avattava nuolen suuntaisesti.

Voit tehdä tämän avaamalla pikalukitukset molemmilta puolilta.




2) Nosta selkäosa ylös

Avaa pikalukitukset molemmilta puolilta
Nosta selkäosa ylös ja lukitse pikalukitukset uudestaan.

HUOMIO!

Varmista, että pikalukitus on lukittu oikein!
Lukitusten on oltava täysin lukittu myös toisiinsa.

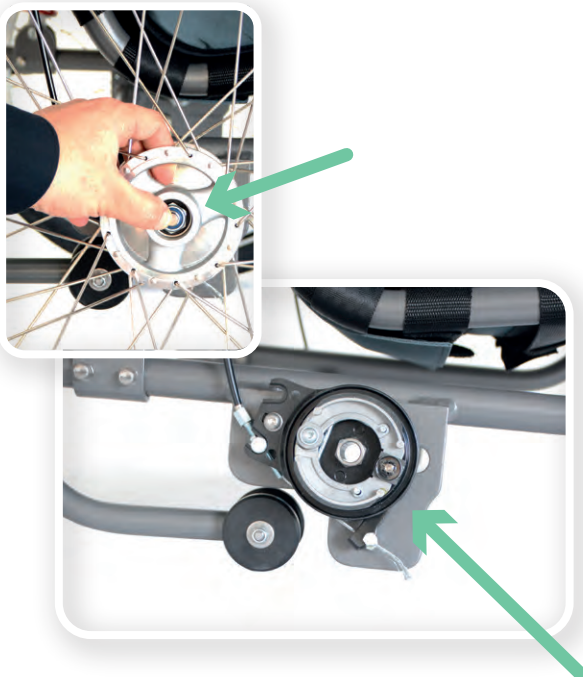

3) Kiinnitä takapyörät


Pidä vapautuspainiketta alhaalla ja aseta akseli akselin pidikkeeseen.
Kun akseli on asetettu kokonaan pidikkeeseen, vapautus voidaan irrottaa.

Huom:

Varmista, että akseliin ja akselitukeen ei pääse vieraita esineitä tai likaa!

Huomio!

Tarkista, että akseli on asennettu oikein.
Takapyörää ei saa olla mahdollista irrottaa ilman vapautusvivusta painamista.

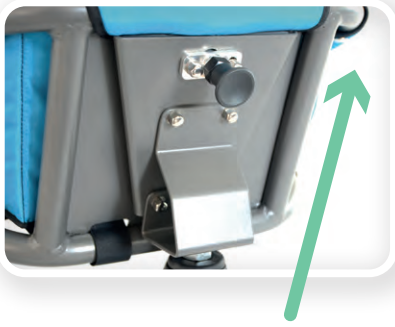

- 4) Pyörän asennus tai vetovarren asennus**
Katso kappale "Adapterijärjestelmä" seur. sivu.



- 5) Etuosan kokoontaittaminen ja lukitus**
Avaa etuosa kokonaan ja lukitse se kevyesti painamalla nuolen suuntaisesti.

HUOMIO!

Varmista, että lukitusmekanismi on kokonaan lukittunut paikoilleen.



- 6) Kuomun kokoontaittaminen**

HUOMIO!

Varmista, että lukitusmekanismi on kokonaan lukittunut paikoilleen.

Työntötangon säätäminen

Vedä pikalukitusvivusta työntötangon vapauttamiseksi.



- 7) Taittomekanismin suojiin asentaminen**

Sulje taittomekanismin suojus kiinnittämällä painonepparit.

Adapterijärjestelmät

Adapterit varmistavat kaikkien liitososien vakaan ja turvallisen pidon. Täydellinen muoto takaa nopean osan vaihdon.

Lisäosan vaihtamiseksi, vedä vain lukitusvivusta jonka jälkeen lisäosa voidaan irroittaa.




1) Asennus

Lisäosat asennetaan kiskoon liu'uttamalla osaa ylöspäin.

HUOMIO!

Varmista, että lukitusmekanismi on kokonaan lukittunut paikoilleen.

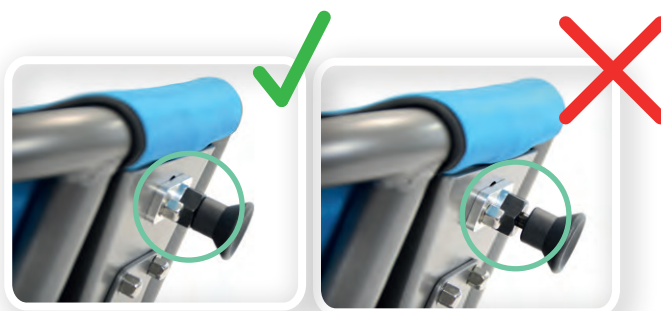

1) Irrottaminen

Lisäosat voidaan helposti irrottaa vetämällä lukitusvivusta ulospäin.

HUOMIO!

Varmista, että lisäosa on tiukasti lukittunut paikoilleen.

Saatavilla olevat adapterit

Terapiarattaisiin:

7" kääntyvä etupyörä



12.5" off-road etupyörä



Vetovarsi polkupyörään



JOSI-Wismin kokoontaittaminen



1) Kokoontaittomekanismi

Avaa kokoontaittomekanismin suojuukset.

Avaa nepparit ja irrota suojuukset

Vedä lukitusmekanismista nuolen suuntaan ja runko taittuu kasaan.



2) Kuomu / työntökahva

Vapauta kuomu vetämällä lukitusmekanismia ja taitamalla se kasaan.

Työntötanko voidaan siirtää alaspäin vapauttamalla pikalukitus molemmilta puolilta.

Huom:

Kuomun kangas tulee laskostaa kasaan oikeaan asentoon.



3) Selkäosan kokoontaittaminen

Kun vapautat pikalukituksen molemmilta puolilta, selkäosa voidaan taittaa kasaan.

JOSI-Wismin kokoontaittaminen



4) Pyörien irrottaminen

Takapyörät voidaan irrottaa akselin pikalukituksesta painamalla.

Adapterin irrottaminen

(katso kappale Adapterit)




5) Etuosan kokoontaittaminen

Taita etuosa kasaan nuoleen suuntaisesti vetämällä.

Huom:

Etuosa voidaan kiinnittää työntötangolla. Vapauta työntötangon pikalukitus, taita se etuosan päälle ja sulje pikalukitus uudelleen.

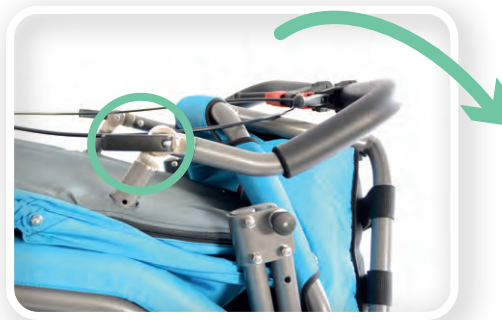



Säädöt


Painopisteen säätäminen

Rattaiden keskiosaa ja siten painopistettä voidaan säätää asentamalla akseli useisiin eri kohtiin keskiosassa. Tätä tarkoitusta varten ruuvi A ja mutteri B pitää irroittaa (katso kuva). Varmista, että osat koota kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.

HUOMIO!

 Väärin säädetyllä painopisteellä voi olla kielteinen vaikutus ajo-ominaisuuksiin. Vältä rattaiden kallistumista taaksepäin väärin säädetyin painopisteen takia.

 Kaatumiseste on saatavana lisävarusteena.

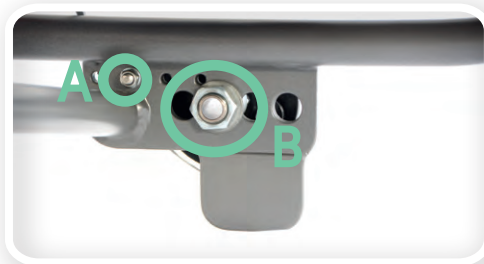

Kaatumiseste

Kaatumiseste voidaan kääntää rattaiden alle painamalla kuvan osoittamasta kohdasta.

Sitä voidaan käyttää myös kallistustukena.



Jousitus


Jousituksen kovuutta voidaan säätää ripustuksen säätörengalla käyttäjän painon mukaiseksi. Kiristämällä (käännä säätörengasta myötäpäivään) jouseen saadaan korkeampi jännitystaso ja siten säädettyä suuremmalle painolle sopivaksi. Alemman jännitystason saamiseksi säätörengasta voidaan löysätä (käännä säätörengasta vastapäivään).


Huom:

Jousituksen ei tulisi ylittää 35% kuormitettuna (JOSI-Wismi ja käyttäjä).

Esimerkiksi: Kokonaisjousitus 25 mm vähennys 20 % = 20 mm jousirengas

Huomio!

 Säätörengasta ei saa kääntää kierteen ulkopuolelle.

 Jousi ei saa olla liian löysällä aluslevyn ja säätörengaan välissä.

säätörengas

jousirengas 25 mm



Istuinjärjestelmä (lisävaruste)

JOSI-Wismi voidaan varustaa istuinjärjestelmällä paremman istuma-
asennon saavuttamiseksi. Kaikki varusteet voidaan säätää helposti
velcro-tarrapintojen avulla.

Istuinjärjestelmään kuuluu seuraavat osat::

- Muotoiltu päätuki (tarrasäädettävä)
- Thoracic-pehmusteet sis. selkäpehmuste (=vartalotuet, säädettävä)
- Anatomisesti säädettävä istuintyyny
 - o sis. reunapalat (säädettävä)
 - o Sivujen asemointipalat (säädettävä)
 - o Abduktiokiila (säädettävä)
- Jalkatuki (tarrasäädettävä)



Sivusuuntainen asemointi

Istuimen sivuttaissuuntainen tuenta voidaan kustomoida käyttäjän tarpeen mukaan. Korota istuintyynyä siltä sivulta, mistä haluat nostaa istuinasettoa.

Huom:

Tarvittaessa korotinpala voidaan poistaa myös kokonaan.



Reunapalat

Reunapaloja voi säätää avaamalla istuintyynyn vetoketju. Tyynyn etureunassa voi käyttää paksumpaa tai ohuempaa vaahtomuovipalaa.

Huom:

Tarvittaessa vaahtomuovipala voidaan poistaa myös kokonaan.

Turvavöiden asennus

Kiinnitä turvavyö seuraavasti: Ylemmät hihnat on ohjattava hartioiden ja alemmat hihnat reisien yli.

Huom: Varmista, että turvavyöt ovat olkapäitä vasten. Pehmeusteissa on tarranauha, joka pitää ne paikallaan.

Sulje solki seuraavasti:



1) Soljen sulkeminen

Aseta kaksi ylemmää soljen osaa toistensa päälle ja kiinnitä ne sitten turvavyön solkeen.

Huom:

Jos, vyö on liian lyhyt katso kohta 3 (turvavyön löysääminen)



2) Turvavyön pituuden säätö

Säädä turvavyön hihnan pituutta vetämällä hihnasta.



3) Turvavyön löysääminen

Hihnan irrottamiseksi avaa lukitusta ja istuimen etuosassa ja vedä hihnää pidemmäksi.

Huom:

Turvavyö aukeaa painamalla punaista aukaisunappia.

Turvavöiden säätö



1) Irrota kuomu

Avaa kuomu kokonaan (katso JOSI-Wismin kokoontaittaminen)

Avaa molemmat vetoketjut irrottaaksesi kuomun selkäosasta ja avataksesi selkäosan.



2) Irrota turvavyö

Löysää takana olevaa pituussäätimen kuusiokoloruuvia.

Vedä hihna kokonaan ulos pituussäätimestä.

Tarvittavat työkalut:

Kuusiokololenkkiavain 8 mm

Kuusiokoloavain 3 mm



3) Irrota turvavöiden hihnaliitin

Avaa selkänoja päästäksesi käsiksi hihnaliittimeen.

Irrota vyöt hihnaliittimestä ja vedä ne selkänojan etuosasta läpi.




4) Säädä turvavyöhihnat

Pujota hihnat takaisin aukon läpi.

**Huom:**

Jos lähtöpaikkoja ei ole vielä leikattu auki, ne on leikattava terävällä veitsellä auki.

HUOMIO!

 Leikkaa vain määrättyjä lähtöpaikkoja auki, repeytymisen välttämiseksi.

**5) Ohjaa turvavyön hihnat takaisin paikalleen**

Ohjaa hihnat uudelleen hihnaliittimeen ja tarkista, että ne ovat oikein asennettu.

6) Aseta selkäosa ja kuomu takaisin paikalleen:

- Sulje selkänojan vetoketju puoleen väliin asti.
- Kiinnitä hihnaliitin takana (asetä ruuvi rungon ja kankaan läpi) ja aseta hihnat takaisin hihnaliittimeen.
- Sulje selkäosan päällinen kokonaan.
- Kiinnitä kuomu kokonaan vetoketjulla.

Turvavyön ympärysmittan / pituuden säätö:

Huom: Jos rattaissa on takalaukku, se on ripustettava kokonaan ylös.

**1) Irrota takalaukku**

Löysää laukunpidikettä vetämällä sitä nuolen suuntaan.



2) Avaa selkäosa

Avaa selkätuen tarrapinta ja nosta se kokonaan ylöspäin, että yletyt turvavyöhihnan säätöön.



3) Säädä turvavyön pituutta

Vyön pidentäminen - Paina solkea.

Vyön kiristäminen - Vedä turvavyön hihnaa ja pidä soljesta kiinnit toisella kädellä.

Huom:

Kun vyö on asetettu haluttuun pituuteen, vedä hihnasta vyön kiristämiseksi.



4) Aseta selkäosan päällinen ja laukku takaisin

Sulje selkäosan päällinen ja lisää laukku takaisin paikalleen.


Pyörän vetovarsi

Vetovarren avulla JOSI-Wismiä voi käyttää myös polkupyörän perävaununa. Adapterijärjestelmä takaa nopean ja helpon käytön.

HUOMIO!



Lue luku Turvallisuusohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

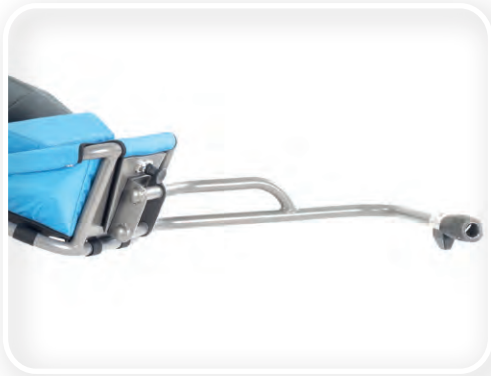

1) Vetovarren asennus

Asenna vetovarsi JOSI-Wismiin (katso kappale Adapterijärjestelmät)

2) Weber-kytkentä

Weberin avulla voit yhdistää vetovarren pyöräsi kanssa. (katso Weber-kytkennän asennus)

HUOMIO!



Lue Weber-kytkimen asennusohjeet ja noudata niitä tarkasti.



3) Turvavyön kytkentä

Kytke turvavyö runkoon kiinnitettyllä hihnalla.

HUOMIO!



Kiinnitä turvavyö JOSI-Wismin runkoon.



3) Turvallisuuspaketti

Asenna seuraavat osat:

- Heijastimet edessä (valkoinen)
- Heijastimet takana (punainen)
- Pyörän heijastimet
- Huomiolippu

HUOMIO!



Huomioi oheiset ohjeet, jotka koskevat turvasarjan asentamista.

Jarrut / Seisontajarrut



1) Jarruttaminen

Jarruta kahden jarrukahvan avulla. Molempia pyöriä voi jarruttaa myös erikseen, jonka ansiosta on mahdollista muuttaa suuntaa myös alasmäkee ajettaessa.

Huom:

Jarruja voidaan käyttää pysäköintijarruina. Tätä varten lukitse jarrukahva punaisella lukolla.



Istuinjärjestelmän runko



1) Asennuslevy (kallistettava)

Istuinrunгон istuinkulmaa voidaan säätää painamalla työntökahvan vapautusvivusta. Pidä lukituspainiketta painettuna alas, kun säädät asentoa. Kun istuinkulma on halutussa asennossa, voit vapauttaa lukon. Asento pysyy nyt säädetyssä asennossa.

huom:


Saatavana on myös jäykkä asennuslevy. Jäykkä asennuslevy voidaan asentaa kahteen eri istuinkulmaan.

huom:

Asennuslevy voidaan varustaa erilaisilla adaptereilla (esim. Trapezoidisella adapterilla). Noudata asennusohjeen käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.

huom:

Jalkatuet / jalkalaatikot kallistuvat automaattisesti yhdessä asennuslevyn kanssa.

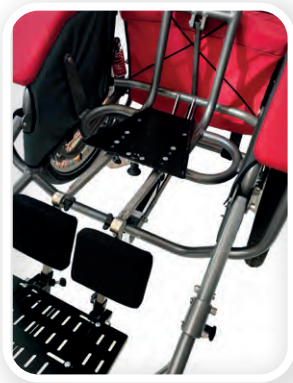

Huolto

Tekninen tarkastus

o Visuaalinen tarkastus (esim. vaurioiden osalta)	ennen jokaista käyttökertaa
o Turvavöiden säätö ja lukituksen toimivuus	ennen jokaista käyttökertaa
o jarrujen testaus	ennen jokaista käyttökertaa
o kokoontaittomekanismit ja lukitukset	ennen jokaista käyttökertaa
o valot (jos käytössä)	kuukausittain, ennen jokaista käyttökertaa
o renkaiden ilmanpaine	kuukausittain
o renkaat, laakerit, johdot jne.	kuukausittain
o ruuviliittimet	kuukausittain

Jos vikoja löytyy, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään korjataaksesi ne.

Hoito- / pesu-ohjeet

Runko voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla. Kaikki kankaat voidaan pestä lämpimällä vedellä ja desinfioida kaupallisesti saatavilla olevilla desinfiointiaineilla.

Säilytä JOSI Wismi kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. JOSI Wismin tulee olla kuiva ennen säilytystä, jotta vältetään homeen kasvulta ja hometahrojen muodostumiselta. Altista JOSI Wismi niin vähän suoralle auringonvalolle kuin mahdollista, jotta värit eivät haalistu.

Älä säilytä tuotetta pitkää aikaa polkupyörään kytkettynä.

Tekninen käyttöikä ja kestävyys

JOSI-Wismi on valmistettu korroosiosuojatuista materiaaleista (pulverimaalattu alumiinirunko). Tuote sisältää osia tai komponentteja, jotka kuluvat normaalissa käytössä, mutta joiden kuluminen riippuu tuotteen käytön tyypistä, tiheydestä sekä huollosta ja hoidosta. Näin on erityisesti intensiivisen käytön yhteydessä (päivittäinen käyttö kaikissa sääolosuhteissa tai vastaavissa). Näissä tapauksissa, joissa ennenaikainen kuluminen johtuu kovasta käytöstä, tuotteessa ei kuitenkaan ole automaattisesti mitään vikaa.


Kestävyys riippuu käyttäjien yksilöllisistä käyttötavoista ja -määrästä sekä hoidosta ja ylläpidosta, kuten:

- käyttömäärä kilometreinä
- kuormitus: matkustajien ja matkatavaroiden paino
- ajotapa: kovuus ja jarrutusten kovuus
- nopeat käännökset
- sääolosuhteet
- ultraviolettiäteet
- kosteus
- lika ja tahrat ja niiden puhdistaminen
- lämpötila
- suolainen ilma
- kosketus suolaisen veden kanssa
- katujen suolaus
- varastointi ja säilytysolosuhteet
- huollon ja hoidon määrä ja taajuus

Uudelleenkäyttö

Tuote soveltuu käytettäväksi uudelleen. Päälliset / verhoilu voidaan muuttaa erikseen tai poistaa puhdistusta varten. Yleensä on suositeltavaa, että JOSI-Wismi huolletaan valmistajalla ennen uudelleenkäyttöä. Kulutuvat osat on vaihdettava ennen uudelleenkäyttöä.

Tekniset tiedot

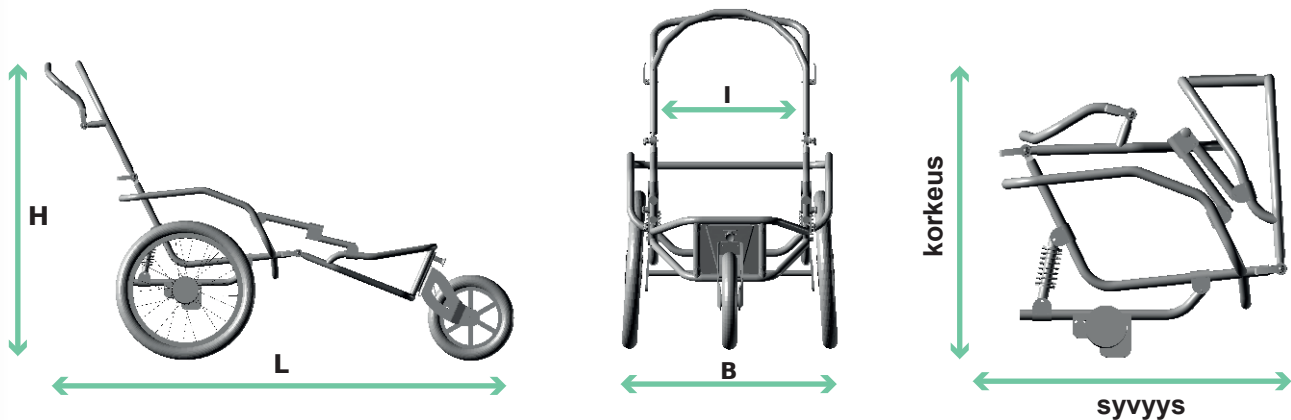

JOSI-Wismi	koko S	koko M	koko L
alustan leveys (B)	79 cm	79 cm	79 cm
pituus (L)	156 cm	167 cm	178 cm
korkeus (H)	111 cm	111 cm	121 cm
sisäleveys (I)	47 cm	47 cm	47 cm
pakkausmitat (BTH)	68 x 67 x 62 cm	68 x 67 x 62 cm	68 x 71 x 64 cm
kuormitus	85 KG	85 KG	85 KG
paino (runko ja päälliset)	16 KG	17 KG	19,5 KG
takapyörät	20"	20"	20"
istuinleveys	45 cm asti	45 cmasti	45 cm asti
istuinsyvyys	38 cm asti	38 cm asti	38 cm asti
jalkapituus	44 cm asti	52 cm asti	60 cm asti
selkäosan korkeus	80 cm	80 cm	90 cm
Kallistus (istuinjärjestelmä + runko)	35° asti	35° asti	35° asti