

Invacare nostoliinat



Optimaalinen sopivuus & mukavuus



Uusi nostoliinavalikoima tarjoaa optimaalisen sopivuuden

Uusi nostoliinavalikoimamme on suunniteltu tarjoamaan turvallisia, tuettuja ja mukavia siirtoja asiakkaillemme. Valikoimassa on uusia vaihtoehtoja, erilaisia malleja, kokoja ja kangasmateriaaleja, jolla varmistetaan, että nostoliina sopii täydellisesti jokaiselle henkilölle riippumatta siitä, onko heillä vain pieniä liikuntarajoitteita vai tarvitsevatko he koko kehon ja pään tuentaa.


Asiantuntijatiimimme ja toimintaterapeutit ovat käyttäneet aikaa varmistaakseen, että liinat ovat intuitiivisia ja helppoja käyttää, mikä vähentää nostoon käytettävää aikaa ja parantaa turvallisuuden tunnetta.

Valikoima koostuu 15 mallista, joista jokaista on enintään 6 kokoa ja jopa 3 eri kangasvaihtoehtoa. Tämä vaikuttava valikoima varmistaa, että kaikille löytyy sopiva nostoliina jokaiseen käyttötärpeeseen päivittäisistä siirroista sängystä pyörätuoliin / nojatuoliin, wc-siirtoihin tai suihkuun tai jopa uimiseen.



4

AVAIN- OMINAISUUTTA

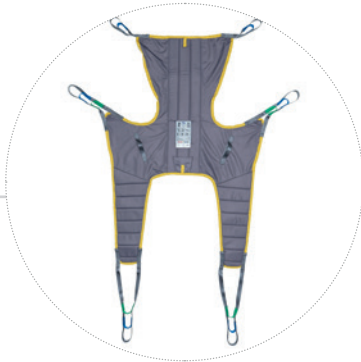

◀ Optimaalinen sopivuus

- ▶ Oikeanlainen nostoliina jokaiseen asiakas- ja nostotarpeeseen
- ▶ Vaikuttava valikoima 15 mallia, 6 kokoa ja 3 eri kangsvaihtoehtoa
- ▶ Tarkkaan harkitut mallit, leikkaukset ja tukiompeleet tukemaan juuri oikeita kehonosia
- ▶ Kaikissa liinoissa on silmukkakiinnitys, jotta liinat ovat mahdollisimman hyvin yhteensopivia eri nostohenkarien kanssa

Parempi turvallisuus ja käyttövarmuus ▶

- ▶ Pukemisvideot nopeasti löydettävissä QR-koodin avulla
- ▶ Selkeät tuotelaput, joissa yksinkertaiset pukemishojepiirroukset
- ▶ Comfort In Situ -liinoissa sertifioitu, ympäristöystävällinen ja palosuojattu materiaali



◀ Optimoitu käyttömukavuus

- ▶ Pehmeät Soft touch -materiaalit lisäävät käyttömukavuutta
- ▶ Pehmustetut selkä ja jalkaosiot optimaalisen painonjakautumiseen
- ▶ Pehmustetyynyt herkällä kainalon alueella

Helppo pukea ▶


- ▶ Pukemistasku estää liinan liukumista pois alta pukemisen aikana
- ▶ Kaksi värillistä keskilinjamerkkiä osoittavat selkärangan oikean kohdan
- ▶ Värilliset silmukat helpottavat oikeaa aseointia nostohenkariin



Oikean mallin valinta

Oikean nostoliinan valinnan päätavoitteena on antaa tarvittava määrä tukea vartalolle. **Invacare-nostoliinat on suunniteltu antamaan tukea alueille, joilla kehon hallinta ja lihastonus on heikentynyt.** Tärkeimmät arvioitavat kehonosat ovat jalat, lonkat, vartalo ja pää. Seuraava antaa yleiskuvan siitä, mikä nostoliinamalli pitää valita asiakkaan fyysisen toimintakyvyn mukaan:

Kehonhallinnan arviointi

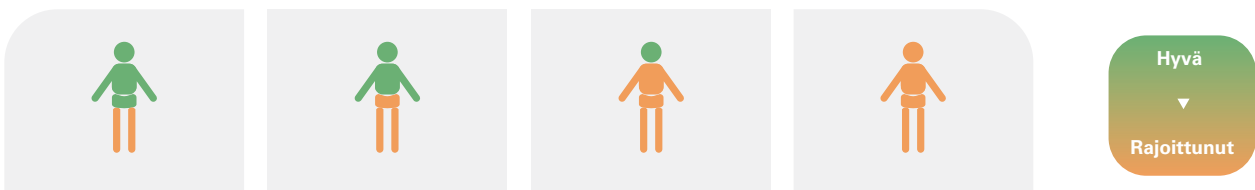

Vartalon tuenta eri **Invacare nostoliinat** -malleissa:

Erittäin kevyt ▼	Kevyt ▼	Keskitaso ▼	Täysi tuki ▼	Käyttötarkoitus
	Universal Low	Universal Standard	Universal High	Universal Standard
		Amputee	Universal High Plus	Vähemmän optimaalinen*
		Comfort Standard	Easy-Fit	Optimaalinen
		Comfort In Situ	Comfort High	
Dress Toileting Low				
Dress Toileting High				
Light Transfer Support				
Standing Transfer Vest				
Standing Transfer Vest with Groin band				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				

*Vähemmän optimaalinen


On tärkeää ottaa huomioon, että asiakkaalla on enemmän toimintakykyä jäljellä, kuin mitä liinan tuentatase sallii heidän käyttä. Tosin myös toimintakyky saattaa heikentyä ajan myötä. Toisaalta, mitä isommalta alueelta tukeva liina on käytössä, sitä työlämpi se on pukea.

Oikean koon valitseminen

Lantion leveys ja **selkäosan korkeus** istuma-asennossa ovat tärkeimmät tekijät oikean koon valinnassa. Kävelyliinoissa myös **vyötärön ympärysmitta** on tärkeä.

Asiakkaan paino on otettava huomioon pääosin vain nostoliinan maksimaalisen turvallisen työkuorman kannalta. Oikean koon valitsemiseen se ei niinkään sovellu.

Invacare-nostoliinan valintaoppaasta saat täydellisen yleiskuvan mallien mitoista ja oikean koon mittauksesta.

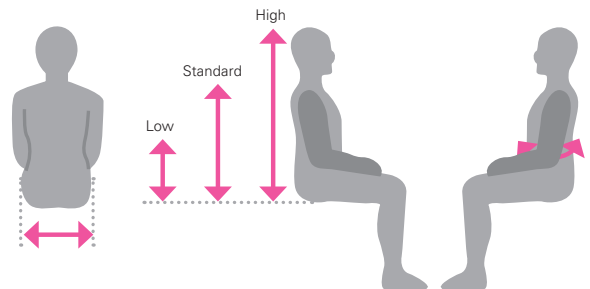

► Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
► Turvallinen max. kuormitus	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Invacare nostoliinat passiivisiin nostoihin

Universal tuoteperhe

Yleisnostoliinat päivittäiseen potilaan käsittelyyn.



◀ Universal Low

- Tukee lantiota ja alaselkää
- Sopii henkilöille, joilla hyvä vartalon ja pään kontrolli
- Voidaan käyttää nostoihin istuvasta istuvaan asentoon.



◀ Universal Standard

- Tukee koko vartaloa, mukaan lukien olkapäät, ei tue niska ja päätä
- Sopii henkilöille, joilla hyvä pään kontrolli
- Voidaan käyttää nostoihin makaavasta asennosta, lattialta ja istuvasta istuvaan asentoon.



◀ Universal High

- Tukee koko vartaloa, mukaan lukien pään ja niskan
- Nostettava istuu hieman kallistetussa asennossa
- Sopii myös henkilöille, joilla rajoittunut vartalon, lantion ja pään kontrolli
- Voidaan käyttää nostoihin makaavasta asennosta, lattialta ja istuvasta istuvaan asentoon.



◀ Universal High Plus

- Samat ominaisuudet kuin Universal High, mutta nostettava voi pitää kätet nostoliinan ulkopuolella ja mahdollistaa siten interaktiivisemmän noston.

Nostoliinat pienemmällä aukolla

Henkilöille, jotka tarvitsevat pienemmän hygieniakukon.



◀ Amputee

- Tukee koko vartaloa ja lantiota, ei tue niska ja päätä
- Sopii amputaatiopotilaille, joilla hyvä pään kontrolli
- Ei sovi spastisille potilaille
- Nostettava istuu hieman kallistetussa asennossa
- Voidaan käyttää nostoihin makaavasta ja istuvasta asennosta istuvaan asentoon.



◀ Easy-Fit

- Tukee koko vartaloa, mukaan lukien niska ja päätä
- Sopii myös henkilöille, joilla rajoittunut vartalon, lantion ja pään kontrolli
- Erilliset jalkatuet tekevät pukemisesta helpompaa kuin Comfort-liinoissa
- Tarjoaa hyvän lantion asennon ja nostettava voi istua pystymässä asennossa.

Nostoliinat suuremmalla aukolla

Suurempi aukko WC-käyntejä ja helpompaa pukemista varten.



◀ Dress Toileting Low

- Sopii henkilöille, joilla hyvä vartalon ja pään kontrolli.
- Vyö lisää tukea vartalon ympärille ja takaa turvallisen asennon.
- Voidaan käyttää nostoihin istuvasta istuvaan asentoon.



◀ Dress Toileting High

- Samat ominaisuudet kuin Dress Toileting Low-liinassa, mutta päätuen ansiosta soveltuu myös henkilöille, joilla rajoituksia pään kontrollissa.

Comfort tuoteperhe

Hammock (riippukeinu) -tyyliset liinat ovat ideaaliset henkilöille, joilla on kroonisia kipuja ja polven yläpuolelta amputoiduille henkilöille. Comfort In Situ -nostoliina on paras vaihtoehto, kun liina halutaan jättää henkilön alle istumaan siirron jälkeen.



◀ Comfort Standard

- Tukee koko vartaloa
- Sopii henkilöille, joilla hyvä pään kontrolli
- Sisältää hyvin asemoidut nostokahvat



◀ Comfort High

- Tukee koko vartaloa, mukaan lukien pään ja niskan
- Sopii myös henkilöille, joilla rajoittunut vartalon, lantion ja pään kontrolli
- Sisältää hyvin asemoidut nostokahvat
- Saatavana myös hygienia-
aukolla verkkomateriaalina



◀ Comfort In Situ

- Tukee koko vartaloa
- Sopii henkilöille, joilla hyvä pään kontrolli
- Suunniteltu kahvattomaksi ja jätettäväksi henkilön alle siirron jälkeen.
- Kaikki 3 kangasvaihtoehtoa (polyester-, spacer, verkko-) valmistettu erityissertifioidusta palosuojatusta kangasmateriaalista.
- Ympäristöystävällinen materiaali
- Puolueettomasti EN 1021 (osioiden 1 ja 2) mukaan testattu ja hyväksytty.



Nostovyöt

Sopii nopeisiin siirtoihin, voidaan valita erityisesti silloin, kun siirtymiseen tarvitaan tukea, mutta henkilö haluaa muuten liikkua itsenäisesti.



◀ Light Transfer Support nostovyö

- Sopii henkilöille, joilla hyvä vartalon ja pään kontrolli
- Voidaan käyttää siirtoihin istuvassa asennossa
- Voidaan käyttää nostoliinana yksittäisen käden tai jalan tukemiseksi, tai tarvittaessa myös lisätukena toiselle liinalle.

Nostoliina tasapainon, seisomisen ja kävelyn harjoitteluun

Helppo pukea ja irrottaa, voidaan valita, kun halutaan keventää painokuormitusta aktiivisemmalta henkilöltä.



◀ Standing Transfer Vest kävelyliina

- Puetaan vyötärön ympärille, käyttäjä jalat tukevasti maassa seisoen
- Sopii käyttäjille, jotka pystyvät seisomaan, mutta tasapaino ja kävelykyky on heikentynyt
- Lisävarusteena saatavat haararemmit auttavat pitämään Standing Transfer kävelyliinan paikallaan ja lisäävät turvallisuutta

Invacare nostoliinat aktiivisiin nostoihin



◀ Stand Assist

- Käyttäjille, jotka pystyvät hieman varaamaan jalkojensa varaan, mutta eivät pysty nousemaan seisomaan itsenäisesti.
- Käyttäjän tulee olla koherentti, ja hyvä vartalon ja pään kontrolli
- Erittäin hyvin pehmustettu, joka lisää käyttömukavuutta
- Selkäosassa luistamaton non-slip -materiaali



◀ Transfer Stand Assist

- Samat ominaisuudet kuin Stand Assist -liinassa, mutta lisänä jalkaosat

Lisävarusteet ▾



Pidennyslenkit

▲ Pidennyslenkkien avulla voi lisätä eri asemointimahdollisuuksia. Saatavana pituudet 20 cm ja 30 cm.



Nostolenkin merkkuspalat

▲ Merkkuspalalla voi merkata mitä nostolenkkejä on tietyllä potilaalla käyttänyt. Myydään 4 kpl:n pakkauksissa.


Koot ja materiaalit ▼

▼ Tuoteperhe	▼ Mallit	▼ Koot (tuotenrot Polyester*)						▼ Materiaalit		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Polyester Net	Spacer	
Universal	Universal Low	802860033	820000301	820000302	820000303	802860034		●	●	●
	Universal Standard	802860045	820000289	820000290	820000291	820000292		●	●	●
	Universal High	820000264	820000265	820000266	820000267	820000268	802860048	●	●	●
	Universal High Plus	802860049	820000279	820000280	820000281	820000282		●	●	●
Pieni aukko	Amputee	802860070	820000348	820000349	820000350	820000351		●		
	Easy Fit	820000312	820000313	820000314	820000315	820000316		●		●
Iso aukko	Dress Toileting Low	802860068	820000304	825000305	820000306	820000307		●		
	Dress Toileting High	802860069	820000308	820000309	820000310	820000311		●		
Comfort	Comfort Standard	802860054	802860055	802860056	802860057	802860058		●	●	●
	Comfort High	802860063	802860064	802860065	802860066	802860067		●	●	●
	Comfort In Situ	802860015	802860016	802860017	802860018	802860019	802860020	●	●	●
Nostovyö	Light Transfer Support		820000359		820000360			●		
Kävelyliina	Standing Transfer Vest	820000352	820000353	820000354	820000355	820000356		●		
Seisomaannostava	Stand Assist	802860071	820000361	820000362	820000363	820000364		●		
	Transfer Stand Assist		802860010	802860011	802860012	802860013		●		

* Pinkki=uusi koko/tuote


Lataa kaikkien kokojen ja materiaalien tuotenumerkartasto www.campmobility.fi/nostoliinat

Materiaalit ▼

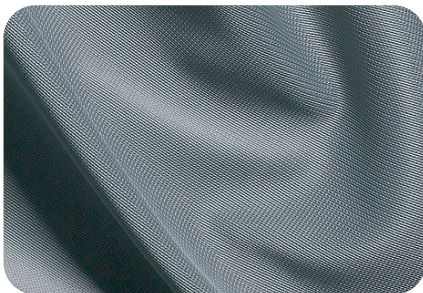


Polyester - Standard

▲ Vahva materiaali, joka on kulutusta kestävä ja helppo pukea. Se liukuu tasaisesti paikalleen ja kuivuu nopeasti pesun jälkeen. Vakiomateriaali kaikissa malleissa.

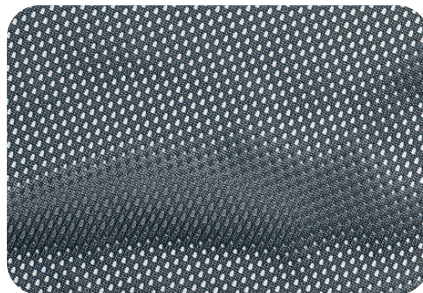

Polyester Net - Verkkomateriaali

▲ Polyester Net tunnetaan myös nimellä suihkuliina, soveltuu erinomaisesti uimiseen tai suihkutukseen. Nopeat vedenpoisto- ja kuivumisominaisuudet.

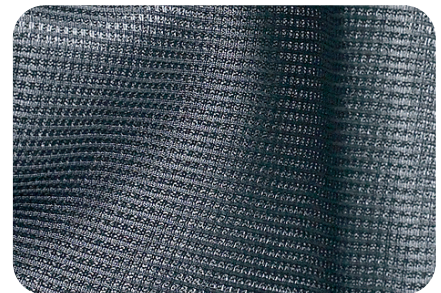

Spacer - Joustava polyester

▲ Hengittävä Spacer on kahteen suuntaan joustava materiaali joka mukautuu nostettavan vartalonmuotoihin ja tarjoaa paremman mukavuuden ja tuen.

Tekniset tiedot ▼

Löydät kattavammat tiedot tuotteesta, mukaan lukien tuotteiden käyttöohjeet www.campmobility.fi



Max. käyttäjäpaino ▼



Max konepesu-
lämpötila ▼



Valkaisu ▼



Kuivaus
koneessa ▼

**Invacare
nostoliinat**

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg

90° C

Älä käytä
valkaisuaineita!

Matala lämpötila

Kaikki liinat tulee testata ja säätää asiakkaan koon mukaan optimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi siirron aikana.

Riskinarviointi on suoritettava ennen nostoliinan käyttöä toisen valmistajan nostimessa.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil Switzerland



Yes, you can.®