


Nostoliinojen koko-opas



Yes, you can.

Oikean koon valinta

- ▶ Oikean nostoliinan koon valinnassa tärkeimmät mitat ovat lantion leveys ja selän korkeus istuma-asennossa. Liinoissa, joissa on vyöt, myös vyötärön ympärysmitta on tärkeä.

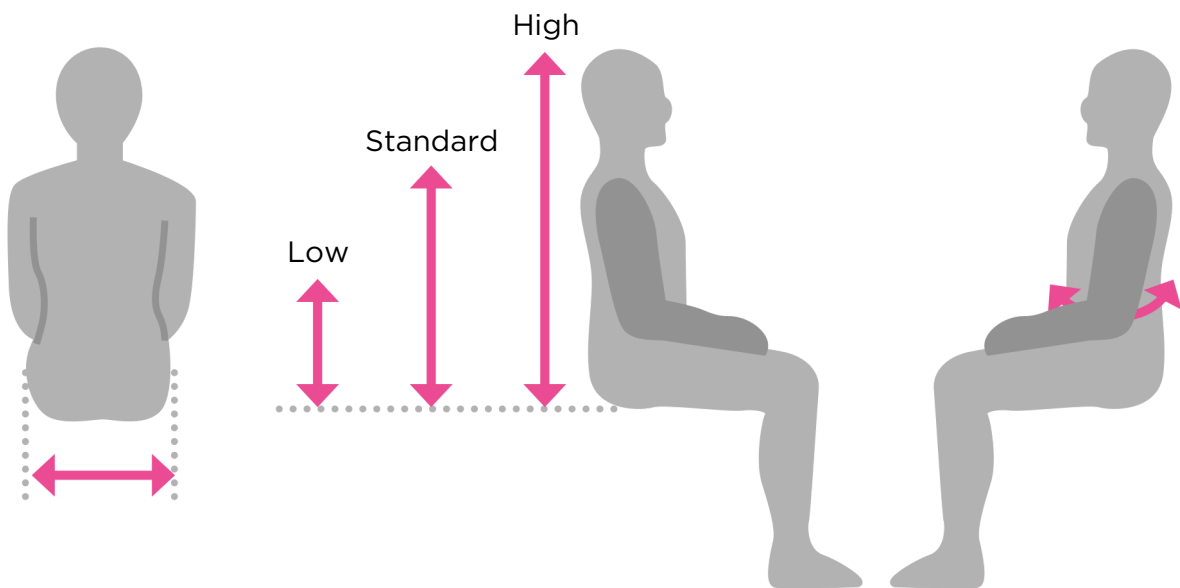

Invacare nostoliinojen koot ja SWL (safe working load)

► Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
► SWL	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Asiakkaan paino tulee ottaa huomioon lähinnä nostoliinan enimmäisturvallisen työkuorman (SWL) osalta. Sitä ei tule käyttää oikean liinakoon määrittämiseen.

Jos pään tukea ei tarvita, oikea selän korkeus mitataan alaselästä olkapäiden/niskan tasolle. Jos pään tuki tarvitaan, mittaukseen tulee sisällyttää myös pää.

- ▶ Jos nostoliina on liian suuri, asiakas saattaa luiskahtaa pois. Jos nostoliina on liian pieni, asiakas voi silti luiskahtaa pois, erityisesti silloin kun keuhonhallinta on heikompaa. Liian pieni liina voi myös pahentaa asiakkaan terveydentilaa. Jos asiakas sijoittuu kahden koon väliin, hieman pienempi liina voi tarjota paremman tuen ja turvallisuuden.





Jotkin terveydentilat, kuten aivohalvaus, tuki- ja liikuntaelinten ongelmat, amputaatiot tai tietyt haavat, voivat vaikuttaa nostoliinan valintaan.

Mitat



► Yksi tärkeimmistä turvallisen siirron tekijöistä on lantion leveyden ja nostoliinan jalkatukien välisen aukon välinen yhteensopivuus. Jos koko jää kahden koon väliin, pienempi koko voi pitää asiakkaan turvallisemmin paikoillaan.

Invacare-nostoliinat erillisillä jalkatuilla

Universal tuoteperhe, normaali aukko		XS	S	M	L	XL	XXL
Universal Low	A	820	850	920	950	970	
	B	700	800	935	1075	1140	
	C	280	350	375	405	405	
	D	365	410	480	575	730	
Universal Standard	A	965	1000	1085	1180	1240	
	B	800	915	1050	1095	1240	
	C	405	510	560	585	590	
	D	365	410	480	555	720	
Universal High	A	1040	1080	1425	1555	1600	1650
	B	740	845	1000	1120	1190	1285
	C	615	770	900	1000	1000	1000
	D	310	350	375	450	570	600
Universal High Plus	A	1335	1385	1510	1580	1590	
	B	500	570	660	740	850	
	C	705	880	935	970	970	
	D	305	345	455	565	630	

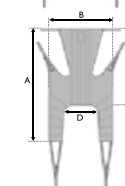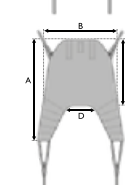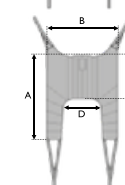
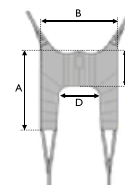


Pieni aukko		XS	S	M	L	XL
Amputee	A	1060	1100	1160	1360	1510
	B	815	930	970	1230	1360
	C	390	490	520	570	600
	D	285	320	355	410	500
Easy-Fit	A	1105	1130	1200	1270	1360
	B	710	760	800	860	950
	C	590	630	675	720	760
	D	150	185	235	245	255
	E	170	180	190	210	210
	F	120	150	195	215	225

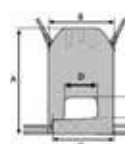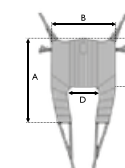


Suuri aukko		XS	S	M	L	XL
Dress Toileting Low	A	840	870	950	1020	1100
	B	620	710	800	900	1080
	C	160	200	230	230	270
	D	380	430	495	600	760
Dress Toileting High	E	400	400	465	465	465

Samat mitat kuin Dress Toileting Low-mallissa, lisäksi mitta "E"

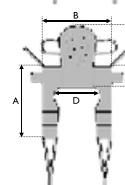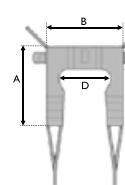


Invacare-nostoliinat yhtenäisillä jalkatuilla koko vartalon tukemiseen

Comfort Family		XS	S	M	L	XL	XXL
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395
	C	505	550	610	675	745	820
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340
Comfort High	A	1040	1150	1395	1445	1460	
	B	970	1050	1170	1290	1330	
	C	510	550	610	675	745	
	D	960	1020	1160	1280	1470	

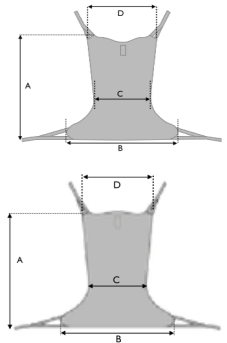


Kävelyliina

		XS	S	M	L	XL
Standing Transfer Vest	A	150	150	180	180	180
	B	750	850	950	1050	1200
Nivushihna	C	-	850	-	950	-
	D	-	300	-	350	-

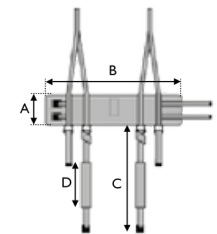

Nostovyö Transfer Support


		S	L
Light Transfer Support	A	930	1120
	B	120	120

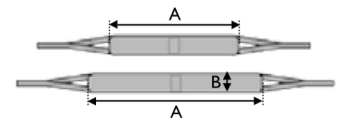

Invacare-nostoliinat seisomaan nostaviin henkilönostimiin

		XS	S	M	L	XL
Stand Assist	A	260	260	330	360	360
	B	840	840	895	950	1020
	C	900	950	1170	1270	1810
Transfer Stand Assist	D	-	965	1060	1160	1260

Samat mitat kuin Stand Assist -siirtovyössä, lisäksi mitta "D"

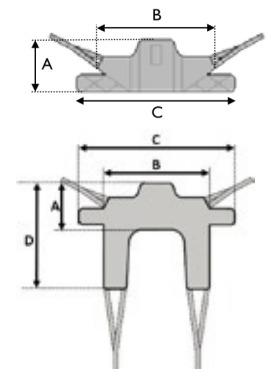

► Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
► Safe Working Load (kg)	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg