





Buffalo 150 -siirtymälauta

Lasikuidusta valmistettu Buffalo 150 -siirtymälauta on helppo- ja monikäyttöinen apuväline potilaan siirtoon esimerkiksi pyörätuolista vuoteeseen tai wc-istuinelle. Siirtymälauta on ainoastaan neljä millimetriä paksu ja siinä on kädelle otekolo. Lisäksi siirtymälaudassa on kaksi koloa, jotka pitävät siirtymälaudan vakaana siirron aikana. Kevyen painon ansiosta se on myös helppo kuljettaa mukana. Buffalo 150 on valmistettu Italiassa.

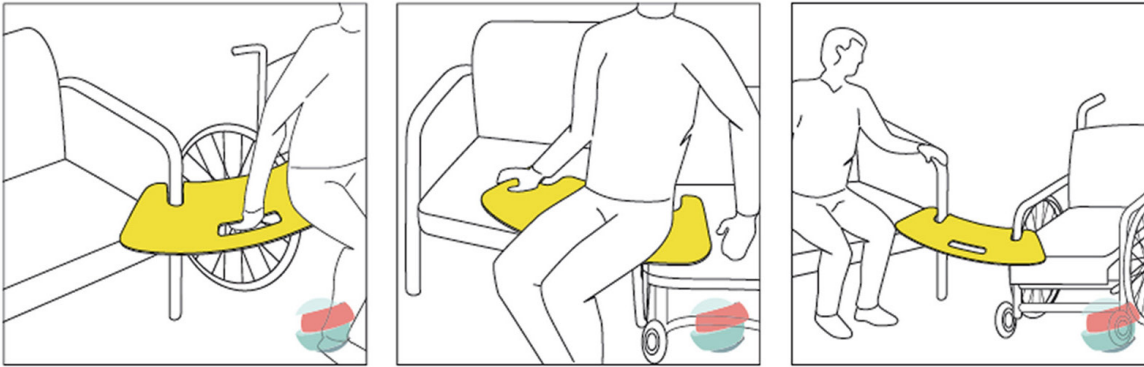


Buffalo 150 -siirtymälauta on joustava ja soveltuu monipuoliseen käyttöön.

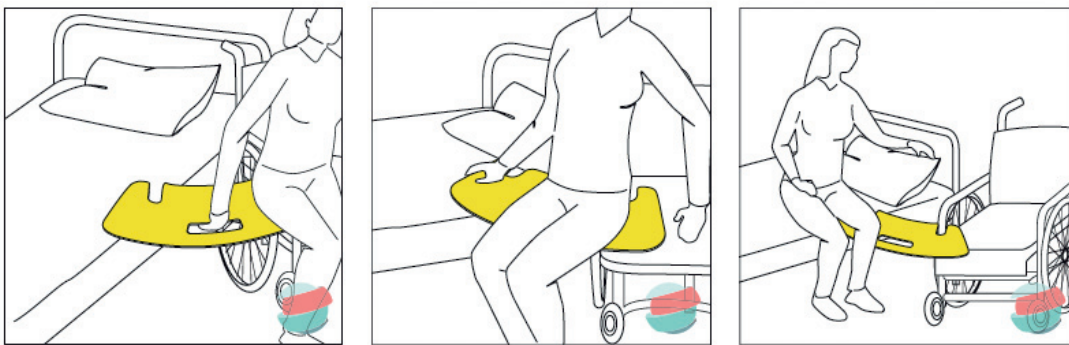


Siirtymälauta soveltuu erityisen hyvin pyörätuolissa olevan henkilön siirtoon kaikissa kodin ympäristöissä, kuten keittiössä sekä makuu-, olo ja kylpyhuoneissa.



Siirtymälauta soveltuu myös ulkokäyttöön ja se on kevyen rakenteensa ansiosta helppo kuljettaa mukana. Potilas voidaan siirtää siirtymälaudan ansiosta esimerkiksi pyörätuolista autoon ja toisten päin. Lisäksi sen kanssa on helppo siirtyä esimerkiksi julkisissa tiloissa pyörätuolista penkille.

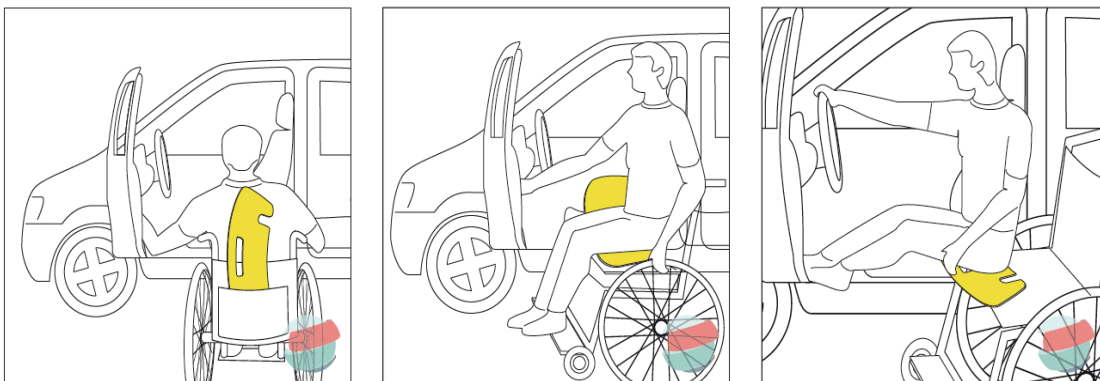

- ↔ 77 cm
- ↗ 32,5 cm
- ↑ 0,4 cm
- 📦 1,23 kg
- max 150 kg*

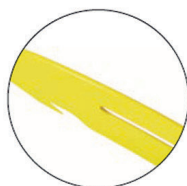

Miksi se on niin ohut? Tähän on selkeä syy. Useiden potilaiden on vaikea päästä paksun siirtymälaudan päälle, koska he eivät pysty nostamaan kehoansa kuin muutaman sentti- tai millimetrin. Buffaloon suunniteltiin on panostettu siirtymälaudan toimivuuteen.

Miksi se on niin sileä ja liukas? Tällöin siirrettävä henkilö voi liukua helposti laudan päältä toiseen.

Miksi se on hieman joustava? Käyttäjä joutuu usein siirtymään kahden eri korkeudella olevan istuinpinnan (esimerkiksi wc-istuin ja pyörätuoli) välillä. Joustavuuden ansiosta siirtymälauta on miellyttävä käyttää ja soveltuu erilaisiin siirtotilanteisiin.


Miksi se on banaanin muotoinen? Kaarevan muodon ansiosta siirtymälauta tarjoaa vakaan kaksoistuennan siirtymäpisteiden välille. Lisäksi kaarevuus mahdollistaa myös käyttäjän liikkeen kaarevuutta vaativissa siirtotilanteissa.

Miksi siirtymälaudan pohjassa ei ole tarroja? Käyttäjien on helpompi ottaa siirtymälauta pois pakaroidensa alta, kun he ovat lopettaneet siirtymävaiheen.

Miksi otekolo? Tämä helpottaa liukumista käyttäjille, joilla on raajoissa heikot voimat.

Miksi siirtymälaudassa on kaksi lovea? Tämä auttaa käyttäjää pääsemään lähemmäksi niin tavallisen tuolin kuin pyörätuolin käsinojaa.

Miksi Buffalo 150 on tehty muovista eikä puusta niin kuin perinteiset siirtymälaudat? Perinteiset siirtymälaudat ovat hyvin usein raskaita ja jopa vaarallisia. Usein siirtymälautojen käyttäjillä on herkkä iho. Ajan myötä puulaudoissa on usein naarmuja ja niistä saattaa irrota myös puun siruja.

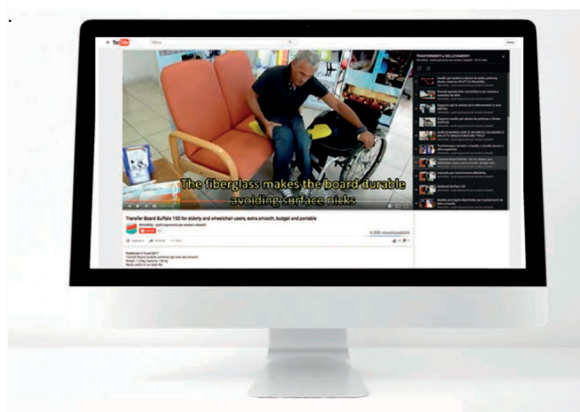

Valmistaja:

Allmobility Trading srl
via G. Balla, 4 - 42124 Reggio Emilia
ph. 0522 941078
mob. 388 6389624
e-mail: info@allmobility.it
Internet: www.allmobility.it

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2017 Camp Mobility Finland

Katso Buffalo 150 -video Youtube-palvelussa osoitteesta:

<https://www.youtube.com/watch?v=MOeimG-P2qs&list=PLXGq5ureUKqbCC0GuIAHJKPP3hYWoDAKl&index=12>

