

Siirtolaite Gateway

Monikäyttöinen siirtolaite
henkilön siirtämisiin



Siirtämisiin ja kuntoutukseen

Rehasense Gateway on monikäyttöinen siirtolaite, jota voidaan käyttää kääntölevyn tavoin esim. henkilön siirtämiseen pyörätuolista sängylle. Siirtolaitetta voi käyttää myös hieman pidempiin siirtoihin kuten sängyltä kylpyhuoneeseen kuljetukseen. Soveltuu käytettäväksi henkilöiden kanssa, jotka pystyvät hieman varaamaan painoa myös omille jaloilleen.

Gateway on erinomainen laite myös kuntoutukseen: laitteen avulla voidaan hyödyntää jäljellä olevaa lihasvoimaa ja vahvistaa sitä. Jalustan ja runkoputkien muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissakin tiloissa sekä pääsyn tuolien ja wc-istuimien lähelle.

Kaarevaksi muotoillut vaakatasoiset runkoputket antavat siirrettävän vartalolle enemmän tilaa ja antavat useita eri otemahdollisuuksia. Säätimet ovat pehmustetut sekä korkeus- ja kulmasäädettävät. Pyörät voidaan lukita jalkapolkimen avulla.



Käyttöalueet

Gateway on suunniteltu käytettäväksi niiden henkilöiden siirtämiseen, joilla on liikkumisen kanssa ongelmia. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi niiden henkilöiden siirtämiseen paikasta toiseen, jotka eivät voi kävellä tai seistä itsenäisesti ilman avustusta tai tukea

Enimmäiskäyttäjäpaino on 150 kg.

Kokoontaitettava

Gateway siirtolaite voidaan taittaa kasaan varastointia varten pikalukituksen avulla, ja voidaan purkaa osiin kuljetusta ja varastointia varten.

Lukittavat pyörät

Molemmat pyörät voidaan lukita yhdellä liikkeellä jalkapolkimen avulla.



Säädettävät säätimet

Korkeus- ja kulmasäädettävien, kaarevaksi muotoiltujen ja pehmustettujen säätimien paikkaa voidaan säätää helposti pikalukituksen avulla.




Nosto- ja siirtovyö Gateway Belt

Rehasense Gateway Belt on Gateway siirtolaitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettu nosto- ja siirtovyö, jota voidaan käyttää esim. henkilön siirtämiseen pyörätuolista sängylle, kylpyhuoneeseen tms. Soveltuu käytettäväksi henkilöiden kanssa, jotka pystyvät hieman varaamaan painoa myös omille jaloilleen.

Materiaalit: Polyamidi, PU-päällinen, PES.
Koot S/M ja L/XL
Maksimikuormitus 210 kg.
Konepesu +60°C.



Käyttöohjeet

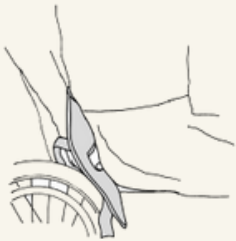

1. Pue siirtovyö henkilön päälle siten, että joustava osa on ylöspäin ja jäykempi osa alaspäin..



2. Kallista henkilöä eteenpäin tai sivulle niin, että hän saat asetettua vyön alaosan istuinkynnyksen alle.




3. Kiinnitä vyö lukitusmekanismilla. Edessä olevan osan tulee olla koko pituudeltaan alla olevan osan suuntaisesti.




4. Lukitusremmi kierretään siirtolaitteen ympäri, jotta potilaan on mahdollisimman turvallista olla seisoma-asennossa.



5. Lukitse siirtolaitteen jarrut. Pyydä siirrettävää nojaamaan eteenpäin ja tarttumaan siirtolaitteen kädensijoihin ja avustajia tarttumaan siirtovyön lenkkeihin.

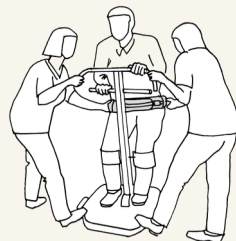

6. Avusta henkilö seisoma-asentoon.

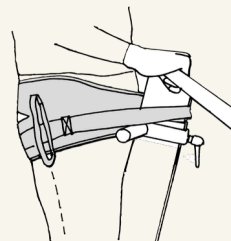


7. Varmista, että henkilö seisoo tukevasti siirtolaitteessa. Aseta vyön lukitusremmi siirtolaitteen ympärille. Kiinnitystapa riippuu siitä, mikä malli on kyseessä.

8. Varmista, että lukitusmekanismi on kunnolla kiinni. Kuulet pienen naksahduksen, kun vyö lukkiutuu. Siirrä potilas haluamaasi paikkaan siirtolaitteen avulla.

Tekniset tiedot

Gateway

Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Kokonaispaino	19,2 kg
Max. korkeus	120,2 cm
Min. korkeus	19,6 cm
Max. leveys	57,2 cm
Min. leveys	36,5 cm

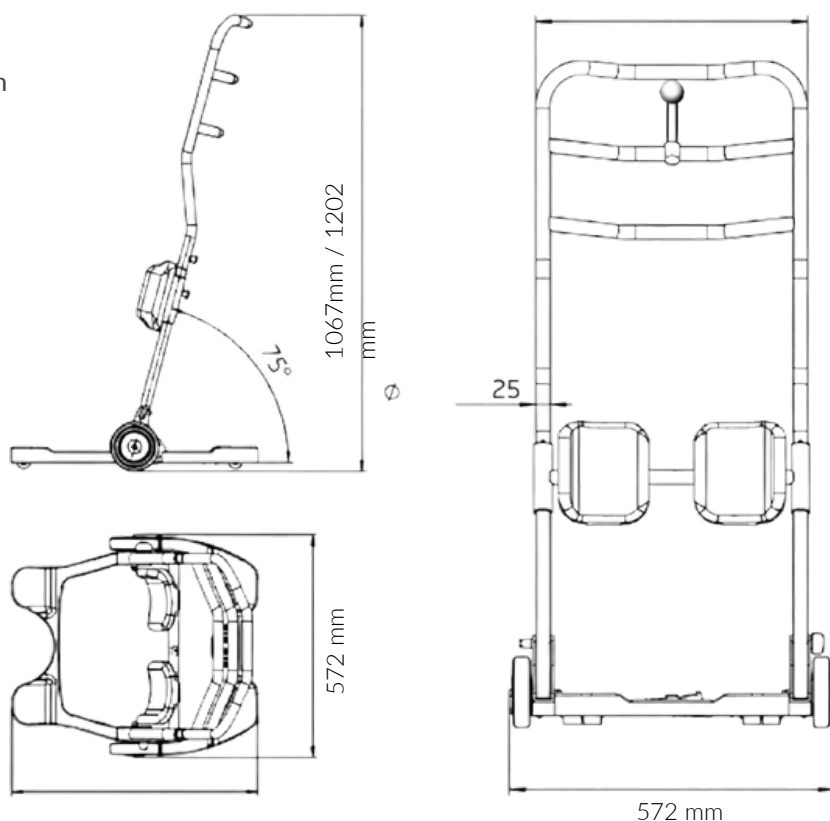

Materiaalit ja rakenne

- Siirtolaitteessa vakaa teräsjalusta ja kevyt alumiininen putkirunko
- Siirtovyö: polyamidi, PU-päällinen, PES.

Puhdistus

- Puhdistus: Kevyt lika ja pöly voidaan pyyhkiä kostutetulla liinalla.
- Suuremmat liat voidaan puhdistaa ei syövyttävällä, miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä
- Siirtovyö voidaan pestä pesukoneessa 60°C.



- Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2026



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi