



Adventus nokkapyörä keventää kelaamista ulkona!

DECON Adventus nokkapyörä helpottaa liikkumista esimerkiksi lumessa, hiekalla ja ruohikolla. Nokkapyörä asennetaan kiinteärunkoisen pyörätuolin jalkatukeen kiinnityspidikkeellä tai kokoontaitettavan pyörätuolin runkoputkiin kiinnitysadapterin avulla. Nokkapyörä on helppo ottaa pois ja asentaa paikalleen itsestään lukittuvan lukkokahvan avulla.

Uusittu Adventus soveltuu nyt sekä kiinteärunkoisiin että kokoontaitettaviin pyörätuoleihin uusien leveyssäädettävien kiinnitysadapterien ansiosta. Kiinteärunkoisissa pyörätuolissa tulee olla yhtenäinen jalkatuki, jonka putkien halkaisija on 16, 18 tai 20 mm ja etu- ja takaputken välinen etäisyys 60-135 mm. Ristikkorunkoisen pyörätuolin istuinleveys tulee olla välillä 33-52 cm ja runkoputkien max. 22 tai 25 mm. Oikeankokoinen adapteri valitaan pyörätuolin istuinleveyden mukaan. Max. käyttäjäpaino 125 kg.

Lisävarusteena saatavana nokkapyörän pidike, joka asennetaan pyörätuolin selkäosan poikkiputkeen. Nokkapyörä kulkee kätevästi mukana pidikkeessä ja on nopea käyttäjän itsensä ottaa käyttöön.



Ominaisuudet



Kääntösäde ja vastuksensäätö

Nokkapyörä kääntyy eteen ja taakse.
Kääntymisvastusta on helppo hienosäätää säätövivusta.



Sopii nyt myös kokoontaitettaviin pyörätuoleihin
asennus kiinnitysadapterin avulla (lisähinta).



Uusi kiinnitysadapteri ristikkorunkoisiin pyörätuoleihin

3 kokoa: 33-39 cm, 39-45 cm tai 45-52 leveisiin pyörätuoleihin.
Runkoputken Ø: max. 22 tai 25 mm



Sopii kiinteärunkoisiin tuoleihin,
jossa yhteinen jalkatuki ja
etu- ja takaputken välinen etäisyys
on 60-135 mm.



Kiinteärunkoisen kiinnityspidike

Vakiokiinnityspidike sopii jalkatukiin, joissa Ø 16-20 mm putket,
60-135 mm etäisyydellä.



Kuljetuspidike (LI)

Kulkee kätevästi mukana
selkäosan poikkitankoon
asennettavassa pidikkeessä.

Tekniset tiedot

Pituus	450 mm jalkatuen edessä
Korkeus	350 mm lattiatasosta
Rengaskoko	Kenda 10" x 2 ilmakumirengas
Rengaspaine	2.5 bar / 240kPa
Paino	2,45 kg
Max.käyttäjäpaino	125 kg



Vakioväri
Musta



Tilausväreinä saatavana lähes mikä tahansa väri. Kysy lisää myyntineuvottelijoiltamme!

Valmistaja:
Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
S-314 93 Hyltebruk
Phone: +46(0) 345-40880
Fax: +46(0) 345-40895
e-mail: info@decon.se
www.decon.se

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2025 Camp Mobility Finland



Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi