


Adventus-liitin taitettavaan pyörätuoliin

Asennusohje



1. Yleiskuva

Kuva 1

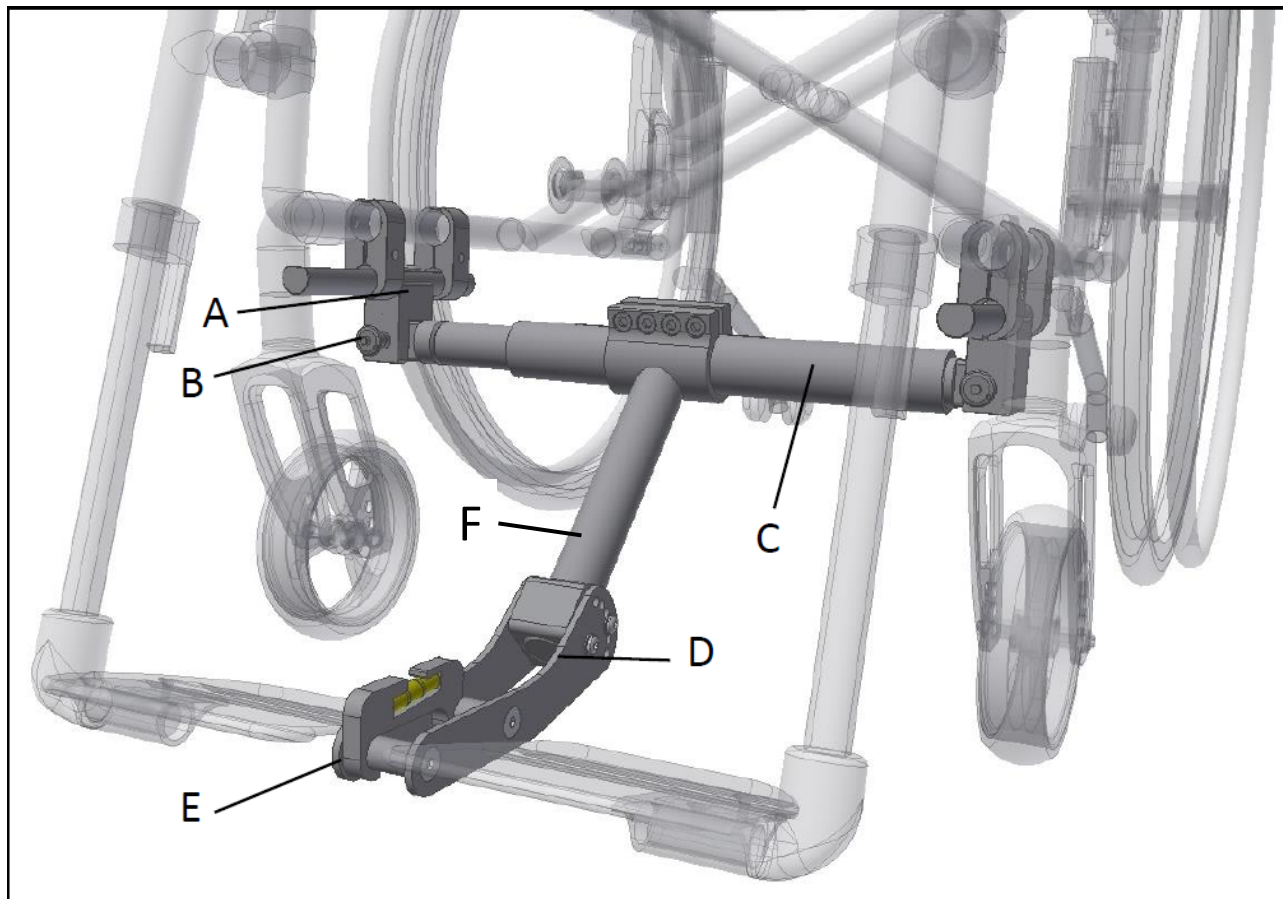

A Liitintangon pidike

B Pikalukitustappi

C Liitintanko

D Haarukka

E Vesivaaka

F Haarukan varsi



2. Liitintangon asentaminen

Asenna ensimmäiseksi liitintangon pidikkeet (A). Eri pyörätuolimalleihin on erimuotoiset pidikkeet (ks. kuvat alla). Kiinnitä pidikkeet pyörätuolin runkoputkiin siten, että niitä voi vielä liikuttaa runkoa pitkin. Kiinnitä sitten liitintanko (C) pidikkeisiin (A) pikalukitustapeilla (B). Kiristä pidikkeissä (A) olevat ruuvit, jotta pidikkeet puristuvat tiukasti pyörätuolin runkoon.

Kuvat 2 ja 3, Yleispidike pyöreäputkisiin pyörätuoleihin




Kuvat 4 ja 5, Pidike Etac Cross- ja Cross 5 -malleihin

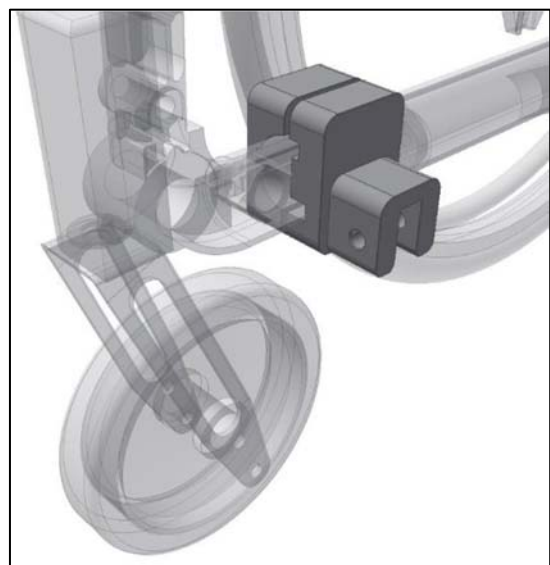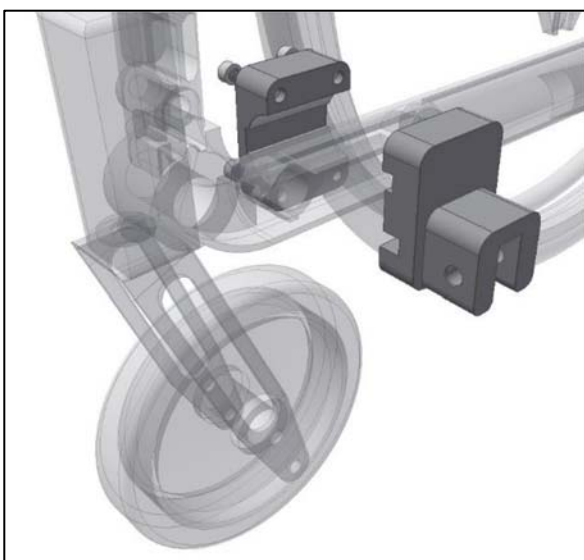

Kuva 6, Pidikkeet asennettuina molemmille puolille



Kuva 7, Liitintangon kiinnitys pidikkeisiin pikalukitustapeilla

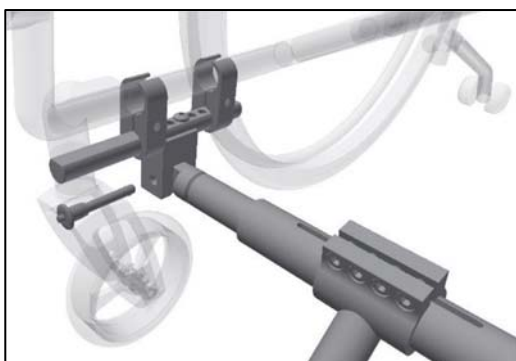

Kuva 8, Kiinnitetty liitintanko




3. Liitinhaarukan säätäminen


Kohta 3.1

Kiinnitä vesivaaka (E) haarukkaan (D). Irrota haarukasta yhdessä takimmaisista rei'istä (ks. kuva) oleva ruuvi, joka lukitsee haarukan kulman. Löysää myös haarukan varren kiinnikkeen ruuvit, jotta kiinnikettä voi liikuttaa liitintangolla. Säädä haarukkaa niin, että se asettuu pyörätuolin rungon keskelle.

Kuva 9

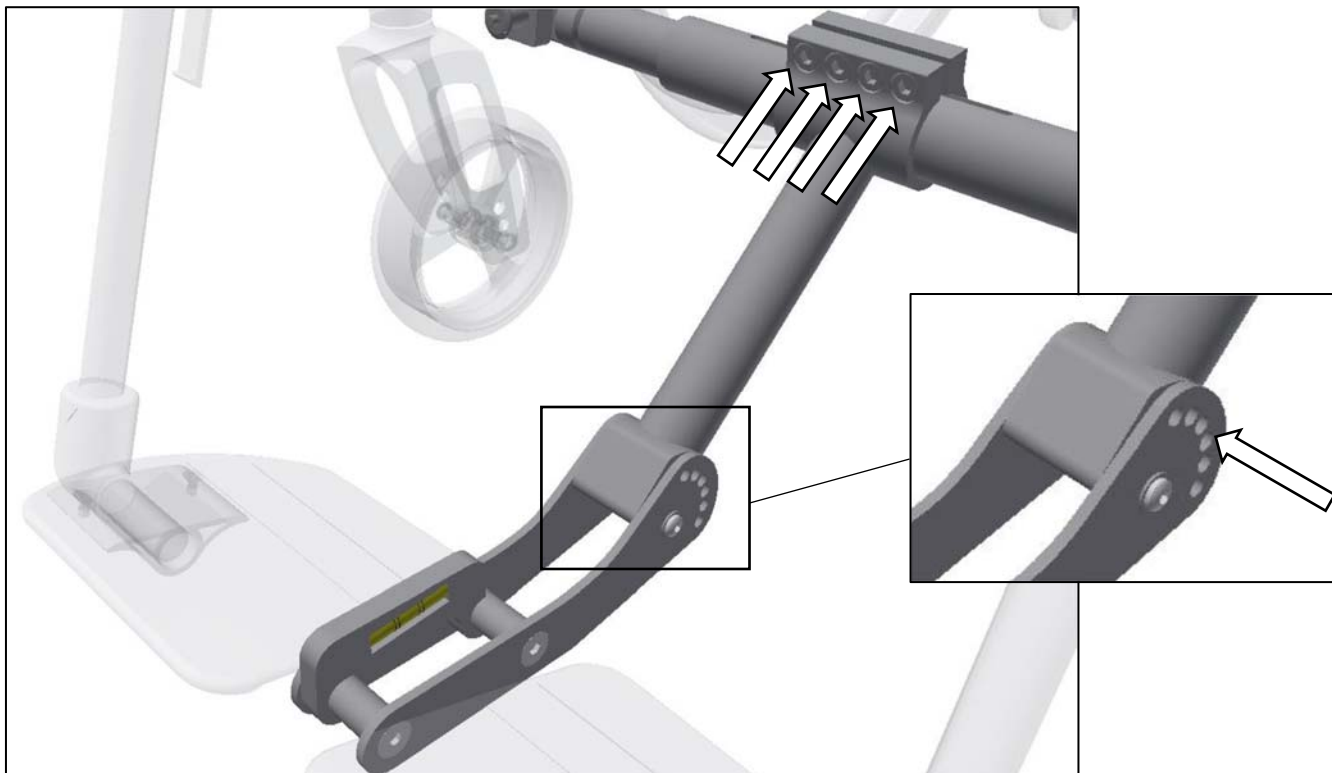

Kuva 10

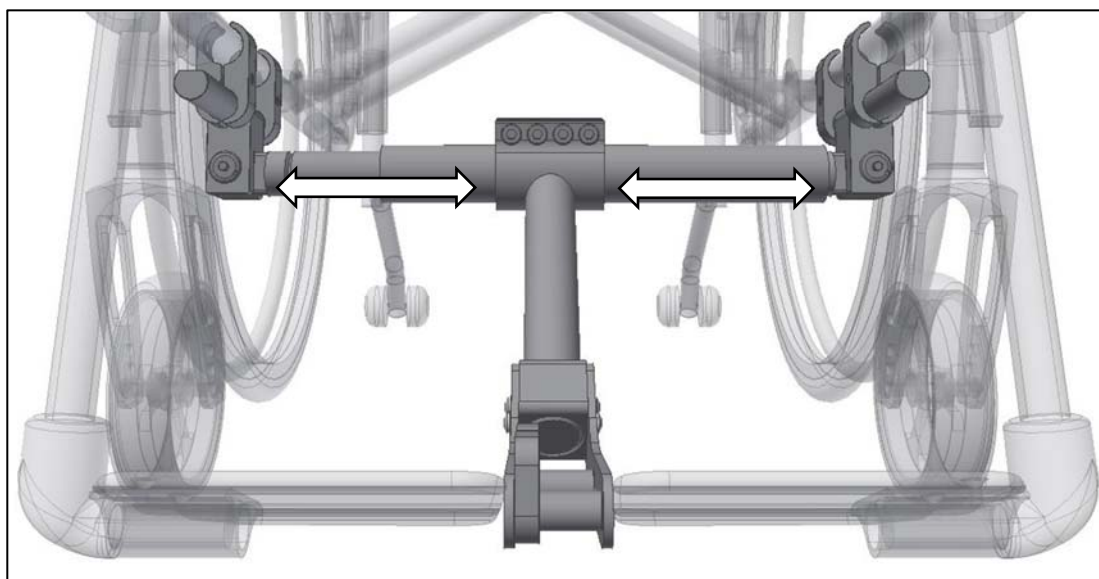


Kohta 3.2

Säädä haarukkaa ja sen vartta niin, että haarukka ei osu jalkatukiin ja se on vesivaakaan merkityssä kulmassa. Varmista, että haarukka on samassa tasossa kuin jalkatuet. Pyri säätämään haarukka mahdollisimman pitkälti kuvien 11 ja 12 mukaisesti.

Kuva 11




Kuva 12

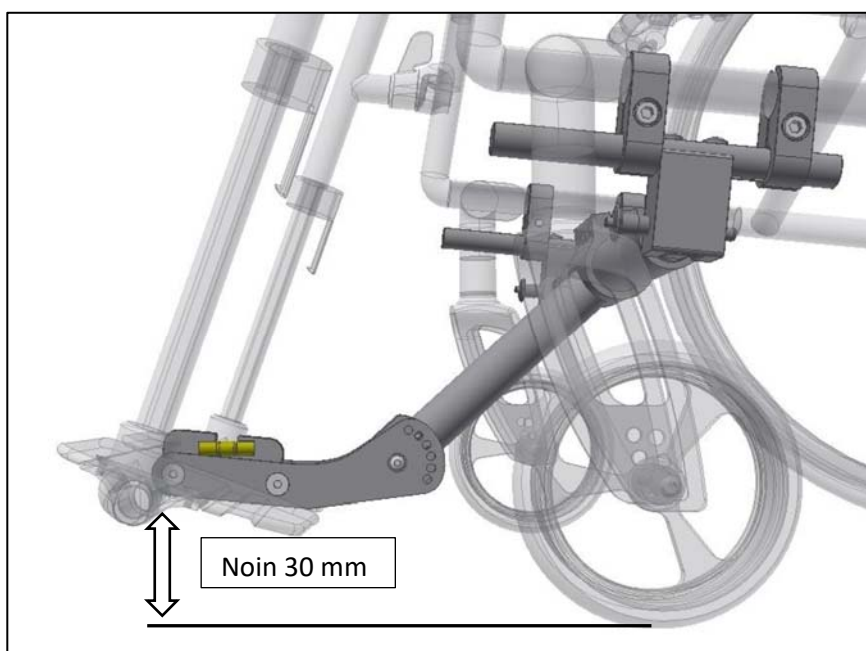

Kohta 3.3

Lukitse haarukka kiinnittämällä ruuvi parhaiten sopivaan reikään. Katso mallia kuvasta 13.


Kuva 13

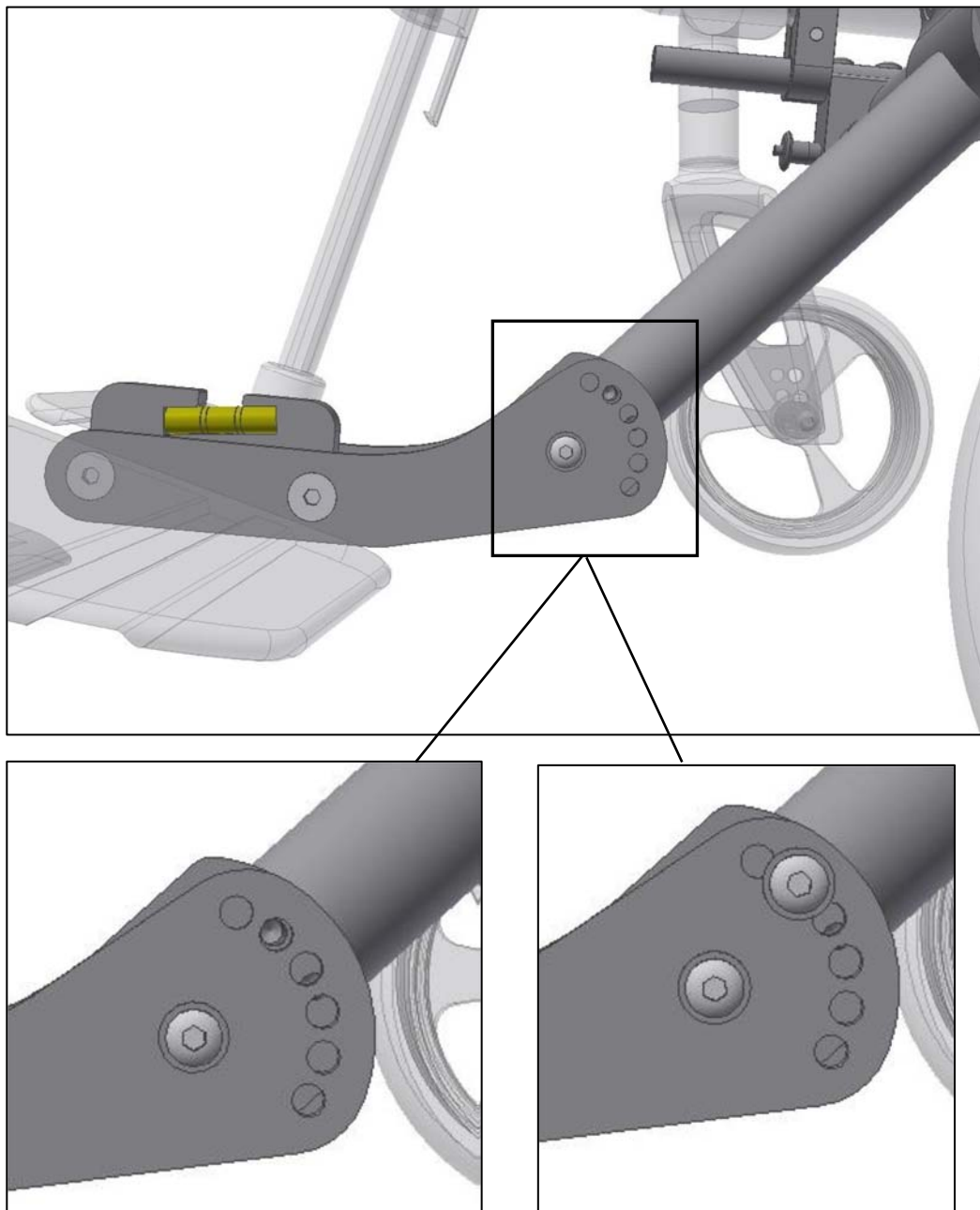

Kohta 3.4

Kiristä seuraavaksi haarukan varren kiinnikkeen ruuvit vähän kerrassaan. On tärkeää kiristää kaikkia neljää ruuvia vähitellen, eikä yhtä kerralla kokonaan. Varmista vielä, että haarukka on keskellä ja vesivaakaan merkityssä kulmassa. **Jatka kiristämistä, kunnes kaikki ruuvit ovat kireällä (momentti 30–35 Nm).**

Kuva 14

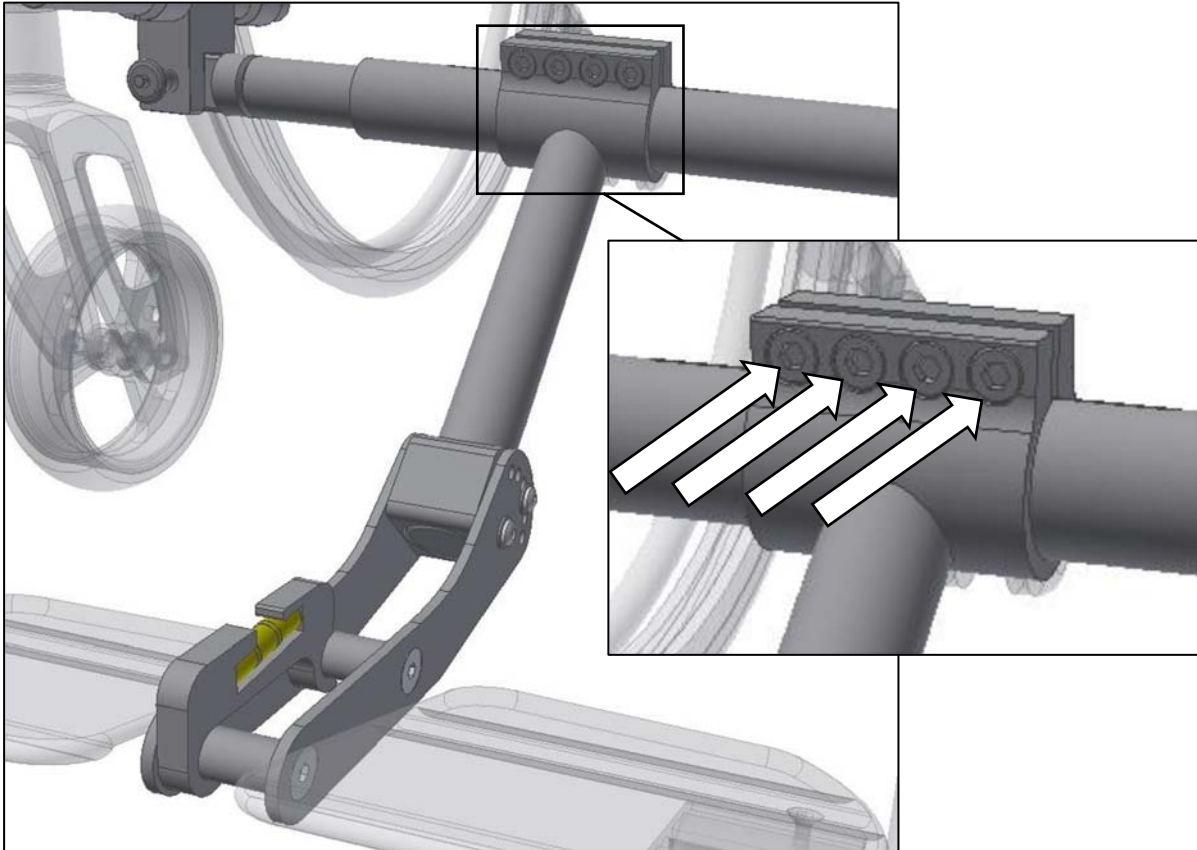

Kohta 3.5

Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla. Asenna sitten haarukkaan Adventus-nokkapyörä sen oman käyttöohjeen mukaan. Voit ladata käyttöohjeen osoitteesta www.campmobility.fi.