

Huolto/Kunnostus E-Drive

HUOMAUTUS! Sähkö- ja elektroniikkakomponentit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä paine- tai höyrypesureita!

Puhdistus

Puhdista vetopyörät tarvittaessa.

- Sammuta vetopyörät ja irrota yksikkö pyörätuolista.
- Vetopyörät on parasta puhdistaa paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Vetoyksikön runko ja toimilaitteet voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Voidaan desinfioida kaupallisesti saatavilla olevilla pintadesinfiointiaineilla.
- Pyyhi pehmeällä liinalla ja anna kuivua ilmassa.
- Voitele pyöränakselit tarvittaessa sopivalla rasvalla puhdistuksen jälkeen.

Suosittelut huolto

Aikaväli	Ohje	Käyttäjä	Teknikko
Päivittäin/ Viikoittain	Lataa akku jokaisen käyttökerran/yksittäisen käyttökerran jälkeen	X	
1 kerran viikossa	Vetopyörän ilmanpaine	X	
Kerran kuukaudessa	Vetopyörän kuluminen (vaurioiden sattuessa ota yhteyttä teknikkoon)	X	
1 kerran vuodessa	Vetopyörän kiinnitys/Ruuvit ja mutterit		X
1 kerran vuodessa	Vetopyörän pinnat/ Kiristä tai vaihda		X
1 kerran vuodessa	Vetopyörät/ Viallinen tai kulunut		X
1 kerran vuodessa	Akun tila/ (mahdollisesti huollettu ja ladattu)		X
1 kerran vuodessa	Sähköjohdot/Painikkeet/Toimilaitteet/Laturi (Löyisyys ja kuluminen)		X
1 kerran vuodessa	Varsien/Niveltien ja pyöränakselien tarkistus halkeamien varalta ja voitelu		X
1 kerran vuodessa	Toiminnan tarkistus (vetopyörät ja toimilaitteet)		X

Pitkäaikaisen kestävyden varmistamiseksi suosittelemme tekemään säännölliset tarkastukset 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Huolto tulisi suorittaa kahden vuoden välein normaaleissa käyttöolosuhteissa.

HUOMAUTUS: Akku. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan (2–6 kuukautta), se tulee säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa, jonka lämpötila on 0–30 °C, ja ylläpitolataus 3–4 kuukauden välein. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Ota yhteyttä Decon Wheeliin tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.