

Huolto/Kunnostus E-Move

HUOMIO! Sähkö- ja elektroniikkakomponentit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä paine- tai höyrypesureita!

Puhdistus

Puhdista vetopyörät tarvittaessa.

- Sammuta vetopyörät ja irrota laite pyörätuolista.
- Vetopyörät puhdistetaan parhaiten paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Käyttöyksikön runko ja toimilaitteet voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Käytä mietoa pesuainetta.
- Voidaan desinfioida markkinoilla olevilla yleisillä pintadesinfiointiaineilla.
- Pyyhi pehmeällä liinalla ja anna kuivua ilmassa.
- Voitele pyöränakselit tarvittaessa sopivalla rasvalla puhdistuksen jälkeen.

Suosittelut huolto

Aikaväli	Ohjaus	Käyttäjät	Teknikko
Päivittäin/Viikoittain	Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen/yksittäisen käyttökerran jälkeen	X	
1 kerran viikossa	Vetopyörien ilmanpaine	X	
Kerran kuukaudessa	Vetopyörien kuluminen (vaurioiden sattuessa ota yhteyttä teknikkoon)	X	
1 kerran vuodessa	Vetopyörien kiinnitys/Ruuvit ja mutterit		X
1 kerran vuodessa	Vetopyörien pinnat/Kiristys tai vaihto		X
1 kerran vuodessa	Vetopyörät/Vetorenkaiden kuluminen/Viallinen tai kulunut		X
1 kerran vuodessa	Akun tila/(mahdollisesti huollettu ja ladattu)		X
1 kerran vuodessa	Sähköjohdot/Painikkeet/Ohjaimet/Laturi (Löysyys ja kuluminen)		X
1 kerran vuodessa	Pyörien akselit, halkeamien tarkistus ja voitelu		X
1 kerran vuodessa	Toiminnan tarkistus		X

Pitkäaikaisen kestävyysvarmistamiseksi suosittelemme tekemään säännölliset tarkastukset 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Huolto tulisi suorittaa kahden vuoden välein normaaleissa käyttöolosuhteissa.

HUOMAUTUS: Akku. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan (2–6 kuukautta), se tulee säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa, jonka lämpötila on 0–30 °C, ja ylläpitolataus 3–4 kuukauden välein. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Ota yhteyttä Decon Wheeliin tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.