

Huolto/Kunnostus E-Walk

HUOMIO! Sähkö- ja elektroniikkakomponentit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä paine- tai höyrypesureita!

Puhdistus

Puhdista vetopyörät tarvittaessa.

- Sammuta käyttöyksikkö ja irrota se pyörätuolista.
- Vetopyörät on parasta puhdistaa paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Käyttöyksikön runko ja toimilaitteet voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Voidaan desinfioida kaupallisesti saatavilla olevilla pintadesinfiointiaineilla.
- Pyyhi pehmeällä liinalla ja anna kuivua ilmassa.
- Voitele pyöränakselit tarvittaessa sopivalla rasvalla puhdistuksen jälkeen.

Suositteltu huolto

Aikaväli	Ohjaus	Käyttäjä	Teknikko
Päivittäin/Viikoittain	Lataa akku jokaisen käyttökerran/yksittäisen käyttökerran jälkeen	X	
Kerran kuukaudessa	Vetopyörien kuluminen (vaurioiden sattua ota yhteyttä teknikkoon)	X	
1 kerran vuodessa	Vetopyörien kiinnitys/ruuvit ja mutterit		X
1 kerran vuodessa	Vetopyörien kuluminen/viallinen		X
1 kerran vuodessa	Akun tila		X
1 kerran vuodessa	Sähköjohdot/painikkeet/ohjauslaitteet/laturi (löysyys ja kuluminen)		X
1 kerran vuodessa	Varret/nivelet voitelu ja tarkistus halkeamien/löysyyden varalta		X
1 kerran vuodessa	Toiminnan tarkistus (vetopyörät ja ohjauslaitteet)		X

Pitkäaikaisen kestävyden varmistamiseksi suosittelemme tekemään säännölliset tarkastukset 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Huolto tulisi suorittaa kahden vuoden välein normaaleissa käyttöolosuhteissa.

HUOMAUTUS: Akku Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan (2–6 kuukautta), se tulee säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa, jonka lämpötila on 0–30 °C, ja ylläpitolataus 3–4 kuukauden välein. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Ota yhteyttä Decon Wheeliin tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.