



PAWS

POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS



CAMP[®]
MOBILITY

REPRESENTED BY





POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS = PAWS!

PAWS SÄHKÖINEN AJOLAITE

PAWS:ssa yhdistyvät ergonomia ja toiminnallisuus hyvään ulkonäköön. Laitteen kiinnitys ei vaadi erillisiä adaptereita pyörätuoliin, joten pyörätuolin paino pysyy saman painoisena ilman adapterin tuomaa lisäpainoa. Laite kiinnitetään pyörätuolin sivurunkoputkiin, jolloin jalkojen väliin ei tule mitään kiinnitysvartta.

Pyörätuoliin kiinnitys tapahtuu sähköisesti napista painamalla. Pyörätuolin tukipyörien nosto ajoasentoon tapahtuu sähköisesti nappia painamalla.

Laitteessa on ns. cruiser-ominaisuus (vakionopeudensäädin). Laitteessa on luistonestotoiminto, josta on hyötyä mm. alhaisissa nopeuksissa.

PAWS:n avulla manuaalipyörätuolistasi tulee kulkuneuvo, jonka avulla voit olla itsenäinen, päästä töihin, ostoksille tai matkalle. Ajolaite on loistava vaihtoehto autolle.

Tutustu PAWS:n mahdollisuuksiin seuraavilla sivuilla.



REPRESENTED BY



REHASENSE



CITY

KOE TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PAWS CITYN KANSSA

PAWS City on saatavana joko 12" tai 14" eturenkaalla ja on suunniteltu pääasiallisesti kaupunkiajoon. Valitse 12" tasaisemmille teille tai 14" jolla pääset yli vähän suuremmistakin epätasaisuuksista.

PAWS City sopii myös sisätiloissa käytettäväksi vain 1 m kääntösäteen ansiosta. Sopii kovalle alustalle ja tasaisille pinnoille, mutta selviää myös epätasaisista jalkakäytävistä ja kivityksistä.



AUTO CLAMP

Et tarvitse mitään muutoksia tai lisäosia kiinteärunkoiseen pyörätuoliin. Auto Clamp -kiinnitys ja Auto Lift -nosto kestää vain muutaman sekunnin.

Kuvassa: 12" pyörä ja Auto Clamp -sähköinen automaattikiinnitys.

ERGONOMIA

PAWS on kehitetty yhteistyössä insinöörien, ergonomiasiantuntijoiden ja terapeuttien kanssa.

PAWS:ssa on helppo ja universaali kiinnitysjärjestelmä. Automaattinen kiinnitys ja nostaminen on yhtä helppoa kuin napin painallus.

Lisäksi sinulla on useita mahdollisuuksia säätää ohjaustanko juuri siten, kuin se sinulle parhaiten sopii.

PAWS:n kokoonpano voidaan kustomoida erilaisilla kiinnityksillä, ohjaustangoilla, pyöräkoolla ja lisävarusteilla optimaalisen käytön ja istuvuuden takaamiseksi.



Pysäköintiasento



Touring-mallin ajo-asento



City-mallin ajoasento

KIINNITYS

PAWS:n liittäminen pyörä-tuoliin on erittäin helppoa automaattisella kiinnitysvaihtoehdolla

(tai manuaalinen optiona).

Toinen PAWS:n ainutlaatuinen piirre on, että pyörätuoliin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia tai lisätä lisäosia molempien yhdistämiseen. PAWS-laitteen käytön jälkeen pyörätuoli pysyy sellaisenaan.

- Ainoa mitä lisää on PAWS!



Auto Clamp automaattiset kiinnittimet vaivatonta kytkemistä varten (vakio)



Manual Clamp manuaalinen kiinnitys pitkillä vivuilla helpoon kytkemiseen (optio)



Auto Clamp

NOSTAMINEN

Automaattisella nostotoiminnolla, sinun ei tarvitse käyttää ylävartalon voimaa PAWS:n liittämiseen pyörä-tuoliin. Auto Clamp ja Auto Lift saattavat sinut automaattisesti ajoasentoon.

OHJAUSTANKO

Kahden ohjaustankovaihtoehdon avulla suurin osa voi ohjata PAWS:ia. Valitse paras käyttöösi: Vakio-ohjaustanko tai Tetra-käsikahvat. Molemmissa on myös useita mahdollisuuksia säätää ohjaustangon asento juuri sinulle sopivaksi.



NOPEUS

Vakiona 3 nopeusmoodia*, joiden lisäksi vakio-ominaisuuksina Kävelymoodi, Vakionopeudensäätö, Peruutus ja Luistonesto.

(*max nopeus 15 km/h)

Huom: PAWS voidaan toimittaa myös eri nopeuksilla paikallisten säädösten ja rajoitusten mukaisesti).



**Eteen /
Taakse =
Peruutus-
moodi**



Kävelymoodi
Aseta vakio-
nopeus 4 km/h
nopeuteen.



Vakionopeudensäätö
Ajonopeus voidaan asettaa
päälle, ilman, että kaasusta
tarvitse pitää kiinni.



Luistonesto
Tämä toiminto on hyödyllinen,
jos pinta on liukas tai ajat ylä-
alamäessä.



JARRUT

Jarrutus tapahtuu eturenkaan levyjarrulla, jota käytetään kahdella ohjaustankoon asennetulla jarruvivulla. Jarrua voidaan käyttää yhdellä tai molemmilla käsillä, jos tarvitaan voimakasta jarrutusta.

RENKAAT

Jokaisessa mallissa on oma pyörätyyppinsä, jotka eroavat toisistaan koon ja käyttötarkoituksen mukaan. PAWS City 12"/14":sta on lyhyt akseliväli ja tiukka kääntösäde, ja se soveltuu kaduille tai jopa sisätiloihin, PAWS Cruiser 16" on monipuolinen, hyvä keskipitkälle matkalle ja kovaan maastoon. PAWS Tourer 20":ssa on kaksi rengaslevyettä - 2,5"- yleisrengas ja 4" leveä maastorengas epätasaisempaan maastoon.

CITY



Kuvan konfiguraatio: 12" rengas, Manuaali ohjaustanko, Manual Clamp -kiinnitys + ICON 60 pyörätuoli

CRUISER



Kuvan konfiguraatio: 16" rengas, Standard ohjaustanko, Auto Clamp + ICON 60 pyörätuoli

AUTOMAATTIVALOT

Kirkkaassa ja voimakkaassa ajovalossa on automaattinen optio - valot syttyvät automaattisesti iltaisin hämärässä ja tunneleissa.

VEDENKESTÄVÄ

PAWS:ssa on vedenpitävä IP54 luokitus, joten se ei pelkää sadetta, lätäköitä ja kosteutta.

KIRKAS NÄYTTÖ

Näyttö näyttää tärkeät ajotiedot, kuten nopeuden, matkan, ajan, tehon, ajotilan ja muut asetukset. Näytön kirkkaus mukautuu automaattisesti ympäröivän valon määrään. Näyttö on asennettu keskitetysti ohjaustankoon ja sitä voidaan kääntää parhaaseen asentoon.

UNIVERSAALI KIINNITYS

Universaalin kiinnitysjärjestelmän säätöalue mahdollistaa PAWS:n kiinnittämisen laajaan valikoimaan kokoonlaitettavia ja kiinteärunkoisia pyörätuoleja, joissa on kiinteä eturunko.

KESTÄVÄ AKKU

Litium-ioni akku latautuu täyteen alle 5 tunnissa. Täydellä latauksella voit saavuttaa jopa 40 km:n ajomatkan (maastosta, kuljettajan painosta ja valitusta mallista riippuen). IATA-yhteensopiva "lentoakku" on hyvä olla silloin, kun otat PAWS:n lennolle mukaan. Akun vaihto on helppoa ja nopeaa, joten kun virta on vähissä, vaihda vain se täyteen ja matkaa jatkuu.

KUSTOMOITAVA

Varustele PAWS vastaamaan tyyliäsi ja tarpeitasi. Parhaan kokoonpanon voit valita kolmesta mallista: PAWS (12", 14", 16" tai 20"), manuaali- tai automaattikiinnityksellä ja -nostolla, kaksi mallia ohjaustangoksi, ja jopa renkaan tyypin ja koon voit valita.

Hienosäädä lopuksi ohjaustankosi asento ja valitse haluamasi ajomoodi.

TOURER



Kuvan konfiguraatio: 20" rengas, Tetra-ohjauskahvat + Auto Clamp + ICON 60 pyörätuoli

LISÄVARUSTEET

VARUSTELE LAITTEESI JA MAKSIMOI KÄYTETTÄVYYS

LAUKKU JA KORI

Etulaukku - upgreidaa etukori vetoketjulliseen ylä- ja sivulokeroilla varustettuun kantolaukkuun! Juomapullo pysyy tiukasti paikallaan sivutaskuissa, joissa on tarranauhat, jotta se pysyy paikallaan.



Etulaukku

Etukori - helppo klipsikiinnitys korin kiinnittämiseksi tai pois irrottamiseksi. Korin avulla voit kuljettaa kätevästi mukana muita tavaroita tai vaikka eväät! Tukeva teräsputkirakenne on maalattu korroosion estämiseksi.



Etukori

RENKAIDEN TÄYTTÖLAITE

Smart Tyre Inflator -laitteessa on sisäänrakennettu ladattava akku joka käyttää minikompressoria renkaiden täyttämiseen. Paitsi, että laite tunnistaa automaattisesti asetetut painerajat, laitteesta voi ottaa virtaa USB:lla virtaa ulkoisille laitteille ja siinä on myös valo-toiminto. Erittäin hyödyllinen pidemmille matkoille!



AKKUVAIHTOEHDOT

Vakiona Lithium Ion 48V 11.2 Ah akku tarjoaa tehokkaan 556 wattitunnin käyttöajan - joka on universaali kaikissa malleissa. Kätevällä hihnakahvalla se kiinnittyy helposti pidikkeeseen ja kiinnitetään paikalleen omalla avaimellaan ja lukolla. Latausaika 5 tuntia. Älykäs laturisammu, kun täysi lataus on saavutettu.

Akun päällä on akun virtatason ilmaisin virran kytkemiseen ja latauksen tason tarkistamiseen.

Lentoakulla (300 Wh) on alhaisempi virrankulutus, jotta sitä voidaan kuljettaa matkustajakoneilla IATA:n mukaisesti. On tärkeää ilmoittaa akusta lentoyhtiölle vähintään 48 tuntia ennen lähtöä akun kanssa matkustettaessa.



Akun paikalleen asennus

PAKKAUS

Kestävä pakkauslaatikko on tarkoitettu suojaamaan PAWS-laitteita vaurioilta kuljetuksen aikana. On suositeltavaa pitää tämä varalla, jos laite on kuljetettava myöhemmin .

Leveyden
säätö:
Mahdollistaa
asentamisen
useisiin eri
pyörätuoli-
leveyksiin.



MUISTA TURVALLISUUS:

suosittelemme käyttämään kypärää
ajaussasi PAWS:lla.

Työkalut:
Jokaisen
PAWS:n
mukana
toimitetaan
täydellinen
säätötyökalu-
sarja

INNOVATIIVISIA AJOLAITTEITA PYÖRÄTUOLEIHIN

3 mallia – 6 toimintoa – yli 30 patenttia haussa



CITY

12 tai 14 tuuman rengas



CRUISER

16 tuuman rengas



TOURER

20 tuuman rengas

6 ERI TOIMINTOVAIHTOEHTOA



AUTO CLAMP

Automaattinen kiinnitys
Kiinnitys ja avaus sekunneissa
Suomessa myytävissä malleissa vakiona.



AUTO LIFT

Automaattinen nosto.
Nostaminen on täysin vaivatonta.



TRACK ASSISTANCE

Itse keskittävä ajo-avustin ohjaa laitetta
kulkemaan suoraan ja tiettyä nopeutta.



MANUAL CLAMP

Vahva ja turvallinen
Saatavana erikoistilauksesta optiona..



MANUAL LIFT

Helppo ja nopea
Nosto ilman vaikeuksia. Optio.



TETRA OHJAUSKAHVAT

Eriyiset Tetra-kahvat peukalojarruilla
Täysi hallinta ilman voimankäyttöä. Optio.