


TRACK WHEEL

MUUNTAÄ HETKESSÄ PYÖRÄTUOLISI
KETTERÄKSI KOLMIPYÖRÄKSI

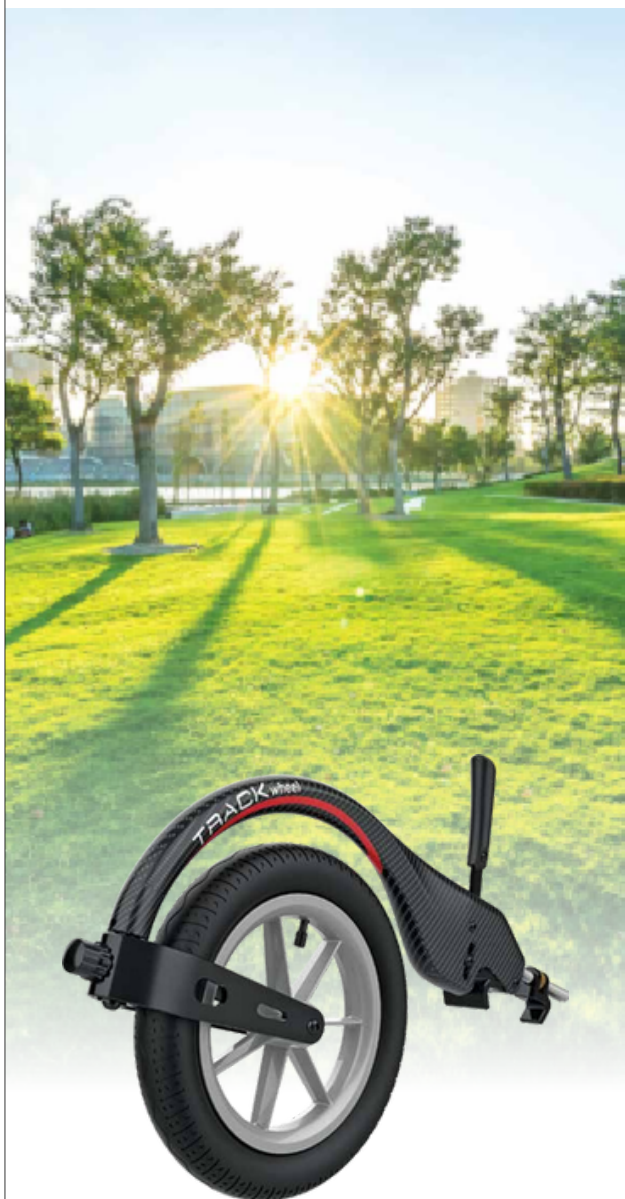

KOE UUSI VAPAUDEN TUNNE VALMISTETTU ULKOSEIKKAILUIHIN!



YHDELLÄ KIINNIKKEELLÄ

TRACK WHEEL kiinnitetään pyörätuolin kiinteisiin jalkarautoihin yhdellä kiinnikkeellä. Telakointia varten ei tarvita mitään työkaluja tai lisäadaptoreita.



TUPLA- KIINNIKKEILLÄ


suunniteltu erityisesti kokoontaitettaviin pyörätuoleihin, jossa on kiinteät, erilliset jalkatuet ja tarvitsee siksi tuplakiinnikkeet. Saatavana myös malli, joka kiinnitetään irrotettavien jalkatukien tilalle. Tällöin nokkapyörään kiinnitetään lisävarusteena saatavana oma jalkalauta.



EDUT JA HYÖDYT



Työkaluja ei tarvita

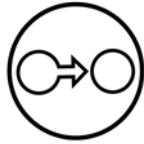

2 kiinnitysratkaisua
Single tai Double



Erittäin nopea
telakointijärjestelmä



Suuri 12" ilmakumirengas

ERGONOMINEN JA ELEGANTTI DESIGN



Kuvan konfiguraatiossa yksi kiinnike ja hiilikuituvarsi

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Ultrakevyt, alkaen 2.6 kg
Materiaali hiilikuitu tai alumiini
2mallia: Yhdellä tai kahdella kiinnikkeellä
Suuri ajomukavuus 12" ilmakumirenkaan ansiosta
Suuntavakaa, väpättämätön anti-flutter-haarukka

Miellyttävä ajokokemus myös kuopaisilla teillä
Monipuoliset kiinnitysratkaisut kiinteille ja kokoon-
taitettaville pyörätuoleille, säädettävissä useisiin
kokoihin

SINGLE ARM

YHDELLÄ KIINNIKEELLÄ

Jos käytät kiinteillä, yhtenäisillä jalkaraudoilla varustettua pyörätuolia, TRACK WHEEL yhdellä kiinnikkeellä on oikea malli sinulle.

Erittäin kevyen hiilikuiturakenteen ansiosta TRACK WHEEL:n paino on vain 2,6 kg ja renkaan koko 12 tuumaa.

Max. käyttäjäpaino 140 kg


Kiinnitä pyörä muutamassa sekunnissa ja nauti vapaudesta ajon aikana!

ultrakevyt

2.6 kg



MITTATIEDOT (mm)

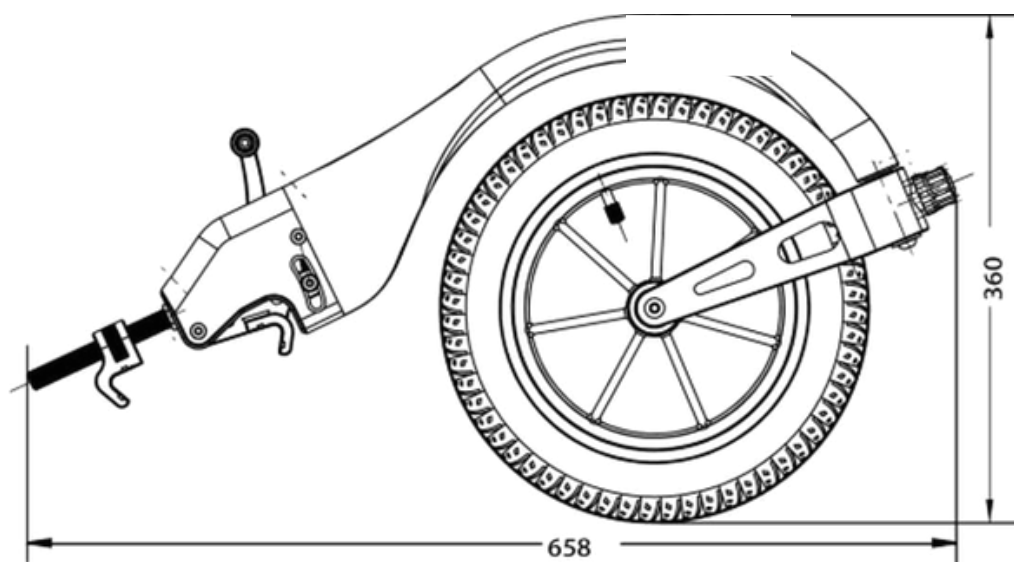

DOUBLE ARM

hiilikuituinen

4.7 kg

alumiininen

4.9 kg



TUPLA-KIINNITKEILLÄ


TRACK WHEEL tuplakiinnikkeellä on suunniteltu erityisesti kokoontaitettaville pyörätuoleille.

Kiinteäkeulaiselle, ristikkorunkoiselle pyörätuolille soveltuu hiilikuituinen TRACK WHEEL tuplakiinnikkeillä, ja ristikkorunkoiselle pyörätuolille, jossa on irrotettavat jalkatuet, sopii alumiininen tuplakiinnitteinen TRACK WHEEL jalkalaudalla.

Max. käyttäjäpaino 140 kg.

Universaalin, useimpiin kokoontaitettaviin pyörätuoleihin sopivan, säädettävän kiinnityslaitteen ansiosta, voit nauttia ajosta mahdollisimman joustavasti.

MITTATIEDOT (mm)

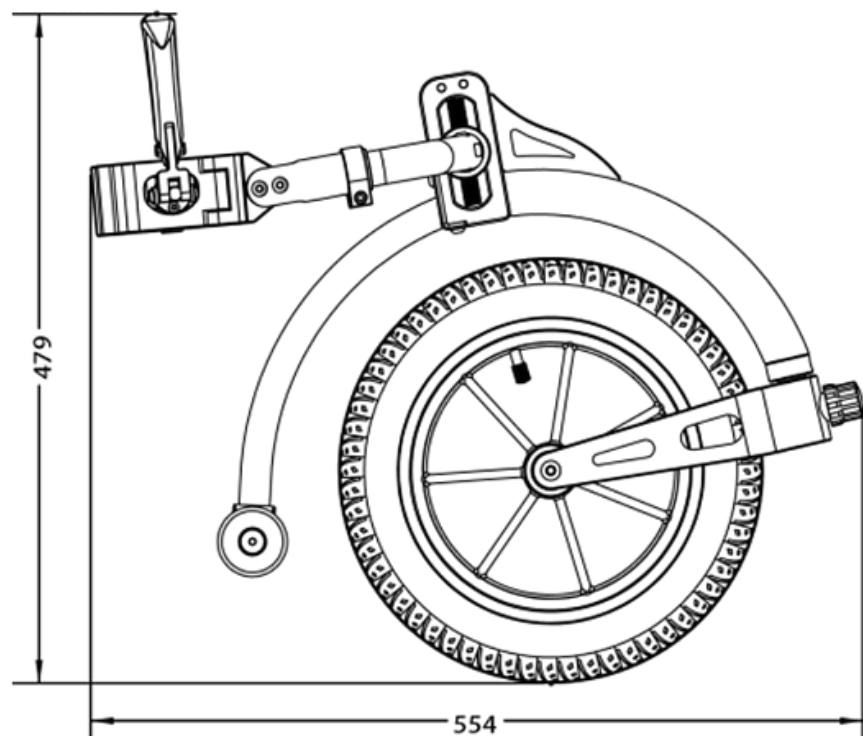

SINGLE ARM

PYÖRÄN SÄÄTÄMINEN


Ennen ensimmäistä käyttökertaa TRACK WHEEL on asennettava ja hienosäädettävä pyörätuoli sopivaksi. Asentaminen kestää noin 5-10 minuuttia vakiotyökaluilla (kuusiokoloavaimet 4 ja 5).



Pyörätuolissasi tulee olla kiinteä, jatkuva jalkakaari tai jalkarauta.

Kiinnike kiinnitetään kiinteään pyörätuolin jalkarautaan.

Asento 1:
Kiinnikevipu aukeaa

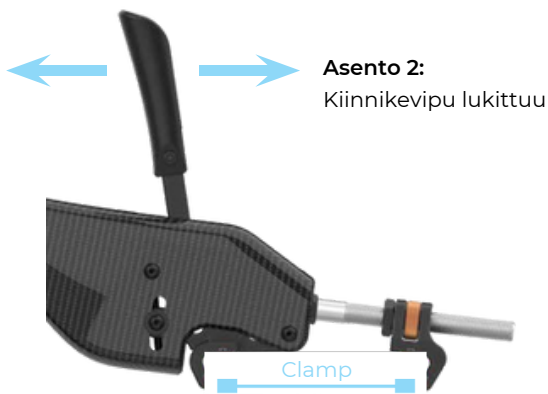

Asento 2:
Kiinnikevipu lukittuu

PYÖRÄN KIINNITYS

Ensimmäisen asennuksen ja hienosäädön jälkeen nokkapyörän kiinnittäminen on helppoa. Seuraa vain näitä vaiheita:

1. Käännä TRACK WHEEL ulospäin ja siirrä vipu asentoon 2.
2. Telakoi TRACK WHEEL pyörätuoliin, sulje se siirtämällä vipu asentoon 1 ja käännä TRACK WHEEL takaisin sisäänpäin.



Käännä TRACK WHEEL ulospäin, kun kiinnität sen, ja takaisin sisäänpäin ajoasentoon. Löydät lisätietoja käyttöohjeesta.

DOUBLE ARM

PYÖRÄN SÄÄTÄMINEN

Ennen ensimmäistä käyttökertaa TRACK WHEEL pitää asentaa ja hienosäätää pyörätuoliin sopivaksi. Tuplakiinnikkeillä varustetuissa malleissa voidaan säätää korkeutta ja leveyttä. Asennus kestää noin 15-20 minuuttia.

Asento 1:

Kiinnikevipu
lukittuu

QR-pikalukitus
Clamp



Asento 2:

Kiinnikevipu aukeaa



Yksityiskohta tuplakiinnikejärjestelmästä.
Kuvassa vasen kiinnike yhdessä vivun kanssa.
Avaamiseksi ja sulkemiseksi molemmat vivut
(oikea + vasen) on avattava.

TRACK WHEEL voidaan
kiinnittää kätevästi QR-
pikalukitusvipujen avulla.

PYÖRÄN KIINNITYS

KAKSIKIINNIKEINEN -mallin kiinnittäminen on yhtä helppoa alkuasennuksen ja hienosäädön jälkeen.
Seuraa vain näitä vaiheita:

1. Käännä TRACK WHEEL ulospäin ja siirrä vivut asentoon 2.
2. Telakoi TRACK WHEEL pyörätuoliin, sulje se siirtämällä vivut asentoon 1 ja käännä TRACK WHEEL takaisin sisäänpäin.



Käännä TRACK WHEEL ulospäin, kun kiinnität sen,
ja takaisin sisäänpäin ajoasentoon.
Löydät lisätietoja käyttöohjeesta.



OLETKO SINÄKIN VALMIS TUTKIMAAN UUSIA POLKUJA?

Muuta pyörätuolisi urheilulliseksi kolmipyöräksi ja koe uusi nopeuden ja vapauden tunne! TRACK WHEEL on ihanteellinen kumppani retkille, kaupungissa, metsässä tai rannalle: erittäin kevyt, helppo kiinnittää ja mukava.

Oletko valmis seuraavaan ulkoiluseikkailuusi? Olitpa ylittämässä kuoppaisia teitä kaupungissa, kiertämässä pyöräily- ja vaellusreittejä tai tutustumalla epätasaisiin luontopolkuihin - TRACK WHEEL:n avulla voit liikkua vaivattomasti monissa maastoissa.

12" tuuman TRACK WHEEL nokkapyörän kanssa tukipyörät ovat koholla ja pyörätuoli kallistuu hieman taaksepäin. Tällöin kelausvastus pienenee huomattavasti. Tämän seurauksena voit nauttia enemmän nopeudesta ja ohjattavuudesta ajaessasi! Kun TRACK WHEEL on säädetty oikein pyörätuolillesi sopivaksi, **sen voi kiinnittää muutamassa sekunnissa!**



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



REHASENSE SP. Z O.O.
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND

+48 502 728 074
INFO@REHASENSE.COM



REHASENSE