

UUSI

TRACK WHEEL

MUUNTAÄ HETKESSÄ PYÖRÄTUOLISI
KETTERÄKSI KOLMIPYÖRÄKSI



KOE UUSI VAPAUDEN TUNNE VALMISTETTU ULKOSEIKKAILUIHIN!



YHDELLÄ KIINNIKKEELLÄ

TRACK WHEEL kiinnitetään pyörätuolin kiinteään jalkatukeen yhdellä kiinnikkeellä. Telakointia varten ei tarvita mitään työkaluja tai lisäadaptoreita.




TUPLA- KIINNIKKEILLÄ

TRACK WHEEL, joka on suunniteltu erityisesti kokoontaitettaviin pyörätuoleihin, jossa on kiinteät, erilliset jalkatuet ja tarvitsee siksi tuplakiinnikkeet


EDUT JA HYÖDYT




Työkaluja ei tarvita

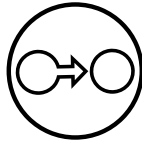

2 kiinnitysratkaisua
Single tai Double

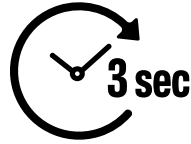

Erittäin nopea
telakointijärjestelmä

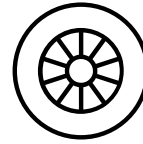

Suuri 12" ilmakumirengas

ERGONOMINEN JA ELEGANTTI DESIGN



Kuvan konfiguraatiossa yksi kiinnike ja hiilikuituvarsi

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

- Ultrakevyt, alkaen 2.6 kg
- Materiaali hiilikuitua (tilauksesta myös alumiini)
- 2 mallia: Yhdellä tai kahdella kiinnikkeellä
- Ylimääräisiä adaptoreita ei tarvita
- Suuri ajomukavuus 12" ilmakumirenkaan ansiosta
- Suuntavakaa, väpättämätön anti-flutter-haarukka
- Nautittava ajokokemus myös kuopaisilla teillä
- Monipuoliset kiinnitysratkaisut kiinteille ja kokoon-taitettaville pyörätuoleille, säädettävissä useisiin kokoihin
- Yksi kiinnike kiinteille pyörätuoleille
- Tulossa pian tuplakiinnike kokoon-taitettaville pyörätuoleille, joissa kiinteät, integroidut jalkatuet

SINGLE ARM

YHDELLÄ KIINNIKEELLÄ

Jos käytät kiinteällä, yhtenäisellä jalkatuella varustettua pyörätuolia, yksihaarukainen TRACK WHEEL yhdellä kiinnikkeellä on oikea malli sinulle.

Erittäin kevyen hiilikuiturakenteen ansiosta TRACK WHEEL:n paino on vain 2,6 kg ja renkaan koko 12 tuumaa.

Markkinoiden kevyin nokkapyörä!


Kiinnitä pyörä muutamassa sekunnissa ja nauti vapaudesta ajon aikana!

ultra kevyt
2.6 kg



MATERIAALI	TUOTENRO
HIILIKUITU	RTW12SC

MITTATIEDOT (mm)

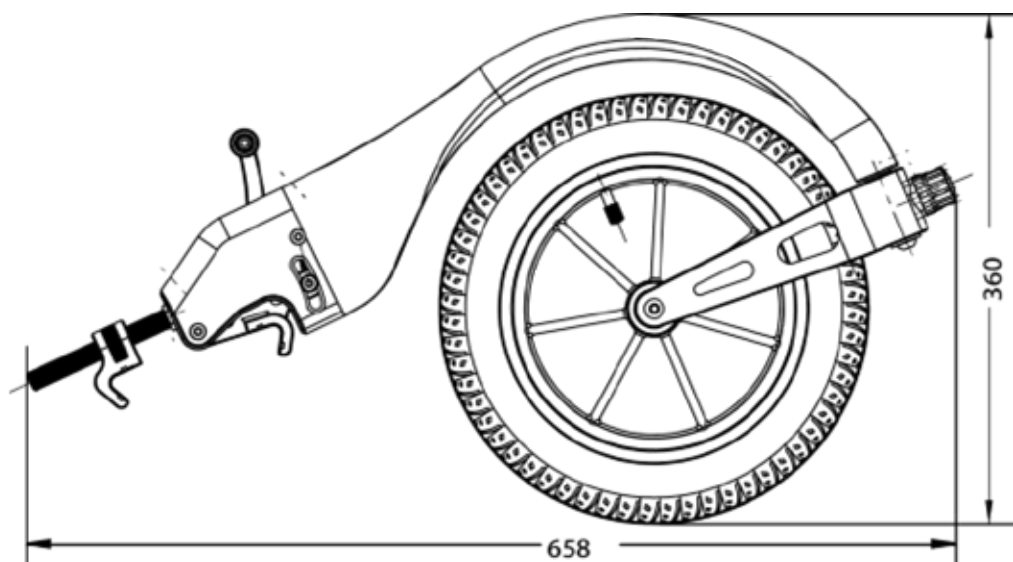

DOUBLE ARM

ultra kevyt
4.5 kg




TUPLA-KIINNIKKEILLÄ

TRACK WHEEL KAKSIPUOLEISELLA HAARUKALLA ja tuplakiinnikkeellä on suunniteltu pyörätuoleille, joissa on kiinteät erilliset tai yhtenäiset jalkatuet. Asennus pyörätuolin jalkatukien runkoputkiin. Ei sovellu irrotettaviin jalkatukiin.

Markkinoiden kevyin!
Erittäin kevyen hiilikuiturakenteen ansiosta TRACK WHEEL:n paino on vain 4,5 kg, koko 12" .
Universaalin säädettävän kiinnityslaitteen ansiosta, voit nauttia ajosta mahdollisimman joustavasti.

MATERIAALI	TUOTENRO
HIILIKUITU*	RTW12DC

MITTATIEDOT (mm)

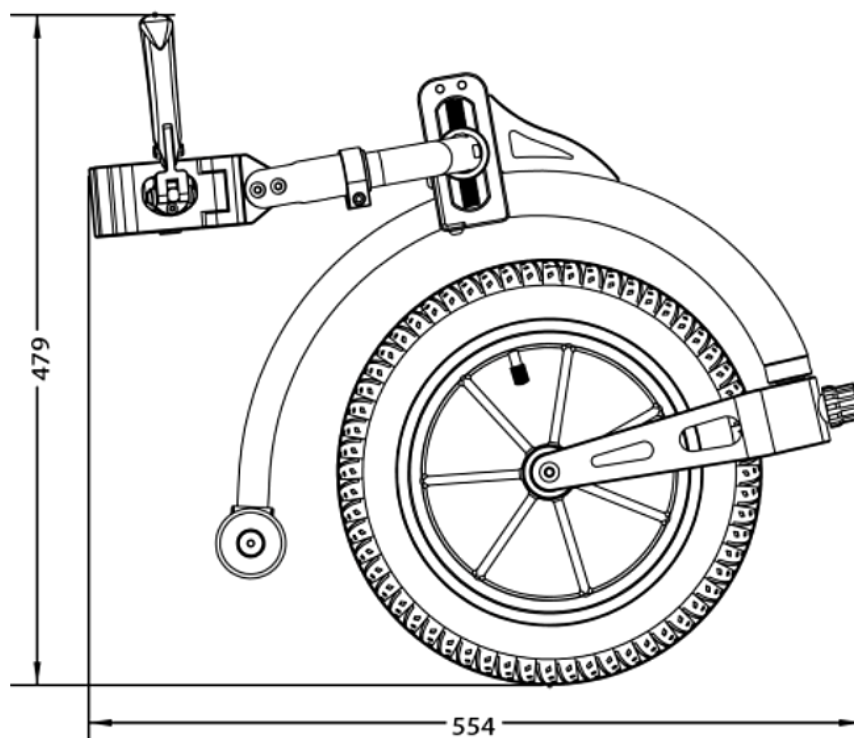

SINGLE ARM

PYÖRÄN SÄÄTÄMINEN


Ennen ensimmäistä käyttökertaa TRACK WHEEL on asennettava ja hienosäädettävä pyörätuoli sopivaksi. Asentaminen kestää noin 5-10 minuuttia vakiotyökaluilla (kuusiokoloavaimet 4 ja 5).



Pyörätuolissasi tulee olla kiinteä, jatkuva jalkakaari tai jalkalauta.

Kiinnike kiinnitetään kiinteään pyörätuolin jalkalautaan.

Asento 1:
Kiinnikevipu aukeaa

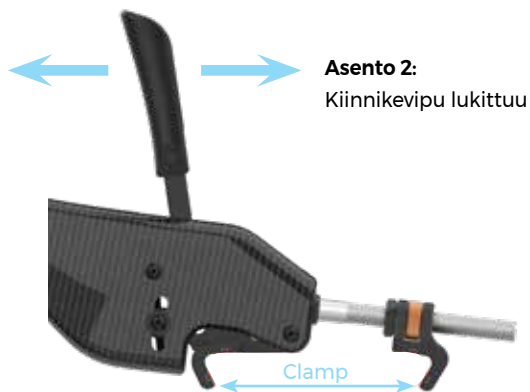

Asento 2:
Kiinnikevipu lukittuu

PYÖRÄN KIIINNITYS

Ensimmäisen asennuksen ja hienosäädön jälkeen nokkapyörän kiinnittäminen on helppoa.

Seuraa vain näitä vaiheita:

1. Käännä TRACK WHEEL ulospäin ja siirrä vipu asentoon 2.
2. Telakoi TRACK WHEEL pyörätuoliin, sulje se siirtämällä vipu asentoon 1 ja käännä TRACK WHEEL takaisin sisäänpäin.



Käännä TRACK WHEEL ulospäin, kun kiinnität sen, ja takaisin sisäänpäin ajoasentoon. Löydät lisätietoja käyttöohjeesta.

DOUBLE ARM

PYÖRÄN SÄÄTÄMINEN

Ennen ensimmäistä käyttökertaa TRACK WHEEL pitää asentaa ja hienosäätää pyörätuoliin sopivaksi. Tuplakiinnikkeillä varustetuissa malleissa voidaan säätää korkeutta ja leveyttä. Asennus kestää noin 15-20 minuuttia.

Asento 1:

Kiinnikevipu
lukittuu

QR-pikalukitus
Clamp



Asento 2:

Kiinnikevipu aukeaa



Yksityiskohta tuplakiinnikejärjestelmästä. Kuvassa vasen kiinnike yhdessä vivun kanssa. Avaamiseksi ja sulkemiseksi molemmat vivut (oikea + vasen) on avattava.

Pyörätuolissasi tulee olla kiinteät tai tiukasti kiinnitetyt jalkatuet.

TRACK WHEEL voidaan kiinnittää kätevästi QR-pikalukitusvipujen avulla.

PYÖRÄN KIINNITYS

KAKSIHAARUKKAISEN -mallin kiinnittäminen on yhtä helppoa alkuasennuksen ja hienosäädön jälkeen.

Seuraa vain näitä vaiheita:

1. Käännä TRACK WHEEL ulospäin ja siirrä vivut asentoon 2.
2. Telakoi TRACK WHEEL pyörätuoliin, sulje se siirtämällä vivut asentoon 1 ja käännä TRACK WHEEL takaisin sisäänpäin.



Käännä TRACK WHEEL ulospäin, kun kiinnität sen, ja takaisin sisäänpäin ajoasentoon. Löydät lisätietoja käyttöohjeesta.



OLETKO SINÄKIN VALMIS TUTKIMAAN UUSIA POLKUJA?

Muuta pyörätuolisi urheilulliseksi kolmipyöräksi ja koe uusi nopeuden ja vapauden tunne!

TRACK WHEEL on ihanteellinen kumppani retkille, kaupungissa, metsässä tai rannalle: erittäin kevyt, helppo kiinnittää ja mukava.

Oletko valmis seuraavaan ulkoiluseikkailuusi?

Olitpa ylittämässä kuoppaisia teitä kaupungissa, kiertämässä pyöräily- ja vaellusreittejä tai tutustumalla epätasaisiin luontopolkuihin - TRACK WHEEL:n avulla voit liikkua vaivattomasti monissa maastoissa.

12" tuuman TRACK WHEEL nokkapyörän kanssa tukipyörät ovat koholla ja pyörätuoli kallistuu hieman taaksepäin. Tällöin kelausvastus pienenee huomattavasti. Tämän seurauksena voit nauttia enemmän nopeudesta ja ohjattavuudesta ajaessasi! Kun TRACK WHEEL on säädetty oikein pyörätuolillesi sopivaksi, **sen voi kiinnittää muutamassa sekunnissa!**



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



REHASENSE SP. Z O.O.
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND
☎ +48 502 728 074
✉ INFO@REHASENSE.COM



REHASENSE