

Huolto/Kunnostus Yomper

HUOMIO! Sähkö- ja elektroniikkakomponentit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä paine- tai höyrypesureita!

Puhdistus

Puhdista Yomper kerran kuukaudessa tai tarvittaessa.

- Sammuta Yomper ja irrota laite pyörätuolista.
- Yomper puhdistetaan parhaiten paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Yomper ja EasyGo-ohjausyksikkö voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Yomper ja EasyGo-ohjausyksikkö voidaan desinfioida markkinoilla olevilla yleisillä pintadesinfiointiaineilla.
- Pyyhi pehmeällä liinalla ja anna ilmakeivua.

Suositteltu huolto

Aikaväli	Ohjaus	Käyttäjä	Teknikko
Päivittäin/Viikoittain	Lataa sekä Yomperin että EasyGo-laitteen akku jokaisen käyttökerran jälkeen.	X	
Päivittäin/Viikoittain	Tarkista EasyGo-ohjausyksikkö (valinnainen). Tarkista halkeamien/vaurioiden varalta (ota yhteyttä teknikkoon, jos huomaat halkeamia/vaurioita).	X	
Kerran kuukaudessa	Tarkista renkaiden kuluminen (ota yhteyttä teknikkoon, jos huomaat renkaiden kulumista).	X	
Joka kolmas kuukausi	Tarkista, että sovittimen kiinnike on kiinnitetty tukevasti pyörätuolin runkoon.	X	
1 kerran vuodessa	Yomperin/moottorin ruuvien ja muttereiden kiristys.		X
1 kerran vuodessa	Akun tila.		X
1 kerran vuodessa	Sähkökaapelit / liittimet / laturi (löysyys ja kuluminen).		X
1 kerran vuodessa	Toiminnan tarkistus (vetopyörät ja toimilaitteet).		X

Pitkäaikaisen kestävyysvarmistamiseksi suosittelemme tekemään säännölliset tarkastukset 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Huolto tulisi suorittaa kahden vuoden välein normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, ota yhteyttä Decon Wheeliin tai jälleenmyyjään.