

 decon wheel

Adventus



Versio: 2016-03

The undersigned, representing the following manufacturer

Decon Wheel AB
Org.No. 556618-9006
Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk
Sweden

hereby declares that the product

Adventus

with the basic UDI-DI 735001014ADVA8

and the following references

ADV4500
ADV4510
ADV4520
ADV4530
ADV4540
ADV4550
ADV4560

is in conformity with the Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 as a class I medical device based on Annex VIII.

Intended purpose: The device is a front wheel for manual wheelchairs with the intention to provide mobility and flexibility to persons who are unable to walk or who have restriction on walking. The device is designed for mounting on the footrest to increase the accessibility on challenging surfaces. The device is intended for outdoor use.

This EU declaration of conformity is issued according to Annex IV in MDR and under sole responsibility of the manufacturer.

Hyltebruk, 2021-05-25


Benny Andersson
COO



Tuote sisältää



- Adventus nokkapyörä
- Asennussetti
- Pidiketeline (lisävaruste)
- Suojus
- Käyttöohje
- 2 vuoden takuu

Huomioitavaa


- Tarkista renkaiden ilmanpaine aina ennen Adventuksen käyttöä.
- Huomioi, että Adventus pidentää pyörätuolisi etuosaa ja saattaa siten lisätä loukkaantumis- ja tapaturmariskiä.
- Adventus on lisävaruste, joka auttaa mm. lumessa, hiekalla ja ruohikolla liikkumisessa. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön (ei esim. pelituoliksi tai urheiluvoitoksiin).

Huomioi ennen asennusta




- Varmista, että pyörätuolin jalkatuki soveltuu nokkapyörän asentamiseen, ja että jalkatuen etu- ja takaputken välinen etäisyys on 60-135 mm.
- Adventus vakiomallin asennuskorkeus on 25-120 mm maasta putken ylätasoon mitattuna. Adventus extra korkeudensäädöllä asennuskorkeus on 25-150 mm.

Asennus ja säätö

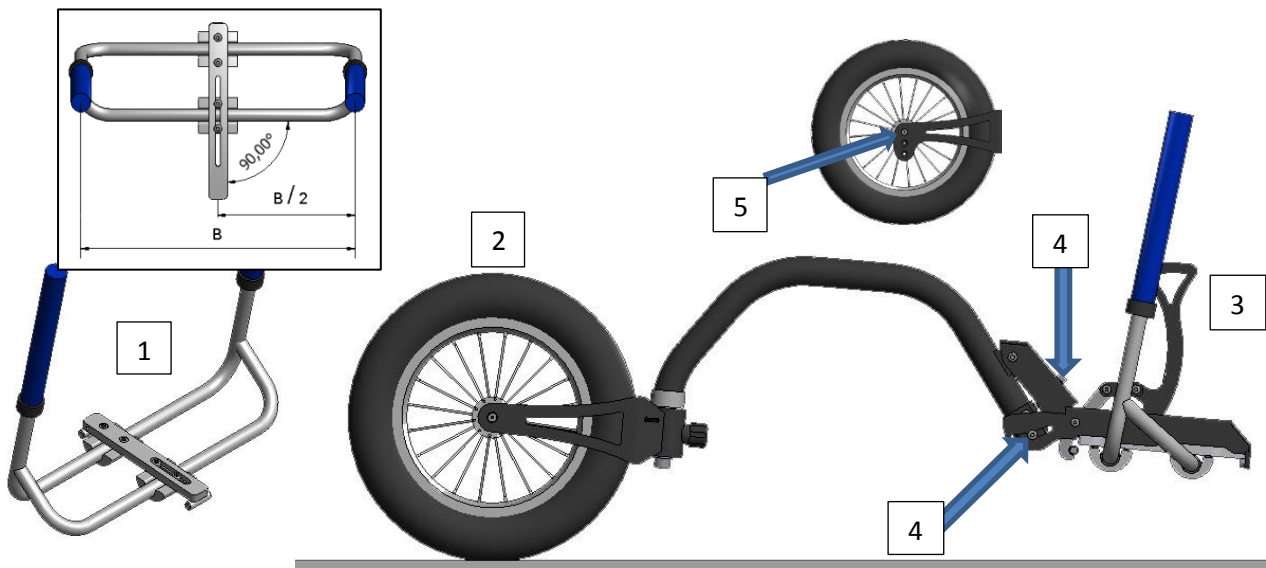

1. Mittaa putken halkaisija ja valitse oikea kiinnike. Kiinnitä pidike 16 mm tai 19 mm kiinnikkeillä. Asenna pidike keskelle jalkatukea, käytä suorakulmaa asentaaksesi pidike mahdollisimman suoraan.
2. Aseta nokkapyörä niin, että se osoittaa suoraan eteenpäin.
HUOM! Käyttäjä ei saa istua pyörätuolissa asennuksen ja säätämisen aikana!
3. Kiinnitä Adventus kannattimeen ① siirtämällä lukkokahvan vipua ③ eteenpäin kunnes se lukittuu.
4. Säädä korkeus kiristämällä ja säätämällä ruuveista niin, että etupyörä koskettaa tukevasti maata.
5. Jos pyörätuolin jalkatuen alaputkien yläosat ovat yli 120 mm korkeudella, valitse Adventus extra korkeudensäädöllä.

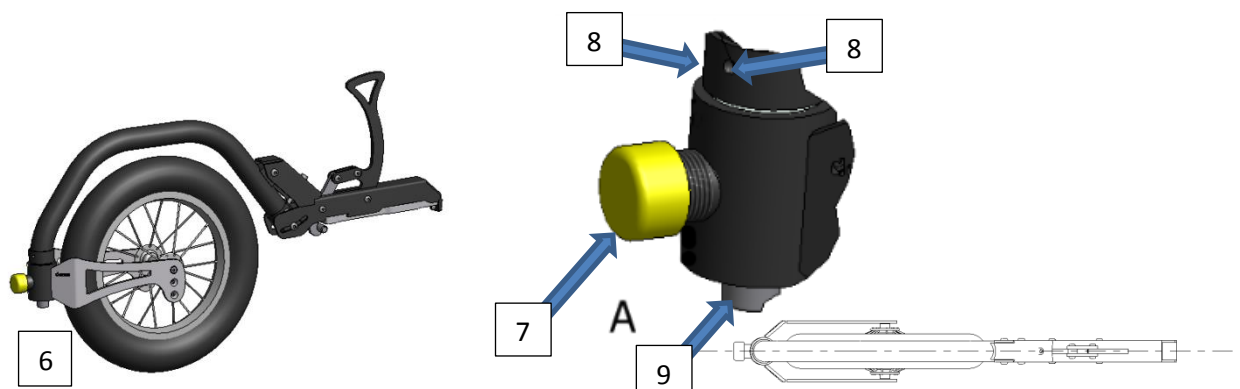


6. Kun etupyörä on kiinnitetty, käännä etupyörä sisäänpäin, jotta pyörätuoli nousee maasta.
7. Ruuvaa säätövivusta ⑦ säätääksesi kääntövastusta.
Kiristä saadaksesi voimakkaampi vastus, ja käännä vipua taakse saadaksesi kevyempi vastus.
8. Tarkista, että pyörä on linjassa runkoputken kanssa. Jos ei, säädä pyörää avaamalla asennusrasian päätyruuvit ⑧ ja ⑨. Säädä pyörän etäisyys ja oikea linja suhteessa runkoputkeen ja kiristä ruuvit takaisin paikoilleen.

Nyt voit käyttää Adventusta.

HUOM!

Muista asentaa kannattimen suojus paikoilleen, kun et käytä Adventusta.

Adventus pidiketelineen asennus

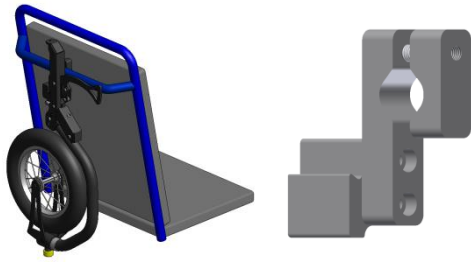

Pyörätuoliin asennus:

Asenna pidiketeline pyörätuolin selkäosan poikkitankoon (halkaisija 18-25 mm).

Kiinnitä Adventus telineeseen lukkokahvasta.

Tekniset tiedot

Pituus:	n. 480 mm jalkatuen edessä.
Korkeus:	n. 350 mm lattiatasosta
Renkaan koko:	12"
Ilmanpainen:	2.5 bar / 240kPa
Paino:	2.32 Kg

Puhdistus ja huolto-ohje

- Puhdista nokkapyörä paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä korrosoivia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Runko puhdistetaan kostealla pyyhkeellä. Vaikeiden tahrojen puhdistukseen voi käyttää mietoa puhdistusainetta.
- Kuivaa pehmeällä liinalla ja anna kuivua.

Takuu

Takuu on voimassa 2 vuotta. Takuu ei koske kuluvia osia.

Vahinkoilmoitukset

Onnettomuudet ja tuotteen käytöstä aiheutuneet vahingot tulee ilmoittaa Adventuksen valmistajalle. Osoite alla:

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
S-314 93 Hyltebruk
Phone: +46(0) 345-40880
Fax: +46(0) 345-40895
e-mail: info@decon.se
www.decon.se

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
31493 Hyltebruk
Sweden
Phone: +46 (0)345-40880
Fax +46 (0)345-40895
info@decon.se
www.decon.se