

Valittu puhujiksi tiedotomitean
toimesta:

ISS

2018

ATSA

2018-2023

ISPRM

2018

ESS

2022



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Juditta



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Juditta

Kehitysaskel mukavuudessa

Juditta on kallistuva ja makuuasentoon säädettävä pyörätuoli, jonka Ormesa on erityisesti suunnitellut ja valmistanut **aikuisille ja iäkkäille potilaille**, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai pysyvää oleskelua pyörätuolissa tai vuoteessa.

Se on **istuinjärjestelmä, jota suositellaan eritasoisista toimintarajoitteista** kärsiville henkilöille; se mukautuu jopa kaikkein vaativimpiin tarpeisiin. Se mahdollistaa vakaan ja mukavan asennon sekä auttaa ehkäisemään virheasentoja ja virheellisiä tai patologisia asentoja.

Istuimen **viskoelastiset nauhat** mukautuvat käyttäjän **yksilölliseen anatomiaan** ja ehkäisevät hankausta sekä painehaavojen syntymistä.

Sen **erityinen rakenne mahdollistaa hengittävyyden, hyvän hygienian ja käyttömukavuuden.**



Mallit B30 ja B60 soveltuvat kuljetettaviksi ajoneuvossa standardien **ISO 7176/19** ja **ANSI RESNA WC/19** mukaisesti.

PRODUCT
MARKED



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset



Hygieeninen ja hengittävä

Antibakteerinen päätuki

valmistettu erityisestä umpisoluisesta materiaalista, joka on erittäin kestävä ulkoisia vaikutuksia vastaan.

Pitkäikäinen viskoelastinen materiaali

Istuin ja selkäosa on päällystetty viskoelastisella, palonkestävällä materiaalilla. Se on kestävä, hengittävä ja liukumaton. Materiaali on valmistettu Ormesan **erityisestä ja ainutlaatuisesta koostumuksesta.**



Ergonominen istuma-asento

Ergonominen selkäosa

Se mukautuu käyttäjän kehon muotoihin. Selkäosan erityinen rakenne tukee vartalon oikeaa linjausta **eikä aiheuta painetta selkärangalle.**

Se tarjoaa myös korkean vakauden tason ilman sivutukien tarvetta sekä tukee virheasentoja ja ehkäisee virheasentojen pahenemista.

Vähentää ja jakaa paineen uudelleen sekä parantaa istuma-asennon siedettävyyttä.

Selkäosan korkeus on säädettävissä, jotta se voidaan mukauttaa erikokoisille käyttäjille.

Istuin

Istuimen erityinen verhoilu sekä lievä kallistus estävät käyttäjää liukumasta eteenpäin.

Jalkatuen ja selkäosan mekaaniset nivelet vastaavat läheisesti kehon luonnollisia niveliä. Kun säädät jalkatuen ja selkäosan kallistusta, liukumisia ei pääse muodostumaan.





Monisäädettävä päätuki

Päätuen rakenne ja mitoitus tarjoavat käyttäjälle vakautta estämättä pään sivuttaisliikettä. **Päätuki seuraa selkänöjan muotoa, mikä varmistaa pään ja vartalon oikean linjauksen.** Päätuen suuri syvyysäättövara ja laaja sivuttaisäättö vastaavat käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin ja mahdollistavat pään tukemisen myös silloin, kun se on poikkeavassa asennossa suhteessa vartalon ja lantion linjaukseen. **Kaikki säädöt helpottavat ja tukevat käyttäjän näkösuuntaa.**



Korkeussäädettävä



Kulmasäädettävä



Syvyysäädettävä



Sivuttaissuunnassa säädettävä

Miellyttävä

Tasaisesti jakautuva paineen kevennys

Kallistus- ja makuutoiminnot vaikuttavat myönteisesti verenkiertoon parantamalla ihon ja lihaskudosten hapensaantia.



Ilman käyttäjää



Käyttäjän kanssa



Paino jakautuu tasaisesti istuimen ja selkäosan välillä, mikä **ehkäisee painehuippujen** syntymisen istuinluiden alueelle.

Istuimen ja selkäosan **viskoelastinen materiaali mukautuu käyttäjän anatomiaan aiheuttamatta painetta tai hankausta.**

Judittan istuinmuotoilu ja verhoilu **ehkäisevät selkärankaan kohdistuvaa painetta.**

A white and black ORMESA wheelchair is shown from a side-rear perspective. The backrest is reclined, and the footrests are extended. The brand name 'ORMESA' is visible on the side of the backrest. The wheelchair has large black wheels and a smaller front wheel. The backrest features a black mesh panel. The footrests are black with green adjustment levers. The frame is white with black components.

Kallistus ja makuuasento

Selkäosan kallistus ja makuuasennon säätö mahdollistavat **optimaalisen asennon** saavuttamisen.

Tämä auttaa **vaihtelevaan painepisteitä ja ehkäisee painehaavojen** syntymistä.

Kallistus- ja makuutoiminnot toimivat kahden erillisen kaasujousen avulla, jotka tasapainottavat käyttäjän painoa ja helpottavat säätöjä avustajalle. Tämä mahdollistaa asennon muuttamisen useita kertoja päivän aikana.

Kliininen arviointi




Judittalla tehty kliiniset havainnot osoittavat kehon painon jakautuvan optimaalisesti. Tämä vähentää painehuippuja ja ehkäisee painehaavojen syntymisriskiä.



Juditta – istuinratkaisumme potilaille, joiden on oltava makuuasennossa pitkiä aikoja

Erityiset viskoelastiset nauhat mukautuvat käyttäjän kehon muotoihin ja painoon, lisäävät selkänöjan ja istuimen kosketuspinta-alaa sekä vähentävät merkittävästi painehuippuja.

Juditta: maksimaalinen kallistus, maksimaalinen selkänöjan kallistus, kohotetut jalkatuet.
Potilas (keskikokoinen aikuinen) juuri asetettu paikoilleen

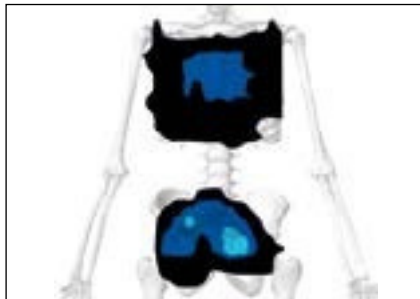

Laajennettu paineen kevennys

Jo 90 minuutin kuluttua käyttäjän asettamisesta paikalleen erityiset viskoelastiset nauhat säilyttävät muotonsa ja painekuormitus vähenee.

Juditta: maksimaalinen kallistus, maksimaalinen selkänöjan kallistus, kohotetut jalkatuet.
Potilas (keskikokoinen aikuinen) 90 minuutin kuluttua asettamisesta.



Ei painetta nikamakappaleisiin

Vasemmalla näemme käyttäjän kannalta turvallisen tilanteen, jossa paineenkevennys on rajallinen. Kun verhoilu poistetaan, selkärangan alueella ei synny painetta.

Tämä tekee Judittasta erityisen sopivan henkilöille, joilla on tulehduksia tai ihomuutoksia selkärangan alueella.

Juditta: tulokset ilman verhoilua



Yksilöitävissä

**Mukautuu erilaisten
käyttäjien tarpeisiin**





Jalkatuki

Ergonominen, irrotettava, käännettävä ja vaivattomasti kallistettavissa kaasujousien avulla.

Säärituet ovat säädettävissä syvyysuunnassa ja vapaasti kallistettavissa, jotta ne mukautuvat jalan liikkeisiin.



Jalkalaudat

Säädettävissä fleksio-ekstensiosuunnassa ja korkeudeltaan.



Istuimen syvyys säädettävissä

neljään eri asentoon siten, että selkänokan kallistuskulma säilyy samana kaikilla neljällä syvyyden säädön tasolla.



Rumpujarrut

Yksittäinen ohjattava rumpujarru punaisella sekä lisänä musta poljin kynnyksien ylittämiseen.



Käsituet

Pehmustetut ja helposti sekä tukevasti korkeussuunnassa säädettävät vivun avulla.



Sivut saksimaisella avautumismekanismilla

Erityisen nivelen ansiosta käsinojat voidaan kääntää selkänojan taakse, mikä poistaa täysin kaikki siirtymistä haittaavat esteet.



Selkäosa

taittuu kuljetusta varten.



Kulmasäädettävä

Säädettävissä vivuilla, joissa on varmistustappi. Tappi mahdollistaa vipujen lukitsemisen, jotta käyttäjälle sopiva säätö säilyy paikoillaan.



Työntökahva

Kulma- ja korkeussäädettävä. Helpottaa avustajaa pyörätuolin käsittelyssä myös silloin, kun Juditta on makuuasennossa.

Hengittävä, kestävä ja

vaalean
harmaa



saatavana myös valkoisella rungolla

tumman
harmaa



saatavana myös mustalla rungolla

pitkäikäinen verhoilu

Helppo irrottaa pesua varten

- › **Palonkestävä:** materiaali on luonnostaan palonkestävää, eikä ominaisuus perustu lisäkäsittelyihin
- › **Kierrätettävä:** tuotantoprosessi on ympäristövaikutuksiltaan vähäinen.
- › **Martindale-menetelmä:** erittäin korkea hankauksenkestävyys jopa 100 000 kierrosta (UNI EN ISO 12947).
- › **Oeko-Tex -sertifikaatti:** kaikille ihokosketuksessa oleville kankaille, mikä takaa laadun ja turvallisuuden terveydelle.

Pitkäikäiset ja erittäin kestävät värit: kestävät hikeä valoa, kemiallista pesua sekä konepesua (katso käyttö- ja huolto-ohjeet).



CERTIFICATE
MED annex A. 1/3. 19-20-21



Kolme kallistusominaisuutta



B12

Sisäkäyttöön, varustettu neljällä 5 tuuman kiinteällä kääntyvällä pyörällä, takapyörissä jarrut.



B30

Varustettu 8 tuuman tukipyörillä (kiinteät, kääntyvät) ja 12 tuuman takapyörillä; rumpujarrut yhdellä ohjauspolkimella sekä erillinen poljin kynnyksien ylittämiseen.



B60

Varustettu 8 tuuman tukipyörillä (kiinteät) ja 22 tuuman kelauspyörillä, joissa on jarru. Kaatumaeste sekä polkaisuputki kynnyksien ylittämiseen.

Lisävarusteena saatavilla käsijarrusarja kelauspyöriin yhdellä vivulla (MOD 905).



Lisävarusteet



975 Ohimotuki

korkeus-, leveys- sekä eteen-taakse-suunnassa säädettävä.

Voidaan asentaa päätuen oikealle tai vasemmalle puolelle.



976 Ohimotuki kaareva

muotoiltava sekä korkeus-, leveys- ja eteen-taakse-suunnassa säädettävä.

Voidaan asentaa päätuen oikealle tai vasemmalle puolelle.



824-R Tarjotin, kallistettava

kallistus sekä eteen-taakse-suunnassa säädettävä, varustettu turvalukituksella.

Valmistettu kestävästä ja hygieenisestä materiaalista. Reunaton muotoilu estää ruokajäämien kertymisen.



894 45° Lantiovyö



834 Pemustettu abduktiotuki

korkeus- ja eteen-taakse-suunnassa säädettävä.




892 Jalkalevyn päällinen,

pehmustettu, irrotettava.



896 Tarjotin 824 päällinen

pehmustettu, irrotettava.

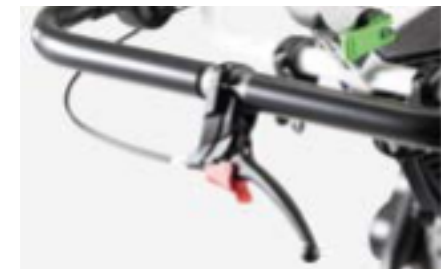

905 Käsijarrusarja yhdellä vivulla takapyöriin

vain malleihin B30 ja B60

Lisävarusteet



914 Jalkatuen lukitus

Lukitsee jalkatuet yhteen yhtenäiseksi jalkalaudaksi.



916 Pohjeremmi, pehmustettu

Vaihtoehto säärityille



932 Kaatumaeste

Vain malliin B30 (vakiovarusteena mallissa B60).



933 Infuusioteline

Vain malleihin B30 ja B12



936 Päätuen päällinen, irrotettava


Yhteensopiva verhoilun kanssa.



938 Vedenkestävä päällinen

Juditta B12 mitat ja painot

	koko 36	koko 40	koko 45	koko 50
A: istuinleveys	36 cm ~ 14,1"	40 cm ~ 15,7"	45 cm ~ 17,7"	50 cm ~ 19,6"
B: istuinsyvyys	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"
C: selkäosan leveys	47 cm ~ 18,5"	47 cm ~ 18,5"	52 cm ~ 20,4"	57 cm ~ 22,4"
D: kokonaisleveys	60 cm ~ 23,6"	60 cm ~ 23,6"	65 cm ~ 25,5"	70 cm ~ 27,5"
H: istuimen kallistuskulma (tilt)	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°
I: selkäosan kallistus	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°
Kokonaispaino	37 kg ~ 81,5 lb	37 kg ~ 81,5 lb	39 kg ~ 85,9 lb	40 kg ~ 88,1 lb
Max. kuormitus	120 kg ~ 264,5 lb	120 kg ~ 264,5 lb	130 kg ~ 286,6 lb	140 kg ~ 308,6 lb
Käyttäjän pituus	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"

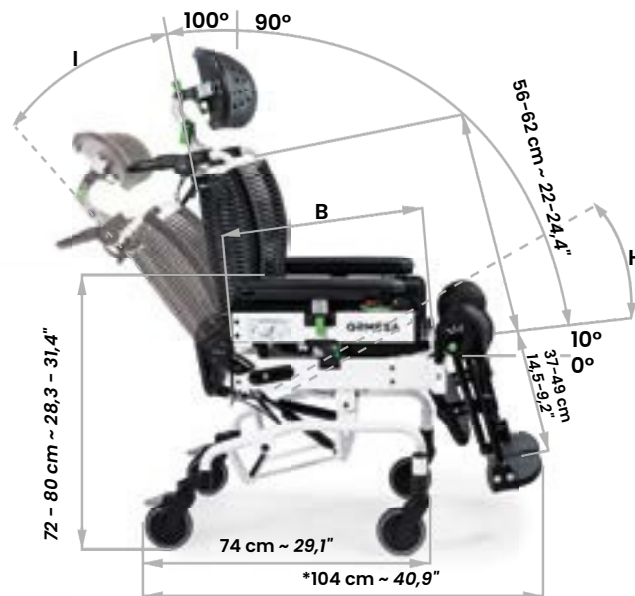



*jalkatuki säädettyä maksimipituuteen



Juditta B30

mitat ja painot

	size 36	size 40	size 45	size 50
A: istuinleveys	36 cm ~ 14,1"	40 cm ~ 15,7"	45 cm ~ 17,7"	50 cm ~ 19,6"
B: istuinsyvyys	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"
C: selkäosan leveys	47 cm ~ 18,5"	47 cm ~ 18,5"	52 cm ~ 20,4"	57 cm ~ 22,4"
D: kokonaisleveys	62 cm ~ 24,4"	62 cm ~ 24,4"	67 cm ~ 26,3"	72 cm ~ 28,3"
H: istuimen kallistuskulma (tilt)	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°
I: selkäosan kallistus	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°
Kokonaispaino	38 kg ~ 83,7 lb	38 kg ~ 83,7 lb	41 kg ~ 90,3 lb	42 kg ~ 92,5 lb
Max. kuormitus	120 kg ~ 264,5 lb	120 kg ~ 264,5 lb	130 kg ~ 286,6 lb	140 kg ~ 308,6 lb
Käyttäjän pituus	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"

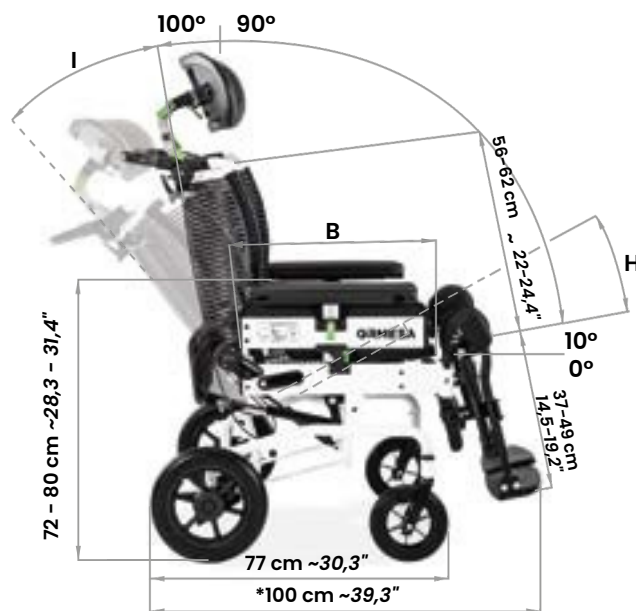
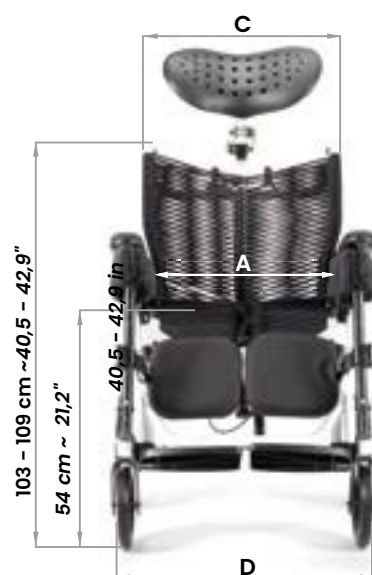


*jalkatuki säädettynä maksimipituuteen





Juditta B60 mitat ja painot

	size 36	size 40	size 45	size 50
A: istuinleveys	36 cm ~ 14,1"	40 cm ~ 15,7"	45 cm ~ 17,7"	50 cm ~ 19,6"
B: istuinsyvyys	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"	40-43-46-49 cm 15,7-16,9-18,1-19,2"
C: selkäosan leveys	47 cm ~ 18,5"	47 cm ~ 18,5"	52 cm ~ 20,4"	57 cm ~ 22,4"
D: kokonaisleveys	69 cm ~ 27,1"	69 cm ~ 27,1"	74 cm ~ 29,1"	79 cm ~ 31,1"
H: istuimen kallistuskulma (tilt)	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°	10° - 35°
I: selkäosan kallistus	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°	10° - 38°
Kokonaispaino	40 kg ~ 88,1 lb	40 kg ~ 88,1 lb	42 kg ~ 92,5 lb	43 kg ~ 94,7 lb
Max. kuormitus	120 kg ~ 264,5 lb	120 kg ~ 264,5 lb	130 kg ~ 286,6 lb	140 kg ~ 308,6 lb
Käyttäjän pituus	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"	140 - 190 cm 55,1 - 74,8"

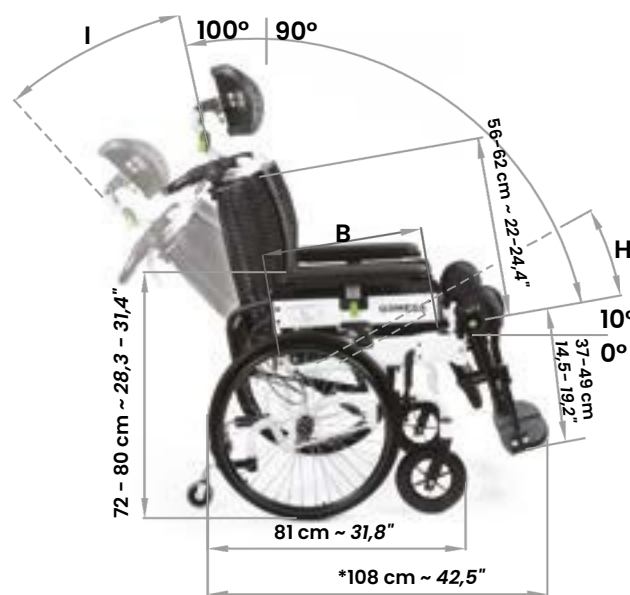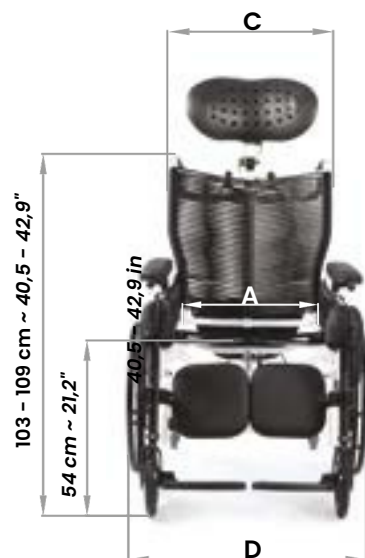


*footrest adjusted to the maximum length

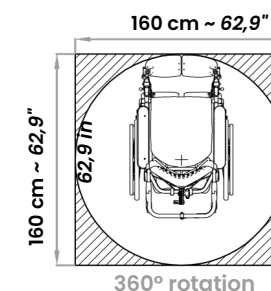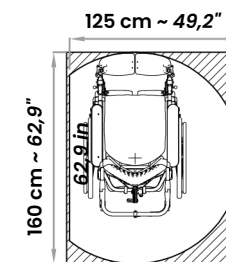





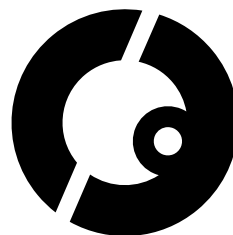

A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.

CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX+39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

