

Rea[®] Focus[™]

Rea[®] Focus[™] , Rea[®] Focus[™] I 50



en **Manuell rullstol medium aktiv**
User Manual



Den här bruksanvisningen **MÅSTE** ges till brukaren.
INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för
framtida referens.

rea[®]



Yes, you can.[®]

© 2016 Invacare® Corporation

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med ™ och ®. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges.

Contents

I Allmänt	5	5.4.2 Lutbart ryggstöd	22
1.1 Inledning	5	5.5 Brickbord	23
1.2 Symboler som används i bruksanvisningen	5	5.5.1 Fästen för brickbordet	23
1.3 Garanti	5	5.5.2 Justering av djup	23
1.4 Ansvarsbegränsning	5	5.5.3 Lås brickbordet	24
1.5 Kundtjänst	5	5.6 Dyna för brickbord	24
1.6 Olyckor/incidenter	5	5.7 Tippskydd	24
1.7 Avsedd användning	5	5.7.1 Montera det svängbara tippskyddet	24
1.8 Överensstämmelse	5	5.7.2 Justera det svängbara tippskyddet	25
1.9 Livslängd	5	5.7.3 Ordinarie tippskydd	25
2 Säkerhet	6	5.8 Höftbälte	26
2.1 Särskilda risker	6	5.8.1 Montera höftbältet	26
2.2 Märkning	6	6 Användande	27
2.3 Symboler	6	6.1 Allmänna varningar – användning	27
2.4 Placering av serienummeretikett	6	6.2 Att använda rullstolen	27
2.5 Lyfta rullstolen	7	6.2.1 Överflyttning till/från rullstol	27
3 Inställningar	8	6.2.2 Sträcka och böja sig	27
3.1 Leveranskontroll	8	6.2.3 Köra i uppförsbacke	27
3.2 Montering	8	6.2.4 Köra nedför en sluttning	27
3.2.1 Montera drivhjulen	8	6.2.5 Trottoarkant	28
3.2.2 Montera sitsen	8	6.2.6 Trottoarkant — alternativ metod	28
3.2.3 Montera ryggstödsbygeln	8	6.2.7 Rulltrappor och trappor	28
3.2.4 Sätta fast armstöden	8	7 Transport	30
3.2.5 Sätta fast benstöden	9	7.1 Säkerhetsinformation	30
4 Funktioner	10	7.2 Begränsningar för transport i fordon	30
4.1 Översikt över rullstolen	10	7.3 Transportera rullstolen i fordon när brukaren sitter i den	30
4.2 Justera ryggstödshöjden	10	7.3.1 Höftbälte	31
4.2.1 Fast ryggstöd och ryggstöd med justerbar spänning	10	7.4 Fastspänningsmetoder	31
4.2.2 Ryggstöd med dubbla vinklar	11	7.4.1 Fastspänning fram med spännband	32
4.2.3 Lutbart ryggstöd	11	7.4.2 Bakre fastspänningsdon	32
4.3 Justera formen på ryggstödet med justerbar spänning	12	7.4.3 Spänna fast höftbältet och säkerhetsbältet	32
4.4 Justera ryggstödsvinkeln	12	7.5 Isärtagning för transport	32
4.4.1 Fast ryggstöd	12	7.5.1 Fälla ned ryggstödsbygeln	32
4.4.2 Ryggstöd med dubbla vinklar	13	7.5.2 Ta bort armstöden	32
4.4.3 Lutbart ryggstöd	13	7.5.3 Fälla ihop sitsen	32
4.5 Justera körhandtagen	13	7.5.4 Ta bort det vinkeljusterbara benstödet	32
4.6 Justera armstöden	13	7.5.5 Ta bort det fasta fotstödet	33
4.6.1 Uppfällbara armstöd	14	7.5.6 Bromsspak	33
4.6.2 Löstagbara armstöd	14	7.5.7 Ta bort drivhjulen	33
4.6.3 Höjdjusterbara armstöd	14	8 Underhåll	34
4.7 Justera sittdjupet	14	8.1 Daglig funktionskontroll	34
4.8 Justera sittbredden	14	8.2 Säkerhetsinformation	34
4.9 Justera sitsen	15	8.3 Rengöring	34
4.10 Justera benstöden	15	8.4 Tvätt och desinfektion	34
4.10.1 Vinklinsbart benstöd	15	8.5 Underhållsplan	34
4.10.2 Fast benstöd	16	8.6 Punktering	35
4.11 Justera de vinklinsbara fotplattorna	16	9 Återanvändning	36
4.12 Justera fotstöd i en del	16	9.1 Återvinning	36
4.13 Justering av vaddynorna	16	9.2 Kassering	36
4.14 Justera drivhjulen	17	9.2.1 Ytbehandling	36
4.14.1 Höjdjustering	17	9.3 Förvaring	36
4.14.2 Djupjustering	17	9.4 Återanvändning	36
4.14.3 Camber	18	10 Teknisk data	37
4.15 Justera länkhjulen	18	10.1 Mått och vikt	37
4.15.1 Länkhjulsinkel	18	10.1.1 Maxvikt för borttagbara delar	38
4.15.2 Höjd på länkhjulen	19	10.2 Material	38
4.16 Däck	19	10.3 Användningsmiljö	38
4.17 Justera bromsarna	19	10.4 Tabeller med sitthöjder	38
5 Tillbehör	21	10.4.1 Rea® Focus™ hög – 20" 3/8"	38
5.1 Iläggsdyna till sits	21	10.4.2 Rea® Focus™ hög – 22" 3/8"	39
5.2 Svängbart bälstöd	21	10.4.3 Rea® Focus™ hög – 22" 1"	39
5.3 Fast arm till bälstödet	21	10.4.4 Rea® Focus™ hög – 24" 3/8"	40
5.4 Huvudstöd/nackstöd	22	10.4.5 Rea® Focus™ hög – 24" 1"	41
5.4.1 Ryggstöd med dubbla vinklar	22	10.4.6 Rea® Focus™ låg – 20" 3/8"	41
		10.4.7 Rea® Focus™ låg – 22" 3/8"	42
		10.4.8 Rea® Focus™ låg – 22" 1"	42

10.4.9	Rea® Focus™ låg – 24*1 3/8”	43
10.4.10	Rea® Focus™ låg – 24*1”	43

I Allmänt

1.1 Inledning

Den här rullstolen har många justeringsmöjligheter och tillbehör. För att se till att du kan utnyttja rullstolen så mycket som möjligt och för att göra alla alternativen rättvisa, måste stolen testas och justeras av kompetent personal. Du måste även få anvisningar angående hur du använder enheten till vardags.

Den här bruksanvisningen innehåller en beskrivning av stolens delar, enkla justerings alternativ samt hur du kan använda enheten säkert och transportera den. Bruksanvisningen måste läsas igenom noggrant, både av brukaren och assistenten.

Dessutom finns en beskrivning av hur tillbehör monteras i bruksanvisningen, samt mer avancerade inställningar.

Eftersom rullstolen har många olika komponenter och tillbehör kan tillbehören du har på din stol skilja sig från de som visas här.

1.2 Symboler som används i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen markeras alla varningar med symboler. Rubriken bredvid varningssymbolen anger graden av fara.



VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.



VIKTIGT

Anger en riskfylld situation som kan leda till sakskada om den inte undviks.



Tips och rekommendationer

Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.



Den här produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Produktens lanseringsdatum anges i CE-försäkran om överensstämmelse.



Verktyg

1.3 Garanti

Vi ger 2 års garanti från leveransdatumet. Skada som beror på slitage på klädsel, däck, (gummi-) rör, drivringar, länkhjul osv. täcks inte av garantin. Skador som uppkommit av fysiskt våld eller onormalt användande täcks inte. Skador som orsakas av att brukaren väger mer än den tillåtna maxvikten för modellen täcks inte. Garantin gäller endast om underhållsanvisningarna följs.

1.4 Ansvarsbegränsning

Invacare Rea AB åtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av:

- underlåtenhet att följa bruksanvisningen
- felaktig användning
- normalt slitage och nötning

- felaktig montering eller inställning som utförs av köparen eller tredje part
- tekniska ändringar
- obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga reservdelar

Skriftligt godkännande från Invacare Rea AB måste erhållas innan extra tillbehör monteras på Invacare Rea-rullstolen. I annat fall kan inget skadeanspråk göras.

1.5 Kundtjänst

Om du vill ha information om produktsäkerhetsmeddelanden och återkallade produkter finns adresserna till de europeiska försäljningsföretagen på sista sidan i det här dokumentet.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om rullstolens användning. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsföreskrifterna för att försäkra dig om att du använder rullstolen på ett säkert sätt.

Du som har nedsatt syn kan se bruksanvisningen som PDF-fil på Internet via www.invacare.se där du kan förstora texten på skärmen efter behov. Kontakta ditt lands Invacare®-distributör om du inte kan förstora text och bild tillräckligt.

® kontaktadresser finns på baksidan av detta dokument. Vid behov kan vi förse dig med en högupplöst version av bruksanvisningen som PDF-fil. Dessutom kan du lyssna på PDF-filen med hjälp av ett lämpligt program som använder särskilda talfunktioner i datorn (t.ex. i Adobe® Reader® X: Skift+Ctrl+Y).

1.6 Olyckor/incidenter

Informera genast ett lokalt Invacare-kontor om rullstolen har varit med i någon olycka eller incident som har lett till eller skulle kunna ha lett till personskada. Du måste även kontakta behörig myndighet och rapportera det inträffade.

1.7 Avsedd användning

Den manuella rullstolen är avsedd för brukare som använder rullstolen under långa tidsperioder och som behöver stöd när de sitter ned. Rullstolen är avsedd att användas både inomhus och utomhus (beroende på vilken storlek som används på länkhjulen). Brukarens maxvikt finns angiven i informationen om tekniska data. Rullstolen är avsedd för brukare som är kapabla att köra rullstolen själva, men också för brukare som behöver assistans. Det finns inga kända kontraindikationer.

1.8 Överensstämmelse

Invacare® arbetar ständigt för att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt.

Den här produkten uppfyller kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Den här produkten har testats och överensstämmer med standarderna ISO 7176-8 och ISO 7176-16 eller ISO 1021-2.

1.9 Livslängd

Vi uppskattar att Invacare® rullstolen har en livslängd på fem år. Det är svårt att ange en exakt livslängd för våra produkter och den livslängd som anges är en uppskattad livslängd som fastställs utifrån normal användning. Livslängden kan vara betydligt längre om rullstolen endast används lite och om den används försiktigt och underhålls och hanteras korrekt. Livslängden kan vara kortare om rullstolen utsätts för extremt hård användning.

2 Säkerhet

2.1 Särskilda risker

Nedan finns ett antal punkter som påverkar din personliga säkerhet. Läs dem noga! Kontakta ett lokalt Invacare-kontor eller en vårdgivare om du behöver hjälp.

Invacare ansvarar endast för produktändringar som utförs av behörig personal. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna och specifikationerna utan förvarning.

Om de instruktioner som ges inte följs kan det leda till personskador och/eller skador på produkten.



WARNING!

Fallrisk

- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta på ramen.
- Kontrollera att alla hjul, rattar, skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att bromsarna och tippskyddet (tillval på vissa modeller) fungerar som de ska.
- Kontrollera att ryggstödet och körhandtagen/körbygeln sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att rullstolen är stabil.
- Dra alltid åt bromsen innan du sätter dig eller reser dig från rullstolen.
- Stå aldrig på fotplattorna när du sätter dig eller reser dig från rullstolen, eftersom det finns risk att den välter.
- Om sittvinkeln ändras kan det medföra en ökad risk för att välta.
- Använd tippskyddet (tillval på vissa modeller).
- Kom ihåg att den vårdarstyrd bromsens bromsverkan minskar på vått eller halt underlag och i nedförslutning.
- Kontrollera noga att drivhjulens sitter ordentligt fast.
- Det finns risk att rullstolen välter och att du skadar dig om ryggstödet kardborreband är för lösa. Kontrollera alltid att de är spända. Kontrollera även att drivhjulens är inställda på ett sådant sätt att det inte finns någon tipp risk.




WARNING!

Risk för personskador

- Rullstolen får aldrig lyftas i de löstagbara armstöden, fotstöden, ryggbygeln eller de justerbara körhandtagen.
- Drivringarna kan bli varma på grund av friktionen, vilket kan leda till skador på händerna.
- Vissa av rullstolens ytor, t.ex. ramdelar och klädsel, kan nå temperaturer över 41 °C om de utsätts för solljus under en längre tid.
- Akta dig så att du inte fastnar med fingrarna när du monterar tillbehör och dyligt.
- Det finns alltid en ökad risk att fastna med kroppsdelar när du lutar rullstolens ryggstöd och sits.
- Sittbredden måste alltid provas ut noggrant så att inte armstödens insida trycker mot sidan av bäckenet.

2.2 Märkning

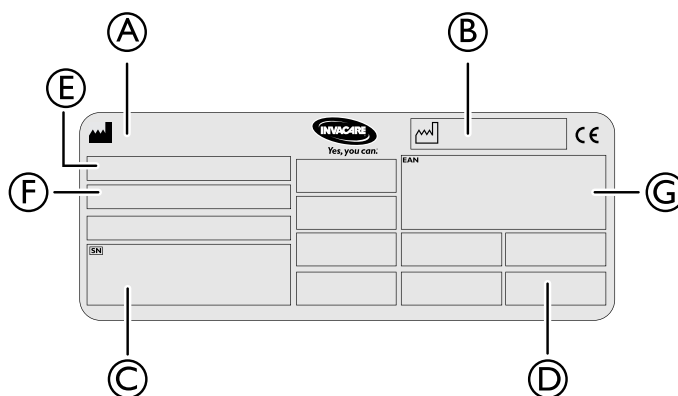

- Ⓐ Tillverkare
- Ⓑ Tillverkningsdatum
- Ⓒ Serienummer
- Ⓓ Brukarens maxvikt
- Ⓔ Modell
- Ⓕ Modellspecifik information som sittdjup och sitthöjd
- Ⓖ EAN-kod

2.3 Symboler

Symboler



Se bruksanvisningen.



Den här produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Lanseringsdatum för produkten anges i CE-försäkran om överensstämmelse.




Tillverkningsdatum




Tillverkare

2.4 Placering av serienummeretikett

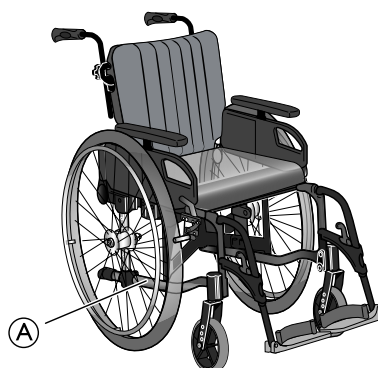

- Ⓐ Placering av serienummeretikett.

2.5 Lyfta rullstolen

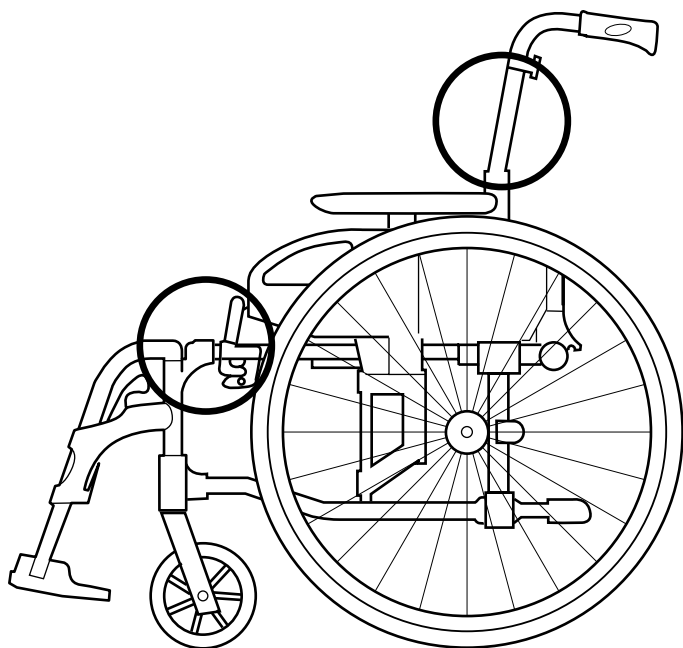

- Lyft alltid rullstolen genom att hålla ramen på de ställen som visas på bilden.
- Se till att ryggstödet och körhandtagen sitter fast ordentligt.
- Läs kapitlet "Säkerhetsinstruktioner/framdrivningstekniker".



Lyft aldrig rullstolen i ryggstödsbygeln.

3 Inställningar


3.1 Leveranskontroll

En eventuell transportskada ska genast anmälas till transportbolaget. Tänk på att behålla förpackningen tills dess att transportbolaget kontrollerat godset och en uppgörelse kommit till stånd.

3.2 Montering

När du får din rullstol måste du sätta dit ryggstödet, eller fälla upp det, beroende på modell. Du måste också sätta dit benstöd och armstöd. Monteringen är enkel och du gör den helt utan verktyg.

3.2.1 Montera drivhjulen

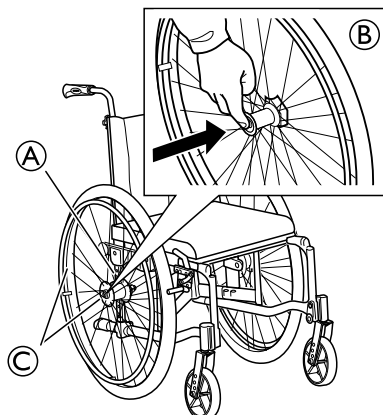

1. Tryck och håll in snabbupplåsningsknappen ⑥ i mitten på navet.
2. Sätt drivhjulet och drivhjulsaxeln ③ i drivhjulsfästet ①.
3. Dra hjulet utåt för att kontrollera att det sitter fast ordentligt.




WARNING!

Risk för personskador

– Kontrollera att drivhjulet sitter fast ordentligt! Det ska inte gå att ta bort hjulen när snabbupplåsningsknappen inte är intryckt.

3.2.2 Montera sitsen

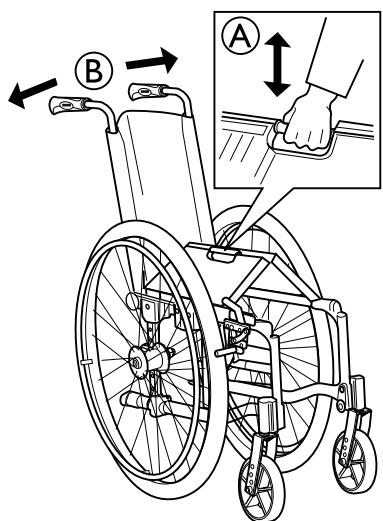

Det finns två sätt att fälla ut sitsen:

- Tryck ned handtaget som sitter i mitten av sittplattan ①.
- Lyft upp drivhjulet något och tryck körhandtagen ② utåt. När sittplattan är i rätt läge hörs ett klick.




WARNING!

Risk för att du fastnar med fingrarna

– Var försiktig så du inte fastnar med fingrarna eller handen när du skjuter sittplattan på plats.

3.2.3 Montera ryggstödsbygeln

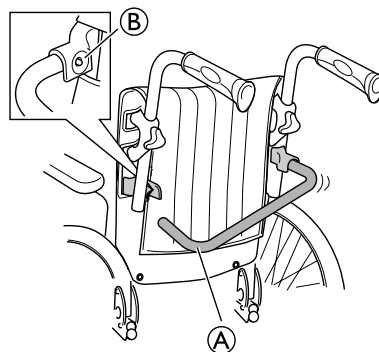


1. Fäll upp ryggstödsbygeln ①.
2. Sätt fast ryggstödsbygeln i fästet med snabbupplåsningsvredet ②.



Se till att snabbupplåsningsvredet ② är fastlåst ordentligt.


3.2.4 Sätta fast armstöden

Uppfällbara armstöd:

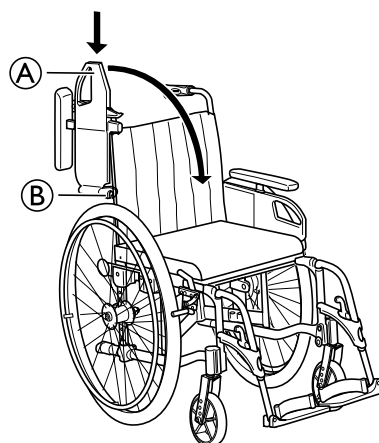

1. Sätt in armstöden ① i fästet ② på ryggstödsramen.
2. Fäll ned armstödet ① för att ställa in det i rätt läge.

Löstagbara armstöd:

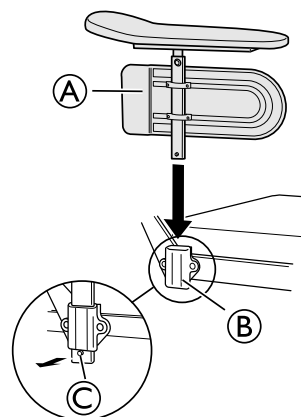

1. Placera armstödet ① i armstödsfästet ②.
2. Se till att snabbupplåsningsknappen ③ är uttryckt.

**VARNING!****Risk för att du klämmer fingrarna**


- Lägg inga fingrar på sittramen medan du trycker in armstöden i fästet.

3.2.5 Sätta fast benstöden

Bromsspakens handtag kan användas med viss frihet. När du för benstödet till ytterläget fälls spaken upp automatiskt utan att bromsen aktiveras. När du ska aktivera bromsen trycker du spaken framåt.

Vinkeljusterbara benstöd

1.

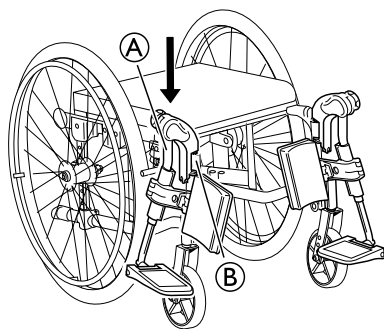


Tryck ned benstöden (A) i rören på benstödens fäste (B).



Du måste vinkla benstödet utåt när du trycker ned det i benstödet fäste.

2.

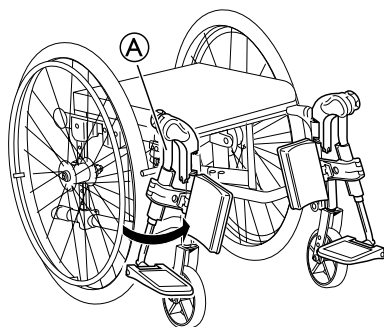

Vrid benstödet (A) inåt så att det snäpper fast.




Benstöden låses automatiskt och det finns ingen risk för att de ska lossna från rullstolen.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för att du fastnar med fingrarna**

- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna mellan ramen och benstöden.

Fasta benstöd

1.

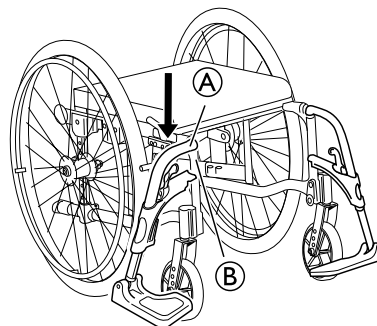


Tryck ned benstöden (A) i rören på benstödens fäste (B).



Du måste vinkla benstödet utåt när du trycker ned det i benstödet fäste.

2.

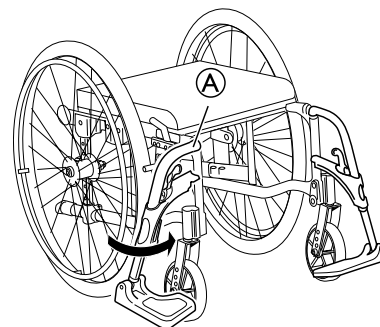

Vrid benstödet (A) inåt så att det snäpper fast.




Benstöden låses automatiskt och det finns ingen risk för att de ska lossna från rullstolen.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för att du fastnar med fingrarna**

- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna mellan ramen och benstöden.

4 Funktioner

4.1 Översikt över rullstolen

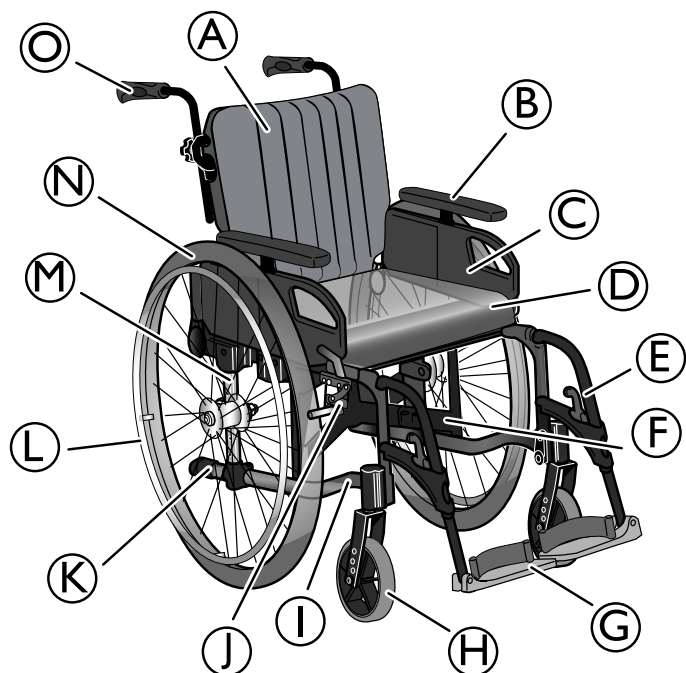


- A Ryggstödsklädsel
- B Armstöd
- C Sidoskydd
- D Sits
- E Benstöd
- F Krysstag
- G Fotplattor
- H Länkhjul
- I Ram
- J Brukarbroms
- K Tippskydd
- L Drivring
- M Drivhjulsfäste
- N Drivhjul
- O Körhandtag

4.2 Justera ryggstödshöjden



VARNING! **Säkerhetsrisk**


– Se alltid till att ryggstödet sitter ordentligt fast.

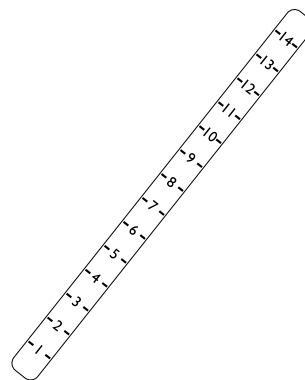

Etiketten som sitter på ryggrören hjälper dig ställa in samma höjd på båda sidor. Etiketten har olika storlek beroende på typen av ryggstöd.


4.2.1 Fast ryggstöd och ryggstöd med justerbar spänning

1.

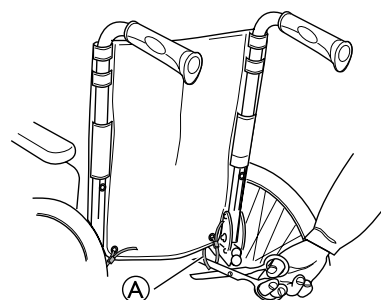

Ta bort buntbanden A längst ned på ryggstödsklädseln.

2.

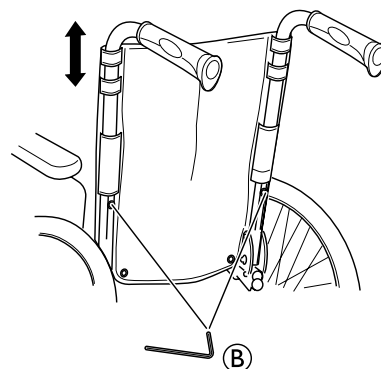

Lossa skruvarna på ryggrören B.

3. Sänk eller höj ryggstödet till önskad position.

4. Dra åt skruvarna.



- 5 mm insexnyckel
- En sax




Justera ryggstödsklädseln så att den täcker så mycket som möjligt av ryggstödet.



Fäst ryggstödsklädseln med nya buntband när du har justerat ryggstödet och dra åt ordentligt.

4.2.2 Ryggstöd med dubbla vinklar

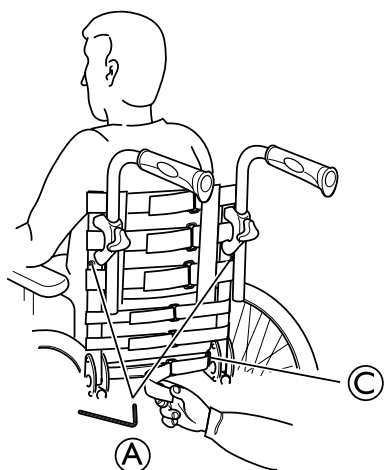

1. Lossa skruvarna A.
 2. Justera ryggstödet till önskad position.
 3. Dra åt skruvarna A.
-  När du justerar höjden på ryggstödet kan det hända att de nedre kardborrebanden behöver justeras.
4. Vid behov kan du vika ned kardborreklädseln och ta bort de band som du inte använder.
-  Det nedre kardborrebandet måste föras genom öppningen på framsidan av ryggstödsfästet C. Det förhindrar att klädseln glider framåt.

4.2.3 Lutbart ryggstöd




WARNING!

Risk för personskador

Ryggstödet sitter inte fast

- Det lutbara ryggstödet har två säkerhetsklämmor som håller fast ryggstödet i ryggstödsrören. Se till att ryggstödet sitter fast i sitt läge och att säkerhetsklämmorna sitter ordentligt efter varje justering.

1.

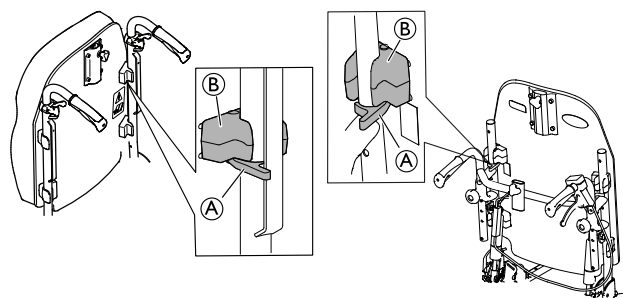


Lutbart ryggstöd utan gasfjäder

Lutbart ryggstöd med gasfjäder


Lossa de två säkerhetsklämmorna A från ryggstödsrören.

2.

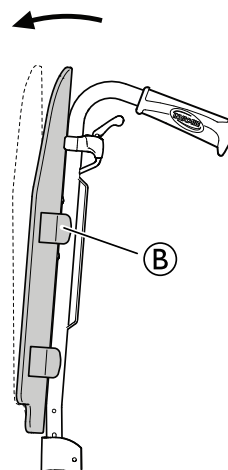

Lossa de två övre fästena B från ryggstödsrören.


3.

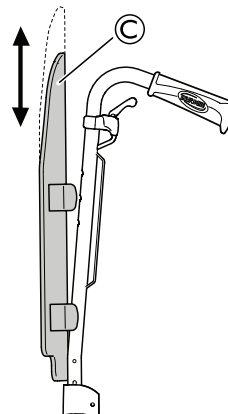

Justera till önskad höjd genom att skjuta ryggstödet C uppåt eller nedåt på ryggstödsrören.


- Det lutbara ryggstödet utan gasfjäder kan justeras till tre fasta lägen (0, 40 och 80 mm).
- Det lutbara ryggstödet med gasfjäder kan justeras till två fasta lägen (0 och 40 mm).

4.

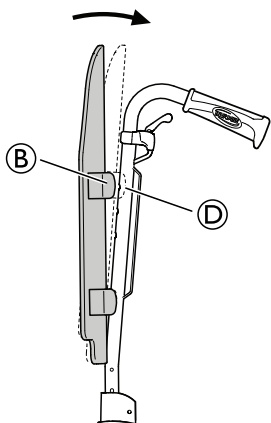


Passa in stiften på de övre fästena (B) i hålen på ryggstödsrören (D).

5.

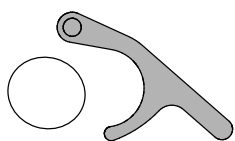

Säkerhetsklämma (A) har lossats

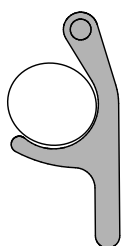

Säkerhetsklämma (A) har satts fast

Sätt fast de två säkerhetsklämmorna (A) igen.


4.3 Justera formen på ryggstödet med justerbar spänning



Formen på ryggstödet med justerbar spänning kan justeras med kardborrebanden. Till exempel kan remmarna i ländryggen dras åt så att de ger det svängbara stödet ett bra stöd och brukaren en mer upprätt sittställning.

1. Vik bort ryggstödsklädseln från kardborrebanden.

2.

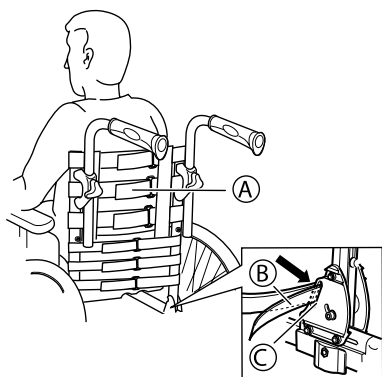

Justera kardborrebanden (A) till önskad form.



Brukaren måste sitta i rullstolen för att ryggstödet ska kunna justeras efter brukarens behov av stöd och komfort.

3. Fixera det lägsta kardborrebandet i ryggstödsfästet (C) efter justeringen. Då fixeras kardborreröygstödet.

4. Vik tillbaka ryggstödsklädseln och sätt fast klädseln med kardborrebandet.

4.4 Justera ryggstödsvinkeln




WARNING!
Säkerhetsrisk

– Se alltid till att ryggstödet sitter ordentligt fast.


4.4.1 Fast ryggstöd

1.

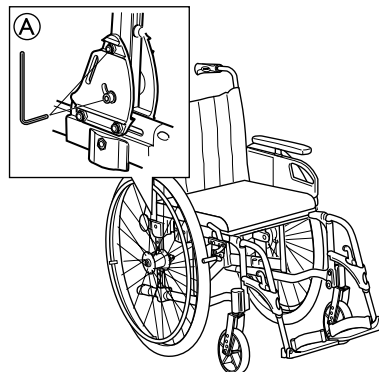


Lossa skruven (A) på ryggstödsfästets insida.

2.

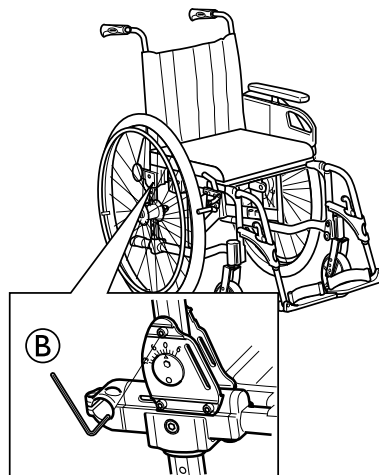

Lossa skruven (B) på ryggstödsfästets utsida.

3.

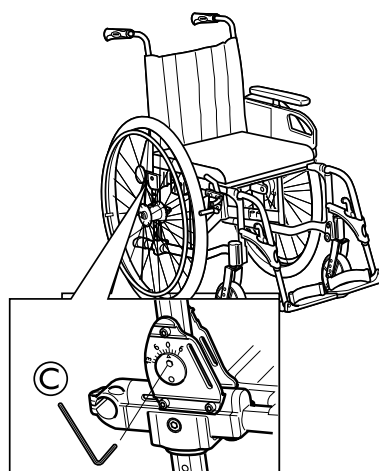

Justera vinkeln genom att vrida på ratten (C).



Vinkeln kan justeras 6 grader framåt och 13 grader bakåt.

4. Dra åt skruvarna på nytt.

5. Upprepa samma sak på andra sidan.




5 mm insexnyckel

4.4.2 Ryggstöd med dubbla vinklar

Ryggstödet med dubbla vinklar kan justeras i två vinklar:

- Vinkeljustering av den övre leden
- Vinkeljustering av den nedre leden

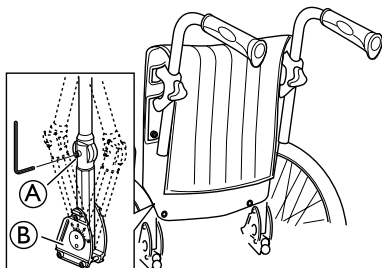

1. Lossa skruven ①.
2. Justera den övre leden till önskad vinkel.
3. Dra åt skruven ①.



I avsnittet "Fast ryggstöd" finns anvisningar för hur du justerar vinkeln på den nedre leden ②.



5 mm insexnyckel

4.4.3 Lutbart ryggstöd




VARNING! Tipprisk bakåt


– Justera drivhjulerna för att få en stabil ställning och använd tippskyddet.

Ryggstöd med gasfjäder:

1.

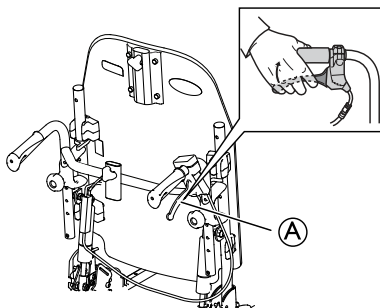

Tryck på spaken ① och justera ryggstödet till önskad vinkel.

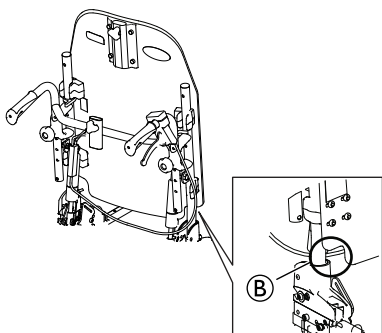


VARNING! Klämrisk

– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du lutar ryggstödet. Håll aldrig fingrarna eller andra kroppsdelar i det markerade området ②.


Ryggstöd utan gasfjäder:

1.

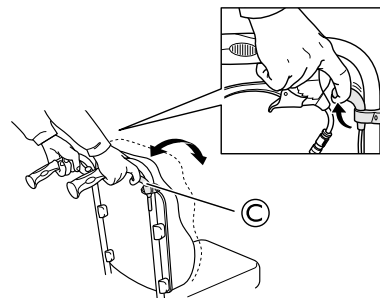


Tryck på spakarna ② och justera ryggstödet till önskad vinkel.

4.5 Justera körhandtagen

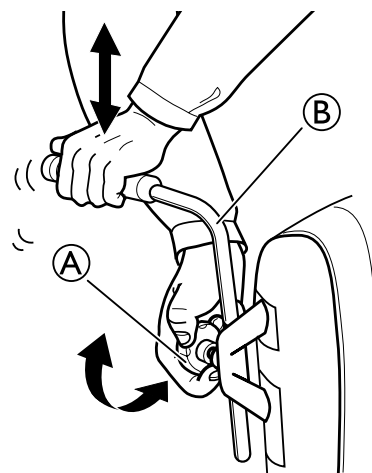

1. Lossa på vredet ①.
2. Justera körhandtaget ② till önskad höjd.
3. Dra åt vredet på nytt.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

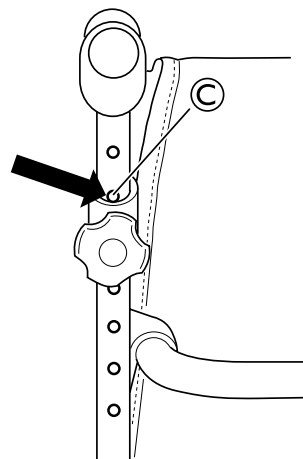

Om du vill låsa körhandtaget i ett visst läge ska närmaste hål uppåt ③ synas som på bilden ovan.

4.6 Justera armstöden




FÖRSIKTIGT!


Risk för att du fastnar med fingrarna

– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan armstödet dyna och sidostödet när du justerar armstödet höjd.

4.6.1 Uppfällbara armstöd

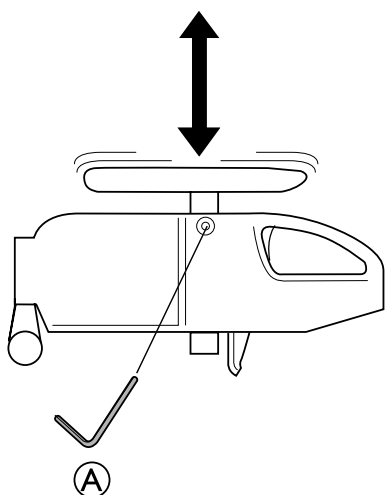


1. Lossa skruven (A).
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

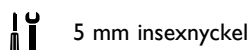


5 mm insexnyckel

4.6.2 Löstagbara armstöd

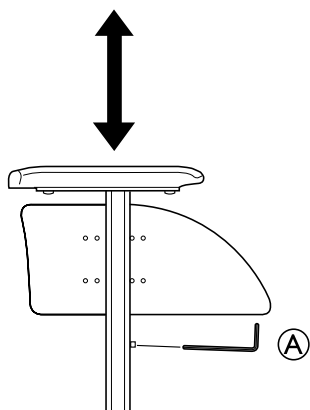


1. Lossa skruven (A).
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

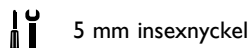

5 mm insexnyckel

4.6.3 Höjdjusterbara armstöd

Höjdjustering:

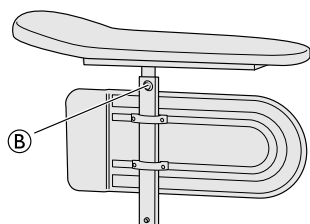


1. Lossa skruven eller handhjulet (B) beroende på vilken typ av armstöd du använder.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven/handhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.



5 mm insexnyckel

Djupjustering:

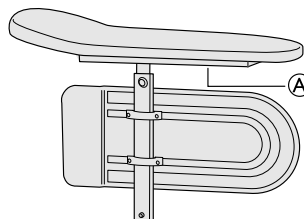

1. Lossa skruven eller handhjulet (A) beroende på vilken typ av armstöd du använder.
2. Justera armstödet höjd till önskat läge.
3. Dra åt skruven/handhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.



5 mm insexnyckel


4.7 Justera sittdjupet



VARNING!

Tipprisk

– När sittdjupet justeras bakåt ska även drivhjulens justeras bakåt för att minska tipprisken.

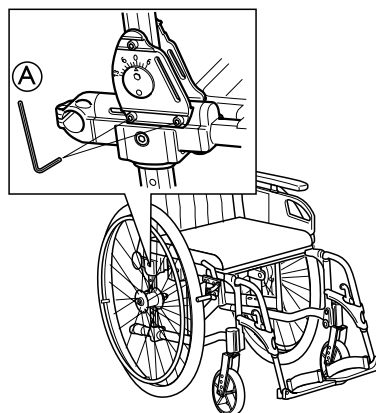

1. Ta bort armstöden.
2. Lossa de två skruvarna (A).
3. Justera till önskat sittdjup.
4. Dra åt skruvarna.
5. Upprepa samma sak på andra sidan.




5 mm insexnyckel

4.8 Justera sittbredden




Sittbredden kan ökas med 25 mm.

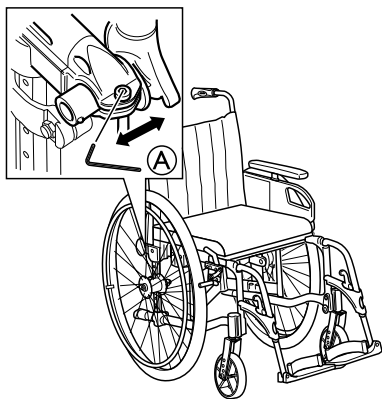

1. Ta bort armstöden och sittdynan.
2. Lossa de två skruvarna A.
3. Justera sittbredden.
4. Dra åt skruvarna.


Om rullstolen är utrustad med uppfällbara armstöd måste även följande göras:

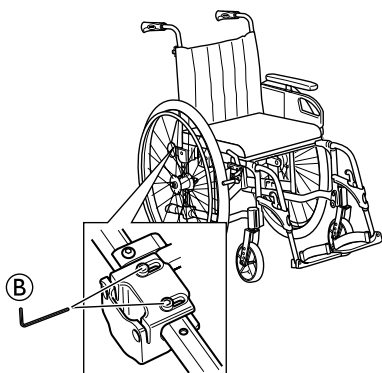

1. Lossa skruvarna B.
2. Dra åt både skruvarna A och skruvarna B

 5 mm insexnyckel

4.9 Justera sitsen

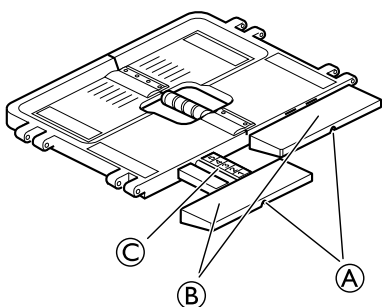

1. Lossa skruven A.
2. Justera sitsfronten B till önskat läge.
 Justera endast sitsfronten inom det markerade området C. Max justering 5 cm
3. Dra åt skruvarna igen.
4. Upprepa samma sak på andra sidan om det behövs.

 Sitsfronten B kan även tas bort helt om det behövs.


 Skruvmejsel

4.10 Justera benstöden

4.10.1 Vinklingsbart benstöd

De vinklingsbara benstöden ger stöd åt benen och minskar belastningen. Benstöden måste alltid vara utrustade med vaddynor, fotplattor och hälband. Det är viktigt att justera benstödens höjd och vinkling för en god sittposition.

Justera benstödet höjd

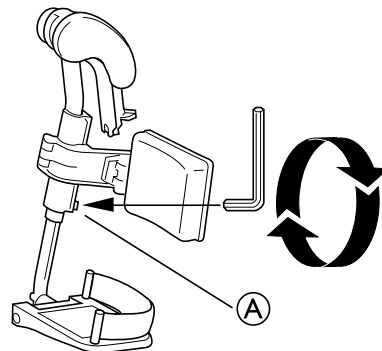

1. Lossa skruven A med en insexnyckel.

 Verktyg: 5 mm insexnyckel

2. Justera benstödet till en lämplig höjd så att skruven fångas av en av försänkningarna i ryggröret.
3. Dra åt skruven.

Justering av vinkeln





WARNING!

Risk för skador på produkten

Mekaniska skador

- Du får inte placera tunga föremål på benstödet eller låta barn sitta på det. Det kan leda till mekaniska skador.
- Benstödet får inte belastas medan du justerar vinkeln. Spaken måste vara helt öppen.

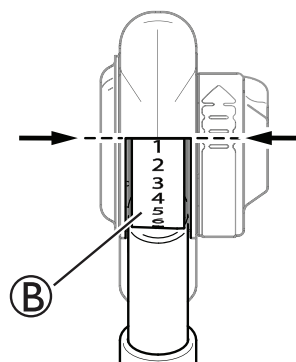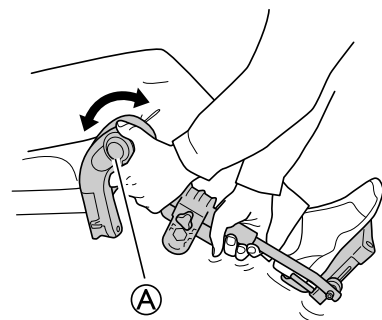


1. Dra i spaken ① med ena handen medan du håller i benstödet med den andra.
2. När vinkeln är lämplig släpper du spaken så att benstödet låser sig i ett av sju förinställda lägen ②.

 Avståndet mellan den nedre delen av fotstödet och marken måste vara minst 40 mm.

4.10.2 Fast benstöd

Höjdjustering

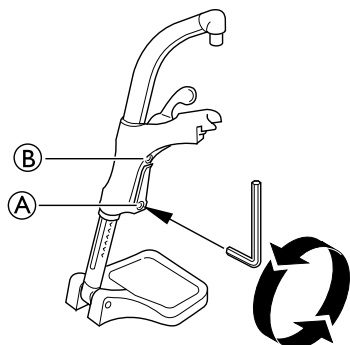

1. Lossa skruven ① med en insexnyckel.


 Rör inte den övre skruven ②.

2. Justera benstödet till lämplig höjd så att skruven fångas av en av försänkningarna i ryggröret.
3. Dra åt skruven.

 Avståndet mellan den nedre delen av fotstödet och marken måste vara minst 40 mm.

4.11 Justera de vinklingsbara fotplattorna

Fotplattorna kan justeras både i djup och vinkel, och de kan även fällas upp.

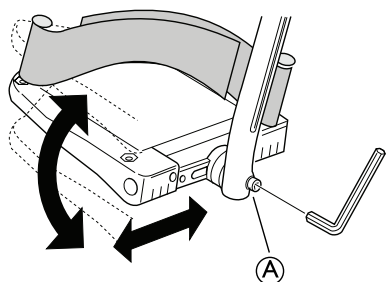

1. Justera vinkeln och djupet genom att lossa skruven ① på fotplattans fäste.

 Verktyg: 5 mm insexnyckel

2. Justera fotplattan till rätt läge.
3. Dra åt skruven.

 Placera inte något på fotplattan när skruven är lös.

4.12 Justera fotstöd i en del




WARNING!

Risk för att du klämmer fingrarna

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan fotplattan och fotplattans fäste.

– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan fotplattan och fotplattans fäste när du viker ned den.

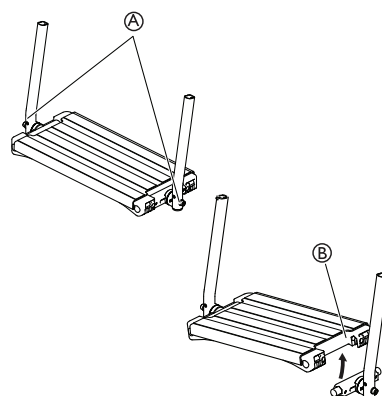

1. Justera vinkel och läge genom att lossa på de två skruvarna ① på fotplattans fäste.


 Verktyg: 5 mm insexnyckel

2. Justera fotplattan till korrekt läge.
3. Dra åt skruvarna igen.

 Fotplattan kan fällas upp. Lyft fotplattan ② uppåt som på bilden ovan.

 Placera inte något på fotplattan när skruvarna är lösa.

4.13 Justering av vaddynorna

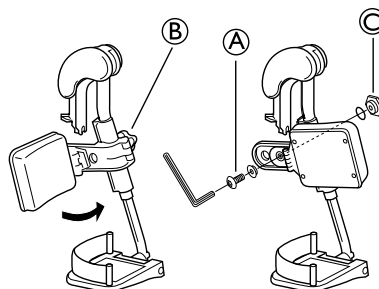

Vaddynorna kan ställas in på två olika djup:

1. Fäll fram dynan.
2. Skruva loss skruven ①.



Verktyg: 5 mm insexnyckel

3. Ta loss den stora muttern ③ på baksidan och sätt den i det andra hålet.
4. Flytta vaddynan till det nya läget.
5. Fäst den med hjälp av skruven ①.

 Du kan enkelt justera vaddynorna med hjälp av handhjulet ②.

4.14 Justera drivhjulen



VARNING! **Säkerhetsrisk**

- När du har monterat hjulen i rätt läge ska du kontrollera att muttrarna och skruvarna är ordentligt åtdragna med ett åtdragningsmoment på 40 Nm. Det är viktigt för din egen säkerhet.



VARNING! **Säkerhetsrisk**


- Kom ihåg att alltid justera bromsarna efter att drivhjulets position har ändrats.



FÖRSIKTIGT! **Skador på produkten**

- När du justerar drivhjulets position kan klämmorna dras åt ojämnt så att drivhjulen skrapar mot armstöden.
- Dra åt fästskruvarna växelvis så att klämmorna sitter jämnt.

4.14.1 Höjdjustering

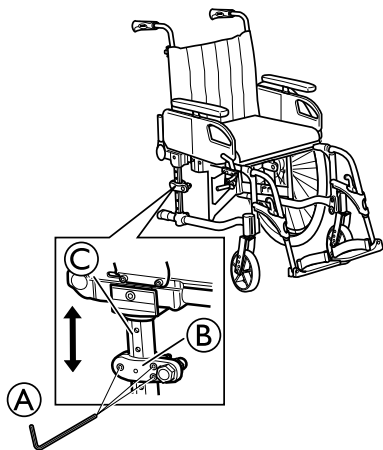

1. Lossa skruven (A).
 2. Skjut klämman (B) uppåt eller nedåt till önskat läge.
-  En plugg på insidan av klämman passar in i hålen på bygel (C).
3. Dra åt skruvarna.



5 mm insexnyckel



FÖRSIKTIGT! **Skador på produkten**

- Klämmorna (B) kan dras åt ojämnt och leda till att drivhjulen skrapar mot armstöden.
- Dra åt skruvarna växelvis för att få klämmorna jämna och hindra hjulen från att bli sneda.

4.14.2 Djupjustering




VARNING! **Tipprisk**

- Placera inte drivhjulen framför ryggstödet eftersom det ökar tipprisken avsevärt.



Drivhjulsstången kan placeras i fyra olika läge för att kunna ändra hjulets balans. Dessutom kan drivhjulet placeras framför eller bakom drivhjulsstången.

Fram- och bakläge:

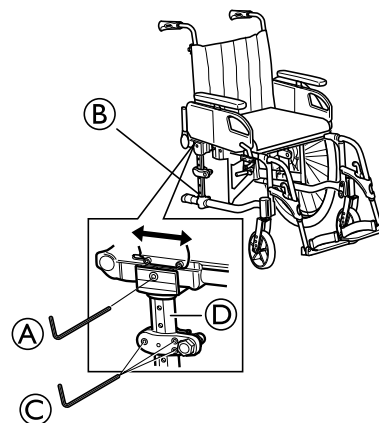

1. Lossa skruvarna (A) och (B).



Skruvhuvuderna ska vara synliga innan drivhjulsstången flyttas.

2. Tryck eller dra drivhjulsstången (D) till det främsta eller det bakersta läget.
3. Dra åt den övre skruven (A) först och sedan den nedre skruven (B).




Den övre skruven (A) låser sig ordentligt först när den är helt igenom.



5 mm insexnyckel

Mellanlägen:

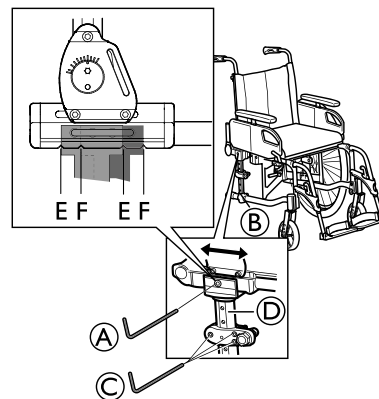

1. Lossa skruvarna (A) och (B).



Skruvhuvuderna ska vara synliga innan drivhjulsstången flyttas.

2. Tryck eller dra drivhjulsstången (D) till läget mellan markeringarna (E) eller (F) på fästet.
3. Dra åt den övre skruven (A) först och sedan den nedre skruven (B).




Den övre skruven (A) låser sig ordentligt först när den är helt igenom.



5 mm insexnyckel

Placering av drivhjulet:

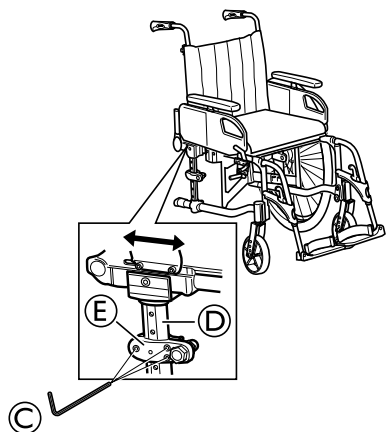


1. Lossa skruvarna ③.
2. Vrid runt drivhjulsklämmorna ⑤ för att placera drivhjulet bakom drivhjulstången ④.
3. Dra åt skruvarna ③.

5 mm insexnyckel

Om drivhjulen placeras framför drivhjulstången ④ blir rullstolen mer instabil. Om drivhjulen placeras längre bak ökar stabiliteten.

4.14.3 Camber

Beroende på drivhjulsfästet kan den här produkten ha 0° eller 2° camber. För att uppnå 2° camber måste drivhjulsfästet bytas ut.

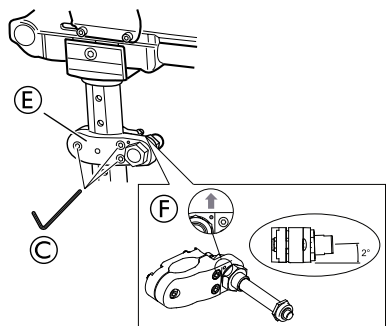

1. Lossa skruvarna ③.
2. Ta bort drivhjulsfästets klämmor ⑤.
3. Montera camber-drivhjulsfästet ⑥.

2° camber-drivhjulsfästet har en rund markering på utsidan av klämman. Se till att markeringen placeras uppåt för att få rätt vinkel.

4. Dra åt skruvarna.

5 mm insexnyckel

4.15 Justera länkhjulen



VARNING!

Tipprisk


Länkhjulet kan lossna
– Kontrollera alltid att länkhjulen är ordentligt fastlåsta efter varje justering.



VARNING!

Säkerhetsrisk


– Se till att länkhjulshöljet sitter ordentligt fast efter varje justering.

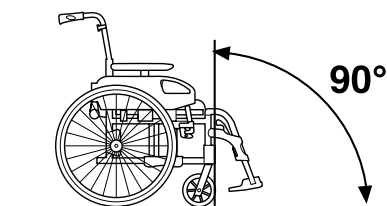

När du har hittat en sitthöjd och ett sittdjup som passar måste du kontrollera att vinkeln mellan länkhjulsfästet och marken är så nära 90 grader som möjligt. Vinkeln kan påverka rullstolens körförmåga.


4.15.1 Länkhjulsvinkel

1.

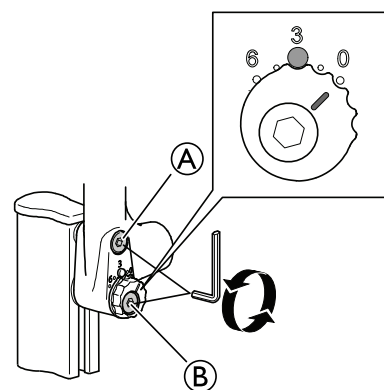


Lossa skruven ①.

2. Lossa skruven ② två varv.
- 3.

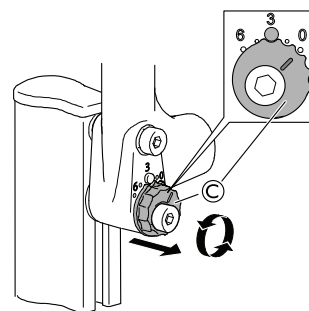

Dra ut justeringsskruven ③.

4.

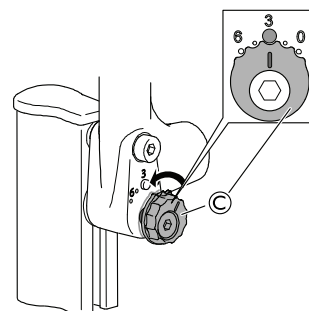


Vrid justeringsskruven ③ till önskat vinkelläge.



Länkhjulen kan vinklas i 5 olika lägen från 0° till 6°.

5.

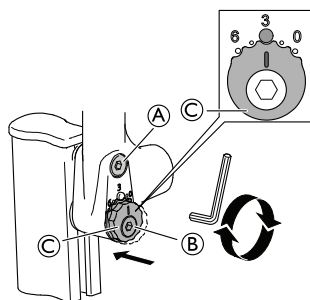

Tryck tillbaka justeringsskruven © i sitt läge efter justeringen.

6. Dra åt skruvarna A och B.




Skruvarna ska dras åt med ett åtdragningsmoment på 20+/-2 Nm.



5 mm insexnyckel

4.

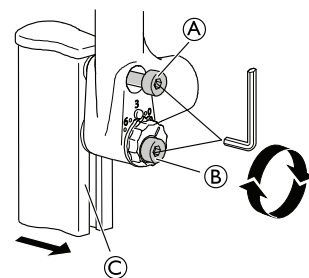

Tryck tillbaka länkhjulshöljet © i sitt läge efter justeringen.

5. Dra åt skruvarna A och B igen.



Skruvarna ska dras åt med ett åtdragningsmoment på 20+/-2 Nm.




5 mm insexnyckel

4.15.2 Höjd på länkhjulen



Notera att endast höjdversionen (89,4 mm) av länkhjulsfästet går att höjjustera.


1.

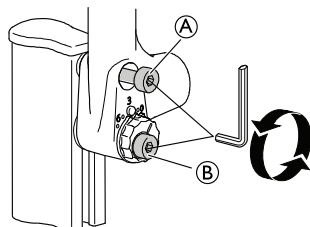

Lossa skruven A cirka 7 varv.

2. Lossa skruven B cirka 2 varv.

3.

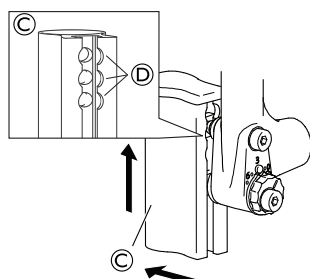

Dra ut länkhjulshöljet © och justera det till önskad höjd.



Det finns tre möjliga fasta höjder ①.

4.16 Däck

Det optimala trycket beror på däcktypen:

Nedanstående tabell visar tryck för olika däck. Om däck inte finns med i nedanstående lista kan du kontrollera däcktrycket på sidan av däck där det maximala däcktrycket finns angivet.

Tire	Max. pressure	
Pneumatiskt 24 x 1 3/8 x 1 1/4	4,5 bar	65 psi
Pneumatiskt 24 x 1 3/8	4,5 bar	65 psi
Pneumatiskt, låg profil	7,5 bar	110 psi
Låg profil PKT (24x1)	—	—
Pneumatiskt, rutmönster, punkteringssäkert	—	—
Massivt	—	—



Kompatibiliteten för däck som anges ovan beror på rullstolens konfiguration och/eller modell.




Om du får punktering på ett däck kan du kontakta en lämplig verkstad (t.ex. en cykelreparatör, cykelåterförsäljare ...) och få innerslangen utbytt av en fackman.

4.17 Justera bromsarna



WARNING! **Minskad bromseffekt**


– Felaktiga justeringar av bromsen kan minska bromsens verkan.

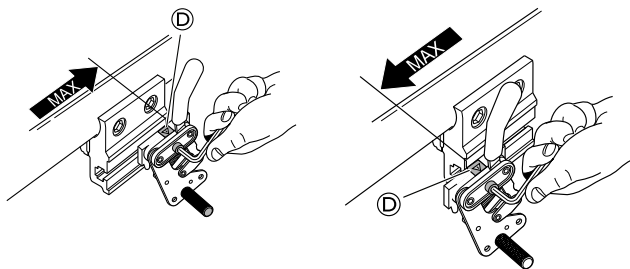

WARNING!

Risk för minskad bromseffekt

– Bromsarna får inte flyttas längre framåt eller bakåt än vad som anges på varningsetiketten **D**.

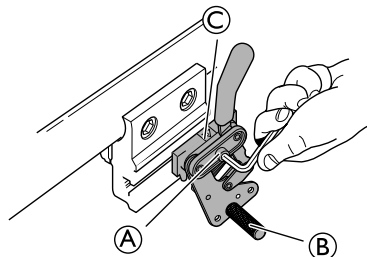

1. Kontrollera att däckens har rätt lufttryck.



Det finns information om lufttrycket på däck.


2. Lossa skruven **A**.

3. Skjut bromsen **C** framåt eller bakåt till önskat läge.
4. Dra åt skruven.



Avståndet mellan bromsaxeln **B** och däck ska vara ca 15 mm.

Om ytterligare justeringar av bromsarna är nödvändiga kan även bromsfästet justeras framåt eller bakåt:

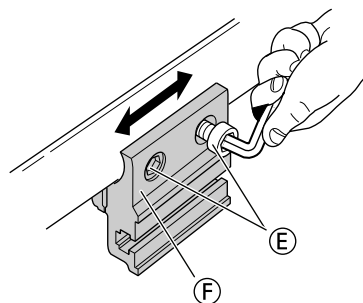


1. Lossa skruvarna **E** på bromsfästet **F**.
2. Skjut bromsfästet **F** framåt eller bakåt till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.



5 mm insexnyckel

5 Tillbehör


5.1 Iläggsdyna till sits

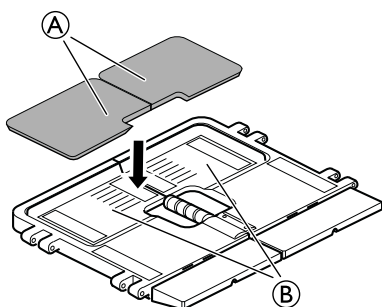


1. För att få en platt sits ska iläggsdynan A placeras på sittplattan.
2. Sätt fast iläggsdynan bak till på sittplattan B.

5.2 Svängbart bålstöd

Höjjustering:

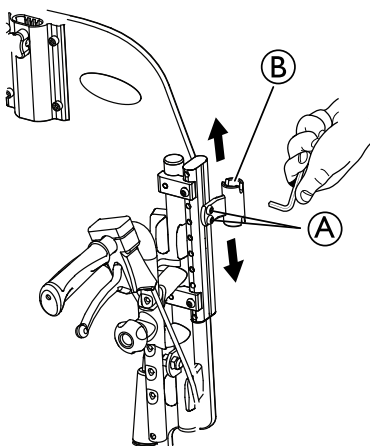

1. Lossa skruvarna A.
2. Skjut bålstödhållaren B uppåt eller nedåt till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

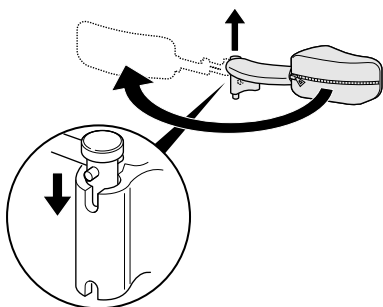


i Det svängbara bålstödet kan vridas åt sidan för att inte vara i vägen när brukaren tar sig i och ur rullstolen.



FÖRSIKTIGT! **Klämrisk**

– Överdraget på bålstödsarmen måste alltid vara på när rullstolen används.

Justering av vinkeln:

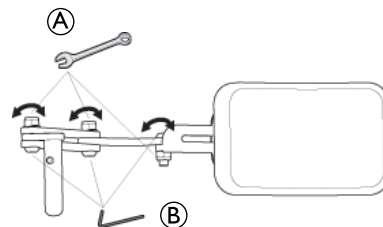


1. Vinkeln kan justeras genom att lossa skruvarna B och bultarna A på bålstödsarmen.
2. Håll med insexnyckeln och dra åt med den fasta nyckeln.
3. Kom ihåg att dra åt skruvarna och bultarna när önskat vinkelläge har nåtts.



5 mm insexnyckel/13 mm fast nyckel.

Djupjustering:

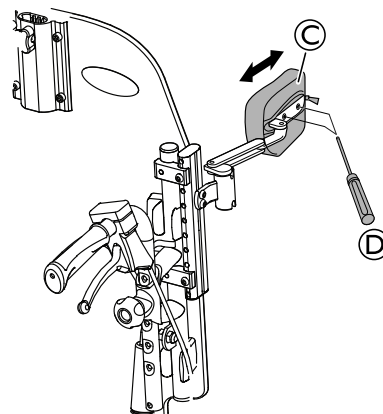

1. Öppna dragkedjan på överdraget C.
2. Lossa skruvarna D.
3. Justera bålstödet till önskat djup.
4. Dra åt skruvarna C.
5. Stäng dragkedjan på överdraget.



Skruvmejsel




FÖRSIKTIGT!

Klämrisk

– Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan bålstödet och hjulet när rullstolen körs.

5.3 Fast arm till bålstödet

Höjjustering:

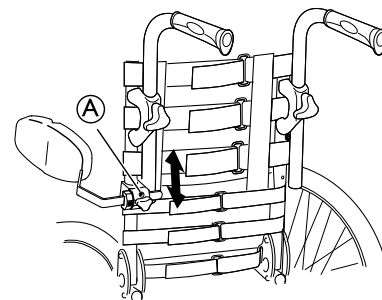


1. Lossa skruven A.
2. Justera fästet uppåt eller nedåt till önskad höjd.
3. Dra åt skruven A.




Skruvmejsel

**FÖRSIKTIGT!****Klämrisk**

- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan bälstödet och hjulet när rullstolen körs.

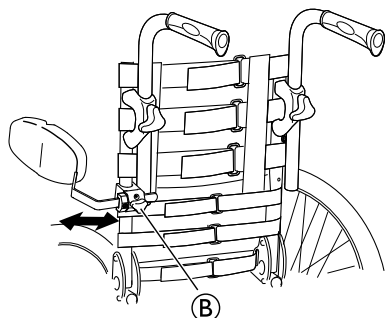Djupjustering:

1. Lossa handhjulet ②.
2. Justera djupet på bälstödet.
3. Dra åt handhjulet.

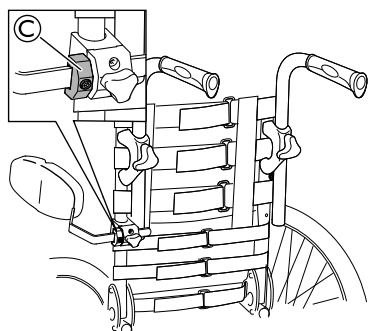Minnesfunktion för djupjusteringen:

1. Lägg till minnesblocket ③ på bälstödet.
2. Montera bälstödet i fästet.
3. Justera bälstödet till önskat djup och fixera djupet.
4. Placera minnesblocket ③ framför fästet.
5. Dra åt skruven på minnesblocket.



 Minnesfunktionen gör det lättare att behålla djupinställningarna när bälstödet tas bort från rullstolen.

5.4 Huvudstöd/nackstöd**WARNING!****Instabil rullstol**

- Om huvudstödet eller nackstödet monteras bakom ryggstödet kan det påverka rullstolens stabilitet. Kontrollera rullstolens stabilitet och justera drivhjulen bakåt om det behövs för att göra rullstolen stabilare.

5.4.1 Ryggstöd med dubbla vinklar

Det dubbelvinklade ryggstödet kan utrustas med ett huvudstöd eller ett nackstöd. Huvudstödet eller nackstödet monteras på körbygeln.

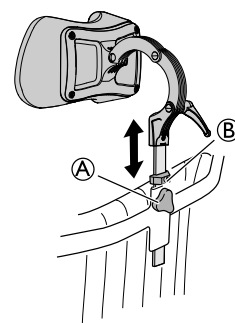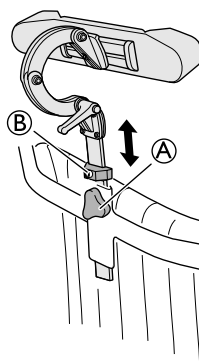Höjdjustering

Höjdjusteringen och borttagningen sköts med handhjulet. Bågen har ett justerbart stoppblock.

1. Lossa på skruven i stoppblocket ②.
2. Lossa handhjulet ①.
3. Justera huvud- eller nackstödet till önskad position.
4. Dra åt handhjulet ①.
5. För stoppblocket ② ned till den övre delen av huvud-/nackstödsfästet.
6. Dra åt skruven.



5 mm insexnyckel





Nu kan du ta bort huvud-/nackstödet och sätta tillbaka det i önskad position utan andra justeringar.



Mer information om djup- och vinkeljustering av huvud-/nackstödet och om hur du sätter tillbaka huvud-/nackstödet finns i de följande avsnitten.

5.4.2 Lutbart ryggstöd

Det lutbara ryggstödet kan utrustas med ett huvudstöd eller ett nackstöd. Huvudstödet eller nackstödet monteras i fästet på ryggstödet.

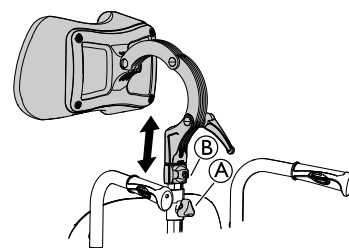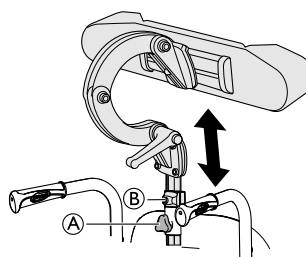Höjdjustering


Höjden liksom borttagande av huvudstödet sker med handvredet. Röret är utrustad med en "minnesring".

1. Lossa först skruven i minnesringen ②.
2. Lossa handvredet ①.
3. Justera huvudstödet till önskad position.
4. Dra åt handvredet igen ①.
5. För nu minnesringen ② ner till fästet.
6. Dra åt skruven igen.



Det är nu möjligt att avlägsna huvudstödet och sätta tillbaka det med förinställd höjd.


Djup / vinkeljustering

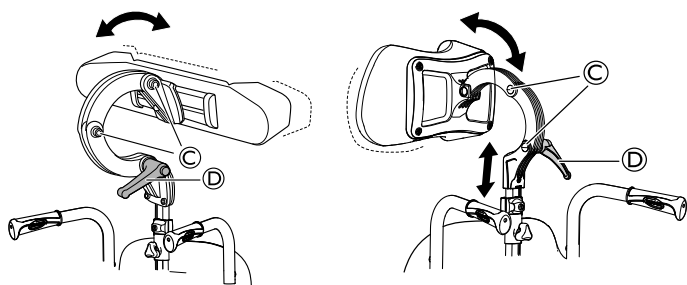

1. Lossa handtaget ④.
2. Lossa skruvarna ③.
3. Justera djupet och vinkeln på huvudstödet.
4. Dra åt handtaget och skruvarna igen.

Flytta fram huvudstödet/nackstödet

i Med denna extra djupjustering placeras huvudstödet ytterligare 7 cm längre fram.

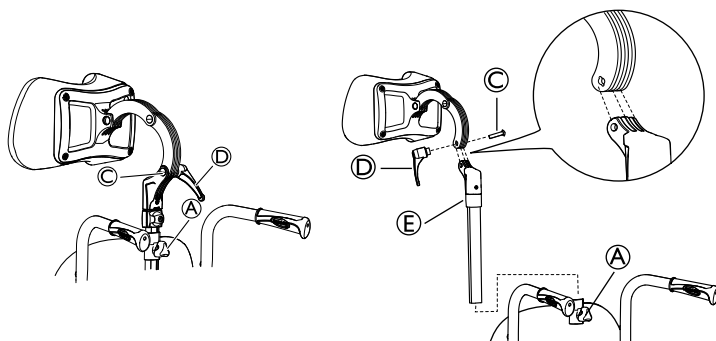

i Du kan också justera vinkeln och djupet genom att vrida på huvudstödet/nackstödet fäste.

1. Lossa handhjulet ①.
2. Ta bort huvudstödet/nackstödet.
3. Lossa handtaget ④.
4. Ta bort skruven och handtaget.
5. Roterar huvudstödet/nackstödet fäststång inklusive fästet ⑤.
6. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet.

i Observera att skruven i huvudstödet/nackstödet fäste ③ och handtaget ④ måste monteras på den motsatta sidan på grund av gängorna i skruvhålet.

7. Sätt tillbaka huvudstödet/nackstödet i fästet på ryggstödet.
8. Dra åt handtaget ④ igen.

5.5 Brickbord



WARNING! Fallrisk/skaderisk

- Bordet får aldrig användas som ersättning för ett bäckenbälte.



WARNING! Tipprisk/skaderisk

- Maximal belastning på bordet: 8 kg



FÖRSIKTIGT!


Risk för obehag/blåmärken

- Se till att användarens armbågar vilar på bordet när rullstolen körs. Om armbågarna sticker ut från bordet när rullstolen körs finns det en risk för obehag eller blåmärken.

Bordet kan justeras både i djup och bredd. I följande avsnitt visar vi de olika möjligheterna.


5.5.1 Fästen för brickbordet

1.

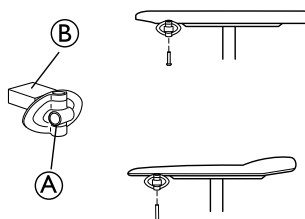

Montera bordsfästet ① med själva fästdelen utåt. Den omöstrade ytan ② på fästet ska vara uppåt när du använder bordet på smala armstöd.


2.

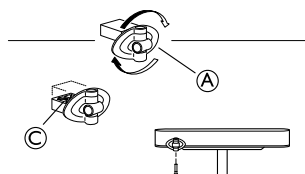

När du ska montera bordsfästet ① på breda armstöd, vänder du på fästet så att den möstrade ytan ③ är uppåt.


5.5.2 Justering av djup

1.

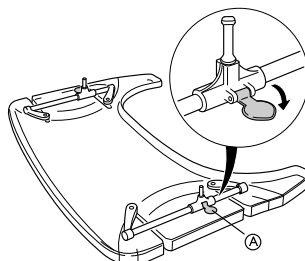


Öppna säkerhetsspärren när djupet ska justeras ①.

2.

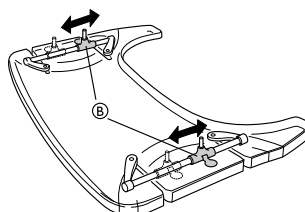

Justera bordsfästena ② framåt eller bakåt till önskat djup.

3.

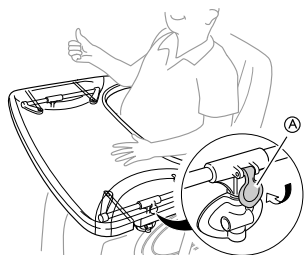


Lås säkerhetsspärren ① igen för att låsa bordets position.

**FÖRSIKTIGT!****Säkerhetsrisk/risk för obehag**

Bordet är inte fixerat.

- Glöm inte att låsa spärren igen efter att du har justerat djupet.

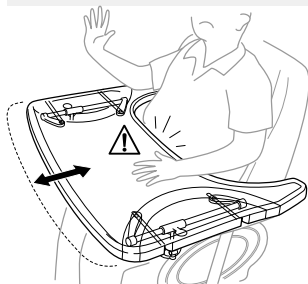
**FÖRSIKTIGT!****Risk för obehag**

- Se till att inte trycka bordet mot användarens mage när du justerar djupet.

5.5.3 Lås brickbordet**WARNING!****Risk för personskador**

Brukaren är låst i en fast position och kan inte tas ur rullstolen utan att bordet låses upp.

- Användning av en låsanordning för brickbordet måste ordinerar av auktoriserad personal.

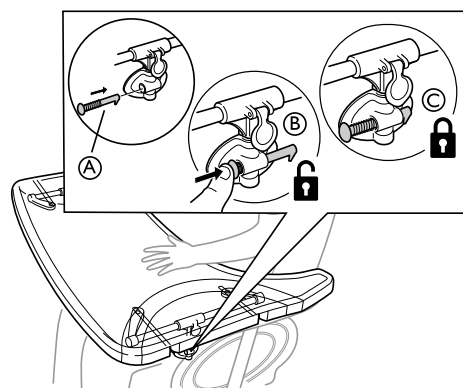

1. Placera låssprinten A i brickfästet.
2. Tryck in låssprinten A för att låsa upp bordet B.




Fortsätt trycka in låssprinten för att hålla bordet upplåst.

3. Släpp låssprinten A för att låsa bordets C läge.

5.6 Dyna för brickbord

En dyna kan placeras på brickbordet för att få en mjukare yta för armar och armbågar.

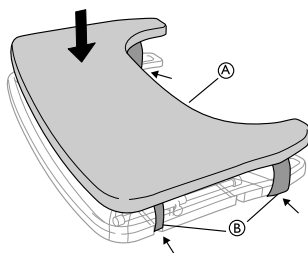


Placera dynan A på bordet och fäst remmarna B runt bordet.

5.7 Tippskydd**WARNING!****Tipprisk**

- Glöm inte att aktivera tippskyddet när det har varit inaktiverat.

**WARNING!****Tipprisk**

- Använd alltid två tippskydd.

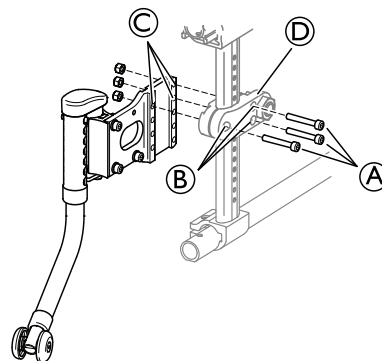5.7.1 Montera det svängbara tippskyddet

1. Sätt in de tre skruvarna A i hålen B på drivhjulsfästet D.
2. Sätt i skruvarna i hålen på tippskyddsfästet C.



Tippskyddet kan monteras i olika höjdlägen, beroende på skruvarnas placering.


3. Dra åt skruvarna ordentligt.



Avståndet mellan hjulet på tippskyddet och drivhjulet ska vara ca 50 mm.




5 mm insexnyckel/10 mm fast nyckel

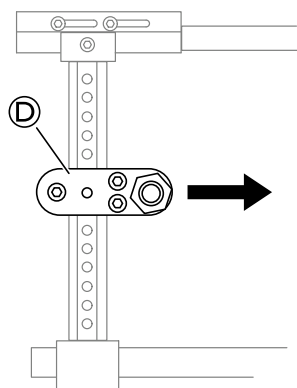

Drivhjulsfästet D måste monteras så det är riktat framåt för att tippskyddet ska fungera ordentligt.

5.7.2 Justera det svängbara tippskyddet

Höjdjustering/uppfallning:

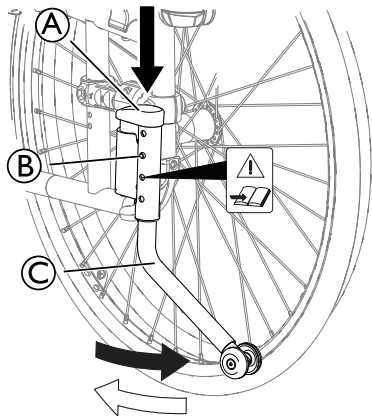

1. När du ska justera höjden trycker du in de två knapparna B på vardera sidan om höljet.
2. Ställ in tippskyddsroret C till önskad höjd.



Se till att tippskyddet sitter rätt. De två knapparna B måste snäppa fast.

3. När du ska fälla upp tippskyddet trycker du höljets övre del A nedåt.
4. Skjut tippskyddet åt sidan.



Knapparna B får inte användas för att fälla upp eller fälla ut tippskyddet.



FÖRSIKTIGT!

Risk för att du klämmer fingrarna


– Fäll upp tippskyddet med foten, annars finns det risk för att du klämmer fingrarna mellan höljet och röret på tippskyddet.

5. Du aktiverar tippskyddet genom att skjuta tillbaka det till det ursprungliga läget. Då snäpper det fast automatiskt.



Det finns en röd varningsetikett på tippskyddets hölje. Etiketten visar när tippskyddet är inaktiverat. När tippskyddet är aktiverat på rätt sätt är den röda etiketten dold.

Djupjustering:

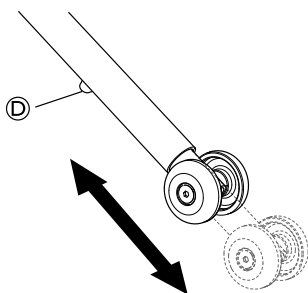

1. Tryck in knoppen D.
2. Justera inerröret till önskat läge.




Se till att röret sitter som det ska. Knoppen D måste snäppa fast.



Avståndet mellan tippskyddet och marken samt mellan tippskyddet och drivhjulet ska vara 50 mm.

5.7.3 Ordinarie tippskydd

Montering och djupjustering:

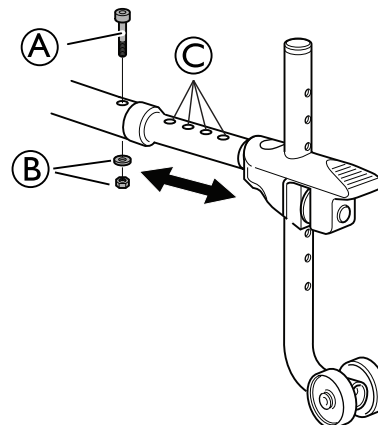


1. Byt ut plastpluggarna på ramrörets båda sidor mot de medföljande pluggarna.
2. Montera tippskyddet på ramröret.
3. Fäst tippskyddet med skruven A, brickan och muttern B.
4. För djupjustering, lossa skruven A och muttern B.
5. Justera djupet och sätt skruven A i något av hålen C.
6. Dra åt skruven.



5 mm insexnyckel/10 mm fast nyckel

Höjdjustering:

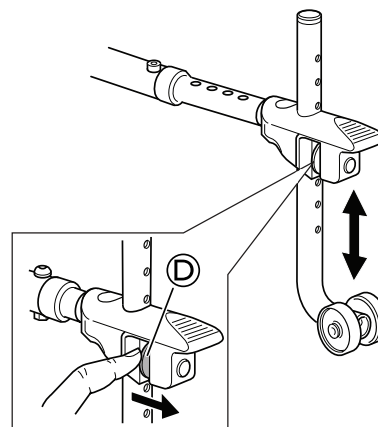

1. Släpp upp den fjäderförsedda knappen D.
2. Ställ in tippskyddet till önskad höjd.
3. Se till att tippskyddet snäpper fast i det nya läget.

5.8 Höftbälte

Rullstolen kan utrustas med ett höftbälte. Det hindrar användaren från att glida nedåt i rullstolen eller trilla ur den. Höftbältet är inte ett positioneringshjälpmedel.




VARNING!

Risk för allvarlig skada/strykning

Om bältet sitter löst kan användaren glida ner och risk för strypning uppstår.

- Höftbältet ska monteras av en erfaren tekniker och provas ut av ansvarig hjälpmedelscentral.
- Se alltid till att höftbältet sitter ordentligt över den nedre delen av bäckenet.
- Kontrollera att höftbältet sitter ordentligt varje gång det används. Om du ändrar sitsens och/eller ryggstöds vinkel, kudden eller har olika kläder kan det påverka hur bältet passar.

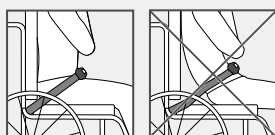


VARNING!

Risk för allvarlig skada vid transport

En person som sitter i rullstol måste använda ett säkerhetsbälte (trepunktsbälte) vid transport i ett fordon. Endast ett höftbälte är inte tillräckligt som säkerhetsbälte.

- När rullstolsanvändaren transporteras i ett fordon ska höftbältet användas som ett komplement till trepunktsbältet, inte som en ersättning.

Stänga och öppna höftbältet

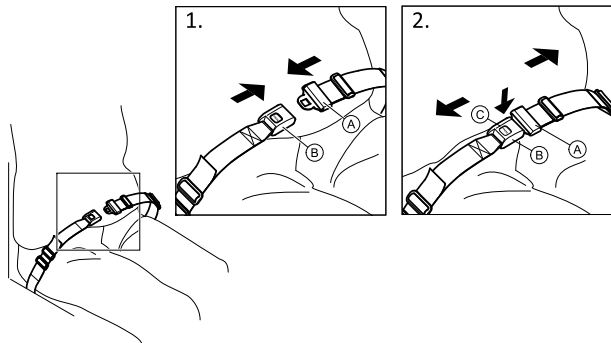


Se till att du sitter så långt bak på sitsen som det går med bäckenet i så upprätt och symmetrisk ställning som möjligt.

1. Tryck in spärren (A) i spännet (B) för att stänga.
2. Tryck på knappen (C) och dra ut spärren (A) ur spännet (B) för att öppna.

Justera längden



Höftbältet sitter korrekt när det finns precis tillräckligt med utrymme så att du kan föra in handen mellan kroppen och bältet.

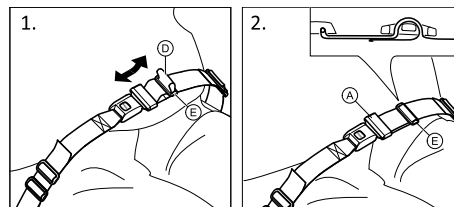

1. Korta eller förläng öglan (D) till önskad längd.
2. Trä öglan (D) genom spärren (A) och plastspännet (E) tills öglan är platt.


Om den här justeringen inte är tillräcklig kanske du måste justera om höftbältet vid fästpunkterna.

Justera höftbältet vid fästpunkterna




FÖRSIKTIGT!

- Trä bältesöglan genom båda plastspännena så att det inte lossnar.
- Justera lika mycket på båda sidorna så att spännets spärr sitter på mitten.
- Se till att bältet inte fastnar i drivhjulens ekrar.

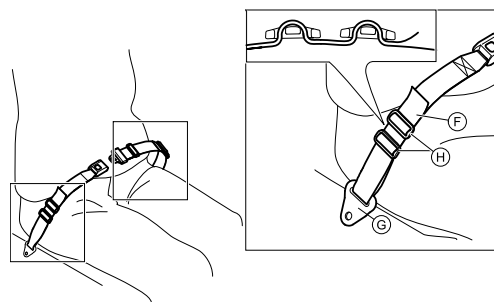

1. Trä öglan (F) igenom stolens fästpunkter (G) och sedan genom BÅDA plastspännena (H).

5.8.1 Montera höftbältet

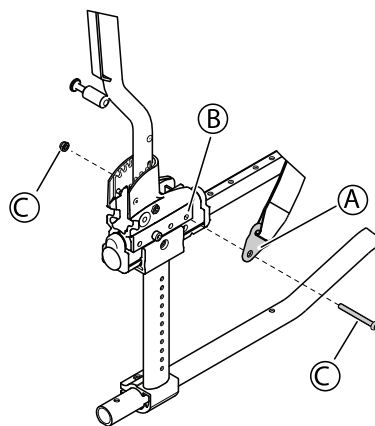

1. Sätt fast höftbältet (A) på ramen (B).
2. Sätt dit skruven och muttern (C) och dra åt.

6 Användande

6.1 Allmänna varningar – användning



FÖRSIKTIGT!

Risk för att glida ur stolen

- Sittenhöjden måste vara i plant läge, eller vinklad bakåt om brukaren lämnas ensam utan tillsyn.



FÖRSIKTIGT!

Risk för att glida ur stolen

- Om du har en väldigt låg sitthöjd och / eller använder fötterna för att manövrera rullstolen, så kan benstöden tas bort. Var aktsam på risken för att glida ur stolen om så är fallet!

6.2 Att använda rullstolen

Vi rekommenderar att du får stolen utprovad av behörig ordinator, som ställer in stolen efter dina önskemål och samtidigt tar hänsyn till din kroppsbyggnad och dina behov. Vi hoppas också att du fått hjälp med hur du bäst använder stolen. Börja med att träna försiktigt tills du lärt känna din rullstols möjligheter och begränsningar.


6.2.1 Överflyttning till/från rullstol



VARNING!

Tipprisk framåt

- Använd inte fotplattorna som stöd vid flytt till / från rullstolen.

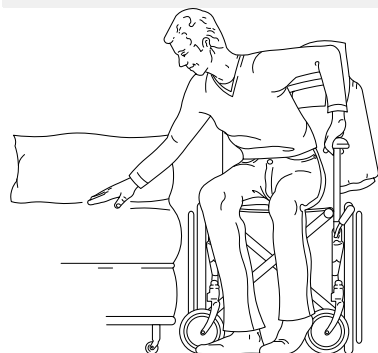

1. Kör rullstolen så nära den nya sittplatsen som möjligt.
2. Bromsa stolen.
3. Ta bort/fäll upp armstöden och haka av/fäll ut benstöden.
4. Ta inte stöd mot fotplattorna, eftersom stolen då kan tippa framåt.

6.2.2 Sträcka och böja sig



1. Ställ rullstolen så nära som möjligt.




VARNING!

Risk för tippa

Rullstolen kan tippa.

- När du sträcker och böjer dig skall ryggen alltid ha kontakt med ryggstödet. Det är inte rekommendabelt att sträcka sig bakåt över ryggstödet.

6.2.3 Köra i uppförsbacke

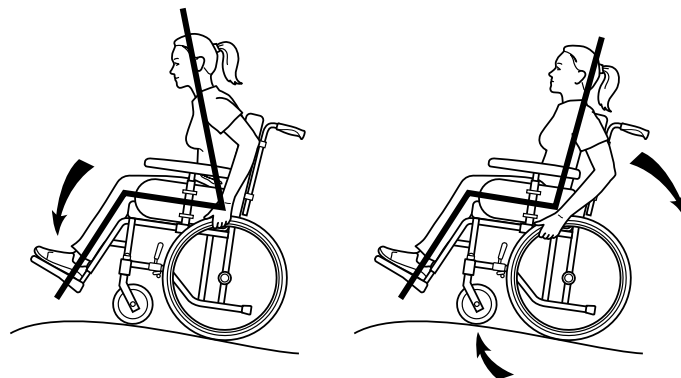

Många erfarna brukare kan köra i uppförslutning. När du kör i uppförslutning ska du alltid luta dig framåt så att du inte förlorar kontrollen över rullstolen eller tippar bakåt. Kör rullstolen framåt med korta, snabba drag på drivringarna så att du håller uppe farten och kan köra kontrollerat.

Rullstolen klarar en lutning på 15 grader men branta lutningar ska undvikas av säkerhetsskäl. I regel behövs extra hjälp vid branta lutningar.



VARNING!

Tipprisk

- Rullstolen kan välta om lutningen är 8 grader eller högre.
- Använd tippskydd!




VARNING!

Tipprisk bakåt

När rullstolen redan lutar bakåt kan en plötslig rörelse få rullstolen att tippa bakåt.

- Om du måste stanna i uppförslutning är det extra viktigt att inte göra några plötsliga eller oväntade rörelser när du börjar köra framåt på nytt.

6.2.4 Köra nedför en sluttning

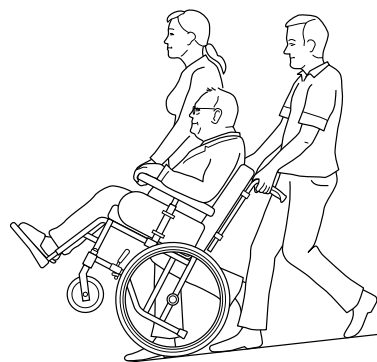

Rullstolen klarar en lutning på 15°.



Fallrisk

- Av säkerhetsskäl bör branta lutningar undvikas.
- Vi rekommenderar att du använder dig av assistent/assistenter i branta och våta lutningar.

**VARNING!****Risk för skada**

Rullstolen kan åka framåt utan kontroll.


- Kontrollera lutningen och se om det finns särskilda risker; gropar, hala partier.
- Använd aldrig blockbromsen för att sakta ner farten. När man bromsar i en nedförsbacke spärras hjulen och rullstolen kan plötsligt dra iväg åt ett håll, tippa åt sidan eller tvärstanna, så att du kastas ur stolen.
- Kontrollera alltid hastigheten med hjälp av drivringarna.
- Kör aldrig upp eller nedför en backe på tvären.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för lättare skador**

- Tänk på att drivringarna kan bli varma till följd av friktionen och kan orsaka skada i händerna.

6.2.5 Trottoarkant

Denna metod bygger på att assistenten alltid är bakom rullstolen och skapar största säkerhet för brukaren. Följande råd gäller assistenten:

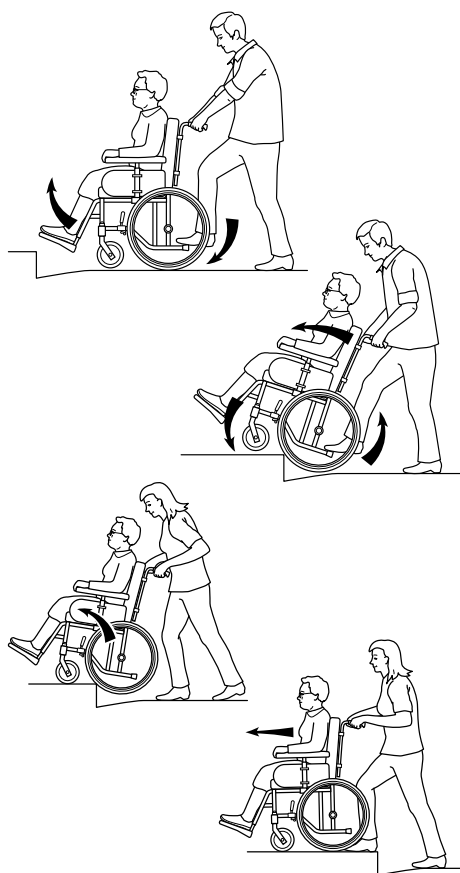


1. Justera upp tippskydden. Se till att brukarens fötter vilar säkert på fotstöden och inte kan glida av, innan du vinklar rullstolen bakåt och skjuter den framåt mot trottoarkanten.
2. Sänk ner rullstolens framdel på trottoaren och ställ dig så nära rullstolen som möjligt, innan du lyfter upp hela rullstolen.
3. Luta dig framåt och lyft/rulla rullstolen över trottoarkanten.
4. Sänk ner rullstolen på trottoaren så att vikten fördelas på alla fyra hjulen. Se till att rullstolen inte rullar bakåt.



Följ den omvända proceduren (steg 4, 3, 2, och 1) för att komma ner för trottoarkanten.

6.2.6 Trottoarkant — alternativ metod

Denna metod används i regel av erfarna assistenter som är starkare än genomsnittet. Metoden kan även användas när trottoarkanten eller trappsteget är lågt och endast utgör ett minimt hinder.

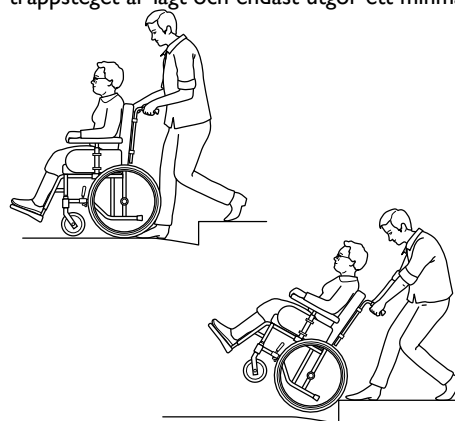

1. Assistenten går baklänges uppför trottoaren och drar rullstolen efter sig.
2. Tippa rullstolen bakåt och rulla stolen över trottoarkanten upp på trottoaren.

**FÖRSIKTIGT!****Risk för skada**

Att lyfta rullstolen på ett felaktigt sätt kan skada assistenten.


- Som assistent bör man tänka på att lyfta rätt. Använd benen och håll ryggen så rak som möjligt.



Var extra försiktig om trottoarkanten är våt eller hal.

6.2.7 Rulltrappor och trappor

Åk inte rulltrappa med rullstol. Undersök om det finns en hiss i närheten.

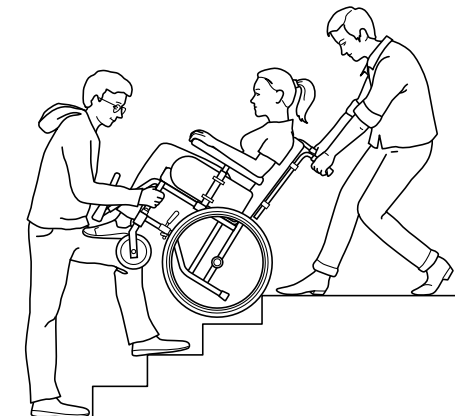

1. Se till att körhandtagen / körbygeln är säkert fixerade i rätt position innan du börjar.
2. Justera upp tippskydden.
3. Balansera rullstolen på drivhjulen tills balanspunkten nås.
4. Stolen rullas sedan trappsteg för trappsteg nedför trappan genom att man låter drivhjulen rulla över trappstegskanten.

**Risk för skada**

Att lyfta rullstolen på ett felaktigt sätt kan skada assistenten.

- Som assistent är det viktigt att tänka på att inte hålla i avtagbara arm- eller benstöd.
- Som assistent bör man tänka på att lyfta rätt. Använd benen och håll ryggen så rak som möjligt.



Vi rekommenderar att du tar hjälp av två assistenter för att ta dig upp och ner för en trappa. En assistent går framför och håller i rullstolens ram och en går bakom och håller i körhandtagen.

7 Transport

7.1 Säkerhetsinformation

Invacare arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för alla våra produkter och brukarna i olika vardagssituationer. Detta innebär, bland annat, att Invacare har låtit krocktesta många av sina modeller av manuella rullstolar sedan mitten av 1990-talet. Vi vill informera om transport av rullstolar med brukare på plats i fordon som är särskilt utformade för detta syfte. Först och främst vill vi påpeka att det absolut säkraste är att brukaren transporteras i fordonets fasta säten, fastspänd med det vanliga säkerhetsbältet. Invacare rekommenderar inte fordonstransporter i rullstolen. Vi är dock medvetna om att vissa brukare och situationer innebär att brukaren måste transporteras sittande i rullstolen. I dessa fall måste säkerhetsanvisningarna i det här avsnittet alltid följas för att minska risken för personskador vid en eventuell olycka.

Rullstolen har testats enligt ISO 7176-19 "Hjulförsedda hjälpmedel som används som säten i motorfordon". Detta innebär att den har genomgått och uppnått kraven i ett standardtest av en tänkbar situation. En frontalkrock i 48 km/tim med en inbromsning på 20 g och en testdocka som väger 75 kg. Teststandarden ISO 7176-19 har utvecklats av myndigheter och specialister inom området och anger minimikraven på rullstolar som transporteras i fordon. Standarden uppdateras regelbundet när nya kunskaper och erfarenheter blir tillgängliga.

Verkliga olyckor skiljer sig från omständigheterna i en testmiljö. Hastighet, krockvinkel, stolens konfiguration, brukarens vikt och inbromsningen är några saker som kan skilja sig åt. Invacare tar inget ansvar för följderna av eventuella olyckor där våra produkter är involverade. Vi har valt att testa vad vi tror är en vanlig konfiguration med vanligt förekommande justeringar. Konfigurationer och tillbehör som inte är lämpade för transport med brukaren i stolen tas upp längre fram i kapitlet.



WARNING!

Risk för personskador

- Säkerhetsbälten får endast användas om rullstolens brukare väger minst 22 kg. Om brukarens vikt är under 22 kg ska rullstolen inte användas som fordonssäte.



WARNING!

Risk för allvarlig skada vid transport

- En person som sitter i rullstol måste använda ett säkerhetsbälte (trepunktsbälte) vid transport i ett fordon. Endast ett höftbälte är inte tillräckligt som säkerhetsbälte.
- När rullstolsanvändaren transporteras i ett fordon ska höftbältet användas som ett komplement till trepunktsbältet, inte som en ersättning.



WARNING!

Risk för personskador om rullstolen inte är ordentligt fastgjord

- I händelse av en olycka, inbromsning eller liknande kan du få allvarliga skador av delar till rullstolen som eventuellt kastas iväg.
- Ta alltid av drivhjulen när rullstolen ska transporteras.
 - Sätt fast alla rullstolens delar ordentligt vid transport för att förhindra att de lossnar under färden.

7.2 Begränsningar för transport i fordon




WARNING!


Risk för personskador

- Rea® Focus™ med 16"-hjul får under inga omständigheter användas som en sits i ett fordon under transport.

7.3 Transportera rullstolen i fordon när brukaren sitter i den

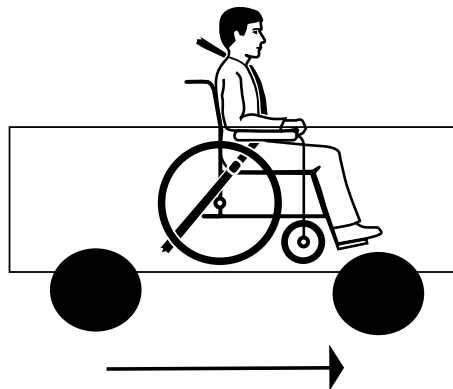

1. Rullstolen och brukaren ska transporteras framåtvända i färdriktningen. All extrautrustning som bord, bälstöd, abduktionskudde och liknande ska tas bort och förvaras på ett säkert sätt så att de inte utgör en risk vid eventuella olyckor.

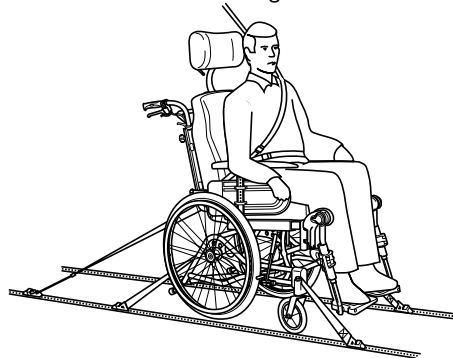

2. Rullstolen ska spännas fast i fordonet med ett fastspänningssystem med fyra fästpunkter. Brukaren ska använda ett trepunktsbälte som är förankrat i fordonet.



WARNING!

Risk för personskador

- Både fastspänningssystemet med fyra fästpunkter och trepunktsbältet måste vara godkända enligt ISO-10542-2.




3. Rullstolens fästpunkter där fastspänningsremmarna ska fästas är markerade med denna symbol.



Det finns inga testmetoder för fordon där rullstolen inte kan spännas fast. Om det finns markerade områden för rullstolar i fordonet rekommenderar vi att dessa används och att eventuella riktlinjer följs.

7.3.1 Höftbälte

1.

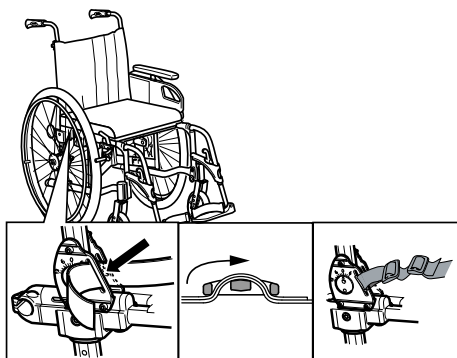


För att rullstolen ska kunna användas som säte under transport i ett fordon måste den vara utrustad med ett höftbälte.



Ett originalhöftbälte från Invacare måste användas som ett komplement till trepunktsbältet i fordonet!

2.

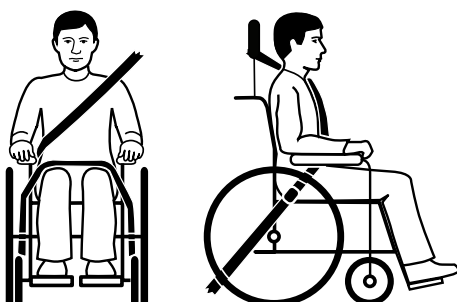


Fordonets trepunktsbälte ska sitta så nära kroppen som möjligt på brukaren utan att orsaka obehag. Den övre delen av trepunktsbältet ska ligga över brukarens axel som på bilden.



Ingen del av trepunktsbältet får vara vriden.

3.

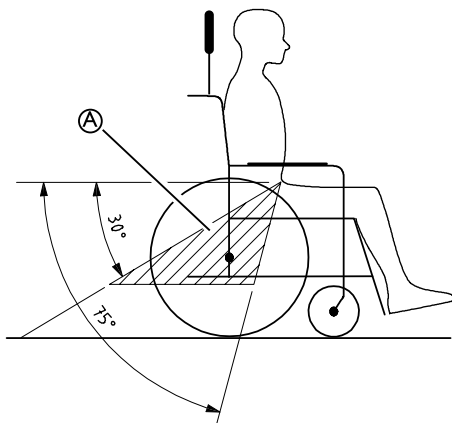

Bäckendelen av trepunktsbältet måste löpa lågt över bäckenet. Vinkeln för höftbältet ska ligga inom zonen A.



Höftbältets vinkel får aldrig överstiga 75 grader.




Felaktig placering av trepunktsbälte

4.



Inga av rullstolens delar får sitta mellan trepunktsbältet och brukarens kropp, t.ex. armstöd eller hjul.

5.

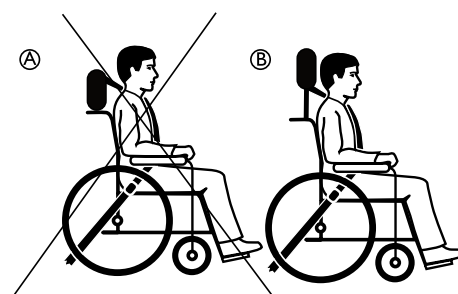


Nackstöd ska alltid användas vid transport och bör justeras som på bilden.

Ⓐ Felaktig placering av nackstödet

Ⓑ Korrekt placering av nackstödet

7.4 Fastspänningsmetoder

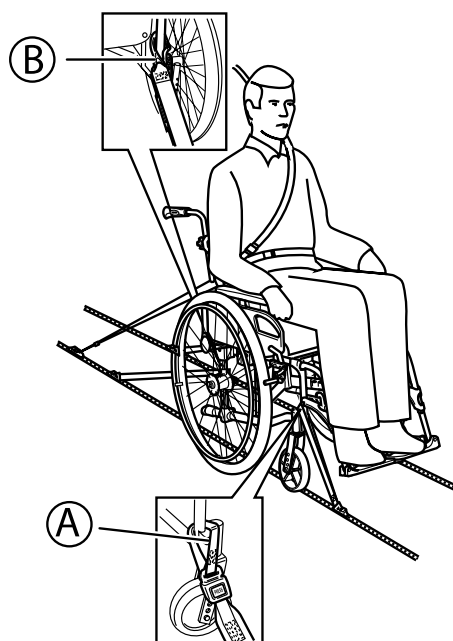

7.4.1 Fastspänning fram med spännband

1. Spänn fast de främre banden i ramen framtill på stolen ①.
2. Lossa rullstolens bromsar och spänn de främre banden genom att dra stolen bakåt.
3. Bromsa stolen.

7.4.2 Bakre fastspänningsdon

1. Haka fast karbinhakarna på de bakre remmarna ② på ramen precis ovanför drivhjulsfästet.
2. Dra åt remmarna.

7.4.3 Spänna fast höftbältet och säkerhetsbältet

1. Kontrollera att höftbältet på rullstolen är fastspänt på rätt sätt.
2. Spänn fast fordonets trepunktsbälte runt brukaren.

 Om det inte finns något höftbälte på rullstolen måste brukaren flyttas över till ett fordonssäte.

 Inga av rullstolens delar får sitta mellan bilens trepunktsbälte och brukarens kropp.



WARNING!

Risk för personskador


Brukaren sitter inte säkert fastspänd i fordonet.

- Använd aldrig höftbältet som ett säkerhetsbälte under transport.
- Fordonets trepunktsbälte måste alltid användas för att spänna fast brukaren under transport.

7.5 Isärtagning för transport

Rullstolen kan är enkel att förbereda för transport.


7.5.1 Fälla ned ryggstödsbygeln

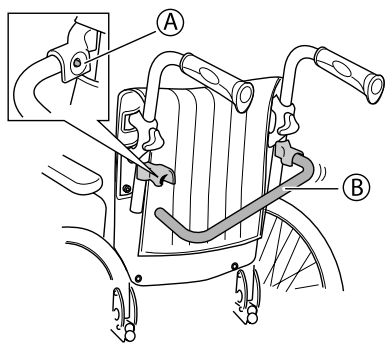

1. Tryck in den lilla knoppen ①.
2. Fäll ned ryggstödsbygeln ②.

7.5.2 Ta bort armstöden

Uppfällbara armstöd:

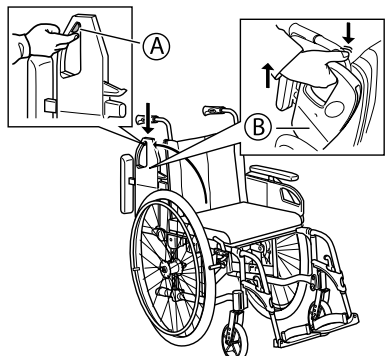

1. Tryck på knappen ①.
2. Lyft armstödet ② rakt upp och ta bort det.




Luta armstödet något framåt för att göra det enklare att ta bort.

Löstagbara armstöd:

Lyft armstöden rakt upp och ta bort dem.

7.5.3 Fälla ihop sitsen

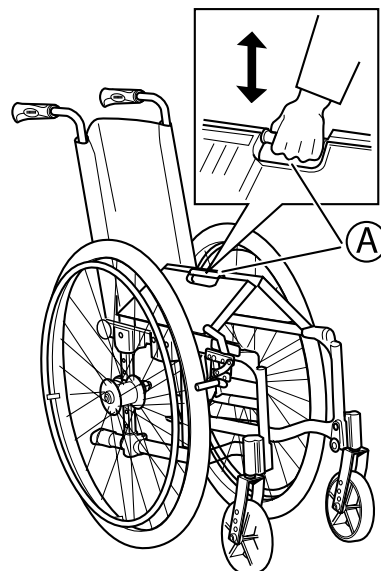

1. Dra handtaget på sitsen ① rakt upp.
2. Fäll ihop sitsen.




WARNING!

Risk för att du fastnar med fingrarna


- Var försiktig så du inte fastnar med fingrarna när du fäller ihop sitsen.

7.5.4 Ta bort det vinkeljusterbara benstödet

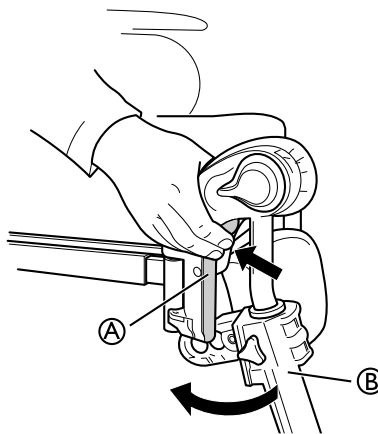

1. Tryck spaken ① inåt.
2. Vrid benstödet ② utåt.
3. Lyft av benstödet.

7.5.5 Ta bort det fasta fotstödet.

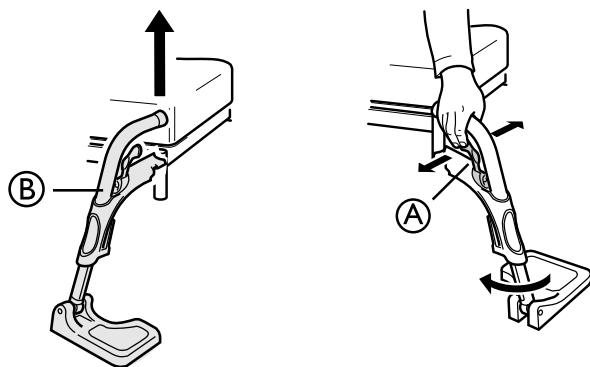


1. Tryck handtaget (A) framåt eller åt sidan.
2. Vrid fotstödet (B) utåt.
3. Lyft av fotstödet.

7.5.6 Bromsspak



Bromsspakens handtag har ett visst frispel. När benstödet har flyttats till sitt ytterläge fälls spaken upp automatiskt utan att aktivera bromsen. Aktivera bromsen genom att trycka spaken framåt.

7.5.7 Ta bort drivhjulen

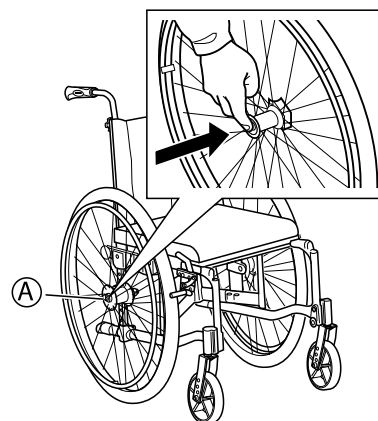

1. Tryck in upplåsningsknappen (A) och håll den intryckt.
2. Dra drivhjulet rakt utåt.
3. Ta bort drivhjulet.
4. Upprepa samma sak på andra sidan.

8 Underhåll

8.1 Daglig funktionskontroll

Kontrollera att följande delar är ordentligt monterade på rullstolen:

- Hjul
- Ryggstöd
- Tippskydd
- Körhandtag
- Fotstöd

8.2 Säkerhetsinformation

Regelbundna kontroller och underhåll av rullstolen säkerställer brukarens säkerhet och rullstolens förväntade livslängd.

8.3 Rengöring

- Torka regelbundet av metalldelarna och klädseln med en fuktad trasa.
- Ett mildt rengöringsmedel kan användas.
- Om det behövs kan klädseln tvättas i 60 °C.
- Vanligt tvättmedel (pulver/flytande) kan användas.
- Använd endast alkoholbaserade desinfektionsmedel.



Använd endast vatten och mild tvål när du rengör bordet!

8.4 Tvätt och desinfektion

1. Ta bort alla lösa och löstagbara överdrag och tvätta dem i tvättmaskin enligt tvättanvisningarna på respektive överdrag.
2. Ta bort alla vadderade delar som sittdynor, armstöd, huvudstöd/nackstöd med fasta vadderade delar, vaddynor och rengör dem separat.



De vadderade delarna kan inte rengöras med en högttryckstvätt eller en vanlig vattenstråle.

3. Spraya ett rengöringsmedel på rullstolschassit, t.ex. bilrengöringsmedel med vax, och låt verka.
4. Skölj sedan av rullstolschassit med en högttryckstvätt eller vanlig vattenstråle, beroende på hur smutsig rullstolen är. Rikta inte strålen mot lager eller dräneringshål. Om rullstolschassit tvättas i maskin får vattnet vara högst 60 °C.
5. Desinficera rullstolschassit genom att spraya med alkohol.



Använd endast vatten och mild tvål när du rengör bordet!

6. Låt rullstolen torka i ett torkskåp. Ta bort delar där vatten samlats, t.ex. slutet på rör, tubringar osv. Om rullstolen har tvättats i en maskin rekommenderar vi att den torkas med tryckluft.

Dartex®

Lättare fläckar på tyget kan tas bort med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Större och svårare fläckar kan behöva behandlas med alkohol- eller terpentinbaserade medel och sedan tvättas med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Varumärkesklassade desinfektionsmedel kan användas under förutsättning att tillverkarens instruktioner följs. Tyget kan tvättas i temperaturer upp till 71 °C. Vanliga rengöringsmedel kan användas.



Alla delar av rullstolen med Dartex® -klädsel, t.ex. armstödsdynor, vaddynor och huvudstöd/nackstöd, ska rengöras enligt instruktionerna ovan.

8.5 Underhållsplan

Alla rullstolens delar ska kontrolleras regelbundet (se planen ovan).

Kontrollera:	Varje vecka	Varje månad	Var sjätte månad	Åtgärd:
Däcktryck	X			Rekommenderat lufttryck för drivhjulen: Standardhjul 3,5 bar 50 psi Lågprofildäck 7,0 bar 90 psi Rekommenderat lufttryck för styrhjulen: 150 mm 2,5 bar 90 psi
Drivhjulens QR-axlar	X			1. Hjulaxlarna ska torkas rena och smörjas med en droppe olja. 2. Dra i drivhjulet för att kontrollera att den löstagbara axeln inte lossnar.
Alla fästanordningar beträffande slitage och åtdragning		X		Skruvar och andra fästanordningar kan lossna vid kontinuerlig användning. 1. Kontrollera att fästanordningarna sitter ordentligt på hjulafflarna, fotstödet, sitsen, sidostöden, ryggstödet, handtagen osv. 2. Dra åt lösa skruvar.
Styrhjul		X		1. Kontrollera att styrhjulen kan svänga fritt. 2. Avlägsna smuts och hår.

Tippskydd			X	Kontrollera att tippskyddet är enkelt att justera och fälla upp/ned.
Ram			X	Kontrollera att ramen är fri från slitage, t.ex. lösa delar, sprickor eller andra defekter.  Om ramen är skadad ska den kontrolleras av en expert.
Klädsel			X	Kontrollera att klädseln är fri från slitage, t.ex. lösa delar, revor eller andra defekter.
Bromsar		X		1. Kontrollera att navbromsarna fungerar som de ska på båda däck. 2. Kontrollera brukarbromsarnas placering.

**WARNING!****Risk för personskador**

– Använd inte rullstolen om den har någon defekt.



Om du hittar någon skada på rullstolen ska du genast kontakta återförsäljaren, teknisk service eller serviceavdelningen för teknisk service hos Invacare. Teknisk service ska utföras av behörig rullstolstekniker eller en serviceavdelning hos Invacare.



Endast originaldelar får användas eller andra delar som uppfyller kraven i specifikationerna från Invacare.

8.6 Punktering



Om du får punktering på ett däck kan du kontakta en lämplig verkstad (t.ex. en cykelreparatör, cykelåterförsäljare ...) och få innerslangen utbytt av en fackman.

9 Återanvändning

9.1 Återvinning

Rullstolen kan delas upp i följande huvudkomponenter:

- Ram
- Plastdelar
- Klädsel
- Hjul, däck och slangar
- Förpackning

9.2 Kassering

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Avfallskasseringen måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land.

Invacare® arbetar ständigt för att se till att företaget påverkar lokal och global miljö så lite som möjligt. Vi använder endast material och komponenter som följer REACH-direktivet.

Rullstolen kan delas upp i följande huvudkomponenter:

Ram

- Ramen är tillverkad av stål och kan återvinnas helt.
- Återvinning av stål kräver endast 20–25 % av den energi som krävs för att tillverka nytt stål.
- Rullstolen har två gasfjädrar som innehåller olja och måste kasseras enligt nationella föreskrifter.



Observera att trycket i gasfjädrarna är högt och att de måste hanteras varsamt vid isärtagning.

Plastdelar

- Rullstolens plastdelar är tillverkade av termoplast och markerade med återvinningssymboler (i de fall där delens storlek tillåter det).
- Det huvudsakliga plastmaterialet är polyamid.
- Det huvudsakliga plastmaterialet i bordet är ABS och polyamid.
- Detta material kan återvinnas eller brännas i godkända anläggningar.

Klädsel

- Klädseln är tillverkad av polyesterfiber (PUR) och Dartex®.
- Det effektivaste sättet att återvinna dessa delar är att bränna dem i godkända anläggningar.

Hjul, däck och slangar

- Drivringen, hjulringen, ekrarna och navet är gjorda av stål, rostfritt stål eller aluminium och kan återvinnas enligt ovan.

- Däcken och slangarna är gjorda av gummi och kan återvinnas enligt ovan.

Förpackning

- Allt förpackningsmaterial från Invacare Rea AB är framtaget för att passa produkterna så bra som möjligt för att undvika onödigt avfall.
- Alla kartonger kan återvinnas.

Kassering

När den här produkten inte längre kan användas bör den återvinnas i enlighet med lagar och föreskrifter för avfallshantering i respektive land.



Kontakta den lokala återvinningsanläggningen för att få korrekt information om hur ovanstående material ska hanteras.

9.2.1 Ytbehandling

- Målade ytor är polyesterlackerade.
- Vissa ståldelar är zinkpläterade.
- Omålade aluminiumdelar är anodiserade.
- Synliga trädelar är lackerade.

9.3 Förvaring



VIKTIGT!

Risk för skador på produkten

- Förvara inte produkten nära värmekällor.
- Förvara aldrig andra saker ovanpå rullstolen.
- Förvara rullstolen inomhus på en torr plats.
- Se avsnittet: "Användningsmiljö" i kapitlet "Tekniska data".



Efter en längre förvaringsperiod (längre än fyra månader) måste rullstolen inspekteras i enlighet med kapitel "Underhåll".

9.4 Återanvändning

Den här produkten lämpar sig för återanvändning efter att följande har utförts av en auktoriserad återförsäljare:

- Rengöring och desinfektion
- Fullständig inspektion
- Rekonditionering

10 Teknisk data

10.1 Mått och vikt

	FOCUS	FOCUS 150
Sittbredd	380–505 mm	530–555 mm
Sittdjup	Låga ramar: 375–450 mm Höga ramar: 425–500 mm Transit: 425–500 mm	425–500 mm
Sitthöjd	Låga ramar: 365–490 mm Höga ramar: 415–540 mm Transit: 430–465 mm	440–540 mm
Ryggstödshöjd	380–780 mm	380–780 mm
Armstödshöjd	190–290 mm Transit: 210–385 mm	190–290 mm
Benstödslängd (avstånd mellan fotstöd och sits)	330–530 mm	330–530 mm
Lutningsjustering (sittvinkel)	0° – 6°	0° – 6°
Ryggstödsjustering	– 6°-13° Fällbart ryggstöd: 0° – 30°	– 6°-13°
Total bredd	Sittbredd + 220 mm	Sittbredd + 220 mm
Totalhöjd	745–1 320 mm	745–1 320 mm
Total längd (med benstöd)	900–1 195 mm Transit: 1 080–1 180 mm	900–1 195 mm
Bredd hopvikt	320 mm Transit: 310 mm	320 mm
Längd hopvikt	595–890 mm	595–890
Höjd hopvikt	893–930	893–930
Brukarens maxvikt	135 kg	150 kg
Transportvikt	10 kg	10 kg
Totalvikt	16,2 kg	16,2 kg
Statisk stabilitet i uppförsbacke	9° -14°	9° -14°
Statisk stabilitet i nedförsbacke	12° -20°	12° -20°
Statisk stabilitet i sidled	19°	19°
Maximal lutning med parkeringsbroms	7°	7°
Vinkel mellan ben och sittytan	96° -211°	96° -211°
Främre utrymme för armstödsstruktur	320–505 mm	320–505 mm
Drivringsdiameter	450–540 mm	450–540 mm
Horisontal placering av axel	25–85 mm	25–85 mm
Minsta vändradie	785 mm	785 mm



I vissa konfigurationer överstiger de totala måtten de rekommenderade rullstolsmåtten.

	16"	20"	22"	24"
Bredd på hjulen	1 3/4"	1 3/8"	1 - 1 3/8"	1 - 1 3/8"
Hjullutning	0° (rullstol utan last)			

10.1.1 Maxvikt för borttagbara delar

Maxvikt för borttagbara delar	
Del:	Maxvikt:
Vinkeljusterbart benstöd med vaddyna och fotstöd	3,1 kg
Armstöd	2,0 kg
Drivhjul 24" massivt med drivring och ekerskydd	2,5 kg
Huvudstöd/nackstöd/kindstöd	1,4 kg
Bålstöd	0,8 kg
Ryggdyna	2,0 kg
Sittdyna	1,9 kg
Brickbord	3,9 kg

10.2 Material

Ram, ryggstödsrör	Aluminium
Plastdelar som körhandtag, bromshandtag, fotplattor och de flesta tillbehör	Termoplast (t.ex. PE och PP) enligt märkning på delarna
Klädsel (sits och ryggstöd)	Jemima och tyg plysch och Dartex®
Bord	ABS
Skravar, brickor och muttrar	Rostfritt stål

10.3 Användningsmiljö

	Långvarig/kortvarig förvaring och transport	Drift
Temperatur	-10 till +50 °C	-5 till +40 °C
Relativ luftfuktighet	20–75 %	
Atmosfäriskt tryck	800–1 060 hPa	



Tänk på att när en rullstol har förvarats i låga temperaturer måste den anpassas till driftförhållandena före användning.

10.4 Tabeller med sitthöjder







10.4.1 Rea® Focus™ hög – 20*1 3/8"

415	3°	9	4	E/T	7	125
440	3°	7	2	E/T	5	125
440	3°	7	3	E/T	E/T	140
440	3°	7	3	E/T	6	150
465	3°	5	E/T	3	3	125
465	3°	5	I	4	E/T	140
465	3°	5	I	4	4	150
465	3°	5	2	E/T	E/T	180
490	3°	3	E/T	I	I	125

490	3°	3	E/T	2	E/T	140
490	3°	3	E/T	2	2	150
490	3°	3	E/T	3	E/T	180
490	3°	3	I	4	4	200







E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.2 Rea® Focus™ hög - 22*1 3/8"

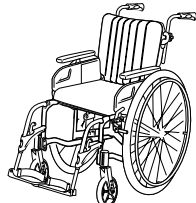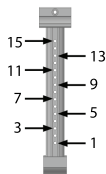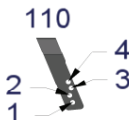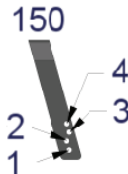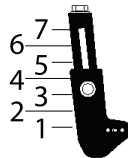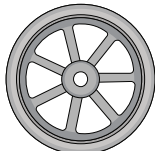						
41,5	3°	11	4	E/T	7	125
44	3°	9	2	E/T	5	125
44	3°	9	3	E/T	E/T	140
44	3°	9	3	E/T	6	150
46,5	3°	7	E/T	3	3	125
46,5	3°	7	I	4	E/T	140
46,5	3°	7	I	4	4	150
46,5	3°	7	2	E/T	E/T	180
49	3°	5	E/T	I	I	125
49	3°	5	E/T	2	E/T	140
49	3°	5	E/T	2	2	150
49	3°	5	E/T	3	E/T	180
49*	3°	5	I	4	4	200
51,5	3°	3	E/T	I	E/T	140
51,5	3°	3	E/T	I	I	150
51,5	3°	3	E/T	2	E/T	180
51,5*	3°	3	E/T	3	3	200
54*	3°	I	E/T	I	I	200

E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd







10.4.3 Rea® Focus™ hög - 22*1"

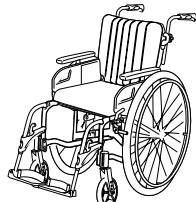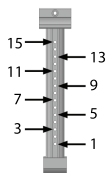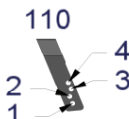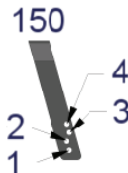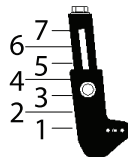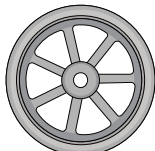						
41,5	3°	10	4	E/T	7	125
44	3°	8	2	E/T	5	125
44	3°	8	3	E/T	E/T	140
44	3°	8	3	E/T	6	150
46,5	3°	6	E/T	3	3	125
46,5	3°	6	I	4	E/T	140
46,5	3°	6	I	4	4	150

46,5	3°	6	2	E/T	E/T	180
49	3°	4	E/T	I	I	125
49	3°	4	E/T	2	E/T	140
49	3°	4	E/T	2	2	150
49	3°	4	E/T	3	E/T	180
49*	3°	4	I	4	4	200
51,5	3°	2	E/T	I	E/T	140
51,5	3°	2	E/T	I	I	150
51,5	3°	2	E/T	2	E/T	180
51,5*	3°	2	E/T	3	3	200
54*	3°	E/T	E/T	E/T	E/T	200







E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.4 Rea® Focus™ hög - 24*1 3/8"

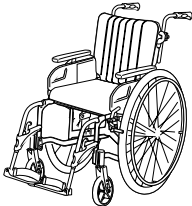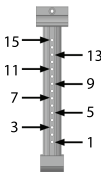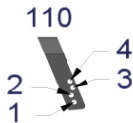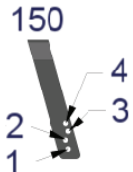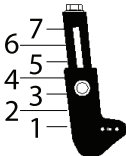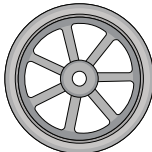						
41,5	3°	13	4	E/T	7	125
44	3°	11	2	E/T	5	125
44	3°	11	3	E/T	E/T	140
44	3°	11	3	E/T	6	150
46,5	3°	8	E/T	3	3	125
46,5	3°	8	I	4	E/T	140
46,5	3°	8	I	4	4	150
46,5	3°	8	2	E/T	E/T	180
49	3°	6	E/T	I	I	125
49	3°	6	E/T	2	E/T	140
49	3°	6	E/T	2	2	150
49	3°	6	E/T	3	E/T	180
49*	3°	6	I	4	4	200
51,5	3°	5	E/T	I	E/T	140
51,5	3°	5	E/T	I	I	150
51,5	3°	5	E/T	2	E/T	180
51,5*	3°	5	E/T	3	3	200
54*	3°	3	E/T	I	I	200






E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.5 Rea® Focus™ hög – 24*1”

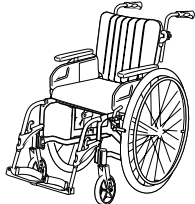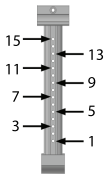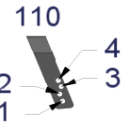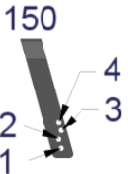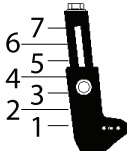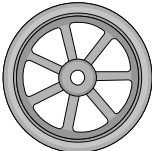						
41,5	3°	12	4	E/T	7	125
44	3°	10	2	E/T	5	125
44	3°	10	3	E/T	E/T	140
44	3°	10	3	E/T	6	150
46,5	3°	8	E/T	3	3	125
46,5	3°	8	I	4	E/T	140
46,5	3°	8	I	4	4	150
46,5	3°	8	2	E/T	E/T	180
49	3°	5	E/T	I	I	125
49	3°	5	E/T	2	E/T	140
49	3°	5	E/T	2	2	150
49	3°	5	E/T	3	E/T	180
49*	3°	5	I	4	4	200
51,5	3°	4	E/T	I	E/T	140
51,5	3°	4	E/T	I	I	150
51,5	3°	4	E/T	2	E/T	180
51,5*	3°	4	E/T	3	3	200
54*	3°	2	E/T	I	I	200







E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.6 Rea® Focus™ låg – 20*1 3/8”

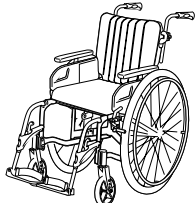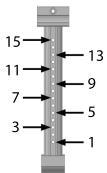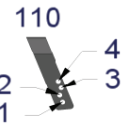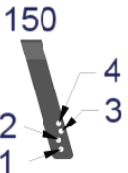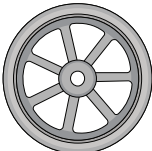						
36,5	3°	9	4	E/T	7	125
39	3°	7	2	E/T	5	125
39	3°	7	3	E/T	E/T	140
39	3°	7	3	E/T	6	150
41,5	3°	5	E/T	3	3	125
41,5	3°	5	I	4	E/T	140
41,5	3°	5	I	4	4	150
44	3°	3	E/T	I	I	125
44	3°	3	E/T	2	E/T	140
44	3°	3	E/T	2	2	150
44	3°	3	E/T	3	E/T	180







E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.7 Rea® Focus™ låg – 22*1 3/8"

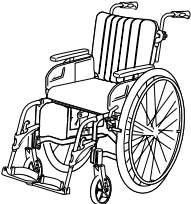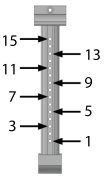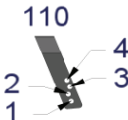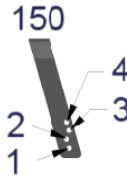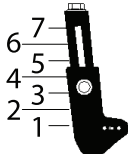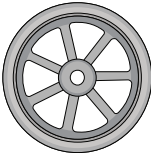						
36,5	3°	11	4	E/T	7	125
39	3°	9	2	E/T	5	125
39	3°	9	3	E/T	E/T	140
39	3°	9	3	E/T	6	150
41,5	3°	7	E/T	3	3	125
41,5	3°	7	1	4	E/T	140
41,5	3°	7	1	4	4	150
41,5	3°	7	2	E/T	E/T	180
44	3°	5	E/T	1	1	125
44	3°	5	E/T	2	E/T	140
44	3°	5	E/T	2	2	150
44	3°	5	E/T	3	E/T	180
44*	3°	5	1	4	4	200
46,5	3°	3	E/T	1	E/T	140
46,5	3°	3	E/T	1	1	150
46,5	3°	3	E/T	2	E/T	180
46,5*	3°	3	E/T	3	3	200
49*	3°	1	E/T	1	1	200

E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd







10.4.8 Rea® Focus™ låg – 22*1"

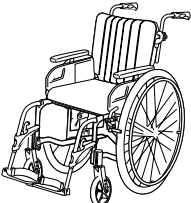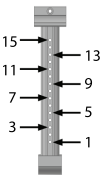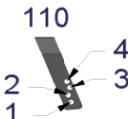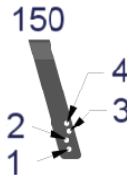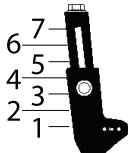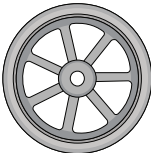						
36,5	3°	10	4	E/T	7	125
39	3°	8	2	E/T	5	125
39	3°	8	3	E/T	E/T	140
39	3°	8	3	E/T	6	150
41,5	3°	6	E/T	3	3	125
41,5	3°	6	1	4	E/T	140
41,5	3°	6	1	4	4	150
41,5	3°	6	2	E/T	E/T	180
44	3°	4	E/T	1	1	125
44	3°	4	E/T	2	E/T	140
44	3°	4	E/T	2	2	150
44	3°	4	E/T	3	E/T	180
44*	3°	4	1	4	4	200

46,5	3°	2	E/T	I	E/T	140
46,5	3°	2	E/T	I	I	150
46,5	3°	2	E/T	2	E/T	180
46,5*	3°	2	E/T	3	3	200
49*	3°	E/T	E/T	E/T	E/T	200







E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.9 Rea® Focus™ låg – 24*1 3/8"

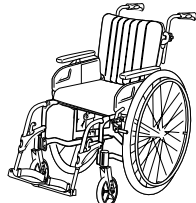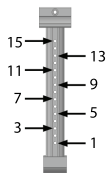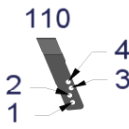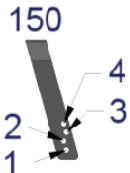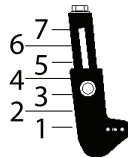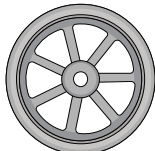						
39	3°	10	2	E/T	5	125
39	3°	10	3	E/T	E/T	140
39	3°	10	3	E/T	6	150
41,5	3°	8	E/T	3	3	125
41,5	3°	8	I	4	E/T	140
41,5	3°	8	I	4	4	150
41,5	3°	8	2	E/T	E/T	180
44	3°	6	E/T	I	I	125
44	3°	6	E/T	2	E/T	140
44	3°	6	E/T	2	2	150
44	3°	6	E/T	3	E/T	180
44*	3°	6	I	4	4	200
46,5	3°	5	E/T	I	E/T	140
46,5	3°	5	E/T	I	I	150
46,5	3°	5	E/T	2	E/T	180
46,5*	3°	5	E/T	3	3	200
49*	3°	3	E/T	I	I	200

E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd

10.4.10 Rea® Focus™ låg – 24*1"

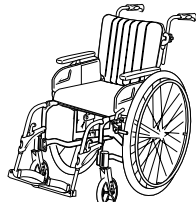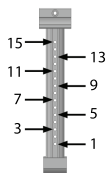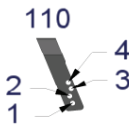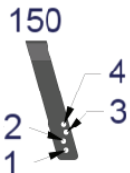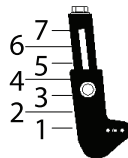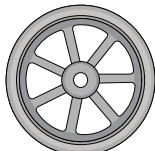						
39	3°	9	2	E/T	5	125
39	3°	9	3	E/T	E/T	140
39	3°	9	3	E/T	6	150
41,5	3°	7	E/T	3	3	125
41,5	3°	7	1	4	E/T	140
41,5	3°	7	1	4	4	150
41,5	3°	7	2	E/T	E/T	180

44	3°	5	E/T	I	I	125
44	3°	6	E/T	2	E/T	140
44	3°	5	E/T	2	2	150
44	3°	5	E/T	3	E/T	180
44*	3°	5	I	4	4	200
46,5	3°	4	E/T	I	E/T	140
46,5	3°	4	E/T	I	I	150
46,5	3°	4	E/T	2	E/T	180
46,5*	3°	4	E/T	3	3	200
49*	3°	2	E/T	I	I	200
E/T = ej tillämpligt, * = ej möjligt i kombination med 90° benstöd						

Invacare Försäljningsbolag

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Tillverkare:

Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

1431581-B 2016-07-01



Making Life's Experiences Possible™



Yes, you can.