

ICON 30FAF

Kokoontaitettava pyörätuoli
Käyttöopas (FI)



Kevyt ja kestävä kokoontaitettava alumiinirunkoinen pyörätuoli kiinteillä jalkatuilla



more than mobility

SISÄLLYS

1.	Yleistietoa.....	3
2.	Käyttötarkoitus, käyttöaiheet ja käytön esteet	3
3.	Turvallisuusvaroitukset ja -suositukset	3
4.	Tuotteen yleiskuvaus	4
5.	Tunnistetarra.....	6
6.	Käyttö	6
7.	Puhdistus ja desinfiointi	9
8.	Kunnossapito ja huolto.....	9
9.	Kuljettaminen ja säilyttäminen.....	11
10.	Uudelleenkäyttö	11
11.	Takuu	11
12.	Tekniset tiedot.....	12
13.	Pyörätuolin säätäminen ja käyttö.....	12
13.1	ICON 30FAF -pyörätuolin esittely	12
13.2	Yleistä.....	14
13.2.1	Pyörät.....	14
13.2.2	Jarrut.....	15
13.2.3	Jalkatuet.....	15
13.2.4	Käsinojat	16
13.2.5	Taitettavat työntökahvat.....	17
14.	Lisävarusteet.....	17
14.1	Niskatuki	17
14.2	Korkeussäädettävät työntökahvat.....	18
14.3	Kallistettavat selkänojan putket.....	18
14.4	Selkänojan tukitanko	19
14.5	Vartalotuet.....	20
14.6	Kaatumisesteet.....	21

1. Yleistietoa

Hyvä asiakas

Kiitos, että valitsit **ICON 30FAF** -pyörätuolin.

Tämä käyttöopas sisältää lääkinnällisen laitteen kuvauksen ja tärkeitä ohjeita sen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Perekäyttöohjeeseen huolellisesti. Erityisesti turvallisuusohjeiden lukeminen ja noudattaminen on tärkeää.

REHASENSE® kehittää jatkuvasti laitteitaan ja varaa oikeuden muuttaa niiden teknisiä tietoja ja toimintoja ilman erillistä ilmoitusta.

ICON 30FAF -pyörätuolia ei saa käyttää istuimena liikennevälineissä, kuten henkilö- tai linja-autossa, junassa, metrossa jne. Katso tarkempia tietoja osiosta Kuljetussuositukset (s. 11). Jos sinulla on laitetta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan valmistajaan. Yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

2. Käyttötarkoitus, käyttöaiheet ja käytön esteet

Käyttötarkoitus: Käsikäyttöinen pyörätuoli on lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen, siirtämiseen ja liikkumiseen istuma-asennossa. Se soveltuu käyttäjille, jotka eivät pysty seisomaan, kävelemään ja/tai istumaan omin voimin. Käyttäjä voi liikkua pyörätuolilla joko avustettuna tai omatoimisesti, kun siihen on asennettu isommat kelauspyörät ja -vanteet. Pyörätuolia voi käyttää sisä- ja ulkotiloissa erilaisilla alustoilla (asfaltti, betoni, kivi ja sora) hyvissä sääolosuhteissa. Kaikki muut käyttötarkoitukset on kielletty.

Käyttöaiheet: Laite on tarkoitettu etenkin henkilöille, jotka eivät terveydentilansa vuoksi pysty seisomaan ja/tai kävelemään ja tarvitsevat siksi liikkumisen apuvälinettä päivittäisten askareiden hoitamiseen.

Käytön esteet: Tätä pyörätuolityyppiä ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu velttohalvaus tai jokin muu keuhonhallintaa merkittävästi heikentävä sairaus. Nämä henkilöt tarvitsevat pyörätuolin, joka on erityisesti suunniteltu tukemaan käyttäjän kehoa. **ICON 30FAF** -pyörätuolin käyttötarve ja -valmiudet on aina syytä arvioida lääkärin tai fysioterapeutin lausunnon pohjalta.

3. Turvallisuusvaroitukset ja -suositukset

Turvallisuus- ja laatustandardit

ICON 30FAF -pyörätuoli on läpäissyt kaikki tarvittavat testit ja on seuraavien eurooppalaisten standardien mukainen: PN-EN 12182:2012; PN-EN 12183:2014; PN-EN 1021-1:2014; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15. Sillä on CE-merkintä. Asianmukaisesti käytettynä pyörätuoli toimii moitteettomasti vuosien ajan.

- Pyörätuolin kuormitus saa olla enintään 125 kg.
- Käyttäjä ei saa istua tuolissa ajoneuvokuljetuksen aikana.
- Varmista, että kaikki pyörätuolin käyttäjät ovat lukeneet oppaan. Valmistaja ei ole vastuussa käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä aiheutuneista henkilö- tai omaisuusvahingoista.
- Käytä tuolia vain, kun se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä tuolia ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.
- Älä muuta tuolin rakennetta omin päin, jolle on saanut valmistajalta kirjallista lupaa muutosten tekemiseen.
- Huolehdi pyörätuolia säästäessasi, että sormet tai muut kehon osat eivät jää puristuksiin tuolin liikkuvien osien väliin.
- Kaikkien pyörien tulee olla kosketuksissa alustaan AINA käytön aikana. Näin varmistetaan, että pyörätuoli pysyy kunnolla tasapainossa eikä aiheuta tapaturmia.
- Lukitse käsijarrut AINA, kun pyörätuoli seisoo paikoillaan.
- Jos havaitset tuolissa puutteita tai vikoja, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.
- Noudata kaikkia tuoliin merkittyjä ohjeita ja varoituksia.
- Pyörätuolia saa käyttää ainoastaan vakaalla pinnalla.
- Suojaudu palovammoilta käyttäessasi pyörätuolia suorassa auringonvalossa, sillä tuolin eri osat voivat kuumeta.
- Pyörätuolia ei suositella käytettäväksi hiekalla, liejussa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Pyörätuolin käyttäjän avustajan tulee olla hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä irrota pyörätuolin osia omin päin, koska tämä saattaa vaikuttaa laitteen vakauteen ja vankkuuteen.
- Älä sijoita tuolia lämmönlähteiden tai avotulen lähelle (takat, uunit, lämmityslaitteet, hellat). Tupakointi ei ole suotavaa pyörätuolissa istuttaessa, koska se ei ole tulenkestävä.

- MIKÄLI LAITTEEN KÄYTTÖ JOHTAA VAKAAN TAPATURMAAN, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄN TAI **REHASENSEEN** (yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan lopussa). Tällaisia välittömiä toimia edellytetään lääkinnällisistä laitteista 5.4.2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/745.

VAROITUS!



Pyörätuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi istuimena liikennevälineissä, kuten linja-autossa, junassa, metrossa ja lentokoneessa. Tuolissa ei siis saa istua liikkeellä olevassa liikennevälineessä. Tuoli tulee lastata ja kiinnittää turvallisesti kuljetuksen ajaksi. Käyttäjä tulee siirtää turvallisesti ajoneuvon omalle istuimelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan, loukkaantumiseen ja omaisuusvahinkoihin.



Varo sormia

Pyörätuolissa on useita eri toimintojen edellyttämiä liikkuvia osia, uria, reikiä ja osien välisiä aukkoja. Kun pyörätuolia taitetaan kokoon, avataan tai säädetään, on vaarana, että käyttäjän kehonosat, etenkin sormet ja kädet, jäävät puristuksiin osien väliin. Laitteen liikkuvat osat voivat myös vahingoittaa sormia. Huolehdi aina säästäessäsi tai kootessasi tuolia, että mikään kehon osa ei jää puristuksiin ja vahingoitu.

4. Tuotteen yleiskuvaus

ICON 30FAF -pyörätuolissa on useita ominaisuuksia: seisontajarrut, kiinteät ja korkeussäädettävät jalkatuet sekä irrotettavat ja korkeussäädettävät käsinojat. Lisäksi siihen kuuluvat taka- eli kelauspyörät, kääntyvät etu- eli tukipyörät sekä yksi ristikkorunko. Tuolin runko on valmistettu jauhemaalatuista alumiiniputkista ja suojattu tehokkaasti korroosiolta. Pyörätuolin säätämiseen tarvitaan tavallisia työkaluja, joita on saatavilla kaikissa rautakaupoissa.

Tukevan runkonsa ansiosta pyörätuolia on miellyttävä käyttää ja helppo ohjata, ja sen saa taitettua kätevästi säilöön. Myös käyttäjän siirtyminen tuoliin ja pois tuolista sujuu vaivatta.

Pyörätuolit toimitetaan pahvipakkauksissa. Tuotteet toimitetaan muutamaan erilliseen osaan irrotettuna, jotta niiden kuljettaminen olisi helpompaa.

Vakiovarustetun pyörätuolin pakkaus sisältää

- 1 ristikkorungon kangasverhoiluineen, 2 jarrua, 2 käsinojaa, 2 kelauspyörää ja 2 tukipyörää
- 2 kiinteää jalkatukea sekä jalkalevyt
- käyttöoppaan.

Lisäksi tuotteen mukana toimitetaan tilauksen mukaiset lisävarusteet.

Pyörätuolin osat:



Edellä olevassa kuvassa näkyy pyörätuolin eri vakio-osien sijainti. Oman pyörätuolisi ulkonäkö ja ominaisuudet voivat poiketa kuvasta tilauksen mukaisesti. Osien nimet, toiminnot ja sijainnit ovat kuitenkin samoja.

Valinnaiset varusteet

Mallin ja tilauksen mukaan pyörätuolissa voi olla erilaiset pyörät, rumpujarrut, yksi tai kaksi poikkitankoa, nostettavat jalkatuet, amputaatiotuet, käsituet toispuolihalvauspotilaita varten, kaatumisesteet, niskatuki, vartalotuet, turvavyö, istuimen pehmuste, kiristettävä selkäkangas, kallistettava selkänoja, korkeussäädettävät työntökahvat, tukitanko, pöytälevy, sateenvarjo, tippateline ja kepinpidike.

Pyörätuolin kokoonpano:

Suosittellemme, että pyörätuolin kokoa ja säätää asiantuntija ennen sen toimittamista loppukäyttäjälle.


- Ota kaikki pyörätuolin osat pois laatikosta ja tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilauksessa mainitut osat. Jos huomaat, että toimituksesta puuttuu osia tai osat ovat vahingoittuneet, lopeta pyörätuolin kokoaminen ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Kaikki irrotettavat osat, kuten kelauspyörät ja jalkatuet, ja kaikki lisävarusteet tulee asentaa paikoilleen ja säätää tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pyörätuolin avaaminen ja kokoon taittaminen



Kokoon taittaminen: Irrota pehmuste. Käännä jalkalevyt pystyyn. Nosta istuinkangasta (kuva vasemmalla).

Avaaminen: Aseta molemmat kämmenet istuinkankaan kiinnityspotkien päälle ja paina niitä alaspäin (kuva oikealla). Kun avaat pyörätuolia, varmista, että kätesi ei jää putkien ja rungon väliin.

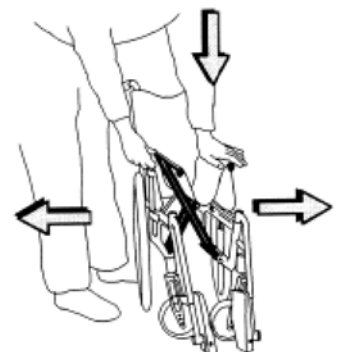

5. Tunnistetarra

Kuvassa on esimerkki poikkitankoon kiinnitetystä tuotetarrasta.


Standardin GS1 mukainen sarjanumero (UDI-DI)	SN	ICON 30FAF	Tuotteen nimi
EAN-viivakoodi – GS1-128	(01)05907467803753(11)200715(21)0001	2020-07-15	Valmistuspäivä
		RW30F40WI7	Tyyppinumero
		40 cm	Istuinleveys
		125 kg	Käyttäjän enimmäispaino
		Max 10°	Suurin nousukulma
		40 cm	Istuinsyvyys
Lääkinnällinen laite		CE MD i	Perehdy käyttöoppaaseen
GS1-standardin mukainen EAN-13-viivakoodi		REHASENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 G 97-300 Piotrków Tryb. Poland	Soveltuu ulkokäyttöön
	5 907467 803753		Valmistaja

6. Käyttö

Pyörätuolin nostaminen

Nosta pyörätuolia työntökahvoista ja etupuoelta rungon yläkulmista kohdista, joissa jalkatuet kiinnittyvät runkoon.

VAROITUS! Älä nosta pyörätuolia jalkatuista tai käsinojista. Jalkatuet kannattaa irrottaa ennen pyörätuolin nostamista.

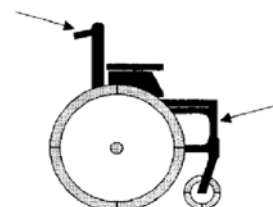

Pyörätuoliin siirtyminen ja siitä poistuminen

Pyörätuolin käyttäjän täytyy harjoitella pyörätuoliin siirtymistä ja pyörätuolista nousemista pätevien ammattilaisten valvonnassa. Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan suosituksia.

Käyttäjän siirtyminen pyörätuolista vuoteelle

Käyttäjän olisi hyvä kääntyä vuoteeseen päin riippumatta siitä, käytetäänkö avustajaa. Siirrä pyörätuoli mahdollisimman lähelle sänkyä ja varmista, että tukipyörät osoittavat eteenpäin. Kytke jarrut ja nosta käsinoja/sivulevy pyörätuolin siltä puolelta, jolta vuoteeseen ollaan siirtymässä.



Käyttäjän siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin

Käyttäjän olisi hyvä kääntyä vuoteeseen päin riippumatta siitä, käytetäänkö avustajaa. Siirrä pyörätuoli mahdollisimman lähelle sänkyä ja varmista, että tukipyörät osoittavat eteenpäin. Kytke jarrut ja nosta jalkatuet. Älä astu jalkatukien päälle, sillä pyörätuoli voi kaatua. Kun pyörätuolia siirretään portaikossa, avustajien kannattaa käyttää siirtämiseen lähinnä jalkojen lihasvoimaa välttääkseen selkävammat ja liian kumaran työskentelyasennon.




Pyörätuolilla kulkeminen

Painon oikea jakautuminen on keskeistä pyörätuolin asianmukaisessa käytössä. Painon lisäksi pyörätuolin oikeanlaiseen käyttöön vaikuttavat myös kehon mittasuhteet, pyörätuolin käyttäjän asento ja kelauspyörien asento. Mitä suurempi osa käyttäjän painosta jakautuu kelauspyörille, sitä kevyempi pyörätuolia on kelata. Vastaavasti kelaaminen on sitä raskaampaa, mitä suurempi osa käyttäjän painosta jakautuu tukipyörille.

VAROITUS! Varmista aina, että jarru on kytketty, kun avustaja jättää käyttäjän istumaan pyörätuoliin.

VAROITUS! Varmista, että tukipyörät osoittavat aina eteenpäin, kun pyörätuoli on paikoillaan. Tällöin niiden kosketuspinta alustaan on mahdollisimman suuri.

Korokkeelle nouseminen

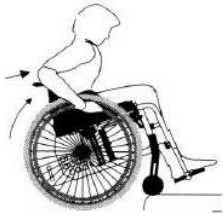

Käyttäjä kääntyneenä korokkeeseen päin

Suosittelimme seuraavaa menetelmää ainoastaan kokeneille pyörätuolin käyttäjille.


Kelaa pyörätuoli mahdollisimman lähelle koroketta.

Kallista pyörätuolia taaksepäin tasapainotellen kelauspyörien varassa ja nosta kääntyvät tukipyörät korokkeen tasalle. Nojaudu eteenpäin, jolloin paino siirtyy pyörätuolin etuosaan, ja kelaa samalla kelauspyöriä eteenpäin.



Avustaja ja käyttäjä kääntyneinä korokkeeseen päin

Avustaja kallistaa pyörätuolia taaksepäin polkimen avulla niin, että tukipyörät irtoavat alustasta. Avustaja työntää pyörätuolia eteenpäin, kunnes kelauspyörät osuvat korokkeen reunaan, ja nostaa sitten pyörätuolia työntökahvoista niin, että kelauspyörät nousevat korokkeelle.

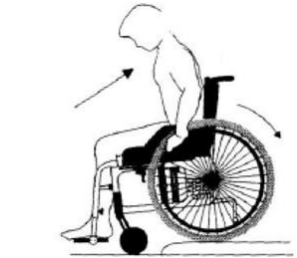

Käyttäjä selin korokkeeseen

Seuraava menetelmä toimii vain, kun koroke on matala ja jalkatuet eivät osu maahan. Kelaa pyörätuolia taaksepäin koroketta kohti, kunnes kelauspyörät koskettavat sitä. Nojaudu eteenpäin ja kelaa samalla kelauspyöriä taaksepäin.



Avustaja ja käyttäjä selin korokkeeseen

Avustaja vetää pyörätuolia takaperin koroketta kohti, kunnes kelauspyörät koskettavat sen reunaa. Avustaja kallistaa pyörätuolia taaksepäin polkimen avulla niin, että tukipyörät irtoavat riittävästi alustasta. Avustaja vetää pyörätuolia taaksepäin korokkeelle, kunnes tukipyörät nousevat korokkeen yläpuolelle, ja laskee ne sitten varovasti alustalle.

Korokkeelta laskeutuminen

Käyttäjä kääntyneenä korokkeen reunaan päin

Suosittelimme seuraavaa menetelmää ainoastaan kokeneille pyörätuolin käyttäjille.

Kelaa pyörätuoli mahdollisimman lähelle korokkeen reunaa.

Tasapainottele pyörätuolia kelauspyörien varassa niin, että tukipyörät irtoavat riittävästi alustasta.

Laskeudu korokkeelta hyvin hitaasti ja laske kääntyvät tukipyörät varovasti alustalle.



Avustaja ja käyttäjä kääntyneinä korokkeen reunaan päin

Avustaja kallistaa pyörätuolia taaksepäin polkimen avulla niin, että tukipyörät irtoavat riittävästi alustasta.

Avustaja työntää pyörätuolin hitaasti reunan yli ja laskee sitten tukipyörät varovasti alustalle.



Käyttäjä selin korokkeeseen

Suosittelimme menetelmää vain, kun korokkeen korkeus on enintään 10 cm.

Kelaa pyörätuoli mahdollisimman lähelle korokkeen reunaa. Laskeudu korokkeelta hyvin hitaasti ja nojaudu samalla eteenpäin.

VAROITUS! Menetelmässä on vaarana, että pyörätuoli keikahtaa kumoon.



Avustaja ja käyttäjä selin korokkeen reunaan

Avustaja vetää pyörätuolia takaperin mahdollisimman lähelle korokkeen reunaa. Avustaja laskee pyörätuolin alas korokkeelta hyvin hitaasti ja vetää pyörätuolia kelauspyörien varassa, kunnes tukipyörät ovat siirtyneet kokonaan reunan yli, ja laskee sitten tukipyörät alustalle.



Liikkuminen kaltevalla alustalla

Noudata seuraavia ohjeita, kun kelaat pyörätuolia kaltevalla pinnalla:

- Vältä suunnanmuutoksia.
- Pyri kulkemaan suoraan. Älä käänny sivuttain kallistukseen nähden.
- Vältä tarpeettomia riskejä ja pyydä tarvittaessa epäröimättä apua.
- Nojaudu ylämäkeä noustessasi eteenpäin niin, että painopiste siirtyy eteen ja pyörätuoli vakautuu.
- Nojaudu alamäkeä laskeutuessasi taaksepäin niin, että painopiste siirtyy taaksepäin ja pyörätuoli vakautuu.
- Älä säätele nopeutta jarruilla vaan kelauspyörien kelausvanteilla.

Portaiden nouseminen ja laskeutuminen

VAROITUS! Pyydä aina apua. Pyörätuolin kantamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä, jotka ovat terveitä ja riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa.

VAROITUS! Älä koskaan käytä pyörätuolia liukuportaisissa sen enempää omatoimisesti kuin avustettunakaan.



Portaiden nouseminen:

Avustaja vetää pyörätuolin takaperin portaikon luo niin, että kelauspyörät koskettavat ensimmäistä porrasaskelmaa. Avustaja kallistaa pyörätuolia taaksepäin kahvojen avulla. Toinen avustaja tarttuu rungon alempiin etukulmiin.

VAROITUS! Älä koskaan nosta pyörätuolia jalkatuista.

Avustajat kantavat pyörätuolia hitaasti ylöspäin porras portaalta. Kun viimeinenkin porrasaskelma on ylitetty, toinen avustajista vetää pyörätuolia taaksepäin, kunnes tukipyörät voi laskea alustalle. Avustajien olisi hyvä käyttää pyörätuolin kantamiseen lähinnä jalkojen lihasvoimaa välttääkseen selkävammat ja liian kumaran työskentelyasennon.

Portaiden laskeutuminen:

Pyörätuoli kannetaan alas portaita noudattaen edellä portaiden nousemiseen annettuja ohjeita.

7. Puhdistus ja desinfiointi

Runko

Rungon voi puhdistaa kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla puhdistusaineella. Lopuksi runko kuivataan kuivalla liinalla. Runko täytyy tarkastaa säännöllisesti maalipinnan vaurioiden varalta, sillä vaurioitunut runko voi ruostua. Jos rungossa on näkyvissä selviä vaurioita (halkeamia, maalipinnan virheitä jne.), toimita pyörätuoli paikalliselle jälleenmyyjälle tarkastusta ja huoltoa varten.

Kangasverhoilut

Istuin ja selkänoja on valmistettu erittäin kestävästä vahvistetusta nylonista. Istuinkankaan voi poistaa helposti irrottamalla rungon putkiin kiinnitetyt ruuvit. Selkäkankaan voi poistaa helposti irrottamalla selkänojan putkiin kiinnitetyt ruuvit. Istuin- ja selkäkankaan voi pestä sienellä ja miedolla pesuaineella.

Metalli- ja muoviosien tavallisimmat tahrat voi pyyhkiä pois käyttämällä tavallista puhdistusainetta ja sientä tai pehmeää liinaa. Tarkista kunkin tuotteen tiedot ja käytä puhdistamiseen ainoastaan kaupallisia puhdistusaineita, jotka soveltuvat puhdistamiseen ja desinfiointiin (ei liuottimia tai hankaavia aineita).

Desinfiointi

Ota yhteyttä jälleenmyyjään varmistaaksesi, että desinfioinnin suorittaa ammattihenkilö. Yksityiskäyttöön suosittelemme yleisesti saatavilla olevilla desinfiointiaineita, jotka eivät sisällä kloriinia eivätkä fenolia. Valmistaja ei vastaa desinfiointiaineiden virheellisestä käytöstä aiheutuneista vaurioista.

8. Kunnossapito ja huolto

Vankasta rakenteestaan ja kestävästä materiaaleistaan huolimatta tuote kuluu ajan mittaan. Tämän vuoksi tuote kannattaa toimittaa asiantuntijan tarkastettavaksi säännöllisin väliajoin.

Tavallisimmat huoltotyöt onnistuvat hylsyavaimilla, jokoavaimella sekä tasa- ja ristipääruuvitaltoilla.

Osat, jotka tulee tarkastaa säännöllisesti:

<i>Osan nimi</i>	<i>Tarkastuksen sisältö</i>	<i>Tarkastustiheys</i>
Renkaat	Tarkista rengaspaine (2,0–2,2 baaria) sekä renkaiden ja kulutus pintojen kunto. Huolehdi siitä, että rengaspaine pysyy samalla tasolla molemmin puolin. Kovemmat renkaat parantavat ohjattavuutta ja ajettavuutta, mutta heikentävät ajomukavuutta epätasaisilla pinnoilla.	Vähintään kerran viikossa.
Tukipyörien haarukat	Tarkista pulttien kireys. Jos etuhaarukan kulman säätöpultit jäävät löysälle, ne voivat rikkoutua, jolloin tuoli voi keikahtaa kumoon.	Vähintään kerran viikossa.
Pinnat	Väljät pinnat voivat aiheuttaa kelauspyörien vääntymistä. Sovi väljen pinnojen korjaamisesta jälleenmyyjän tai paikallisen pyöräkorjaamon kanssa.	Ongelman ilmetessä.
Pyörien akselit	Poista akseleihin kertynyt lika ja hiukset.	Tarpeen mukaan.
Kelausvanteet	Pahasti naarmuuntuneet kelausvanteet tulee vaihtaa, koska käyttäjä voi loukata niissä kätensä laitetta kelatessaan.	Tarpeen mukaan.
Jarrut	Jarrutusteho riippuu rengaspaineesta. Jarrujen tehoon voi myös vaikuttaa renkasiin kertynyt lika. Puhdista jarruihin kertynyt lika kostealla liinalla ja voitele jarruvipujen kääntöruuvien kierteet. Tarkista, että jarrut ovat vaaka-asennossa.	Tarkasta jarrujen asianmukainen toiminta vähintään kerran viikossa.
Runko	Pidä pyörätuoli puhtaana, jolloin sen käyttö on miellyttävämpää.	Vähintään kerran kuukaudessa käyttöolosuhteiden mukaan.
Tukipyörät	Tukipyörän ja haarukan väli tulee pitää puhtaana, koska sinne kertyvä lika voi nopeuttaa pyörän laakereiden kulumista. Puhdistamista varten tukipyörä tulee irrottaa haarukasta, poistaa kaikki lika ja suojata sen metalliosat voiteluaineella.	Vähintään kerran kuussa tavanomaisten käyttökohteiden ja olosuhteiden mukaan.
Irrotettavat osat	Tarkista tuolin irrotettavien osien kunto. Kiristä löystyneet ruuvit.	Kovassa käytössä kerran kuussa.

Yleisimpiä ongelmia ja ratkaisuja

Jos pyörätuoli ei toimi kunnolla, lopeta pyörätuolin käyttö välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen tai toimittajan huoltopalveluun. Valmistaja ei takaa pyörätuolin moitteetonta toimintaa, jos pyörätuolissa ei ole käytetty alkuperäisosa.

<u>Häiriö</u>	<u>Mahdollinen syy</u>	<u>Ratkaisu</u>
Pyörätuoli tuntuu kallistuvan toiselle puolelle.	• Toisessa kelausrenkaassa saattaa olla toista enemmän ilmaa.	• Lisää renkasiin ilmaa (2,0–2,2 bar). • Tarkista, onko pyörätuolin painopiste siirtynyt.
Pyörätuolia on raskasta liikuttaa.	• Rengaspaine on matala. • Tukipyörien akseleissa on likaa. • Kääntyville tukipyörille kohdistuu liikaa kuormitusta.	• Lisää renkasiin ilmaa (2,0–2,2 bar). • Puhdista kääntyvien tukipyörien akselit ja poista niihin tarttuneet hiukset. • Siirrä painopistettä.
Pyörätuolia on raskasta kääntää.	• Rengaspaine on matala. • Tukipyörien vaaka-akselit ovat liian kireällä. • Tukipyörien akseleissa on likaa.	• Lisää renkasiin ilmaa (2,0–2,2 bar). • Tarkista tukipyörien akselit ja löysää niitä tarvittaessa. • Puhdista kääntyvät tukipyörät ja poista niihin tarttuneet hiukset.
Jarrut eivät toimi kunnolla.	• Rengaspaine on matala.	• Lisää renkasiin ilmaa (2,0–2,2 bar).
Pyörätuolia on vaikea avata ja taistaa kokoon.	• Kangasverhoilu on kiristetty liian tiukalle. • Ristikkorungon saranassa on likaa.	• Löysää kangasverhoilun kiristysruuveja ja kiristä ne uudelleen. • Puhdista ja voitele ristikkorungon sarana.
Pyörätuoli ei ole vakaa.	• Rengaspaine on matala. • Pyörätuolin osia ei ole kiinnitetty tukevasti ja tiukasti paikoilleen.	• Lisää renkasiin ilmaa (2,0–2,2 bar). • Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty kunnolla.
Rengas on tyhjä.	• Rengas ja sisäkumi ovat voineet puhjeta. • Rengas ja sisäkumi ovat kuluneet.	• Korjauta tai vaihdata rikkoutuneet renkaat ja sisäkumit lähimmällä pyörätuolien jälleenmyyjällä tai polkupyöräkorjaamossa.

Jos pyörätuoli ei toimi kunnolla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai jälleenmyyjään, jolta tuote on hankittu. Valmistaja ei takaa pyörätuolin asianmukaista toimintaa, jos sen korjauksessa ei ole käytetty valtuutettua huoltoa ja/tai alkuperäisiä varaosia.

VAROITUS! Luvattomat korjaustoimenpiteet mitätöivät takuun.

Valtuutetut huoltopalvelut

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on hankittu, tai suoraan valmistajaan tuotteen korjaamista varten.

Pyörätuolin tai sen osien lähettäminen huoltoon

Jos haluat korjauttaa pyörätuolin, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun. Pyörätuoli tai sen osat tulee lähettää pakattuina niin, että ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana. Pyörätuoli kannattaa pakata alkuperäispakkaukseen. Kuljettamiseen tulee käyttää valmistajan ilmoittamaa kuljetusyritystä.


VAROITUS! Valmistaja ei vastaa huonosta pakkauksesta aiheutuneista laitteen tai sen osien kuljetusvaurioista.

Tuotteen hävittäminen ja kierrätys

Tuote on hävitettävä paikallisten ja kansalliseen lakiin perustuvien määräysten mukaisesti. Selvitä pakkauksen, metalli- ja muoviosien ja muiden materiaalien asianmukainen hävittäminen paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

9. Kuljettaminen ja säilyttäminen

Kuljetussuositukset

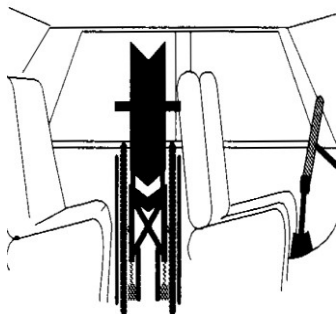

ICON-pyörätuolia on helppo kuljettaa. Pyörätuolin voi taittaa kokoon, jolloin se mahtuu pienempään tilaan. Painoa voi keventää irrottamalla osia. Kelauspyörät ja jalkatuet voi irrottaa ja pyörätuolin rungon voi taittaa vaivatta kokoon edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS! Pyörätuoli ei ole auton istuin. Sitä ei saa käyttää istuimena liikkuvissa ajoneuvoissa. Tuoli tulee taittaa kokoon ja kiinnittää tukevasti paikoilleen.

Säilyttäminen

Säilytä pyörätuolia kuivassa paikassa vähintään 0 °C:ssa. Tuolin voi taittaa kokoon säilytyksen ajaksi, jolloin se vie vähemmän tilaa. Tarvittaessa se mahtuu vieläkin pienempään tilaan, kun irrotat myös jalkatuet. Kosteus ja kylmyys voivat vahingoittaa pyörätuolin renkaita, kangasverhoilua, akseleita, laakereita ja muita osia. Jos pyörätuoli on pitkään käyttämättä, voit estää renkaiden menettämistä muotoaan nostamalla rungon lankkujen tai muiden tukien päälle. Pyörätuoli kannattaa myös peittää säilytyksen ajaksi, jotta se ei kerää pölyä ja likaa.

10. Uudelleenkäyttö

Tämän lääkinällisen laitteen voi luovuttaa toisen käyttäjän käyttöön, jos alkuperäinen käyttäjä ei enää tarvitse sitä. Ennen uudelleenkäyttöä pyörätuoli on toimitettava jälleenmyyjälle valtuutetun teknisen henkilöstön tarkastettavaksi ja desinfioitavaksi.

Perusteellisen tarkastuksen tulee kattaa

- rakenteen lujuus
- pulttien ja muttereiden kiristys
- kangasosien kunto
- pyörien ja kuulalaakereiden kunto
- jarrujen teho ja kunto.

Repeytyneet tai rikkoutuneet osat tulee vaihtaa uusiin. Erityisen suositeltavaa on asentaa uudet pyörät aina, kun käyttäjä vaihtuu. Kaikki löystyneet pultit ja mutterit on kiristettävä. Tuote on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti.

VAROITUS! Pyörätuolia ei saa uudelleenkäyttää, jos sen runko on vääntynyt tai rikkoutunut.

Tämä käyttöopas on toimitettava jokaiselle uudelle käyttäjälle pyörätuolin mukana.

11. Takuu

Takuutiedot

- Valmistaja antaa tuotteelle 24 kuukauden takuun tuotteen ostopäivästä lukien.
- Jos laitteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirheitä takuuaajan kuluessa, kaikki vialliset materiaalit ja osat korjataan tai vaihdetaan veloituksetta.
- Takuu ei kata renkaiden, pintojen ja kangasverhoilun käytönaikaisesta kulumisesta johtuvia vaurioita. Takuu ei myöskään kata muita käytön aikana normaalisti kuluvia pyörätuolin osia.
- Takuu ei kata mekaanisia vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat valmistajan ilmoittamasta käyttötarkoituksesta poikkeavista käyttötavoista tai käytännöistä.
- Pyörätuolin luvattomat muutokset ja muokkaukset mitätöivät takuun.
- Mahdollisista vioista tai vaurioista tulee välittömästi ilmoittaa jälleenmyyjälle.

Vastuuvapauslauseke

- Takuu ei kata kuljetuskustannuksia.
- Takuu ei kata tuotteen toimintahäiriöstä johtuvia henkilö- tai muita vahinkoja.
- Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä.
- Valmistaja ei vastaa tämän käyttöoppaan väärinymmärtämisestä aiheutuvia vahinkoja.

Pyörätuolin mukauttaminen ja lisäosien asentaminen

- Tämä kattaa kaikki pyörätuolit, joita on mukautettu ja jotka poikkeavat tässä käyttöoppaassa kuvatuista tiedoista tai joihin on asennettu toisen valmistajan toimittamia lisäosia. Jos käyttäjä on mukauttanut laitetta edellä kuvatulla tavalla ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa, laite ei enää täytä CE-merkinnän olennaisia vaatimuksia eikä kuulu takuun piiriin.
- Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää muutostöistä, ota yhteyttä valmistajaan ennen toimenpiteitä.

12. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot vaihtelevat valitun rungon mittojen ja pyörätuolin kokoonpanon mukaan (tuki- ja kelauspyörät). Taulukossa esitetyt tiedot koskevat pyörätuolia, jossa istuimen leveys on 45 cm ja istuimen syvyys 40 cm. Kaikki pituudet ilmoitetaan senttimetreinä (cm) ja painot kilogrammoina (kg), jollei muuta ilmoiteta.

	ICON 30FAF
Ristikkorunko	1 × 1
Istuinleveydet (cm)	40 (45)
Istuinsyvytydet (cm)	40 (45)
Käyttäjän enimmäispaino (kg)	125
Tuolin pituus (cm)	91/89/87 (96/94/92)
Tuolin korkeus (cm)	83, 86
Tuolin leveys (cm)	63 (68)
Korkeus kokoonlaitettuna (cm)	83
Leveys kokoonlaitettuna (cm)	35
Kokonaispaino (kg)	13,6
Istuinkorkeus edessä (cm)	48,5
Selkänöjan korkeus (cm)	31
Jalkatuen kulma (°)	70°/80°/90°
Käsinojen korkeudet (cm)	22,5; 24; 25,5; 27; 28,5
Kelauspyörä	24"
Tukipyörä	5" (6", 7")

* Vakiokoko = istuinleveys 40 cm

13. Pyörätuolin säätäminen ja käyttö

13.1 ICON 30FAF -pyörätuolin esittely

ICON 30FAF -pyörätuolin taka-akselissa on useita asetuksia omatoimista ja avustettua käyttöä varten, ja siihen on saatavilla erikokoisia pyöriä.

Tuolin kallistuskulman voi valita käyttäjän toimintakyvyn mukaan. Koska tukipyörien kulmaa voi säätää, istuimen korkeuden ja kallistuskulman voi sovittaa monipuolisesti eri käyttäjien tarpeisiin.

VAROITUS! Etu- ja taka-akselin säädöt ja erikokoisten pyörien vaihdot tulee aina suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä tai pyörätuolin säätämiseen perehtyneen fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti. Yksityiskohtaisempia huolto-ohjeita antaa Rehasense tai jälleenmyyjä.

VAROITUS! Vääränlaiset säädöt voivat vaikuttaa pyörätuolin vakauteen, mikä voi olla vaaraksi käyttäjälle. Jos muutoksia on tarpeen tehdä, ota aina yhteyttä jälleenmyyjään.

Rungon asetukset


Rungon rakenteen ansiosta istuinkulmaa ja istuimen korkeutta voidaan säätää. Myös tuolin vakautta voi säätää muuttamalla taka-akselin sijaintia, jolloin tuolin painopiste muuttuu seuraavasti:

- Kun taka-akselia siirretään lähemmäs painopistettä, tuolia on helpompi käsitellä, mutta se myös keikahtaa herkemmin, joten se soveltuu aktiiviselle käyttäjälle.
- Kun taka-akselia siirretään kauemmas painopisteestä, tuoli ei kallistu yhtä herkästi ja soveltuu vakaampaa ja turvallisempaa tuolia tarvitsevalle käyttäjälle.

Rungon rakenteen ansiosta istuinkulmaa ja istuimen korkeutta voidaan säätää. Voit säätää


- istuinkulmaa ja/tai istuimen korkeutta vaihtamalla tuki- ja/tai kelauspyöriin halkaisijaltaan erikokoiset pyörät
- istuinkulmaa muuttamalla kelauspyörien asennuskohtaa
- etuhaarukan akselin kulmaa niin, että se on kohtisuorassa alustaan nähden.

Kelauspyörien säätäminen

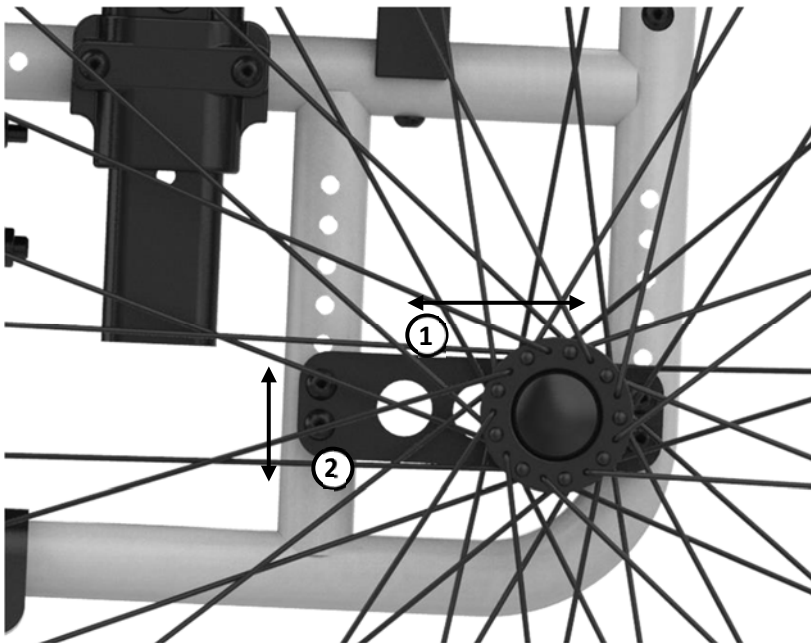

- Voit siirtää kelauspyörää sivusuunnassa irrottamalla mustassa kiinnityslevyssä olevan pyörän holkin (1) ja asentamalla sen levyn toiseen aukkoon. Varmista samalla, että aluslevyt ja mutterit asennetaan oikeassa järjestyksessä.
- Jos haluat siirtää kelauspyörää pystysuunnassa, irrota kiinnityslevyn neljä pulttia (2), jotka pitävät levyn paikoillaan rungossa, siirrä levy haluamaasi kohtaan ja kiristä pultit sitten kunnolla paikoilleen.

Tukipyörien säätäminen

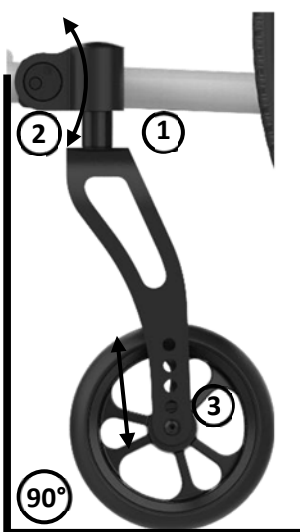

Jos kelaus- tai tukipyörien asennuspaikkaa tai kokoa muutetaan, myös tukipyörän kallistusta voi olla tarpeen muuttaa, jotta pyörät eivät "vipata" ja pyörätuoli kulkee eteenpäin tasaisesti ja suoraan.

Etuhaarukan yläpään (1) tulee aina olla 90 asteen kulmassa lattiaan nähden. Tämä kulma on tarpeen säätää aina, kun pyörien asetuksia muutetaan.

Voit säätää etuhaarukan kallistusta seuraavasti:

- Löysää pultit (2). Säädä etuhaarukkaa, kunnes laakerin kotelo (1) on 90 asteen kulmassa lattiaan nähden.
- Kiristä pultit uudelleen.

Jos haluat säätää istuinkorkeutta, voit asentaa tukipyörät eri asennuskohtaan (3). (Kuvassa on etuhaarukka, jossa on viisi eri asennuskohtaa.) Eri aukkojen ansiosta pyörätuoliin voi asentaa myös halkaisijaltaan erikokoiset tukipyörät.

VAROITUS! Kaikki edellä kuvatut säädöt tulee aina antaa pätevän huoltoteknikon tehtäväksi tai hyväksyttäväksi fysioterapeutilla. Tarkempia ohjeita on huolto-oppaassa.

13.2 Yleistä

13.2.1 Pyörät

Kelauspyörät

Pyörätuolissa voi olla tilauksen mukaan kelauspyörät, joiden halkaisija on 12", 16" tai 24". Pyörissä voi olla ilmarenkaat tai puhkeamattomat PU-renkaat. Muita pyöräkokoja ja -malleja on saatavilla tilauksesta.

Koon 24" pyörissä on vakiovarusteena kelausvanteet, jotka on tarkoitettu pyörätuolin omatoimiseen kelaamiseen. Pienemmillä pyörillä (12" tai 16") varustettujen pyörätuolien liikuttamiseen tarvitaan aina avustaja.

Pikalukitusakseli

Kelauspyörissä voi olla tilauksen mukaan pikalukitusakseli, jonka ansiosta kelauspyörät voi asentaa tai irrottaa nopeasti.



Pyörän irrottaminen rungosta:

- Paina vapautuspainiketta **(1)** ja vedä samalla pyörä irti holkista.

Pyörän asentaminen paikoilleen:

- Aseta akselin pää holkin sisään **(2)**, paina vapautuspainiketta **(1)** ja työnnä samalla akseli kokonaan holkin sisään. Vapauta sitten painike.
- Tarkista pyörän lukittuminen paikoilleen nykäisemällä pyörää ulospäin.

VAROITUS! Varo sormiasi, kun kiinnität tai irrotat pyöriä. Älä työnnä sormiasi pinnojen väliin tai renkaiden ja kelausvanteiden väliin.

VAROITUS! Varo sormiasi, kun kelaat pyörätuolia. Älä työnnä sormiasi pinnojen väliin tai renkaiden ja kelausvanteiden väliin. Voit suojella sormiasi asentamalla pyöriin pinnasuojukset, joita on saatavana lisävarusteena.

13.2.2 Jarrut

Seisontajarrut



Jarru kytketty (pyörätuoli ei liiku)



Jarru vapautettu (pyörätuoli liikkuu)

- Kytke jarru vetämällä jarruvipua taaksepäin **(1)**. Pyörät lukittuvat paikoilleen.
- Voit vapauttaa jarrun työntämällä jarruvipua eteenpäin **(2)**. Pyörät liikkuvat jälleen vapaasti.
- Kytke jarrut aina, kun pyörätuoli on paikoillaan.
- Vapauta jarrut aina, kun aiot lähteä liikkeelle.

VAROITUS! Kytke aina molemmat jarrut siirtyessäsi pyörätuoliin ja noustessasi siitä.

VAROITUS! Seisontajarruja ei ole tarkoitettu pyörätuolin vauhdin hiljentämiseen, vaan ainoastaan pysäköintiin.

VAROITUS! Älä koskaan nojaa jarruun. Jarrut on suunniteltu ainoastaan pysäköintiä varten.

13.2.3 Jalkatuet

Vakiojalkatuet – 70/80/90 asteen kulma

Alumiinia, kiinnitys pulteilla, joilla voi säätää pituutta.

- Jalkatuet on kiinnitetty rungon sivuun pulteilla.
- Jalkatukien korkeutta voi säätää. Jos pyörätuolia käytetään ulkotiloissa, jalkalevyjen tulee olla noin 4–5 cm:n korkeudella maasta.
- Jalkalevyt voi nostaa helposti ylös **(A)**, jolloin siirtyminen pyörätuoliin ja siitä nouseminen käy sujuvammin.

VAROITUS! Jalkatuilla seisominen on kielletty, koska pyörätuoli voi keikahtaa kumoon.





Jalkatuen irrottaminen:

- Löysää pultit (1) ja (2).
- Irrota sitten jalkatuki pyörätuolin rungosta (3).

Jalkatukien kiinnittäminen

(saatavilla 70, 80 tai 90 asteen kulmassa olevat mallit):

- Kiristä pultit (1) ja (2) runkoon (3).
- Sääda etuhaarukan laakerin kotelo (4) siten, että se on pystysuorassa alustaan nähden.
- Varmista, että oikea ja vasen jalkatuki on asennettu vastaavalle puolelle runkoa.

Jalkatuen pituuden säätäminen:


- Löysää pultti ja irrota se rungon putkesta (5).
- Sääda jalkatuen pituutta liu'uttamalla alempaa putkea (6) ylös- tai alaspäin ja sovita sisemmän ja ulomman putken aukot kohdakkain.
- Aseta pultti paikalleen ja kiristä se.

Jalkalevyn kallistuksen ja syvyyden säätäminen:

- Löysää pultti (7), sääda jalkalevyn kulmaa ja kiristä pultti uudelleen.
- Löysää jalkalevyn alla olevat pultit (8) ja sääda jalkalevyn syvyyttä liu'uttamalla sitä eteen- tai taaksepäin.
- Lopuksi kiristä pultit uudelleen.

13.2.4 Käsinojat

Pehmustetut käsinojat (nostettavat)

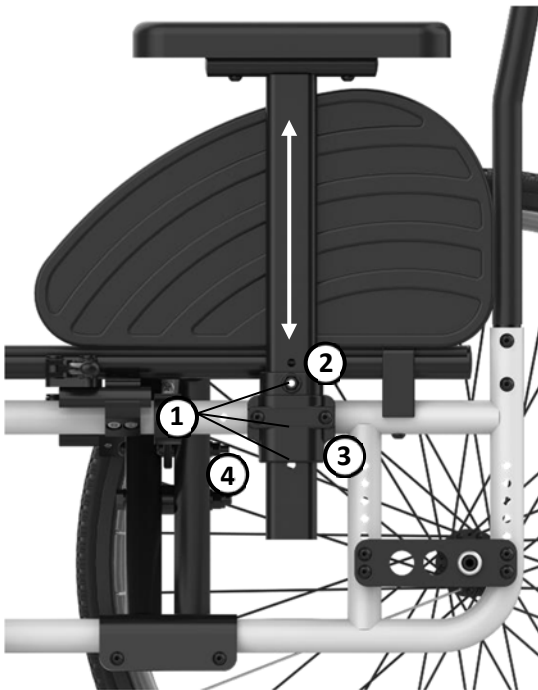

Käsinojen korkeutta voi säätää. Ne voi myös irrottaa, jolloin pyörätuoliin siirtyminen ja siitä nouseminen sujuu helpommin.

Käsinojen korkeuden säätäminen:

- Valitse haluamasi asennusaukko (1) käsinojan kannattimesta. Aseta pultti (2) aukkoon ja kiristä se paikalleen.

Käsinojan irrottaminen pyörätuolista:

- Vedä käsinojaa ylöspäin. Käsinojassa on lukituspainike (3), jotta se ei pääse irtomaan vahingossa. Paina lukituspainiketta ja liu'uta käsinojan putki ulos kannattimesta (4).


Käsinojan kiinnittäminen runkoon:

- Aseta käsinojan putken pää kannattimen kohdalle, paina lukituspainiketta (3) ja työnnä putki kannattimen sisään.
- Käsinoja pysähtyy korkeudelle, jossa korkeuden säätöön tarkoitettu pultti osuu kannattimeen.

VAROITUS! Älä koskaan nosta tai kannata pyörätuolia käsinojista.

13.2.5 Taitettavat työntökahvat

Työntökahvat (taitettavat)

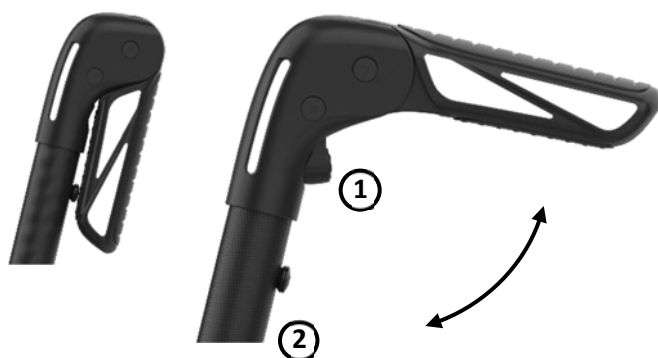

Työntökahvat voi taittaa, jolloin pyörätuolin voi pakata pienempään tilaan.

Työntökahvojen taittaminen:

- Paina painikkeita (1) ja käännä sitten vaakatasossa olevat työntökahvat selkänöjan putkea vasten (2).

Työntökahvojen avaaminen:

- Vedä työntökahvoja ylöspäin, jolloin ne lukkiutuvat automaattisesti paikalleen.
- Lukituspainikkeet (1) palautuvat alkuperäiseen asentoonsa.

14. Lisävarusteet

14.1 Niskatuki



Niskatuki on suunniteltu antamaan lisätukea niskalle ja päälle.


Niskatuen asennussarja sisältää kaksi selkänöjan putkiin kiinnitettävää erikoiskannatinta (1) sekä tangon (3), jonka leveyttä voi säätää.

VAROITUS! Tämän lisävarusteen asentaminen ja säätäminen tulee aina antaa pätevän huoltoteknikon tai fysioterapeutin tehtäväksi.

Tanko kiinnitetään kannattimiin (1) kahdella lukitustapilla (2).

Niskatuen irrottaminen (esim. pyörätuolin kokoontaittamiseksi): vedä lukitustappia (2) ja nosta tankoa. Toista pyörätuolin toisella sivulla.

Voit kiinnittää niskatuen takaisin paikoilleen noudattamalla ohjetta päinvastaisessa järjestyksessä. Niskatuen korkeutta ja syvyyttä voi säätää, ja sitä voi myös kiertää sivusuunnassa käyttömukavuuden lisäämiseksi.

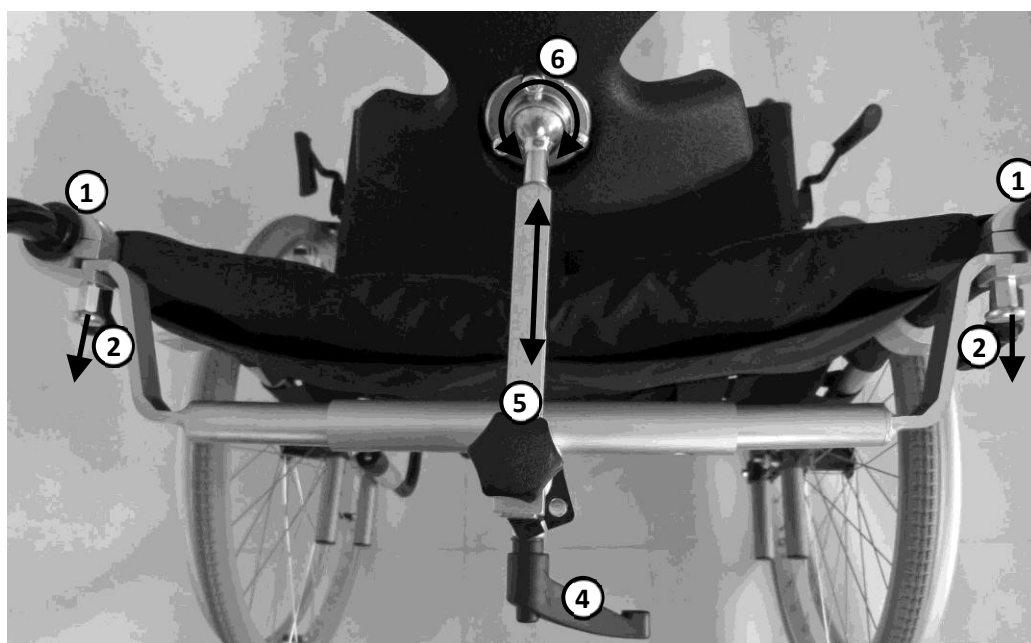

Niskatuen korkeuden säätäminen

- Avaa vipua (4) ja säädä niskatuen pystytanko haluamallesi korkeudelle. Kierrä sitten vipu kiinni.


Niskatuen syvyyden säätäminen:

- Kierrä säätönuppia (5) auki ja säädä niskatuen vaakatanko haluamaasi asentoon. Kierrä sitten säätönuppi kiinni.

Voit kiertää niskatukea sivusuunnassa liitoskohdasta (6), kunnes se on haluamassasi asennossa.

VAROITUS! Säädä niskatukea aina käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

14.2 Korkeussäädettävät työntökahvat

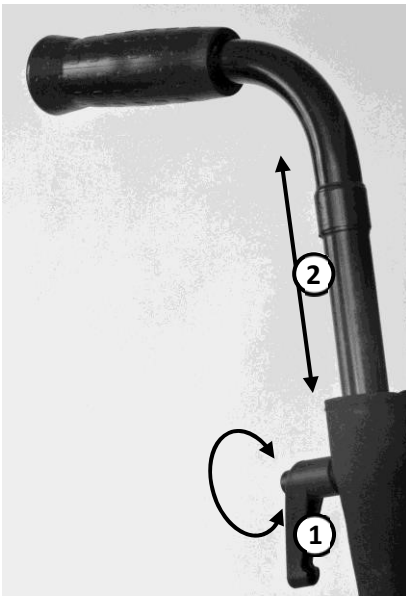

Voit säätää työntökahvojen korkeutta avustajan pituuden mukaan.


VAROITUS! Molemmat työntökahvat tulee asentaa samalle korkeudelle.

Työntökahvan korkeuden säätäminen:

- Avaa lukitusvipu (1).
- Säädä kahva haluamallesi korkeudelle (2).
- Sulje lukitusvipu (1).
- Säädä toinen kahva toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

14.3 Kallistettavat selkänojan putket

Kallistettava selkänoja (kaasujousilla)

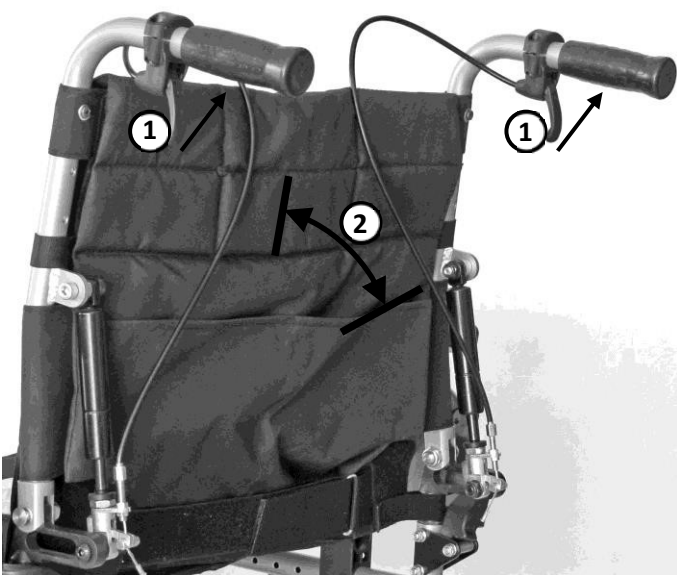

Avustajat voivat lisätä pyörätuolin käyttömukavuutta säätämällä selkänojan kallistusta.

Selkänojan kallistuskulman säätäminen:

- Ota kiinni työntökahvoista ja vedä kahta säätövipua (1) ylöspäin sormillasi.
- Pidä vipuja ylhäällä ja kallista selkänojaa (2) eteen- tai taaksepäin haluamaasi asentoon.
- Vapauta molemmat vivut (1).

VAROITUS! Vedä ja vapauta molemmat vivut aina samaan aikaan ja säädä molemmat selkänojan putket samaan kulmaan.

VAROITUS! Säädä selkänojan kallistusta aina käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

VAROITUS! Kytke seisontajarrut aina ennen kallistuksen säätämistä.

14.4 Selkänojan tukitanko



Tukitanko on suunniteltu tukemaan selkänojan putkia.

Tukitanko kiinnitetään pyörätuoliin kahdella pultilla.

VAROITUS! Tämän lisävarusteen asentaminen ja säätäminen tulee aina antaa pätevän huoltoteknikon tai fysioterapeutin tehtäväksi.

Tukitanko on irrotettava ennen kuin pyörätuoli taitetaan kokoon. Kun pyörätuoli avataan, tukitanko pitää kiinnittää uudelleen.

Tukitangon asentaminen:

- Aseta holkki (1) selkänojan putkien sisään.
- Asenna työntökahvat (2) ja tukitanko (3).
- Kiinnitä osat paikoilleen kiristämällä pultti (4).

HUOM!


On täysin normaalia tuntea pientä vastusta tukitankoa kiinnittäessä, kun selkänojan putket työntyvät kauemmas toisistaan.




Tukitangon irrottaminen:

- Noudata edellä annettuja ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

14.5 Vartalotuet

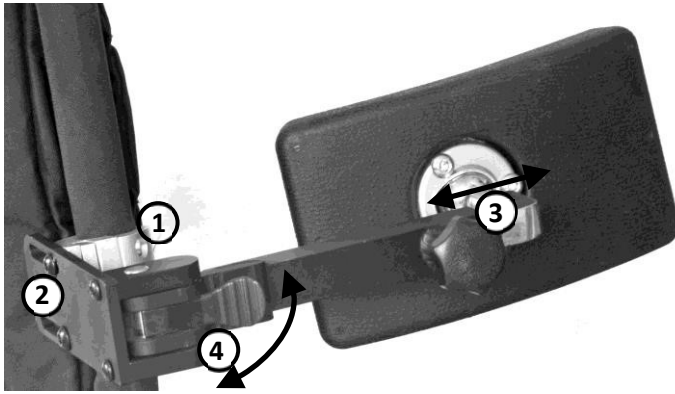

Näkymä sivusta

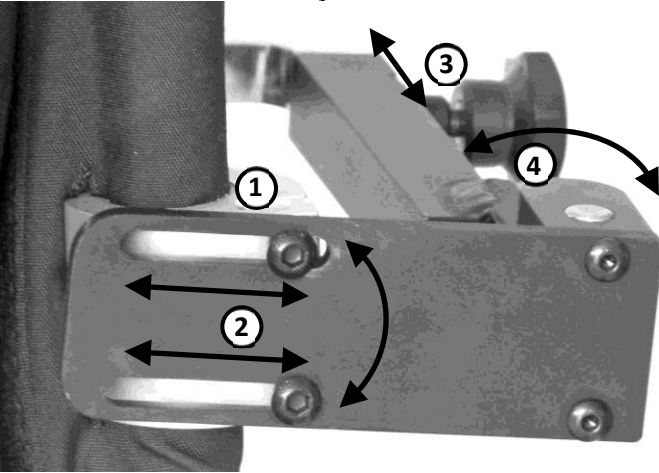

Näkymä takaa

Sivuille asennettavat vartalotuet antavat lisätukea käyttäjän keholle.

Tuet kiinnitetään selkänöjan putkiin erityisillä kannattimilla (1).

VAROITUS! Tämän lisävarusteen asentaminen ja säätäminen tulee aina antaa pätevän huoltoteknikon tai fysioterapeutin tehtäväksi.

Vartalotuki kiinnitetään kannattimeen (1) kahdella pultilla (2). Tuen syvyyttä, kallistusta ja leveyttä voi säätää käyttömukavuuden lisäämiseksi.

Tuen kallistuksen ja/tai leveyden säätäminen:

- Löysää pultteja (2), säädä tuki haluamaasi asentoon ja kiristä sitten pultit paikoilleen.

Tuen syvyyden säätäminen:

- Avaa säätönuppia (3), säädä tuki haluamaasi asentoon ja kierrä sitten säätönuppi kiinni.

Tuen voi kääntää sivuun, jotta käyttäjä voi siirtyä helposti pyörätuoliin ja pois pyörätuolista. Tuen kääntäminen sivuun:

- Paina punaista lukitusvipua (4) ja käännä tuki sivuun.
- Kun käännät tuen takaisin paikoilleen, tuki lukkiutuu automaattisesti aiempaan asentoon.


VAROITUS! Säädä vartalotukea aina käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

14.6 Kaatumisesteet

Tämä lisävaruste lisää käyttöturvallisuutta parantamalla pyörätuolin takaosan vakautta. Lisävaruste on tarkoitettu etenkin käyttäjille, joiden alaraaja(t) on amputoitu. Suosittelemme kuitenkin sen käyttöä kaikille muillekin käyttäjille.

VAROITUS!

**Kaatumisesteiden
asentaminen tulee aina
antaa pätevän
huoltoteknikon tai
kokeneen
fysioterapeutin
tehtäväksi.**

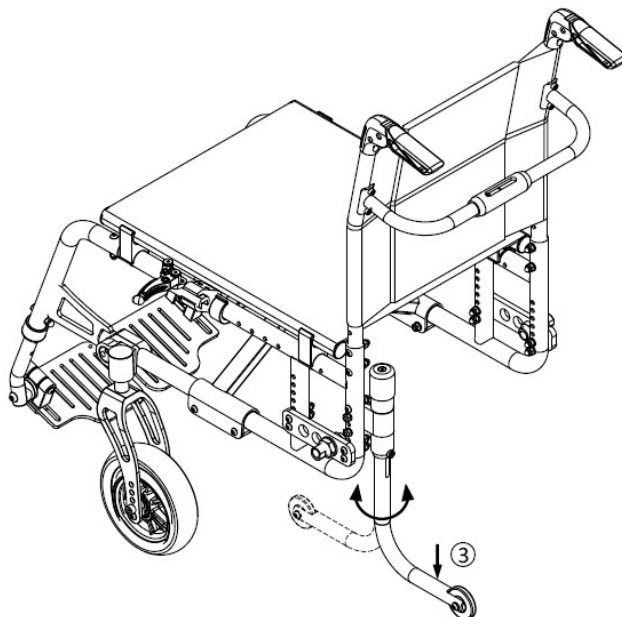

Kaatumiseste on käytössä, kun pieni pyörä osoittaa taaksepäin. Kun pyörä on käännettynä rungon alle, se ei ole käytössä.

Voit ottaa kaatumisesteen käyttöön tai pois käytöstä tarttumalla vaakatankoon ja vetämällä sitä alaspäin.

Kierrä sitten tankoa sivusuunnassa niin, että se kääntyy rungon pystytangon sisällä.

Kun päästät irti tangosta, se lukittuu automaattisesti paikoilleen.



Jos haluat tarkempia teknisiä tietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai suoraan Rehasenseen.

Jälleenmyyjä:

--

Rehasense® Sp. z o.o.
Sulejowska 45G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

www.rehasense.com
info@rehasense.com