


2006-05-18

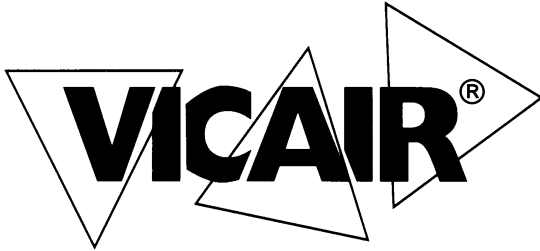

# **Bruksanvisning Vicair Academy Madrass**

---

# Vicair® Academy Madrass – Bruksanvisning

## Introduktion

Denna bruksanvisning gäller för alla modeller av Vicair Academy Madrass. Var vänlig läs denna bruksanvisning innan madrassen tas i bruk.

Madrassen består av följande delar.

## Innermadrass

Innermadrassen består av sektioner försedda med blyxtlås. Antal och form på sektionerna beror på modell och storlek på madrassen. Varje sektion är fylld med ett specifikt antal tetraformade luftfyllda SmartCells. Madrassens underdel består av ett skumlager för extra stabilitet.

## Madrassens ytteröverdrag

Det yttre överdraget är tillverkat av ett vätsketätt inkontinensmaterial. Blyxtlås finns runt kanten på innermadrassen. Använd alltid madrassen med ytteröverdrag på.

## Huvud och fotände

Vicair vuxen madrass har en huvud- och en fotände. Fotänden är märkt med en märklapp. Huvud, kropp och fot- sektionerna har alla sin specifika volym med luftceller som ger olika grader av nedsjunkning.

## Informationsetikett

Vid fotändens blyxtlås sitter en informationsanvisning som talar om vilken typ av madrass det är, samt specifik och viktigt brukarinformation. Denna informationanvisning ska fästas på madrassen när den används på sjukhus mm. Detta för att personalen skall se instruktionerna när det gäller användning samt att brukaren ligger på en Vicair madrass.

## Bärhandtag

Madrassen har fyra bärhandtag. Två på var sida. Dessa är starka nog för att vid en nödevakuering flytta en brukare på madrassen.

## Installation

Vicair® rekommenderar att installation och justering av Academy Madrass sker av en behörig personal.

## Kontrollera storleken på madrassen

Kontrollera storleken på madrassen i förhållande till storleken på sängen där den skall användas. Madrassen passar alla typer av olika sänggramar och sänggavlar.

### **Kontroll av ”ligga igenom”**

Kroppen skall ha fullt stöd och inte ligga igenom madrassen. Kontroll av detta skall göras vid första användningen och efter det att madrassens fyllnadsgrad har anpassats till brukaren.

Använd inte madrassen om brukaren ligger igenom. I de flesta fall så löser man problemet genom att justera fyllnadsgraden i madrassen.

### **Justering av madrassens fyllnadsgrad**

Om det är nödvändigt kan fyllnadsgraden justeras genom att ta bort eller lägga till luftceller från de olika sektionerna i madrassen.

## **Användning**

### **Kontroll av rodnad på huden**

Kontrollera brukarens hud regelbundet mot rodnad, speciellt under de första dagarna. Om rodnad uppstår på huden, fortsätt inte att använda madrassen. Kontakta behörig personal.

### **Användning vid flygresa och högre höjder**

I och med att varje luftcell är fylld med luft kan den fungera olika när den används vid högre höjder eller vid flygresa. Under sådana omständigheter kan madrassens fasthet justeras genom att ta bort några få luftceller från varje sektion. Vicair® rekommenderar dock att inte använda madrassen över 2400m (8000ft) ASL (över havet)

### **Förflyttning av madrassen till annan brukare**

Innan en annan brukare övertar madrassen skall innermadrassen tvättas med en mild tvållösning och sedan torkas av med en desinfektionsmedel på ytan. Ytteröverdraget tvättas i 60°. Kontrollera att madrassens luftceller är anpassade för den nya brukaren.

### **Hjärtmassage**

Det är inte nödvändigt med någon speciell försiktighetsåtgärd med tanke på hjärtmassage. Stabiliteten i madrassen ger tillräckligt fast stöd under överkroppen.

### **Byta ut ytteröverdraget**

Vid normal användning rekommenderar Vicair® att byta ut ytteröverdraget varje år. Ytteröverdraget kan köpas separat.

### **Antändlighet**

Använd inte madrassen nära en öppen eld eller andra objekt med hög temperatur.

## **Underhåll och rengöring**

**OBS! Academy madrassen eller de separata luftcellerna SmartCells kan inte ångtvättas eller autoklaveras.**

### **Kontroll av skadade luftceller**

Kontrollera madrassen var tredje månad efter skadade luftceller. Om en större skada skett och många luftceller skadats fortsätt inte att använda madrassen. Tag kontakt med behörig personal.

### **Rengöring av innermadrassen**

- Rengör ytan på inneröverdraget genom att använda en mild tvållösning. Svåra fläckar eller missfärgningar rengörs genom att först blöta fläcken och använd en mjuk borste för att ta bort smutsen.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel med slipmedel i eller vassa objekt för att göra ren innermadrassen.
- Lägg inte madrassen i blöt i vatten eller annan vätska.
- Tvätta inte den fyllda innermadrassen eller luftcellerna i tvättmaskin.

### **Desinficering av madrassen**

Om vätska har smutsat ner innermadrassen, som ett resultat av mycket inkontinens eller om madrassen skall överföras till annan brukare, skall madrassen rengöras och desinficeras för att undvika smitta.

- Ta bort alla luftceller från innermadrassen. Notera antal luftceller i varje sektion.
- Ta bort skumlagret.
- Maskintvätta den tomma innermadrassen i 40°.
- Använd ett mild tvättmedel för att rengöra de individuella luftcellerna och efter det spraya desinfektionsmedel på dem.
- Maskintvätta ytteröverdraget med antibakteriellt tvättmedel.
- Torka (ej torktumlare) alla delar och återställ innermadrassen.
- Spraya desinfektionsmedel på både ytteröverdraget och innermadrassen. Se till att medlet når ner i mellanrummet mellan sektionerna genom att böja sektionerna utåt.

### **Garanti**

Vicair ger en garanti på defekter i tillverkningen eller i materialet över en period på fem (5) år efter försäljningsdatum, förutsatt att normal användning har skett. Varje skada som uppstår på grund av onormalt bruk som t ex ovarsam behandling, rengöring, vårdslöshet ingår ej i garantin. Skulle en defekt i materialet eller tillverkningen uppstå inom de fem (5) åren, från Invacares försäljningsdatum, vill Vicair på eget initiativ, reparera eller ersätta detta utan extra kostnader. Det yttre överdraget är undantaget från denna garanti.

Garantin är begränsad till reparation eller ersättning för madrassen.

Garantin täcker skador på grund av handhavandefel och övergår inte kostnaden för vad varan är såld.

**Återförsäljare:** Invacare AB, Box 66, 163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax:08-761 8108

**Tillverkare:** Vicair BV, Koetsjerstraat 14, 1531 NX Wormer, Nederländerna.

Tel: +31 (0) 75 6429992 Fax: +31 (0) 75 6429998

[www.vicair.com](http://www.vicair.com)