

2017-10-13



# **Käyttöohje Vicair Academy painehaavapatjat**

---

# Vicair® Academy painehaavapatjat – Käyttöohje

## Esittely

Tämä käyttöohje koskee kaikkia Vicair Academy painehaavapatjoja. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

Patjoissa on seuraavat osat:

### Patjan sisäkerrokset

Patjojen sisäkerrokset koostuvat vetoketjulla varustetuista osastoista. Osastojen määrä riippuu patjan mallista ja koosta. Jokainen osasto on täytetty erityisillä SmarCells™ -soluilla, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja. Patjan pohjakerros on vaahtomuovia, mikä lisää patjan vakautta.

### Patjan päällinen

Uloin patjan päällyskerros on valmistettu kosteutta läpäisemättömästä inkontinenssimateriaalista. Vetoketjut sijaitsevat sisemmän patjan reunan ympärillä. Älä koskaan käytä patjaa ilman patjan päällistä.

### Pää- ja jalkopääty

Vicairin aikuisten patjoissa on erilliset pää- ja jalkopäätyosat. Jalkopääty on merkitty jalkapohja-symbolilla. Pään, vartalon ja jalkaosan osioissa on kaikissa oma määrä SmartCell-soluja, jotka tarjoavat erilaisia upotusasteita.

### Tuote-etiketti

Jalkopäädyssä vetoketjun sisäpuolella on tuoteinformaatiolappu, missä kerrotaan patjan koko ja malli sekä erityisen tärkeitä käyttöohjetietoja. Nämä tiedot on pidettävä kiinnitettynä patjaan, varsinkin, jos patjaa käytetään sairaaloissa yms. Tuote-etiketti on henkilökunnalle tarkoitettu käyttöohje, josta he saavat myös tiedon, että käyttäjä makaa Vicair-patjalla.

### Kantokahvat

Patjoissa on neljä kantokahvaa. Kaksi kummallakin puolella. Kahvat ovat riittävän vahvoja käyttäjän siirtämiseen tai hätäevakuointiin patjalla.

## Asennus

Valmistaja suosittelee, että patjan asennuksen ja täytteiden määrän säätämisen tekee pätevoitynyt ja asiaan perehtynyt terveydenhuoltoalan ammattilainen.

### Tarkista patjan koko

Tarkista patjan koko suhteessa sängyn kokoon, jossa sitä käytetään. Patja sopii kaikenlaisten sängynrunkojen ja sängynpäätysten kanssa käytettäväksi.

## **Tarkista makuuasento**

Käyttäjän vartalon tulee olla täysin tuettu eikä mennä patjan läpi. Tämän tarkistaminen on tehtävä ensimmäisen käytön jälkeen ja sen jälkeen, kun patjan täyttöaste on sovitettu käyttäjälle.

Älä käytä patjaa, jos käyttäjän jokin vartalon osa painuu patjan läpi. Useimmissa tapauksissa tämän voi ratkaista säätämällä patjan täytteiden täyttöastetta.

## **Patjan täytteiden säätäminen**

Tarvittaessa täyttöastoa voidaan säätää poistamalla tai lisäämällä SmartCell-soluja patjan eri osista. Ks. myös täyttökaavio.

## **Käyttö**

### **Tarkista ihon punoitus**

Tarkista käyttäjän ihon punoitus säännöllisesti, etenkin ensimmäisinä päivinä. Jos ihon punoitusta ilmenee, älä jatka patjan käyttöä. Ota yhteys hoitohenkilökuntaan.

### **Käyttö lentomatkoilla ja korkeassa ilman alassa**

Koska SmartCell-solut ovat täynnä ilmaa, ne voi toimia vaihtelevasti käytettäessä korkeammissa korkeuksissa tai lennolla. Tällaisissa olosuhteissa patjan lkovuutta voidaan säätää poistamalla muutamat ilmasolut kustakin osiosta. Valmistaja suosittelee ettei patjaa käytettäisi yli 2400 m (8000ft) korkeudessa ASL (merenpinnasta).

### **Patjan muuttaminen toiselle käyttäjälle**

Ennen kuin patja luovutetaan toiselle käyttäjälle pitäisi sisäpatja puhdistaa miedolla pesuaineella ja pyyhkiä pinta desinfiointiaineella. Päällisen voim pestä koneessa 95°. Tarkista ja tarvittaessa säädä, että patjan ilmasolujen määrä on sopiva uudelle käyttäjälle.

### **Elvytys**

Mitään erityisiä varotoimia elvytystä varten ei tarvita. Patjan vakaus tarjoaa riittävän tukevan tuen ylävartalon alle.

### **Päällisen vaihtaminen**

Normaalilla käytöllä valmistaja suosittelee, että päällinen uusittaisiin vuosittain. Päällisen voi ostaa erikseen.

### **Paloturvallisuus**

Älä käytä patjaa avotulen lähellä tai muiden korkean lämpötilan omaavien objektien (esim. lämpöpatterit) lähellä.

## **Pesu- ja huolto-ohjeet**

**HUOM! Patjan pehmustetta ja SmartCell -soluja ei voi konepestä eikä autoklaavata. Patjan päällinen on konepestävä 95 asteessa.**

## Vaurioituneiden SmartCell-solujen tarkistaminen

Tarkista joka kolmas kuukausi ettei patjassa ole vaurioituneita SmartCell-soluja. Jos monet ilma-soluista ovat vahingoittuneet, älä jatka patjan käyttöä. Ota yhteys hoitohenkilöstöön ja valtuutettuun jälleenmyyjään.

## Sisäpatjan puhdistaminen

- Puhdista sisäpatjan pinta miedolla pesuliuksella. Vaikeat tahrat tai värjäntymät puhdistetaan ensin, kosteat tahrat käyttämällä pehmeää harjaa lian poistamiseksi.
- Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, hankausaineita tai teräviä esineitä sisäpatjan puhdistamiseen.
- Älä upota patjaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä pese täytettyä sisäpatjaa tai SmartCell-soluja pesukoneessa.

## Patjan desinfiointi

Jos sisäpatjaan on valunut nesteitä, johtuen inkontinenssiongelmistä tai jos patja siirretään toiselle käyttäjälle, patja on puhdistettava ja desinfioitava, jotta minimoidaan tartuntariskit.

- Ota SmartCell-solut pois sisäpatjasta. Huomaa solujen määrä jokaisessa osastossa (ks. täyttökaavio)
- Ota pois vaahtomuovipatja
- Pese tyhkö sisäpatja pesukoneessa 40°.
- Käytä mietoa puhdistusainetta yksittäisten ilmasolujen puhdistamiseen ja ruiskuta niihin sen jälkeen desinfiointiaineita.
- Konepese ulkopäällinen 95°:ssa antibakteriaalisella pesuaineella.
- Kuivaa (älä käytä kuivausrumpua!) kaikki osat ja asenna osat takaisin paikalleen sisäpatjaan.
- Spreijaa desinfiointiainetta sekä ulko- että sisäpatjaan. Varmista, että aine saavuttaa kaikki raot ja osastojen väliset raot taivuttamalla osia ulospäin.

## Takuu

Vicair antaa valmistusvirheille ja materiaaleille viiden (5) vuoden takuun jälleenmyyntipäivästä, edellyttäen, että tuote on normaalissa käytössä. Takuu ei kata epänormaalista käytöstä johtuvaa vahinkoa, kuten sopimatonta käsittelyä, -puhdistusta tai tuotteen puhdistuksen laiminlyöntejä. Jos materiaali tai valmistusvirhe ilmenee viiden (5) vuoden sisällä tuotteen myyntipäivästä, Vicair haluaa omasta aloitteestaan korjata tai korvata sen ilman lisäkustannuksia.

Takuu ei koske ulkopäällistä.

Takuu rajoittuu patjan korjaukseen tai vaihtoon.

Takuu kattaa käsittelyvirheiden aiheuttaman vahingon.

Takuu ei ylitä tuotteen myyntihintaa korkeampia kustannuksia.

## Jälleenmyynti Suomessa:

Camp Mobility, Patamäenkatu 5, 33900 Tampere puh. +358(0)9 350 76 310

email: [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) www: [campmobility.fi](http://campmobility.fi)

**Valmistaja:** Vicair BV, Koetsierstraat 14, 1531 NX Wormer, Nederlands.

Tel: +31 (0) 75 6429992 Fax: +31 (0) 75 6429998

[www.vicair.com](http://www.vicair.com)



## Vicair<sup>®</sup> -painehaavapatjat SmartCell<sup>™</sup>-solujen täyttökaaviot:

Malli: ARM 415 /LF/80200

PÄÄ

26	26	26	26
26	26	26	26
26	26	26	26
35	41	35	
35	41	35	
35	41	35	
35	41	35	
26	26	26	26
26	26	26	26
26	26	26	26

JALAT



## Vicair<sup>®</sup> -painehaavapatjat SmartCell<sup>™</sup>-solujen täyttökaaviot:

Malli: ARM 415 /LF/90200

PÄÄ


30	30	30	30
30	30	30	30
30	30	30	30
40	46	40	
40	46	40	
40	46	40	
40	46	40	
30	30	30	30
30	30	30	30
30	30	30	30

JALAT

## Vicair<sup>®</sup> -painehaavapatjat SmartCell<sup>™</sup>-solujen täyttökaaviot:

Malli: ACADEMY MADRASS JUNIOR  
Lasten patja

PÄÄ

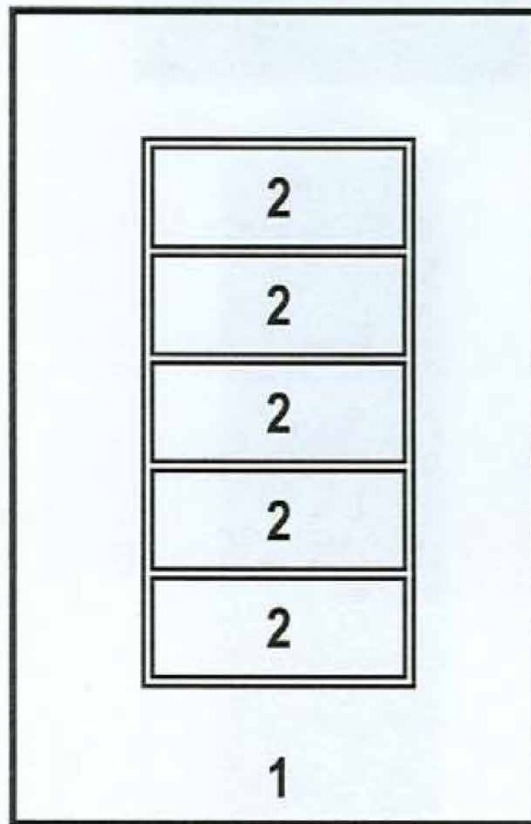

JALAT

Koko	1	2
60X120	980	150