

FLEXLIFE D9

BY DECON







 **FLEXLIFE D9**
BY DECON

Vapautta

neljällä pyörällä



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

Feel free
with
FLEXLIFE!

MITÄ SAAN, KUN TILAAAN FLEXLIFE SÄHKÖPYÖRÄTUOLIN?

- Flexlife -
sähköpyörätuoli
- Basic tai Comfort -malli
- Korkea istuinmukavuus
- Paino vain 26,5kg
- Voimaa vaikeisiin
rinteisiin jopa 10°
- Kallistettava selkäosa
- Älykäs lentohyväksytty
akkujärjestelmä
- Laaja valikoima
lisävarusteita
- Mahdollisuus eri
istuinasentoihin
- Akku ja akkulaturi
- Käyttöohje
- 2 vuoden takuu



Flexlife Basic



Flexlife Comfort

Henkilöille, joilla on vaikeuksia kävellä tai jotka käyttävät pyörätuolia/sähköpyörätuolia jokapäiväisessä käytössä, mutta haluavat olla joustavampia - Flexlife on kätevä vaihtoehto, jonka avulla voit ottaa sähköpyörätuolin mukaasi matkoille ja arkipäivän toimintoihin.

Kokoontaitettava sähköpyörätuoli Flexlife tarjoaa kaksi eri varustetasoa Basic ja Comfort. Flexlife -tuolit ovat kevyitä (alkaen 26,5 kg sis. akun), mukavia, vakaita ja luotettavia. Älykkäiden akkujärjestelmien avulla voit helposti tehdä matkastasi joustavan.

Lukuisten fiksujen lisävarusteiden ansiosta voit tehdä omasta elämästäsi joustavampaa. Varusta Flexlife esimerkiksi matkapuhelintelineellä, pohjetuilla ja pää-/niskatuella tms.



FLEXLIFE

MALLINUMERO

Flexlife D9 Basic

FLD09B

Flexlife Basic: Bima vakioistuintyyppi, selkätyyppi vettä hylkivä kangas, 5 asentoon kallistettava selkänoja, säädettävä ja kokoontaitettava jalkalauta, 8 "etupyörät, 12" massiivinen takapyörä, akkujen pikalukitus, kaatumisesteet pikalukoilla, kokoontaittulukitus ja pieni ostoskassi

Flexlife D9 Comfort

FLD09C

Flexlife Comfortissa on samat vakiovarusteet kuin Flexlife Basicissa ja lisäksi: painetta tasaava Bima Kombi -painehaavaistuintyyppi, valosarja, kääntyvä joystick-pidike, jalkatuki, ja pehmustetut käsinojat.

FLEXLIFE D9 Basic



1 Lukitussalpa kokoontaittoasentoon lukitsemiseksi:
- Salpa sijaitsee jalkatuen alla

2 Viisi selkähihnaa säätöä varten:
- Pehmustettu selkäosa vettä hylkivällä Bima-verhoilulla, 5 säätövaihtoehtoa

3 Kaatumisesteet pikalukituksella: helppo irrottaa

4 Kiinteät renkaat: ei puhkeamisvaaraa
eikä tarvitse pumpata

5 Taksikoukut: kiinnikkeet turvaa autokuljetuksen aikana

6 Korkeussäädettävä jalkalauta:
- voidaan taittaa tuolin alle

7 Tupla-akut: pikalukitus ja akkuvarauksen ilmainen
- voidaan ladata erikseen

8 Bima standard istuintyyppi

9 Joystick oikealla – tai vasemmalla
+ Latauspistoke akuille

FLEXLIFE D9 Comfort



Flexlife Comfort:ssa on kaikki samat ominaisuudet kuin Flexlife Basic:ssa seuraavin muutoksin/lisäyksiin:

1 Pehmustetut käsituet

2 LED-takavalot

3 Jalkatuki, helposti irrotettavat

4 LED-etuvalot

5 Bima Combi, painehaavaistuintyyppi

6 Swing-away joystick-teline

FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

TEKNISET TIEDOT

Paino sis. akut	26,5 kg (23,5 kg ilman akkuja)
Nopeus	6 km/h
Ajomatka*	25 km
Moottori	2x250W harjaton
Joystick	Oikealla, vasemmalla tai avustajan ohjaus
Akut	2 litium akkua à 6 Ah, 24V
Akkuteho**	288 W (lentokonehyväksytty)
Akkujen paino	1,5 kg /akku
Latausaika	6-8 h (100% lataus)
Kääntöhalkaisija	83 cm
Takapyörät	12" (32 x 5,7 cm) puhkeamaton
Etupyörät	8" puhkeamaton
Istuinkorkeus ilman tyynyä	48 cm
Istuinleveys	47 cm (54 cm levennyspaloilla, lisävaruste)
Istuinsyvyys	43-48 cm
Max. käyttäjäpaino	150 kg
Verhoilukangas	Bima, vedenkestävä
Kallistettava selkäosa	5 asentoa, 90°- 115°
Säädettävä jalkatuki	Height adjustable in two positions, foldable
Kokonaismitat cm	93P x 59L x 98K
Mitat kokoonlaitettuna cm	58P x 35L x 78K
Takuu	2 vuotta

*voi vaihdella pinnan, käyttäjän painon ja sään mukaan

** Lentohyväksytyt akut, max. 300 W on hyväksytty lentoliikenteeseen



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

Akut ja laturi

Akku	Tuotenumero
Standard battery D9 24V x 6 Ah	FLD09-2005

Akkulaturi	Tuotenumero
Standard akkulaturi	FLD09-2006
Akkulaturin adapteri	

Lisävarusteet

Lisävarusteet

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Jalkatuki | 6. Avustajan ohjain |
| 2. Bima Combi istuintyyppi | 7. Swing away joystick-pidike |
| 3. Kännykkäteline | 8. Levennyssarja IL 54 cm |
| 4. Päätuki | 9. Juomapulloteline |
| 5. Kuljetuslaukku | 10. Käsituen jatkopalat |



1



2



3



4



5




6



7



10

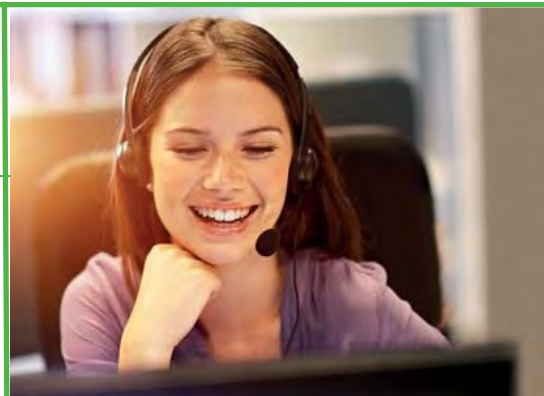

**ONKO SINULLA KYSYMYKSIÄ
TAI HALUATKO TILATA?**

p.09 350 76 310

info@campmobility.fi

Autamme mielellämme!

Tarkastuslista tilaukseen:

- Katso vakiovarusteet kohdasta "MITÄ SAAN, KUN TILAAAN FLEXLIFE-SÄHKÖPYÖRÄTUOLIN?"
- Tarkista, onko halutut varusteet mukana?
- Ota yhteyttä, jos et löydä etsimääsi
- Tarkista tilausvahvistus, jos jokin on vialla tai epäselvää, ota välittömästi yhteyttä tuotteen myyneeseen tahoon.

FLEXLIFE Pika-opas



1. Avaa laatikko varovasti veitsen avulla, laske laatikko alas ja poista styroksi.



2. Poista muovipussi ja kuljetussuojukset.



3. Ajattele ympäristöä ja kierrätä muovi ja styroksi.



4. Avaa Flexlife helposti tarttumalla selkäosan kahvaan ja vetämällä sitä ylös- ja taaksepäin.



5. Lukituskoukku kiinnittyy automaattisesti taitokseen. Ennen ensimmäistä käyttöä suosittelemme, että tarkistat, että lukituskoukku on kiinni.



6. Kiinnitä kaatumisesteet. Vedä pikalukitusta ja aseta kaatumiseste olemassa olevaan reikään ja vapauta pikalukitus. Voit helposti irrottaa kaatumisesteet tarvittaessa.


FLEXLIFE Pika-opas



7. Liu'uta akut tuolin runkoon. Voit helposti irrottaa akut pikalukitusmekanismin avulla. Jos haluat ladata akut erikseen, voit käyttää mukana toimitettua latauskaapelia.



8. Kiinnitä joystick-ohjain käsitukeen. Ohjain on pussissa tuolin alla. Ota se ulos ja aseta se käsinojassa olevaan reikään ja kiristä ruuvi kiinni.

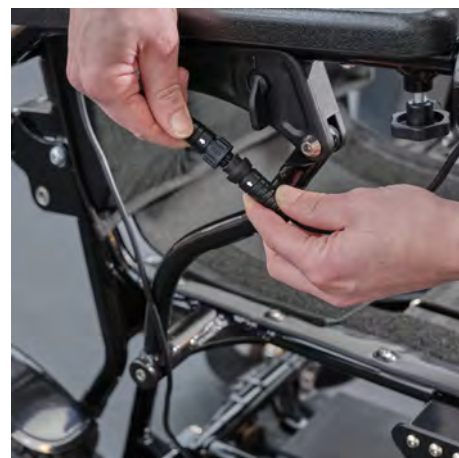

9. Asenna varovasti ohjaimen kaapelin liittimet. HUOM! Varmista, että valkoiset merkinnät vastaavat kaapelin merkintöjä ennen kuin liität ne yhteen. Älä pakota kaapelia sopimaan väkisin. Kierrä suojatulppa kiinni.



10. Aseta mukana toimitettu istuintyyny paikoilleen.



11. Aktivoi moottorit vetämällä punaiset vivut alas. HUOM! Käytä vain käsivoimaa.



12. Kytke laite päälle joystickistä painamalla



Flexlife on nyt valmis ajoon!



Myynti Suomessa:

Camp Scandinavia Oy /
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
p.09 350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Varaosat: p. 09 350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto: p. 09 350 76 313
huolto@campmobility.fi



Decon Wheel AB Södra Ekeryd 119 31493 Hyltebruk

Phone: 0345 - 40880 Fax: 0345 - 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon reserves the right to make any changes made after the time of this printing. All rights are reserved for Decon.
Subject to printing and typing errors, as well as expired goods and incorrect images.