

Kynnysluiskan mittaaminen

Kumiluiskat

Leveys:

Kynnysluiskien vakioleveys on 900 mm. Tarvittaessa luiskaa voi lyhentää esimerkiksi puukolla tai mattoveitsellä.

Korkeus:

Mittaa kynnyksen korkeus ja valitse sitä vastaava luiska.

► Valitse aina lähin pienempi korkeus (esim. 23 mm → valitse 20 mm luiska).


Kynnysluiska ei saa olla kynnystä korkeampi.

Huomio oven puolelle:

Jos luiska tulee oven aukeamispuolelle, huomioi oven huullokseen korkeus:

- Mittaa oven ja lattian välinen vapaa tila
- Valitse luiska, joka mahtuu tähän tilaan

► Luiska ei saa estää ovea avautumasta.

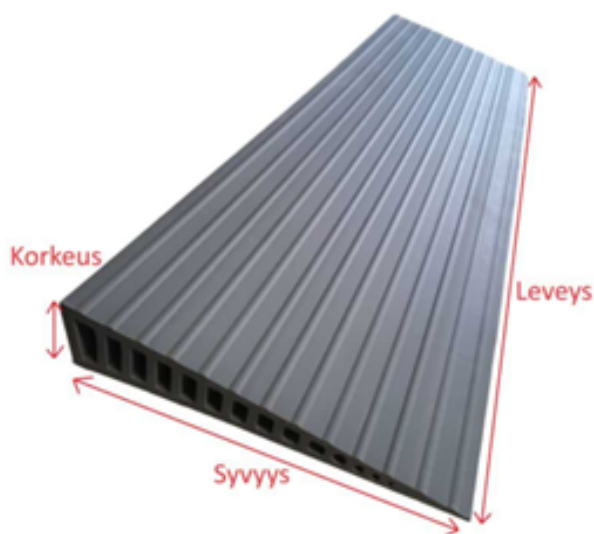

Esteettömyyskartoittajamme ovat aina apunasi!

Sami Salonen

Tuotepäällikkö, esteettömyyskartoittaja

+358 45 7200 419

sami.salonen@campmobility.fi

