

Valintaopas oikean rampin valintaan

- Mittaa korkeusero (cm), jonka ramppi ylittää.
- Valitse nousukulma käyttötarkoituksen mukaan (ks. ohjeet seuraavalla sivulla).
- Etsi taulukosta korkeuseron rivi ja valitsemasi kulman sarake.
- Taulukon arvo kertoo tarvittavan rampin pituuden metreinä.

Korkeusero (cm) Nousukulma (%), käyttötarkoitus (symboli) ja sen mukainen rampin pituus (m)

	 5%	 8%	 10%	 15%	 20%
10	2.0	1.3	1.0	0.7	0.5
20	4.0	2.5	2.0	1.3	1.0
30	6.0	3.8	3.0	2.0	1.5
40	8.0	5.0	4.0	2.7	2.0
50	10.0	6.3	5.0	3.3	2.5
60	12.0	7.5	6.0	4.0	3.0
70	14.0	8.8	7.0	4.7	3.5
80	16.0	10.0	8.0	5.3	4.0
90	18.0	11.3	9.0	6.0	4.5
100	20.0	12.5	10.0	6.7	5.0

Rampin käyttötarkoitukset ja symbolien merkitykset



Pyörätuolin itsenäinen käyttö

- Maksiminousukulma 8 %



Avustettu pyörätuolin käyttö

- Maksiminousukulma 10 %



Rollaattorin käyttö

- Maksiminousukulma 10 %



Tavaran siirto
Pyörätuolin siirto ilman käyttäjää

- Maksiminousukulma 20 %

Esimerkki: Jos korkeusero on 30 cm ja ramppia käytetään itsenäisesti pyörätuolilla (), sopivat nousukulmat ovat 5 % ja 8 %. Taulukon mukaan rampin pituus on tällöin noin 6,0 m (5 %) tai 3,8 m (8 %).

► **Valitse mahdollisimman loiva vaihtoehto**, jos tilaa on – se tekee käytöstä selvästi helpompaa ja turvallisempaa.

Esteettömyyskartoittajamme ovat aina apunasi!

Sami Salonen
Tuotepäällikkö, esteettömyyskartoittaja
+358 45 7200 419
sami.salonen@campmobility.fi

