

Teleskooppiluiskaparit

Teleskooppiluiskia käytetään aina pareittain



Teleskooppiluiskaparit

Rehasense Pondus teleskooppiluiskaparit ovat salkku-mallisia 2- tai 3-osaisia sisäkkäin meneviä, siirrettäviä luiskia esim. pyörätuolin siirtämiseen autoon, portaiden yli, tasolta toiselle tms.

Helposti kuljetettavat luiskat on valmistettu erittäin lujasta, ilmailuluokan alumiinista ja suunniteltu raskaaseen käyttöön. Luiskat on varustettu nylon/muovi-liukulaakereilla sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Nostokahvat on suunniteltu

ergonomisesti ja niissä on lukko kuljetusta varten. Teleskooppiluiskia käytetään aina pareittain.

Valikoimassamme seuraavat mallit:

2-osainen, teleskooppi 117 cm / 2 m
3-osainen, teleskooppi 87 cm / 2 m
3-osainen teleskooppi 117 cm / 2,9 m
Max. kuormitus 250-300 kg / pari

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet

Käytetään pareittain

Valittavissa 3 eri mallia.
pituus avattuna 2 m
tai 2,9 m



Valitse oikean kokoinen luiska tai ramppi oikeaan tarpeeseen:

Luiskan ja rampin oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintatavasta, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkeuserosta. Kun korkeusero alle 40 cm, (max. 60 cm) valitse luiska, kun korkeusero 40-80 cm, valitse ramppi.



Tekniset tiedot

2- ja 3-osaiset teleskooppirampit:

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Pituus kasattuna	Sisä-leveys	Suurin nousu-korkeus	Paino / pr	Max. kuormitus / pr
805010021	2-os. teleskooppi	200 cm	117 cm	19,5 cm	40 cm	5,7 kg / 11,4 kg	300 kg
805010022	3-os. teleskooppi	200 cm	87 cm	19,5 cm	40 cm	6,1 kg / 12,2 kg	300 kg
805010023	3-os. teleskooppi	290 cm	117 cm	18 cm	58 cm	8,25 kg / 16,5 kg	250 kg

Värit ja materiaalit



Alumiini



Siniset muoviosat



Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2022

Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com