




medemagruppen



Reservedele / Spare parts Mini Crosser X1-4W

Mini Crosser X1-4W

Styrestolpe komplet Steering column complete

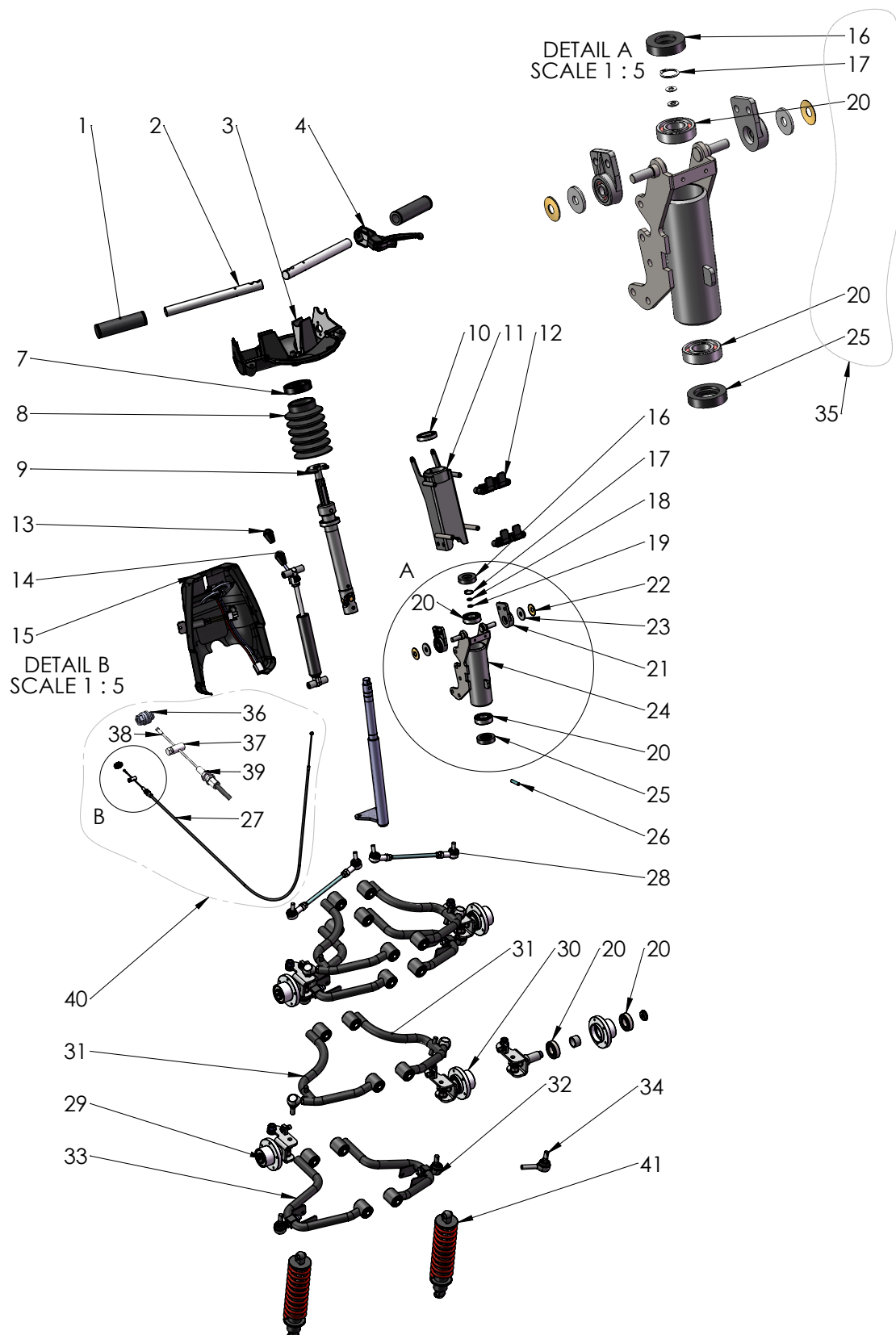


Mini Crosser X1-4W

Styrestolpe komplet Steering column complete

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1503-1344	Styrhåndtag	Steering handle	2
2	1503-1328	Styrrør højre/venstre	Steering tube right/left	2
3	1503-1103	Brugerpanel bunddel	User panel bottom part	1
4	1535-1120	Håndbremsegreb	Brake grip	1
5	1503-1200	Gashåndtag universal højre, komplet	Gashandle universal right, complete	1
6	1503-1201	Gashåndtag universal venstre, komplet	Gashandle universal left, complete	1
7	1503-1339	Ring for gummibælg	Ring for rubber bellow	1
8	1503-1340	Gummibælg	Rubber bellow	1
9	1502-1128	Styrestolpe, kardanled, komplet	Steering post, kardan part, complete	1
10	1535-1108	61906-2RS, leje	61906-2RS, Bearing	1
11	1503-1334	Styrstamme	Steering column	1
12	1503-1314	Holder for kurv, komplet sæt	Holder for basket, complete set	1
13	1503-1343	Knop	Handle	1
14	1503-1230	Gasfjeder for styrstolpe	Gasspring for steering column	1
15	1503-1234	Skærm for styrstolpe, bag inkl. nøgle + nøgleafbryder	Cover for steering column, back incl. key and keyswitch	1
16	1506-1322	Tætningsring Ø42 - Ø20 - 10	Sealing ring Ø42 - Ø20 - 10	1
17	8031-1296	20, Låsering for aksler, FZB	20, Retaining ring for shaft, FZB	1
18	8031-1290	20x28x1,0 Passkiver DIN 988	20x28x1,0 Shim Support Ring DIN 988	1
19	8031-1289	20x28x0,5 Passkiver DIN 988	20x28x0,5 Shim Support Ring DIN 988	1
20	1503-1146	6004-2RS, leje	6004-2RS, Bearing	2
21	1503-1107	Beslag styrstolpe med leje, komplet	Bracket with bearing komplette	2
22	8031-1306	10,2x28x0,8 Tallerkenfjederskive	10,2x28x0,8 Disc-spring washer	2
23	8031-1305	Polyamid skive Ø10,5 - Ø30 - 2,5	Polyamid washer Ø10,5 - Ø30 - 2,5	2
24	1503-1307	Kronrørssamling	Head tube assembly	1
25	1506-1324	Tætningsring Ø42 - Ø25 - 10	Sealing ring Ø42 - Ø25 - 10	1
26	1535-1109	Connex Spændstift 6 x 30	Heavy-duty spring tension pin 6 x 30	1
27	1503-1111	Bremsekabel 2100mm (3w/4w)	Brake cable 2100mm (3w/4w)	1
28	1502-1009	Styrestang, 4W model X	Steering rod, 4W, X model	2
29	1502-1008	Højre forhjulsnave	Right front wheel hub	1
30	1502-1007	Venstre forhjulsnave	Left front wheel hub	1
31	1502-1003	Øverste affjedringsarm, højre	Top suspension arm, right	2
32	1502-1004	Nederste affjedringsarm, venstre	Bottom suspension arm, left	1
33	1502-1005	Nederste affjedringsarm, højre	Bottom suspension arm, right	1
34	1503-1004	Kugleled	Ball joint	2
35	1535-1114	Leje, kronrør - sæt med pakdåse	Bearing, headtube - set w/seal	1
36	1506-1356	Kabel lås	Cable lock	1
37	8031-1258	Skruenippel Ø8 d 2,3 Z	Nipple Ø8 d 2,3 Z	1
38	1503-1155	Kabelende	Cable end	1
39	1503-1156	Justerskrue for bremsekabel inkl. 2 møtiker	"Adjusting screw for brake cable inc.2 nuts."	1
40	1503-1255	Bremsekabel 2100 mm - Komplet	Brake Cable 2100 mm - Complete	1
41	1502-1061	Støddæmper for - model X	Suspension front model X	2

Mini Crosser X1-4W

Stel og sæderør.
Chassis frame and seat column.

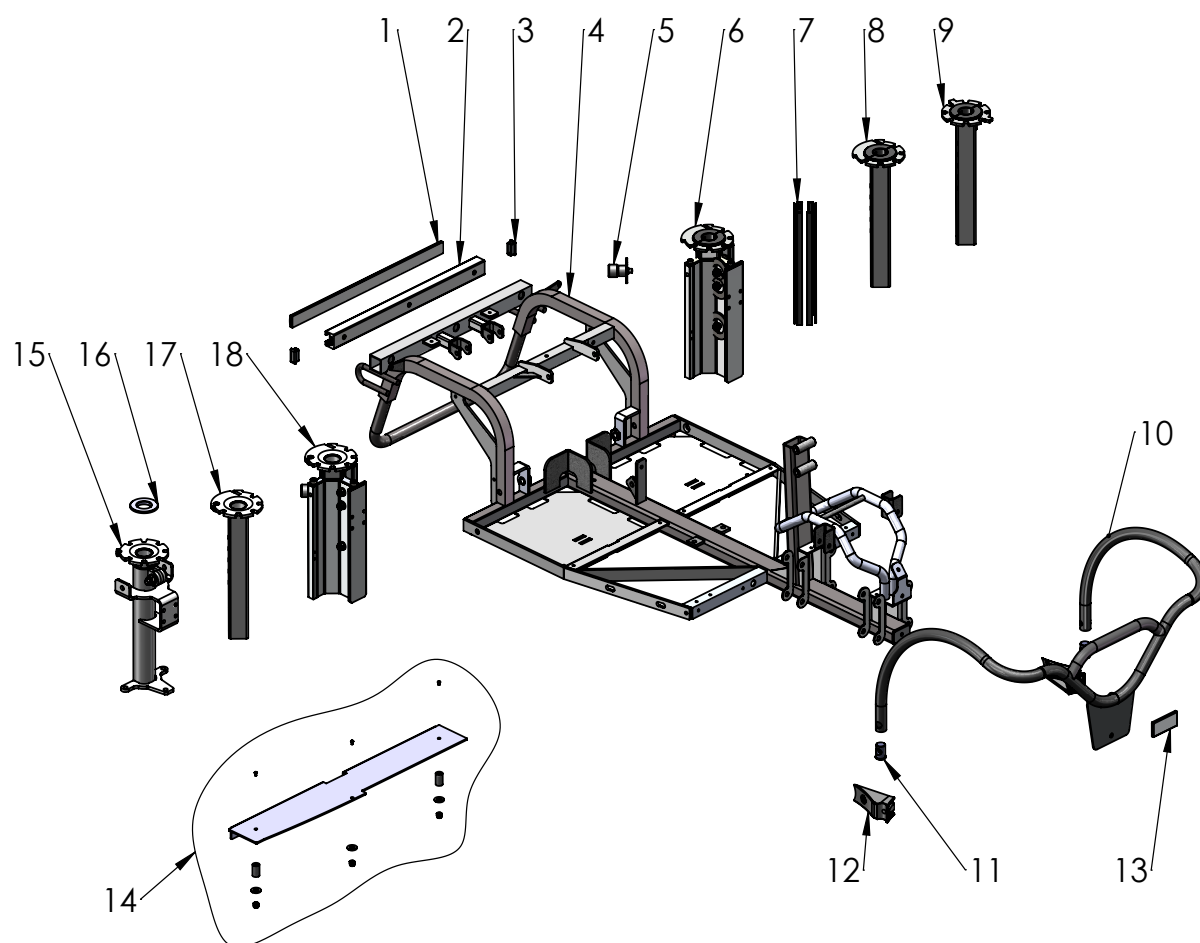

Mini Crosser X1-4W


Stel og sæderør.

Chassis frame and seat column.

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1501-1110	Gummiprofil 3 x 25 x 8 x 440	Rubber list 3 x 25 x 8 x 440	1
2	1502-1104	C-profil	C-profile	1
3	8035-1002	Rørben 15 x 30 B46	Cover caps 15 x 30 B46	2
4	1502-1002	Bundramme X-model 4w	Chassis frame X-model 4w	1
5	1535-1115	Positionsbolt med lås	Position bolt with lock	1
6	1502-1215	Sædestolpe komplet	Seat column complete	1
7	1502-1218	Friktionsstykker for sædestolpe, komplet sæt	Friction Pieces of the seat post, complete set	1
8	1502-1107	Sædestolpe topdel med bøsning	Seatcolumn toppart with bushing	1
9	1502-1108	Sædestolpe topdel med bøsning, A. Før 14.08.2009	Seatcolumn toppart with bushing, A. Before 14.08. 2009	1
10	1502-1045	Forkofanger X-model 4W	Front bumper X-model 4W	1
11	1503-1119	Bøsning for kofanger 4W	Bushing for front bumper 4W	2
12	1501-1119	Adapter for kofanger 4W	Adapter for frontbumper 4W	2
13	1509-1101	Refleks	Reflector white	2
14	1502-1221	Plade kit for standard batteristørrelse	Plate kit for standard battery size	1
Kun Ergo2 sædesystem/only Ergo2 seating system				
15	1502-1219	Sædestolpe, fast	Seat column, fixed	1
16	1507-1109	Mellemlægsskive, konisk	Distance washer, coned	1
17	1502-1111	Sædestolpe, firkantet for Ergo2	Seat post squared for Ergo2	1
18	1507-1340	Sædestolpe m. pos.bolt, Ergo2	Seat column w. pos.bolt, Ergo2	1

Mini Crosser X1-4W

Transaksler Transaxles

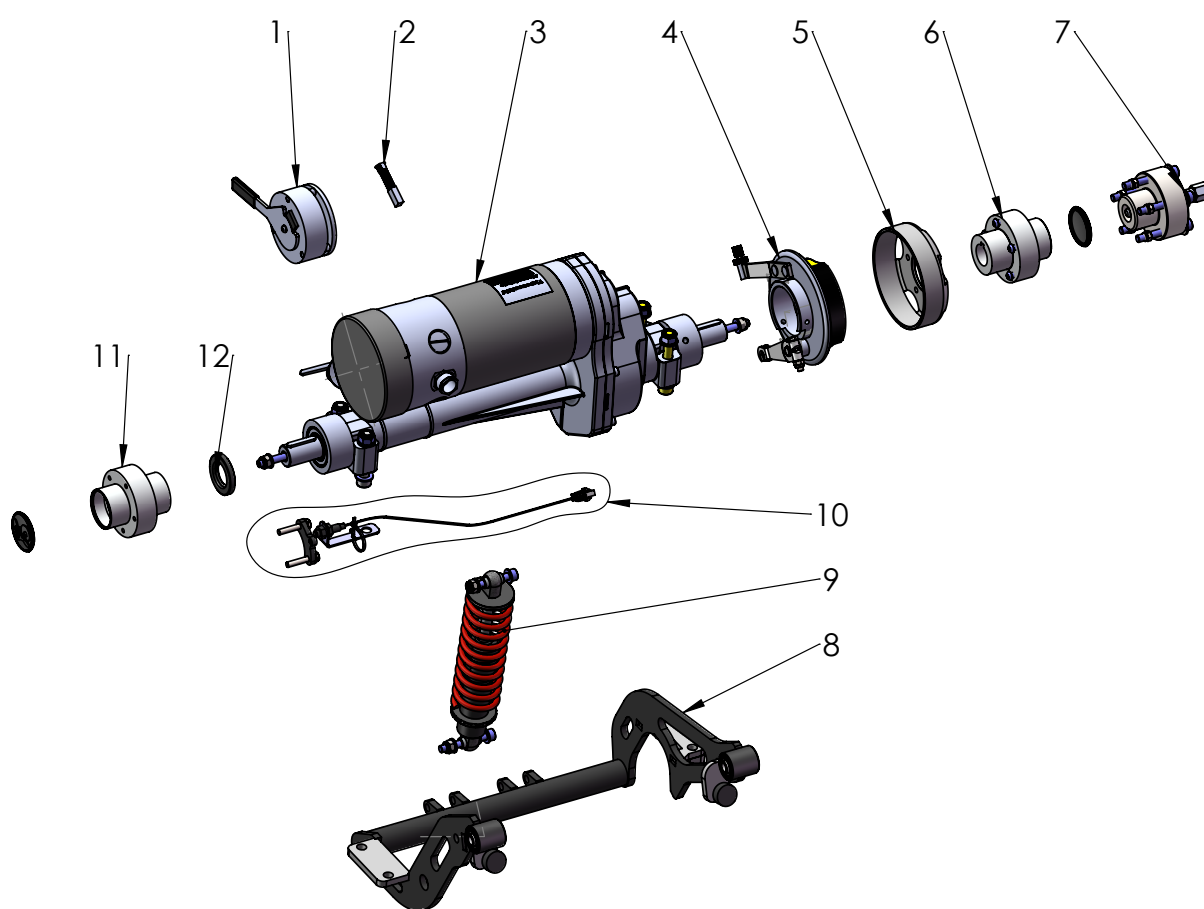


Mini Crosser X1-4W

Transaksler Transaxles

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1504-1156	Motorbremse T, M og E-model, komplet	Engine brake, complete	1
2	1504-1131	Kul for motor, MC-Transaksel	Motor brush for MC-transaxle	1
3	1504-1004	Transaksel 10 km, komplet m./motor	Transaxle 10 km/h. complete	1
	1504-1005	Transaksel 13 km, komplet m./motor	Transaxle 13 km/h. complete	1
	1504-1006	Transaksel 15 km, komplet m./motor	Transaxle 15 km/h. complete	1
	1504-1010	MC motor uden gear 15 km/t	MC motor without gear 15 km/h	1
4	1504-1113	Bremsebæreplade, C+K	Brake plate assembly C+K	1
5	1506-1412	Bremsebakker sæt, C+K	Brake pads, C+K	1
6	1504-1114	Bremsetrumle, C-K	Brake drum, C+K	1
7	1506-1111	Aftrækker for bremsenav	Hub Puller for brake drum.	1
8	1502-1011	Bagsvinger model X	Rear suspension model X	1
9	1502-1010	Støddæmper bag model X	Suspension rear model X	1
10	1506-1836	Speedometer dele	Speedometer parts	1
11	1504-1106	Hjulflange ø25	Wheel flange ø25	1
12	1506-1312	Pakdåse (25x47x7)	Sealing Ring (25x47x7)	1

Mini Crosser X1-4W

Skærme - orange metallic og sort
 Covers - orange metallic and black

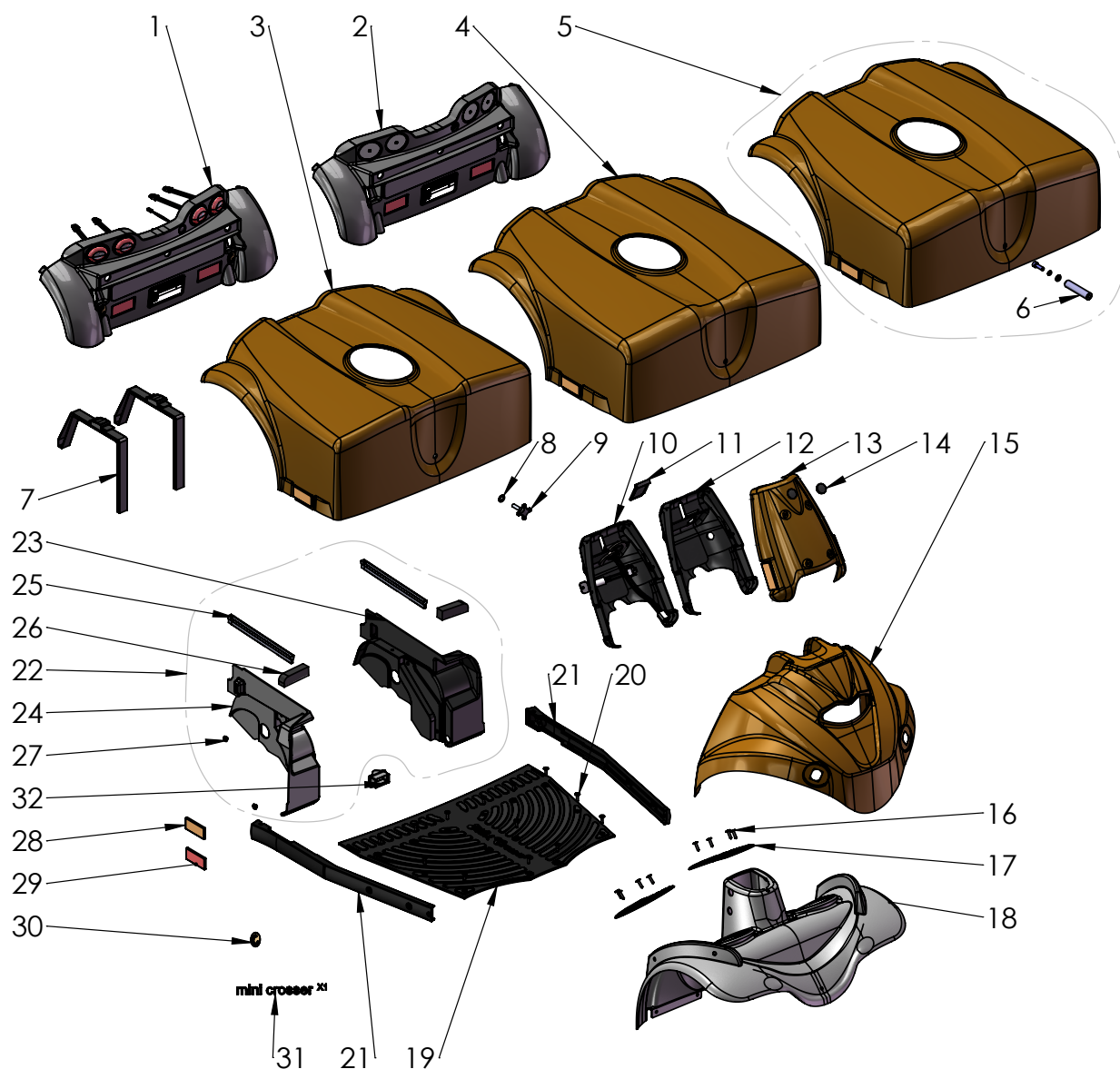

Mini Crosser X1-4W

Skærme - orange metallic og sort Covers - orange metallic and black

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1502-1052	Bagskærm opsamlet med lygter	Rearend cover mounted with lights	1
2	1501-1235	Bagskærm opsamlet uden lygter	Rearend cover mounted without lights	1
3	1502-1274	Batterikåbe kort model (orange metallic)	Battery cover short, complete (orange metallic)	1
	1501-1237	Batterikåbe kort model (sort metallic)	Battery cover short, complete (black metallic)	1
4	1501-1278	Batterikåbe lang model (orange metallic)	Battery cover long, complete (orange metallic)	1
	1501-1236	Batterikåbe lang model (sort metallic)	Battery cover long, complete (black metallic)	1
5	1506-1029	Køretøjsændring til lang batterikåbe (orange metallic)	Vehicle change to long battery cover (grey Metallic)	1
	1506-1865	Køretøjsændring til lang batterikåbe (sort metallic)	Vehicle change to long battery cover (black metallic)	1
6	1501-1120	Adapter for lang batterikåbe.	Adapter long battery cover	1
7	1505-1185	Batterirem	Battery band	2
8	8031-1111	Polyamid skive Ø8 - Ø24 - 2	Polyamid washer Ø8 - Ø24 - 2	1
9	2435-1003	Håndgreb M8x20 - Ø40	Threaded knob M8x20 - Ø40	1
10	1503-1234	Skærm for styrstolpe, bag inkl. nøgle + nøgleafbryder	Cover for steering column, back incl. key and keyswitch	1
11	1505-1352	Afdækning ladestik gummi profil	Cover charge plug rubber profile	1
12	1503-1272	Skærm f. styrestolpe bag.	Cover for steering column, back	1
13	1501-1276	Front for styr med refleks (orange metallic)	Cover steering column front (orange metallic)	1
	1501-1238	Front for styr med refleks (sort metallic)	Cover steering column front (black metallic)	1
14	1503-1350	Prop gummi for hul ø19	Plug rubber for hole ø19	1
15	1501-1002	Lygtekåbe 4W model X - orange Metallic	Front light cover 4W - model X (orange Metallic)	1
	1501-1281	Lygtekåbe 4W model X - Black Metallic	Front light cover 4W model X (black Metallic)	1
16	8031-1286	Ø5 x 25 Blindnitte RH polyamid 6.6	Ø5 x 25 Blind rivets polyamid 6.6	8
17	1501-1250	Fodmåtte lille med blindnitter, 4W	Foot mat small with rivets, 4W	2
18	1501-1112	Fodplade kåbe 4W	Footplate cover 4W	1
19	1501-1249	Fodmåtte med blindnitter, 4W	Foot mat with blind rivets, 4W	1
20	8031-1286	Ø5 x 25 Blindnitte RH polyamid 6.6	Ø5 x 25 Blind rivets polyamid 6.6	14
21	1501-1118	Sidebumper 3/4w	Side bumper 3/4W	2
22	1501-1248	Inderskærm, højre + venstre, komplet sæt	Mudguard cover rear right + left, complete set	1
23	1501-1104	Inderskærm venstre bag	Mudguard cover rear left	1


Mini Crosser X1-4W

Skærme - orange metallic og sort
Covers - orange metallic and black

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
24	1501-1103	Inderskærm højre bag	Mudguard cover rear right	1
25	1501-1122	Gummiprofil med topvulst, EPDM, 3-5 mm	Rubber profile EPDM, 3-5 mm	2
26	1503-1106	Dafacell 25x20x80 med klæb.	Dafacell 25x20x80 with adhesive	2
27	8031-1307	4,8 x 12,7 Blindnitte med stor flange, alu.	4,8 x 12,7 Blind rivet with large flange, alu.	4
28	1509-1102	Refleks orange	Reflex orange	2
29	1509-1103	Reflektor rød	Reflex red	2
30	1509-1104	Label - krog	Label - hook	4
31	1509-1001	Label - Mini Crosser X1, sølv	Label - Mini Crosser X1, silver	1
32	1501-1121	Gummiemne centerrør	Rubberpart for centertube	1


Mini Crosser X1-4W

Skærme - orange metallic og sort
 Covers - orange metallic and black

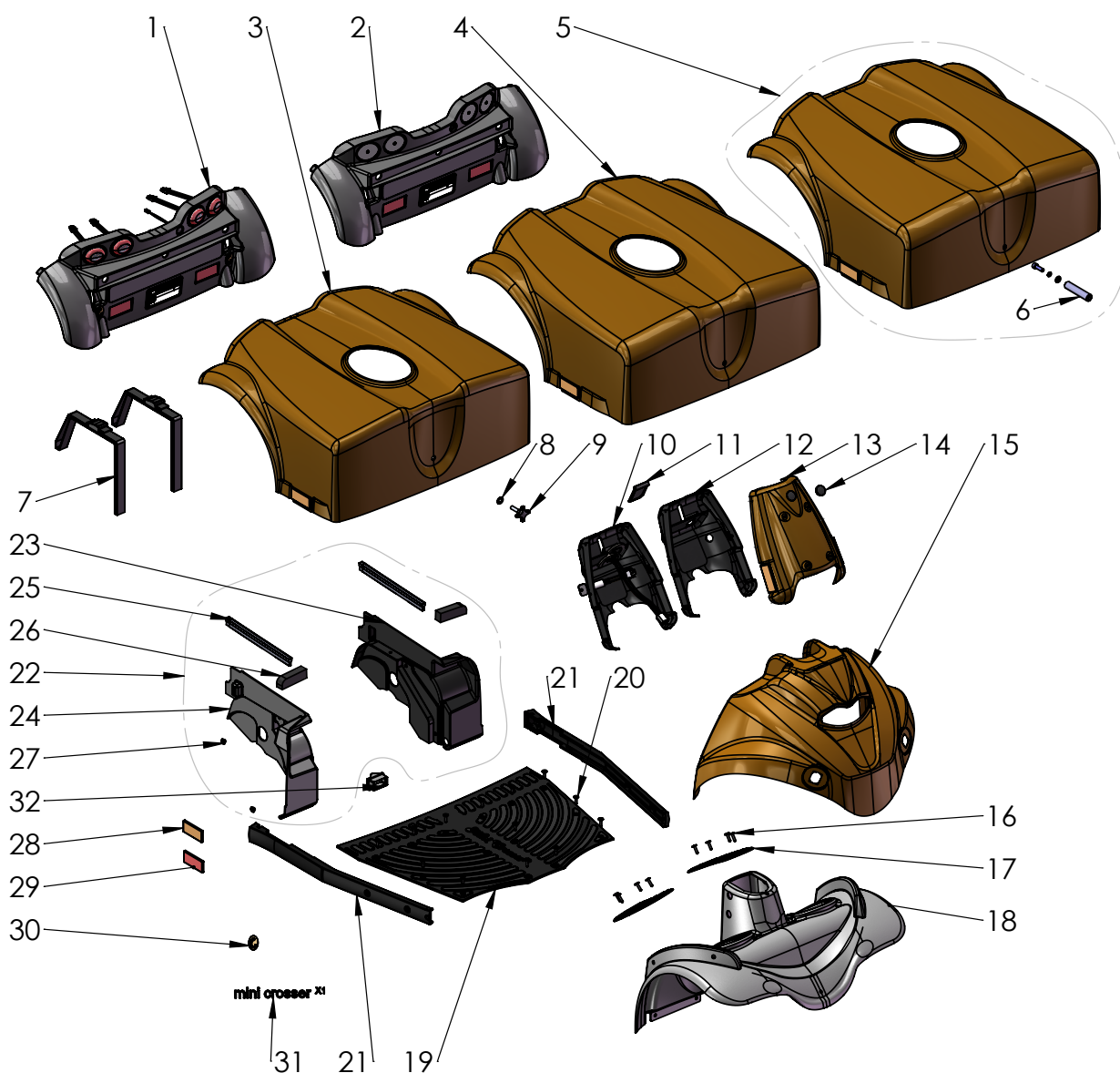

Mini Crosser X1-4W

El-dele for S-200 styring
 Electric parts for S-200 Controller

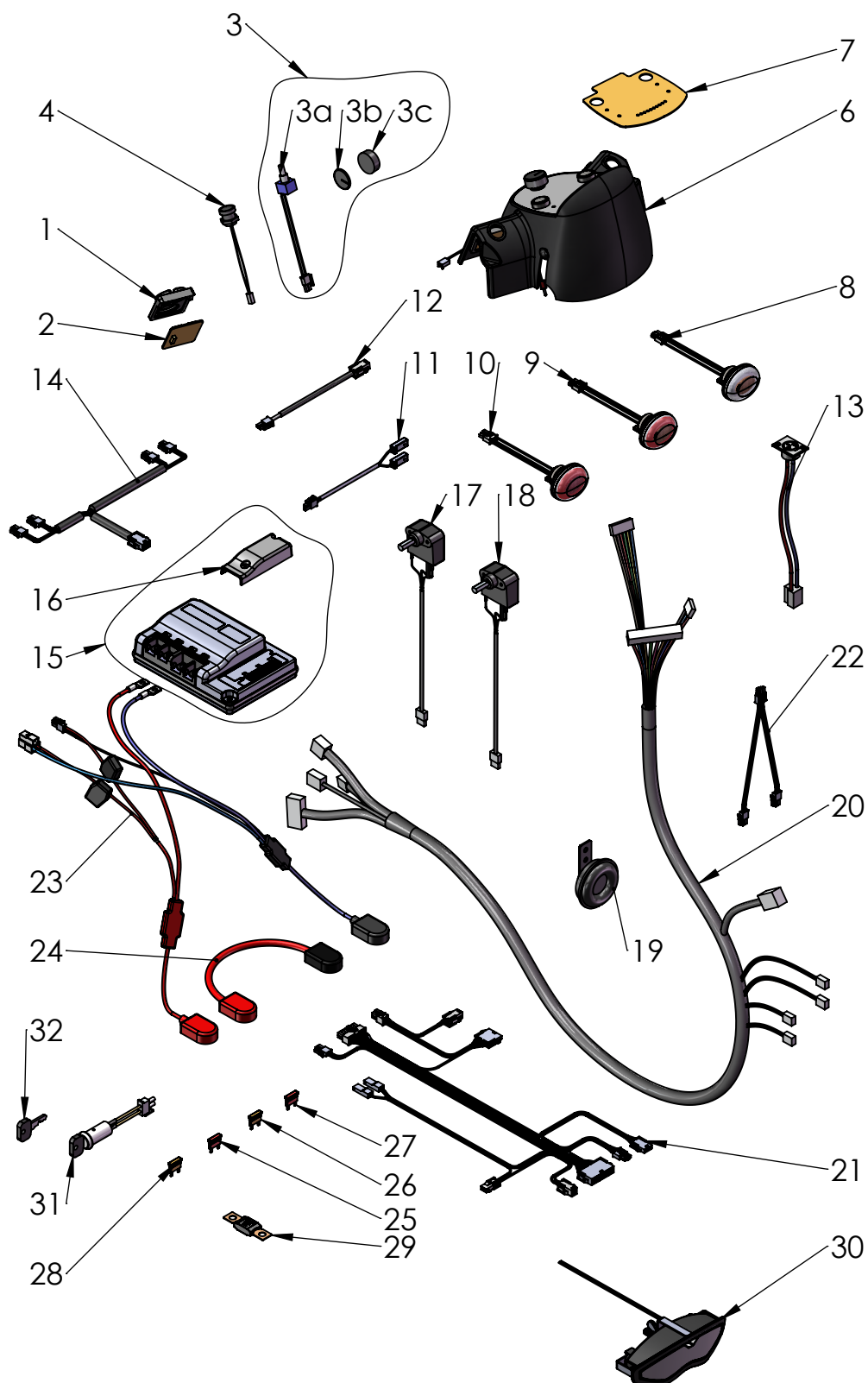

Mini Crosser X1-4W

El-dele for S-200 styring Electric parts for S-200 Controller

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1503-1324	Silikonemåtte blink, horn.	Silicone mat blinker lamp, horn.	1
2	1505-1409	Print, blinklys og horn med kabel.	Print, blinkers and horn with cable.	1
3	1505-1525	Potentiometer høj/lav, komplet m/kabel, kont/knop X-model	Potentiometer high/low, complete w/ cable, switch/knob X model	1
3a	1505-1510	Potmeter 100K med kabel S200, X1	Speed limiting, 100K w/cable S200, X1	1
3b	1505-1416	Potentiometer, knap	Potentiometer knob	1
3c	1505-1417	Potentiometer, låg	Potentiometer lid	1
4	1505-1408	Lys / katastrofe kontakt T	Light / hazard	1
6	1503-1379	Brugerpanel komplet X1.	User panel cover complete X1	1
	1503-1010	Brugerpanel inddækning S-200 SV/X1	User panel cover S200 SV/X1	1
7	1505-1405	Printplade for styr	Print for control	1
8	1505-1006	Blinklygte bag - Model X	LED light back - Model X	2
9	1505-1005	Blinklygte for - Model X	LED light front - Model X	2
10	1505-1007	Stoplygte bag - Model X	Stop light back - Model X	2
11	1505-1111	Kabel, for reduceret hastighed.	Cable, for reduced speed.	1
12	1505-1269	Kabel til magnetbremse	Cable to the magnetic brake	1
13	1505-1414	Ladestik, inkl. kabel/stik T	Charge plug with cable T	1
14	1505-1499	Lyskabel, bag X1/X2	Cable for lights, rear X1/X2	1
15	1505-1501	S-200 styring programmeret til X1 10 km	S-200 controller program. - X1 10 km	1
	1505-1502	S-200 styring programmeret til X1 13 km	S-200 controller program. - X1 13 km	1
	1505-1503	S-200 styring programmeret til X1 15 km	S-200 controller program. - X1 15 km	1
16	1535-1149	Pakningskit for S-200	Sealing kit for 200	1
17	1505-1200	Potentiometer, CURTIS komplet, venstre	Potentiometer, CURTIS complete, L	1
18	1505-1199	Potentiometer, CURTIS komplet, højre	Potentiometer, CURTIS complete, R	1
19	1505-1163	HORN, SIGNAL TIL T-MODELLER (Ver.2)	HORN, SIGNAL (VERSION 2.)	1
20	1505-1496	Hovedkabel X1	Main cable X1	1
21	1505-1498	Kabel for styring, X1	Cable for controller, X1	1
22	1505-1500	Blinklyskabel for	Cable, flashing lights front	1
23	1505-1116	Kabel batteri - styring S-200	Cable battery - Controller S-200	1
24	1505-1386	Mellemkabel, batteri.	Cable, between battery.	1
25	1505-1226	Sikring 1A	Fuse 1A	1
26	1505-1224	Sikring 5A	Fuse 5A	1
27	1505-1225	Sikring 10A	Fuse 10A	1
28	1505-1228	Sikring 20A	Fuse 20A	1
29	1505-1171	Hovedsikring MEGA 100A	Main fuse MEGA 100A	1
30	1505-1008	Forlygte komplet X-model	Head lamp complete X-model	1
31	1503-1347	Nøgle + nøgleafbryder	Key + switch	1


Mini Crosser X1-4W

El-dele for S-200 styring Electric parts for S-200 Controller

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
32	1506-1781	Nøgle løs MC nr. 7305	Key, loose MC no. 7305	1
	1506-1782	Nøgle løs MC nr. 7313	Key, loose MC no. 7313	1
	1506-1783	Nøgle løs MC nr. 7315	Key, loose MC no. 7315	1
	1506-1785	Nøgle løs MC nr. 7317	Key, loose MC no. 7317	1
	1506-1786	Nøgle løs MC nr. 7318	Key, loose MC no. 7318	1
	1506-1787	Nøgle løs MC nr. 7323	Key, loose MC no. 7323	1
	1506-1788	Nøgle løs MC nr. 7325	Key, loose MC no. 7325	1
	1506-1789	Nøgle løs MC nr. 7327	Key, loose MC no. 7327	1
	1506-1790	Nøgle løs MC nr. 7329	Key, loose MC no. 7329	1
	1506-1791	Nøgle løs MC nr. 7330	Key, loose MC no. 7330	1


Mini Crosser X1-4W

El-dele for S-200 styring
 Electric parts for S-200 Controller

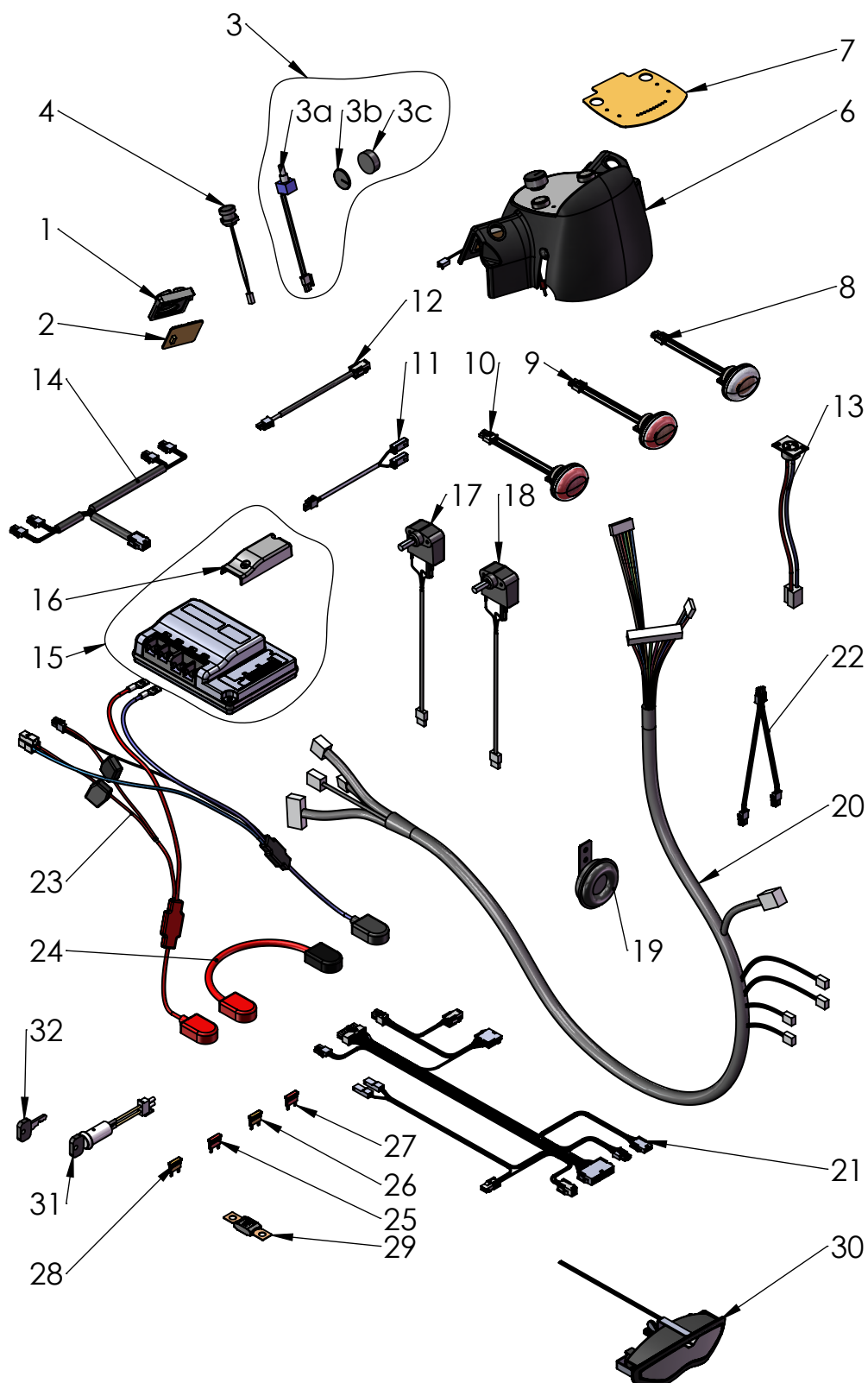

Mini Crosser X1-4W

X hjul og dæk X Wheels and Tires

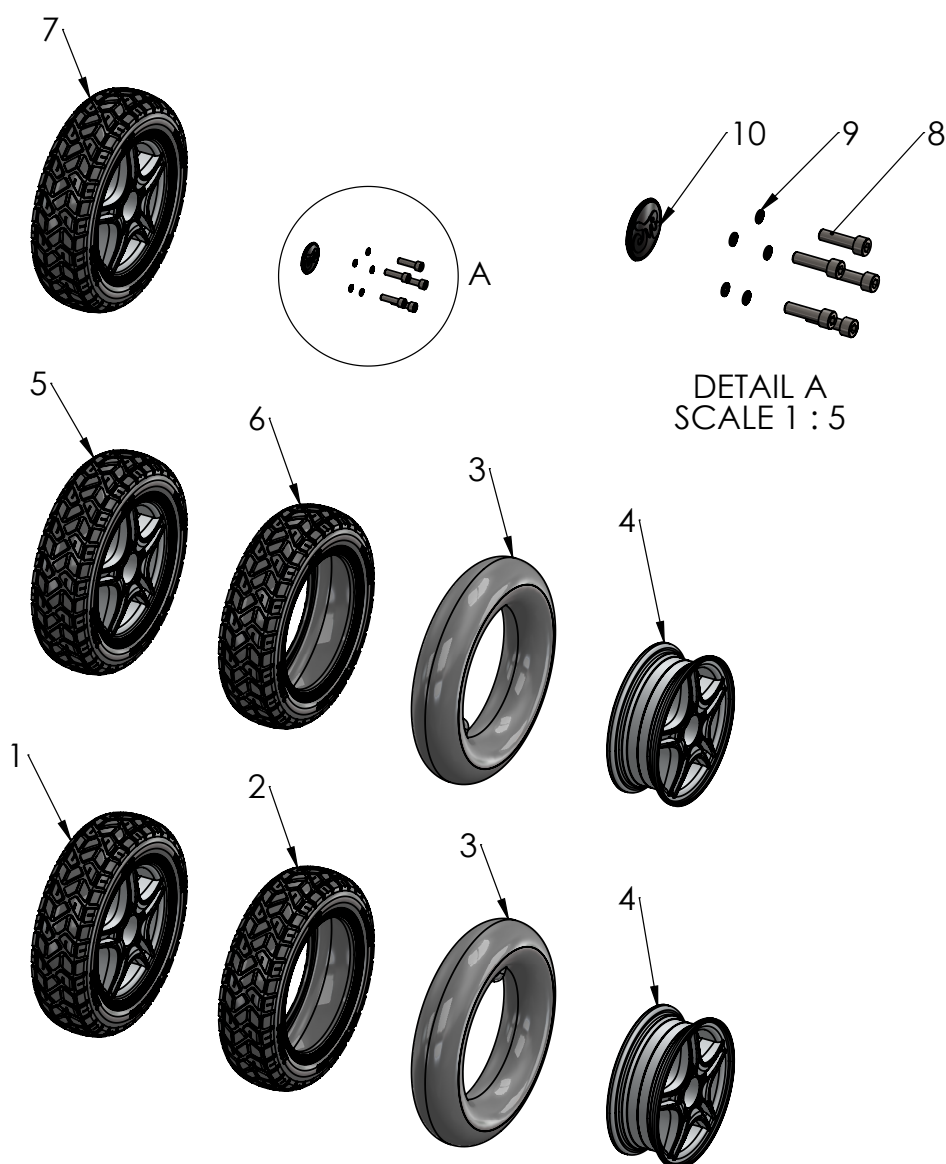

Mini Crosser X1-4W

X hjul og dæk X Wheels and Tires

Pos.	Del/part no.	Beskrivelse	Part name	Antal/ quant.
1	1503-1003	Hjul, model-X, 2,50-3,30-8". komplet med fælg og dæk.	Wheel model-X, 2.50-3.30-8" complete	1
2	1503-1005	Dæk til hjul model-X	Tyre for wheel model-X	1
3	1503-1323	Slange 3.00-8	Tube 3.00-8	1
4	1503-1006	Hjulfælg til hjul model-X	Wheel rim for wheel model-X	1
5	1503-1008	Hjul, Model X, 2,50/3,30-8", komplet med fælg og pigget dæk	Wheel, Model X, 2,50/3,30-8", complete w/rim and tyre w/spikes.	1
6	1503-1007	Dæk Model X, 2,50/3,30-8", pigget dæk	Tyre Model X 2,50/3,30-8", w/spikes	1
7	1503-1009	Hjul, Model X, 2,50/3,30-8", komplet, punkterfri, PUR	Wheel, Model X, 2,50/3,30-8" complete puncture free, PUR	1
8	8031-1268	M6 x 30 ch A2	M6 x 30 socket head cap A2	1
9	8005-1013	M6 Riflet skive	M6 riplock washer	1
10	1503-1321	Kapsel for fælg alu 8"	Capsule for Rim alu 8"	1

Egne notater

Own notes



medemagroup