

Seisomateline Dondolino



Dondolino on edestäpäin seisomista tukeva seisomateline, joka on suunniteltu auttamaan lapsia ylläpitämään pystyasentoa itsenäisemmin.

Dondolinon käyttö arjen eri tilanteissa rohkaisee vuorovaikutukseen ympäristön kanssa tukemalla yläraajojen ja pään liikkuvuutta sekä yksilöllisten motoristen taitojen kehitystä.

Dondolino on erittäin monipuolinen apuväline, jota on saatavana kolmessa koossa, ja jossa on laaja säätömahdollisuuksien valikoima. Se soveltuu 75-150 senttisille lapsille ja nuorille ja mukautuu heidän kasvuunsa, taitojen kehitykseen sekä lantion ja polvien koukistustarpeisiin. Saatavilla kolme kokoa. Max. käyttäjäpaino 35 / 45 / 55 kg

Ominaisuudet



Kallistuva runko

Jousimekanismilla toimivan säädön avulla voidaan siirtää pystyasennosta etunoja-asentoon, mikä tukee pään ja vartalon aktiivista hallintaa.




Säätönupit

Ormesan suunnitteleminen erityisnuppien ansiosta säätöjä voi tehdä ilman työkaluja, helposti ja turvallisesti.




Säätöputkien asteikko

Säätöputkien asteikkojen avulla terapeutti löytää helposti lapselle sopivan asennon.

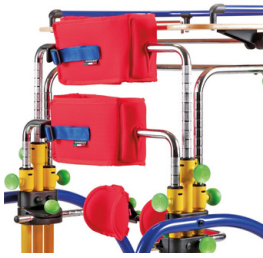


Lantion ja rintakehän tuet

Sekä lantion että rintakehän tuet ovat säädettävissä erikseen ympärysmittaan, korkeuden ja etu-takasuunnan mukaan. Jos käyttäjällä on riittävä vartalonhallinta, rintatuen voi myös poistaa kokonaan.

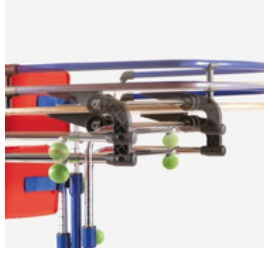

Pöytätas

Opetuskäyttöön suunniteltu koivuvanerinen pöytä tukee yläraajoja ja voidaan tarvittaessa irrottaa, jolloin käsien ja vartalon harjoittelu helpottuu. Pöydän korkeutta, kallistusta ja etu-takasuuntaa voidaan säätää.

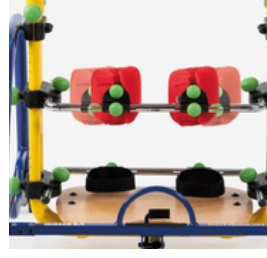

Pehmustetut polvituet

Irrotettavilla ja pestävillä pehmusteilla varustetuissa polvituuksissa on aukot polvilumpion kohdalla paineen keventämiseksi. Tuet ovat säädettävissä yksilöllisesti korkeuden, kierron, loitonnuksen sekä etu-takasuunnan mukaan.

Tekniset tiedot




A: alustan ulkomitat	63cm
B: pituuden ulkomitat	75 - 85 cm
C: korkeus jalkatuesta pöytään	45 - 79 cm
D: leveyden ulkomitat	63cm
E: korkeus jalkatuesta polvitukiin	12 - 26 cm
F: korkeus jalkatuesta lantion tukeen	39 - 59 cm
G: korkeus jalkatuesta rintatukeen	51 - 76 cm
L: tukien ympärysmitta	60 cm
M**: tukien sisäleveys	18 cm
N: käyttäjän pituus	75 - 100 cm
P: rungon kallistus	0° - 19°
Kokonaispaino	21 kg
Max. käyttäjäpaino	35 kg

koko 1

koko 2

koko 3

77 cm	83 cm
81 - 91 cm	85 - 95 cm
52 - 90 cm	62 - 107 cm
67 cm	71 cm
12 - 36 cm	14 - 48 cm
47 - 74 cm	58 - 93 cm
56 - 90 cm	70 - 110 cm
65 cm	70 cm
23 cm	28 cm
90 - 125 cm	120 - 150 cm
0° - 14°	0° - 11°
24 kg	26 kg
45 kg	55 kg

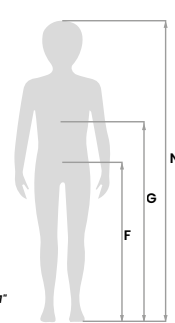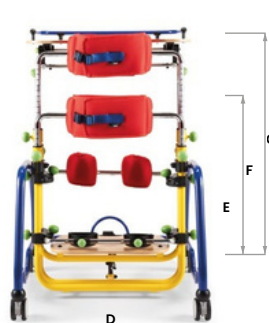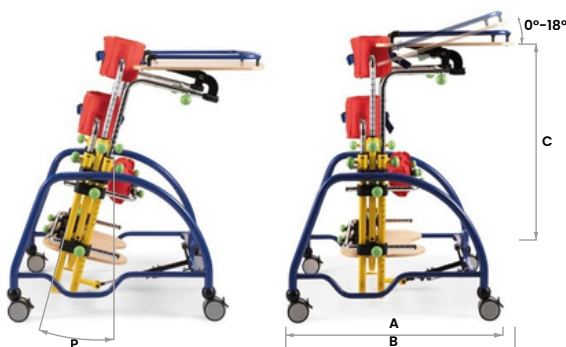

Varmista, että kuvassa esitetyt mitat F ja G eivät ylitä tukien kohdalla ilmoitettua suositettua vaihteluväliä.



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45 97-300
Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2025