



REHASENSE

Explorer

Kävelyteline ulkona liikkumiseen

Käyttöohje



1 Yleistä

Hyvä asiakkaamme,

Tämä käyttöohje sisältää kuvauksen lääkinällisestä laitteesta ja tärkeää tietoa sen toiminnasta ja turvallisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolella läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota ohjeisiin turvallisuudesta ja noudata niitä jokapäiväisessä käytössä.

REHASENSE kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia tai rakennetta ilman erillistä ilmoitusta.

Halutessanne lisää tietoa tuotteesta ottakaa yhteys ensisijaisesti maahantuojan asiakaspalveluun tai vaihtoehtoisesti suoraan valmistajaan REHASENSE. Yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.

2 Käyttötarkoitus, Indikaatiot & Kontraindikaatiot

Käyttötarkoitus: Kävelyteline on suunniteltu kävelyä tukevaksi välineeksi henkilöille, joilla on liikkumisen vaikeuksia seisoen, kävellen tai istuen. Kävelytelineen avulla helpotetaan ylösnousua, kävelyä ja lepäämistä voimien ehtyessä, samalla kun päivittäisistä toiminnoista ja askareista selviytyy ilman avustusta. Kävelytelineen käyttäminen muihin tarkoituksiin ei ole sallittua.

Indikaatiot: Henkilöt, joilla on erityyppisiä terveydellisiä tai toiminnallisia ongelmia ja tarvitsevat lisätukea turvalliseen kävelyyn.

Kontraindikaatiot: Kävelypöytä ei sovellu henkilöille, joilla on niin vakavia tasapainohäiriöitä tai lihastoiminnan heikkoutta, ettei seisominen tai kävely onnistu tuettunakaan. Tarpeen arviointi ja päätös kävelytelineen käytöstä lääkinällisenä välineenä tulee aina tehdä hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin toimesta

3 Toimituksen sisältö, tuotekuvaus

Kävelyteline toimitetaan pahvilaatikossa, kokoon taitettuna – helposti kuljetettavana.

Pakkaus sisältää:

- 1 täydellinen, taitettu kävelyteline
- 1 käyttöohje

Explorer on nelipyöräinen kevyt kävelyteline, jossa on kokoon taitettava ristikkorunko. Teline on valmistettu alumiinista jonka ansiosta se on kevyesti liikuteltava ja kuljetettava. Explorer on helposti käsiteltävä, vakaa ja käsiköiden korkeus on yksilöllisesti säädettävä. Runkorakenne on ristikkorunkoinen, pulverimaalattua alumiinia, Se on varustettu käsikahvoin ja jarruin, kangasistuimella ja tavarakassi pienten esineiden kuljettamiseen.

4 Turvallisuustietoa

Huolehdi että kaikki kävelytelineen käyttäjät lukevat tämän käyttöohjeen huolella läpi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista ja/tai loukkaantumisista, joiden voidaan todeta johtuneen käyttöohjeen noudattamisen laiminlyönnistä.




Käyttörajoituksia

- Suurin sallittu kuormitus välineelle on 200 kg.
- Suurin sallittu kuormitus tavarakassille on 5 kg.
- Välinettä saa käyttää vain tasaisilla alustoilla liikuttaessa.
- Välineellä ei saa liikkua silloin kun istuimella istutaan.
- Välineen seisontajarrut TÄYTYY lukita aina ennen istuimelle istumista tai siitä nousemista.



Vältä vahinkoja ja onnettomuuksia


- Käytä välinettä vain siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Käytä vain sellaista välinettä, jonka kaikki toiminnot pelaavat ja se on turvallisessa käyttökunnossa.
- Älä tee mitään mekaanisia/rakenteellisia muutoksia välineeseen, ellei niistä ole sovittu etukäteen valmistajan kanssa kirjallisesti.
- Kävelypöydän monipuolisia säätöjä tehdessäsi huolehdi, ettei omat tai käyttäjän sormet tai muut kehonosat jää puristuksiin liikkuvien osien väliin.
- Telineettä saa käyttää vain kiinteällä ja tasaisella alustalla.
- Kaikkien pyörien TÄYTYY olla kontaktissa alustaan KOKO käytön aikana. Tällä varmistetaan että teline pysyy tasapainoisena eikä kaadu tai lisää onnettomuusriskiä.
- Kun kävelytelinettä käytetään seisomatelineenä, pidä seisontajarrut AINA lukittuina.

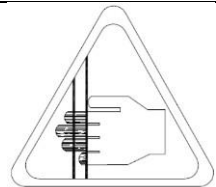

Mind Your Fingers

Ole varovainen. Kävelytelinettä koottaessa, purettaessa tai säädettäessä käyttäjän/avustajan sormet tai muut kehonosat ovat vaarassa jäädä tai puristua liikkuvien osien väliin. Ole erityisen varovainen säätäessäsi välineen mittasuhteita. Ennakoi ja arvioi säätäessäsi eri osien väliin jääviä rakoja, jottei sormet tai muut kehonosat voi jäädä puristuksiin käytön aikana.

Tuotteen osat

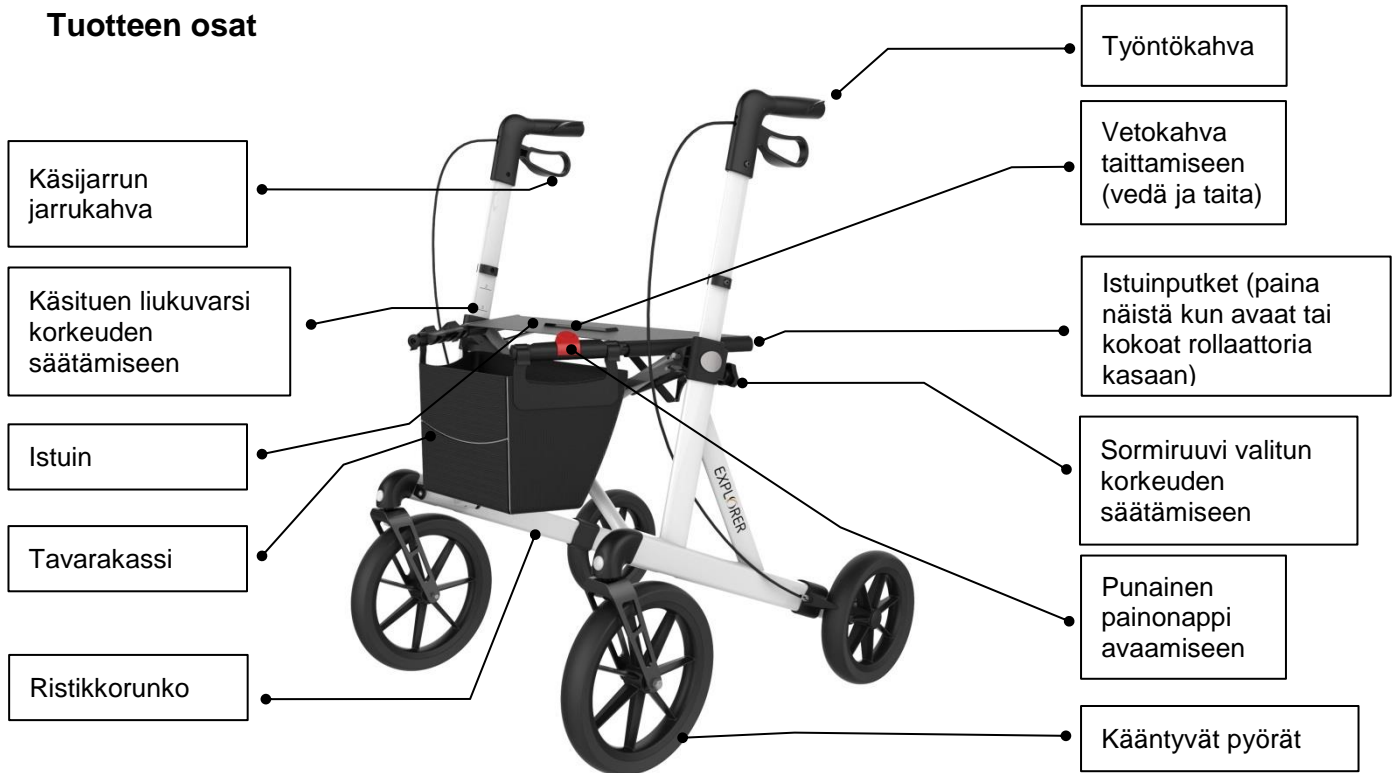

5 Käyttäminen

Lue allaoleva teksti katsoen samalla ylläolevaa kuvaa, jossa kävelytelineen eri osat on nimetty. Kävelytelineen käyttö ja säädöt on näin helppo omaksua:

Tarkastus

- Tarkasta että laatikko on täysin ehjä saapuessaan. Kuljetusliike vastaa vahingoista kuljetuksen aikana. Ota tuote laatikosta ja tarkista ettei mitään yllämainituista osista puutu. Mikäli havaitset puutteita toimituksen sisällössä tai osien rikkoutumista, ota välittömästi yhteyttä myyjääsi.

Kävelytelineen avaaminen käyttökuntoon



- Paina punaista nappia, joka lukitsee istuinputket
- Pitäen molemmista istuiosan putkista kiinni paina niitä alaspäin kunnes kuulet "klik" äänen merkiksi telineen lukittumisesta käyttöasentoon.
- Kokeile nostaa istuiosan putkista ylöspäin taittuuko teline, jos ei taitu, teline on kunnolla lukittunut käyttöasentoon.



- Varmista aina että vetokahvalukitus on kunnolla lukittunut kun kävelyteline on avattu käyttökuntoon.
- Varmista että molempien työntökahvojen säätö ei liiku ja että sormiruuvit on huolella kiristetty, jotteivat kahvat pääse liikkumaan kuormitettaessa.
- Varmistu aina ENNEN käyttöä että kävelyteline on vakaa ja kaikki lukitukset huolella lukittuneet.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen.

Kävelytelineen taittaminen kasaan

- Tartu istuimen vetokahvasta ja nosta ylös, jolloin ristikkorunko taittuu.
- Paina kävelytelineen runkoa kasaan kunnes se lukittuu

Työntökahvojen korkeudensäätö

- Avaa hieman työntökahvan sormiruuvia, joka lukitsee kahvan korkeuden;
- Säädä haluttu korkeus
- Kiristä sormiruuvit huolella



- *Molemmat työntökahvat tulee säätää samalle korkeudelle.*
- *Työntökahvojen korkeus on optimaalisesti säädetty, kun kahvat ovat samalla korkeudella kuin henkilön lonkat.*
- *Älä jätä kävelytelinettä lukitsematta ensin seisontajarruja.*

Käsijarrujen käyttö

- PYSÄYTÄ TELINE puristamalla jarrukahvoja ylös vasten käsikahvoja.
- PIDÄ TELINE PAIKALLAAN pitämällä jarrukahvoja puristettuna ”YLÄ” asennossa.
- LÄHDE LIIKKEELLE vapauttamalla ote jarrukahvoista. Jarru vapautuu automaattisesti.



- *Pidä jarrut aina lukittuina kun et käytä sitä kävelyssä tai et suunnittele siirtää telinettä.*
- *Kun kävelytelinettä käytetään istumiseen, pyörien jarrut on oltava lukittuina!*
- *Älä jätä kävelypöytää koskaan kaltevalle pinnalle ja lukitse aina jarrut kun poistut sen luota!*
- *Älä istu istuimelle liian taakse. Älä istu (osittain) tavarakassin päällä.*
- *Istu kävelytelineessä suorassa antaen käsien tai käsivarsien levätä työntökahvojen päällä.*
- *Älä nojaudu taaksepäin istuessasi kävelytelineen istuimella.*

Käsijarrun lukitus/vapauttaminen seisontajarruksi

- Lukitse käsijarru painamalla jarrukahvaa alaspäin kunnes kuulet lukittumisen ”klik” äänen.
- Vapauta käsijarru vetämällä kevyesti jarrukahvaa ylöspäin kunnes se vapautuu.



- *Kun kävelytelinettä käytetään seisomatelineenä, seisontajarrut on AINA oltava lukittuina.*

6 Puhdistaminen ja hoito

Yleispuhdistus:

- Puhdista kävelyteline säännöllisesti kaikesta irtoliasta ja pölystä.
- Irtolika ja pöly kannattaa puhdistaa heti tuoreeltaan ja se onnistuu parhaiten kostealla pyyhkeellä.
- Piintynyt lika voidaan poistaa lämpimällä pesuvedellä (mieto pesuneste, ei syövyttäviä aineita).
- Älä käytä hankaus- tai valkaisuaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa värimuutoksia.
- Kuivaa pinnat pehmeällä kankaalla.

Pyörät:

- Puhdista pyörät lämpimällä vedellä ja miedolla pesunesteellä. Kuivaa kankaalla. Karvat ja pöly kerääntyy pyörän napoihin ja haarukan väliin ja estää vapaan pyörimisen, poista ne aika-ajoin huolella. Perusteellisemmän huollon yhteydessä puhdistus helpottuu irrottamalla pyörä haarukasta.
- Voitele säännöllisesti pyöränakselit monitoimiöljyllä tai kun pyörät alkavat pitää ääntä.

7 Tunnistetiedot

Tuotekilpi tunnistetietoineen löytyy rungon alaputkesta. Tuotekilvessä on tärkeää tietoa tuotteesta: nimi, sarjanumero, valmistuspäivä, tuotenumero, max. kuormitus, tavarakassin max. kuormitus, tuotteen leveys, koko ja valmistajan tiedot. Tuotekilpeä ei saa poistaa tuotteesta.

8 Tekniset tiedot

Koko	Medium	Large
Max. kuormitus	200 kg	
Max. kuormitus tavarakassi	5 kg	
Kokonaispaino ilman tavarakassia	9 kg	9,2 kg
Tavarakassi	0,4 kg	
Pituus	77 cm	
Kokonaiskorkeus taitettuna (matalin säätö)	84 cm	91 cm
Kokonaisleveys avattuna	69 cm	
Kokonaisleveys taitettuna	25 cm	
Istuinleveys	53 cm	
Työntökahvojen korkeus (säädettävä)	78 - 90 cm	91 – 112 cm
Istuimen korkeus	53 cm	62 cm
Jarrut	2 x käyttöjarrua seisontalukituksella	
Pyörät (halkaisija x leveys) mustat pehmeät PU renkaat	edessä 28,5 x 4,4 cm takana 23,5 x 4,4 cm	

9 Kuljettaminen

Kävelyteline taittuu helposti kasaan kuljetuksen yhteydessä. Mikäli kuljetustarve ilmenee, suosittelemme taittamaan sen käyttöohjeen edellisen kappaleen ohjeistuksen mukaan. Varmista kävelytelineen paikallaanpysyminen ajoneuvossa aina asianmukaisin kiinnityksin, jottei tuote pääse liikkumaan/irtoamaan ja tällöin aiheuta vahinkoja ja loukkaantumisriskiä muille ajoneuvossa olijolle.

10 Huoltotoimet

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liikkuvat /kiristettävät osat ovat hyvin kiristettyinä KOKO AJAN.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien/muttereiden kireyksiä. Mikäli löysyyttä havaittavissa, kiristä huolella.
- Mikäli havaitset rikkoutumia, murtumia tai kulumia, vaihda vialliset uusiin osiin välittömästi
- Voitele silloin tällöin pyörän laakerit (noin kerran vuodessa) tai heti jos ne alkavat pitää ääntä. Anna voitelu asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi.

11 Uudelleenkäyttö kierrätys

Kävelyteline soveltuu erinomaisesti kierrätettäväksi seuraavalle henkilölle, kun alkuperäisen käyttäjän käyttötarve lakkaa. On kuitenkin tärkeää että hyvin laitteen tunteva huollon ammattilainen tarkistaa sen toimintakunnon ja turvallisuuden ennen luovuttamista uudelle käyttäjälle.

Tarkistuksessa on huomioitava seuraavat kohdat:

- rakenne on jäykkä ja tukeva,
- pulttien ja mutterien kireys,
- pehmusteiden kunto,
- pyörien ja laakereiden kunto,
- jarrujen toiminta ja kunto.

Mikäli tarkistuksessa havaitaan puutteita tai kulumia yllämainituissa seikoissa, tarvittavat osat on korvattava uusilla. Käyttäjän vaihtuessa suosittelemme erityisesti vaihtamaan pyörät uusiin. Kaikki ruuvit, pultit ja mutterit on kiristettävä. Tuote puhdistetaan huolella ja pinnat pyyhitään desinfektioaineella.

VAROITUS! Kävelytelineen uudelleen kierrätys on kielletty, mikäli rungossa havaitaan vääntymiä tai murtumia.

Kierrätettäessä kävelyteline uudelle käyttäjälle täytyy varmistaa, että käyttöohje seuraa mukana.

12 Tuotteen hävittäminen

Kun tulee aika poistaa kävelypöytä käytöstä ja hävittää, sitä ei saa heittää yleisjätteen sekaan. Sen kaikki valmistusmateriaalit ovat kierrätettäviä, joten se on hävitettävä kierrätysjätehuollon ohjeistuksen mukaisesti.

13 Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle 2 vuoden takuun valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Takuu ei kata tapauksia, joissa tuotetta on käytetty vastoin käyttöohjeen ohjeistuksia.

Tuotetta koskevissa teknisissä kysymyksissä ota yhteys maahantuojaan asiakaspalveluun tai huoltoon tai viime kädessä valmistajaan Rehasense®.

Myynti Suomessa:

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5,

33900 Tampere

www.campmobility.fi

info@campmobility.fi

Rehasense® Europe

Valmistaja

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Benelux

Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Nederland

Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com

info@rehasense.com