



REHASENSE

PIXEL

Kävelyteline sisäkäyttöön

Käyttöohje



CE

more than mobility

1 Yleistä

Hyvä asiakas,

Tämä käyttöohje sisältää lääkinällisen apuvälineen tuotekuvauksen ja tärkeät suuntaviivat tuotteen oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöä. Tutustu erityisesti turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

REHASENSE noudattaa jatkuvan tuotekehityksen periaatetta ja varaa itsellään oikeuden muuttaa tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja tuotespesifikaatiota ja tuotteen toiminnallisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai suoraan **valmistajaan**. Yhteystiedot löydät tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.

2 Käyttötarkoitus, indikaatiot & kontraindikaatiot

Käyttötarkoitus: Pixel kävelyteline on suunniteltu kävelyn apuvälineeksi henkilöille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi itsenäisessä liikkumisessa tai seisomisessa. Kävelyteline auttaa seisomaan, kävelemään ja suoriutumaan päivittäisistä askareista helpommin ilman avustajaa. Tuotteen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen on kielletty. Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Indikaatiot: Tuote on suunniteltu henkilöille, jotka eri terveysongelmista johtuen, tarvitsevat tukea ja apua seisomiseen ja kävelyyn.

Kontraindikaatiot: Tuotetta ei saa käyttää ulkona. Tuote ei sovellu henkilöille, joilla on vakavia tasapaino-ongelmia, huono vartalon hallinta tai liian heikot lihasvoimat seisomiseen ja kävelemiseen rollaattorin avulla. Lääkärin, fysioterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida käyttäjän tuotteen käyttötarve ja käyttömahdollisuudet.

3 Toimitus & yleinen tuotekuvaus

Pixel kävelytelineet toimitetaan pahvipakkauksessa, kokoonlaitettuna helpomman kuljetuksen varmistamiseksi:

Toimitus sisältää:

- 1 kokonainen, käyttövalmis, kokoonlaitettu kävelyteline
- 1 käyttöohje

Pixel on neljä pyöräinen, kevyt kävelyteline kokoonlaitettavalla rungolla. Tuote on valmistettu alumiinista, joten se on erittäin kevyt kuljettaa ja varastoida. Kävelytelineessä on erinomainen liikkuvuus, stabiliteetti ja siinä on erikokoisille käyttäjille sopivaksi säädettävä, korkeussäädettävä yhtenäinen työntökahva ja yhtenäinen jarrukahva. Tuote koostuu pulverimaalatusta alumiiniputkesta valmistetusta metallirungosta ja se on varustettu tekstiilietukorilla ja muovitarjottimella, joissa käyttäjä voi kuljettaa pieniä tavaroita. Kävelytelineessä on sisäkäyttöön tarkoitetut 6 tuuman renkaat.

4 Turvallisuusohjeet

Varmista, että tuotteen käyttäjä lukee tämän käyttöohjeen läpi ennen käyttöä. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tuote- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



Käyttörajoitukset


- Tuotetta ei saa kuormittaa yli 110 kg.

- Tuotteen etukoria ei saa kuormittaa yli 5 kg.
- Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön, tasaisille, sileille pinnoille.
- Tuotteen päällä ei saa istua.
- Jarrut PITÄÄ OLLA LUKITTUNA, kun kävelyteline pysäytetään ja jätetään vartioimatta.




Tapaturmien välttäminen

- Käytä tuotetta vain siihen käyttötarkoitukseen mihin se on suunniteltu.
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin käyttökunnossa.
- Älä tee tuotteeseen mitään muutostöitä, ellei sinulla ole valmistajan kirjallinen suostumus kyseiseen modifikaatioon.
- Käyttäjän on huolehdittava siitä, etteivät sormet tai muut ruumiinosat jää tuotteen säädettävien osien väliin.
- Tuotetta saa käyttää vain tasaisella pinnalla.
- Kaikkien neljän pyörän tulee olla kiinni lattiassa AINA tuotetta käytettäessä. Tällä varmistetaan, että kävelyteline on tasapainossa ja vältetään onnettomuuksilta.
- Käsijarrut tulee olla lukittuna AINA, kun tuote seisoo paikallaan.

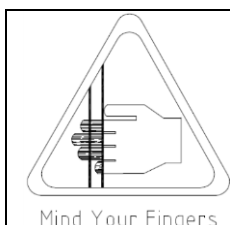

Ole varovainen, kun näet tämän symbolin laitteessa. Käyttäjän ja / tai avustajan sormet tai muut ruumiinosat voivat jäädä loukkuun laitteen osien väliin laitteen kokoon-taittamisen tai säätämisen aikana. Ole erittäin varovainen, kun säädät laitetta. Huomioi laitteen liikkuvien osien väliset aukot, jotta vältät sormien tai muiden ruumiinosien jäämisen niiden väliin.

5 Tuotekuvaus

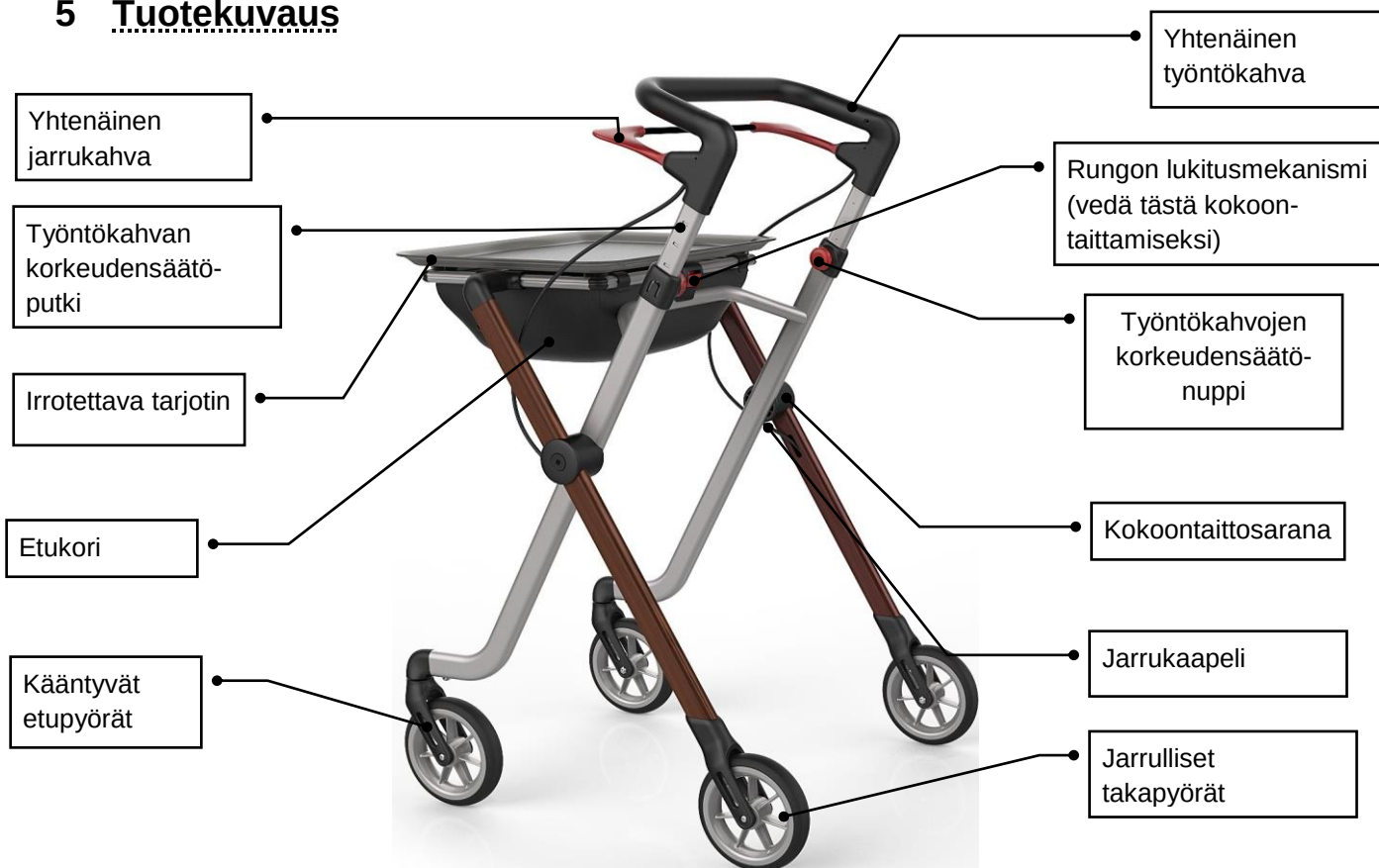

6 Käyttö

Tuote näyttää käyttövalmiina ed.sivulla olevan kuvan mukaiselta ja on heti valmis käytettäväksi. Joka tapauksessa, suosittelemme käymään läpi seuraavat kohdat ennen käyttöä:

Alkutarkastus

Ota tuote pois pakkauksesta ja tarkasta (katso ed. sivun kuvaa), että mitään ei puutu. Jos huomaat, että jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, älä jatka tuotteen purkamista, vaan ota välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Rollaattorin avaaminen

- Aseta rollaattori eteesi ja pitele työntökahvasta molemmin käsin, niin että takapyörät koskettavat maata. Paina työntökahvasta molemmin käsin alaspäin, niin että runko aukeaa kokonaan (ks. kuva alla).
- Lyödät punaisen rungon lukitusmekanismin keskeltä etukorin putkea, lukitse mekanismi runkoputkeen niin, että kuulet "click" äänen.



- Yritä vetää osia takaisin yhteen, kuin kokoontaittaisit rollaattoria. Jos tätä on mahdoton tehdä, runko on avattu ja lukittunut oikein. Katso kuva s.3.




- **Varmista aina kokoontaittamisen tai avaamisen jälkeen, että rungon puoliskot ovat turvallisesti lukittuneet.**
- **Varmista aina, että työntökahvan korkeudensäätönupit ovat turvallisesti lukittu, ettei työntökahva vahingossa liu'u alaspäin.**
- **Varmista aina, että lisävarusteet ovat turvallisesti lukittuneet paikoilleen ENNEN tuotteen käyttöä.**
- **Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoon.**

Rollaattorin kokoontaittaminen

- Avaa punainen lukitusmekanismi, josta korin runko on lukittu rollaattorin runkoon.
- kokoontaittaaksesi rollaattorin, nosta korin runko ylös ja vedä rollaattorin rungon puoliskot yhteen.

Työntökahvan korkeuden säätäminen

- Löysää työntökahvan kahta punaista korkeudensäätönuppia.
- Säädä korkeus haluamallesi korkeudelle.
- Kiristä korkeudensäätönupit takaisin kiinni.

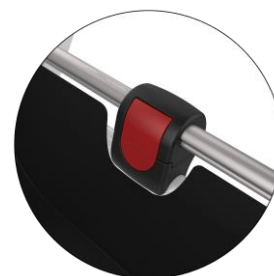

- **Työntökahvan molemmat puolet tulee olla säädetty samalle korkeudelle.**
- **Oikein säädetty työntökahva on käyttäjän lantion korkeudella.**

Jarrujen käyttäminen

- JARRUTTAMINEN: Vedä yhtenäistä jarrukahvaa ylöspäin kohti työntökahvaa.
- PYSÄHTYMINEN: Vedä jarrukahva ylös ja jätä yläasentoon.
- LIIKKEELLE LÄHTÖ: Vapauta jarrukahva. Kahva putoaa alaspäin automaattisesti ja vapauttaa jarrut.



- **Lukitse jarrut aina, kun et käytä laitetta.**
- **Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta lukitsematta käsijarruja!**
- **Älä koskaan jätä laitetta kaltevalle pinnalle lukitsematta käsijarruja!**

Käsijarrujen lukitseminen/avaaminen

- Käsijarrut lukitaan painamalla jarrukahvan punaisista kulmapainikkeista alaspäin, kunnes kuulet "click" äänen.
- Käsijarrut avataan vetämällä yhtenäistä jarrukahvaa ylöspäin.



- **Käsijarrut tulee olla aina lukittuna, kun pysäytät rollaattorin tai esim. ruokailet sen ääressä.**

7 Pesuohjeet

Yleiset puhdistusohjeet:

- Puhdista laite säännöllisesti ja pidä se puhtaana.
- Kevyt lika ja pöly voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Pahempi lika voidaan poistaa hankaamattomalla miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä.
- Älä käytä hiovia aineita tai valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tai värjätä maalipintaa ja muoviosia.
- Kuivaa osat pehmeällä liinalla.

Renkaiden puhdistusohjeet:

- Puhdista renkaat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa puhtaalla rätillä.
- Voitele öljyllä säännöllisin väliajoin tai jos pyörät alkavat vinkua.

8 Tuotemerkintä

Tuote-etiketti on sijoitettu rollaattorin ristikkorungon putkiin. Tuote-etiketti sisältää seuraavat tärkeät tiedot: tuotteen nimi, sarjanumero, valmistuspäivämäärä, tuotenumero, korin max. kuormitus, tuotteen mitat ja valmistajan tiedot. **Tuote-etikettiä ei saa koskaan irrottaa tuotteesta.**

9 Tekniset tiedot

Max. kuormitus	110 kg
Max. kuormitus etukori	5 kg
Kokonaispaino sis. kori ja tarjotin	5,2 kg
Pituus avattuna	65 cm
Korkeus kokoonlaitettuna (matalin)	90 cm
Leveys	53 cm
Pituus kokoonlaitettuna	25 cm
Käsi kahvojen korkeus (säädettävät)	88 – 97 cm
Jarrut	Jarrut takapyörissä + käsijarrut
Pyörät (halkaisija x leveys)	4 x 150 x 27 mm – Musta, pehmeä PU-rengas

10 Kuljetus

Pixel rollaattori on helppo taittaa kasaan kuljetusta varten. Taita tuote kasaan kappaleessa "Rollaattorin kokoontaittaminen" kuvatulla tavalla. Rollaattori tulee kuljettaa tukevalla alustalla, ilman vaaraa äkillisistä, vaarallisista liikkeistä, tai että tuote pääsee putoamaan kuljetuslaitteesta.

11 Huolto

- Varmista, että tuotteen kaikki osat ovat AINA kiinnitetty turvallisesti.
- Tarkista kaikkien ruuvien kireys säännöllisesti, kiristä tarvittaessa.
- Vaihda kaikki hajonneet, vahingoittuneet tai kuluneet osat välittömästi.

12 Uudelleenkäyttö

Pixel kävelyteline sopii uudelleen käytettäväksi uudella käyttäjällä. Ennen tuotteen luovuttamista uudelle käyttäjälle on hyvä, että terveydenhuollon ammattilainen tarkastaa laitteen.

Tarkasta seuraavat kohdat ennen tuotteen luovuttamista uudelle käyttäjälle:

- Tarkasta laitteen rungon kunto.
- Kiristä mutterit ja pultit.
- Tarkasta muoviosien kunto.
- Tarkasta pyörien ja kuulalaakereiden kunto.
- Tarkasta jarrujen kunto ja tehokkuus.

Jos jokin osa on vaurioitunut tai rikki se tulee vaihtaa uuteen. Suosittelemme vaihtamaan renkaat aina tarvittaessa. Kaikki löysät pultit ja mutterit on kiristettävä. Tuote tulee pestä ja desinfioida perusteellisesti ennen uudelleen käyttöä.

VAROITUS! Tuotetta ei saa uudelleen käyttää jos runko on taipunut tai murtunut.

Tämä käyttöohje tulee antaa jokaisen vaihdon mukana.

13 Kierrätys ja hävitys

Tuotetta ei saa heittää normaalin sekajätteen sekaan. Tuote tulee toimittaa kierrätysasemalla uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

14 Takuu

Valmistaja myöntää kahden (2) vuoden takuun valmistusvirheille. Takuu ei kata tuotteen asiattomasta käytöstä johtuvia vahinkoja.

**Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.
Voit ottaa yhteyttä myös valmistajaan.**

Rehasense®

Jälleenmyynti Suomessa:



Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
puh. 09 350 76 310
info@campmobility.fi

Rehasense® Europe

Valmistaja:

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com
info@rehasense.com



REHASENSE