

SERVER

Lätt rullator i aluminium
Bruksanvisning (SE)

Kevytrakenteinen kävelyteline

Käyttöohje (FI)



REHASENSE



1. Allmän information

Bäste kund,

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av den medicintekniska produkten och viktiga riktlinjer för dess korrekta och säkra användning. Det är viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant före användning av produkten. Särskilt viktigt är det att läsa och följa säkerhetskraven.

REHASENSE utvecklar hela tiden sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar i deras specifikationer och funktioner utan förvarning.

Om du har frågor kontakta din återförsäljare eller **Rehasense** direkt. Kontaktuppgifterna finns på sista sidan i denna bruksanvisning.

Förväntad livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om den används i enlighet med säkerhets- instruktionerna, underhållsinstruktionerna och instruktionerna för korrekt användning i denna manual. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

2. Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning: Rullatorn har utformats som ett hjälpmedel för personer med rörlighetsproblem, som t ex har svårt att stå, gå eller sitta på egen hand. Med hjälp av rullatorn kan dessa personer utan svårighet stå, gå och vila samt uppfylla de flesta av sina dagliga uppgifter utan hjälp från andra. All annan användning är förbjuden.

Indikationer: Rullatorn är speciellt utformad för personer som på grund av sitt/sina hälsoproblem kräver ett stabilt gångstöd.

Kontraindikationer: Rullatorn får inte användas av personer med allvarligt rubbad kroppsbalans och/eller vars muskelstyrka är för låg för att låta de stå och gå, inte heller med ett extra stöd av en rullator. Patientens behov och möjlighet av att använda en rullator ska alltid bedömas av en läkare eller en sjukgymnast.

3. Leverans och allmän produktbeskrivning

Rullatorer levereras i lådor och är hopfällda för lättare transport.

Förpackningen innehåller:

- ✓ 1 st komplett, hopfällad rullator, sits och korg
- ✓ 1 uppsättning kryckhållare
- ✓ 1 st bruksanvisning

SERVER är en fyrhjulsdriven, lätt rullator med hopfällbar korskonstruktion. Den är gjord av kolfiber för att vara lätt och enkel att förvara och transportera. Rullatorn erbjuder stor manövrerbarhet och stabilitet. Dess skjuthandtag är höj- och sänkbara för bäst anpassning efter användaren. Den består av en pulverlackad, hopfällbar ramkonstruktion gjord av aluminiumrör. Produkten är dessutom försedd med en sits i tyg som användaren kan vila på samt en shoppingväska som tillåter användaren att ta med sig små föremål.

4 Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning läses av alla personer som använder produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för materiella skador och/eller kroppsskador orsakade av att bruksanvisningen inte har följts.




Användningsbegränsningar:

- Produkten får inte belastas med mer än 150 kg.
- Shoppingväskans maximala belastning är 5 kg.
- Rullatorn är avsedd att endast användas inomhus och/eller utomhus på plana ytor.
- Den är inte avsedd att vara i rörelse när användaren sitter på den.
- Bromsarna MÅSTE vara i låsläge INNAN man sätter sig på rullatorns sits.



Gör så här för att undvika olyckor

- Använd rullatorn endast för dess avsedda ändamål.
- Använd rullatorn endast om den är i gott tekniskt skick.
- Gör inte konstruktiva ändringar på rullatorn, såvida du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- När du gör de justeringar som är möjliga, skydda dina fingrar och andra kroppsdelar från att fastna mellan rörliga delar av rullatorn.
- Använd rullatorn endast på en stabil yta.
- Alla hjul MÅSTE stå på golvet HELA TIDEN när rullatorn används. På så sätt ser du till att rullatorn är korrekt balanserad och att du undviker risken för olycka.
- När rullatorn används i stillastående läge MÅSTE handbromsarna vara låsta.

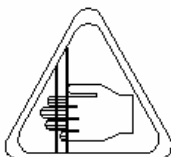

Klämrisk

Var försiktig när du ser denna symbol på rullatorn. Användarens och/eller assistentens fingrar eller andra kroppsdelar kan fastna mellan rullatorns delar vid hopfällning, uppfällning eller justering. Var mycket försiktig när du justerar rullatorn. Beakta avstånd mellan rullatorns element för att skydda dina fingrar och andra kroppsdelar från att fastna emellan.


5 Detaljerade produktuppgifter



Bilden ovan visar ett exempel på en rollator med alla standardkomponenter och deras placering. Rollatorns exakta utseende och funktioner kan skilja sig från rollatorn som visas ovan (beroende på orderspecifikationerna).

- (a) Körhandtag
- (b) Bromshandtag
- (c) Sits
- (d) Väska
- (e) Bromsvajer
- (f) Sidoram
- (g) Krysstag
- (h) Bromsskydd
- (i) Höjdjusteringsmekanism
- (j) Hopfällbart handtag
- (k) Hjulgaffel
- (l) Bärhandtag och väskhållare
- (m) Ryggstöd

Reflexer: från vänster till höger: sidan av ramen, baksidan av handtaget, framsidan av rullatorn på väskan.

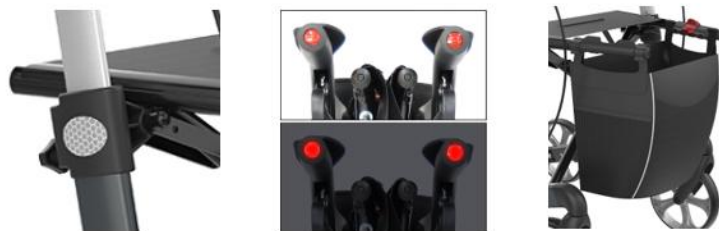

På framsidan av rollatorn finns reflexelement på sidorna av väskan

6 Användning

Med hjälp av bilden ovan kan du intuitivt förbereda rullatorn för användning. För att ytterligare underlätta detta rekommenderar vi att du följer anvisningarna nedan:

Inledande kontroll

Innan rullatorn används för första gången ta ut den ur kartongen och kontrollera (med hjälp av den ovanstående bilden) att ingenting saknas. Om du vid denna tidpunkt upptäcker att någonting saknas eller är trasig fortsätt inte med att sätta ihop produkten. Kontakta återförsäljaren så fort som möjligt.

Uppfällning av rullatorn

- Tryck på den röda knappen som spärrar sitsrören
- Tryck ner båda sitsrören samtidigt tills det hörs ett klickljud i ramens låsmekanism. Försök nu att dra sitsrören tillbaka uppåt för att fälla ihop ramen. Om detta inte är möjligt är ramen korrekt och säkert uppfälld. Se läget OPEN på bilden ovan.



- Efter uppfällning eller montering av rullatorn se alltid till att sitsstödet och ramen är ordentligt låsta.
- Se alltid till att båda skjuthandtagen är ordentligt låsta på en utvald höjd med hjälp av de två vingskruvarna för att undvika slumpmässig glidning av handtagens rör när de pressas ner.
- Testa alltid FÖRE användning att samtliga tillbehör är korrekt och säkert fästa på plats.
- Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskador.

Hopfällning

- Lyft uppåt dragbandet på sitsen för att fälla ihop rullatorn.
- Fäll ihop rullatorn tills låset är stängt.

Höjdusteriing av skjuthandtaget

- Lås upp handtagsknappen,
- Anpassa höjden på handtaget.
- Lås fast handtagsknappen igen.



- Båda skjuthandtagen bör ha samma höjd.
- När handtagen är korrekt justerade befinner de sig på användarens höfthöjd.
- Lämna aldrig rullatorn oövervakad utan aktiverade bromsar!

Användning av handbromsar

- FÖR ATT STOPPA RULLATORN tryck upp handbromsarna mot handtagen.
- FÖR ATT RULLATORN STÅR STILLA håll bromshandtagen i "UP"-läget.
- Släpp bromshandtagen FÖR ATT FÖRFLYTTA RULLATORN. De faller ner automatiskt och bromsarna frigörs.



- Aktivera alltid bromsarna när du vill att rullatorn står stilla.
- Lämna aldrig rullatorn utan aktiverade bromsar när någon sitter på den!
- Lämna aldrig rullatorn på sluttande ytor utan aktiverade bromsar!
- Sitt aldrig för långt mot baksidan på rullatorn. Sitt inte (delvis) ovanför shoppingväskan.
- Sitt alltid rakt upp på rullatorn med underarmarna eller händerna lätt vilande på skjuthandtagen.
- Luta dig aldrig bakåt när du sitter på rullatorn.

Låsning/upplåsning av handbromsar

- För att låsa fast bromsarna tryck ner bromshandtagen tills det hörs ett klickljud.
- För att låsa upp bromsarna tryck upp bromshandtagen tills du känner att hjulen rullar fritt.



- När rullatorn används i stillastående läge MÅSTE handbromsarna alltid vara låsta.

Övervinna hinder:

Ramen vid bakhjulet avslutas med en tippedal. Denna del är avsedd för rullatoranvändaren. Piktogrammet nedan visar hur man övervinner ett hinder med hjälp av den.



Beskrivning av hur man övervinner ett hinder:

- Placera rullatorn framför hindret
- Tryck på tippedalen → lyft framhjulen
- Flytta rullatorn framåt
- Sänk framhjulen
- Varning: Använd inte utan hjälp vid begränsad rörlighet



- Maximal säker lutning

Sitsanvändning

- Se till att bromsarna är låsta före användning.
- Sitt alltid med ryggen i rörelseriktningen

7.....Rengöring

Allmänt:


- Rengör rullatorn regelbundet och håll den ren.
- Lättare smuts och damm kan tas bort med en blöt trasa.
- Om rullatorn är mycket smutsig kan den rengöras med ett icke-korroderande, mildt tvättmedel och varmt vatten.
- Använd inte starka slipmedel eller kemikalier med innehåll av blekmedel, eftersom de kan skada eller missfärga rullatorn.
- Torka av rengjorda ytor med en mjuk trasa.
- Rengör inte med lösningsmedel som bensen eller thinner. Detta kan skada lack och plastdelar.
- Klorbaserade rengöringsmedel är inte tillåtna.
- Rengör inte med rengöringsmedel med frätande för metallämnen eller blandningar.
- är desinfektion med sprayning eller avtorkning med en testad och godkänd produkt tillåten. En lista över aktuella tillåtna desinfektionsmedel finns tillgänglig från Robert Koch Institute på <http://www.rki.de>.

Hjul:

- Rengör hjulen med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en ren trasa.
- Smörj in hjulen med universalolja periodvis eller när de börjar gnissla.

8... Produktens märkning

Produktens märkning är placerad på insidan av den lodräta sidoramen:

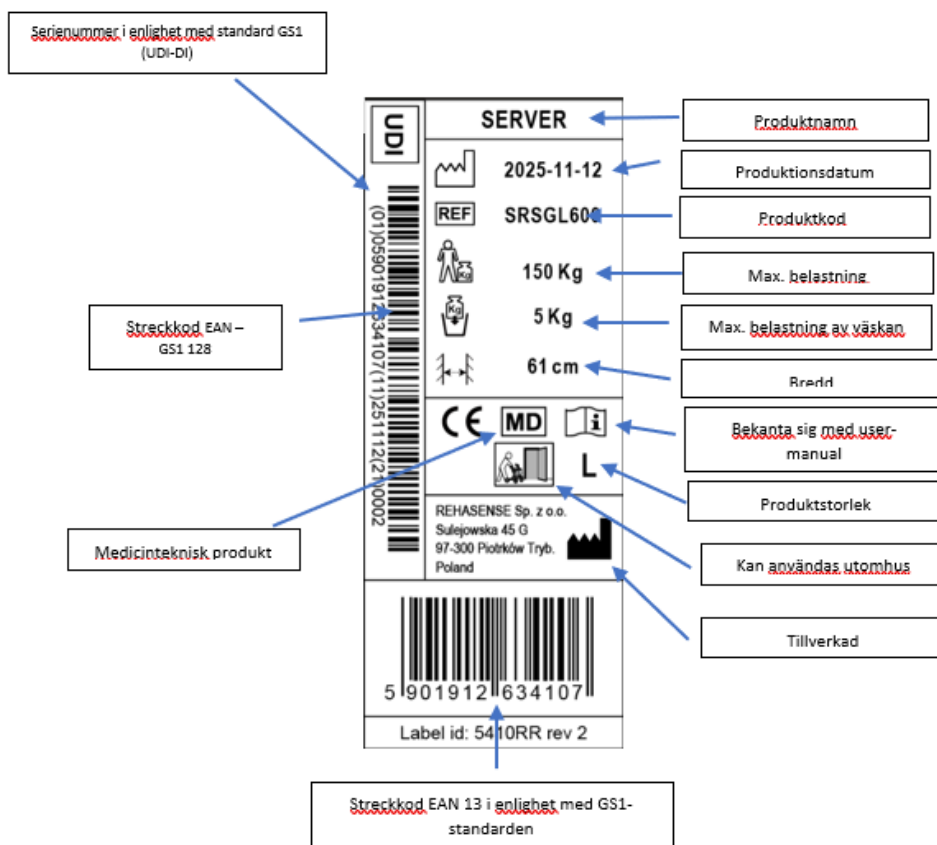

9 Tekniska data

"SERVER" lättvikts rullator i aluminium			
Storlek	S	M	L
Maximal användarvikt	150 kg	150 kg	150 kg
Maximal väskbelastning	5 kg	5 kg	5 kg
Totalvikt och väskvikt	7 kg & 0,3 väska	7 kg & 0,3 väska	7 kg & 0,3 väska
Längd	66 cm	66 cm	66 cm
Total hopfälld höjd (lägst)	72 cm	72 cm	79 cm
Vickad bredd	23 cm	23 cm	23 cm
Utfälld bredd	61 cm	61 cm	61 cm
Sitsbredd	46 cm	46 cm	46 cm
Handtagshöjd (justerbar)	63-79 cm	66-86 cm	74-102 cm
Sitshöjd	50 cm	55 cm	62 cm
Bromsar	2 x handbroms med låsfunktion		
Standardhjul (diameter och bredd)	Båda hjulen 8" 200 x 35 mm		
Mjuka hjul (diameter och bredd)	Båda hjulen 8" 200 x 35 mm		

10 Transport beskrivning

Rullatorn är lätt hopfällbar och bekväm för transport. Om den behöver transporteras rekommenderar vi att fälla ihop den enligt beskrivningen ovan. Rullatorn bör transporteras på så sätt att den är stabil och att det inte finns någon risk för plötsliga och farliga ryckningar.

11 Underhåll

- Se till att alla delar ALLTID är säkert fästa på rullatorn.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Dra åt vid behov.
- Byt ut trasiga, skadade eller slitna element omedelbart.

12 Återanvändning

Rullatorn kan återanvändas. Innan den lämnas över till en annan användare måste den inspekteras av återförsäljaren. Följande måste ingå i inspektionen:

- Visuellt kontroll av ramen
- Säker fästning av muttrarna och bultarna
- Skicket på plastdelarna
- Skicket på hjulen och kullagren
- Effektiviteten hos och skicket på bromsarna

Om en av delarna är skadad eller trasig måste den bytas ut mot en ny. Det rekommenderas att byta ut hjulen varje gång rullatorn byter användare. Alla lossade bultar och muttrar måste dras åt. Produkten måste rengöras noggrant och desinficeras före återanvändning.

OBSERVERA! Det är förbjudet att återanvända rullatorn om ramen är böjd eller bruten.

Bruksanvisningen måste åtfölja rullatorn vid varje användarbyte.

13 Avfallshantering av produkten

Rullatorn får inte deponeras med vanligt avfall. Den bör levereras till avsedd deponi för återanvändning eller återvinning.

14 Garanti

Garantin är inte giltig på grund av oavsiktlig användning av produkten.

Garantin utesluter skador orsakade av felaktig användning, olyckor och/eller normalt slitage.

Eventuella modifikationer av produkten kommer att orsaka förlust av garantin. Mekaniska skador omfattas inte av denna garanti.

För reparationer under garantiperioden, kontakta din lokala återförsäljare.

SUOMI

1 Yleistä

Hyvä asiakkaamme,

Tämä käyttöohje sisältää kuvauksen lääkinnällisestä laitteesta ja tärkeää tietoa sen toiminnasta ja turvallisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolella läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota ohjeisiin turvallisuudesta ja noudata niitä jokapäiväisessä käytössä.

REHASENSE kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia tai rakennetta ilman erillistä ilmoitusta.

Halutessanne lisää tietoa tuotteesta ottakaa yhteys ensisijaisesti maahantuojaan asiakaspalveluun tai vaihtoehtoisesti suoraan valmistajaan **REHASENSE**. Yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.

Käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on kymmenen (10) vuotta, jos sitä käytetään tässä käyttöoppaassa annettujen turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tuotteen todellinen käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, kuinka paljon ja kuinka intensiivisesti sitä käytetään.

2. Käyttötarkoitus, Indikaatiot & Kontraindikaatiot

Käyttötarkoitus: Kävelyteline on suunniteltu kävelyä tukeväksi välineeksi henkilöille, joilla on liikkumisen vaikeuksia seisoen, kävellen tai istuen. Kävelytelineen avulla helpotetaan ylösnousua, kävelyä ja lepäämistä voimien ehtyessä, samalla kun päivittäisistä toiminnoista ja askareista selviytyy ilman avustusta. Kävelytelineen käyttäminen muihin tarkoituksiin ei ole sallittua.

Indikaatiot: Henkilöt, joilla on erityyppisiä terveydellisiä tai toiminnallisia ongelmia ja tarvitsevat lisätukea turvalliseen kävelyyn.

Kontraindikaatiot: Kävelypöytä ei sovellu henkilöille, joilla on niin vakavia tasapainohäiriöitä tai lihastoiminnan heikkoutta, ettei seisominen tai kävely onnistu tuettunakaan. Tarpeen arviointi ja päätös kävelytelineen käytöstä lääkinnällisenä välineenä tulee aina tehdä hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin toimesta.

3. Toimituksen sisältö, tuotekuvaus

Kävelyteline toimitetaan pahvilaatikossa, kokoonlaitettuna – helposti kuljetettavana.

Pakkaus sisältää:

- ✓ 1 täydellinen, taitettu kävelyteline
- ✓ 1 käyttöohje

Serverikävelytelineontarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Siinä on selkeäjalaaja helppokäyttöinen käsikruunin korkeussäätö jaerittäin kevyetjatoimintavarmat jarrutsekä TPE-päällysteiset puhkeamatto- mat renkaat. Runko ja verkkoistuin on turvallisuustestattu jopa 150 kg:n painoiselle käyttäjälle. Kävelyteline voidaan taittaa kokoon, jolloin sen kuljettaminen on helpompaa. Myös kokoonlaitettuna sitä voidaan käyttää tukena.

4. Turvallisuustietoa

Huolehdi että kaikki kävelytelineen käyttäjät lukevat tämän käyttöohjeen huolella läpi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista ja/tai loukkaantumisista, joiden voidaan todeta johtuneen käyttöohjeen noudattamisen laiminlyönnistä.




Käyttörajoituksia

- Suurin sallittu kuormitus välineelle on 150 kg.
- Suurin sallittu kuormitus tavarakassille on 5 kg.
- Välinettä saa käyttää vain tasaisilla alustoilla liikuttaessa.
- Välineellä ei saa liikkua silloin kun istuimella istutaan.
- Välineen seisontajarrut TÄYTYY lukita aina ennen istuimelle istumista tai siitä nousemista.



Vältä vahinkoja ja onnettomuuksia

- Käytä välinettä vain siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Käytä vain sellaista välinettä, jonka kaikki toiminnot pelaavat ja se on turvallisessa käyttökunnossa.
- Älä tee mitään mekaanisia/rakenteellisia muutoksia välineeseen, ellei niistä ole sovittu etukäteen valmistajan kanssa kirjallisesti.
- Kävelypöydän monipuolisia säätöjä tehdessäsi huolehdi, ettei omat tai käyttäjän sormet tai muut kehonosat jää puristuksiin liikkuvien osien väliin.
- Telineettä saa käyttää vain kiinteällä ja tasaisella alustalla.
- Kaikkien pyörien TÄYTYY olla kontaktissa alustaan KOKO käytön aikana. Tällä varmistetaan että teline pysyy tasapainoisena eikä kaadu tai lisää onnettomuusriskiä.
- Kun kävelytelinettä käytetään seisomatelineenä, pidä seisontajarrut AINA lukittuina.

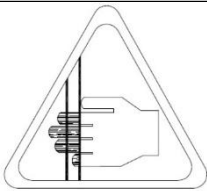

Mind Your Fingers

Ole varovainen. Kävelytelinettä koottaessa, purettaessa tai säädettäessä käyttäjän/avustajan sormet tai muut kehonosat ovat vaarassa jäädä tai puristua liikkuvien osien väliin. Ole erityisen varovainen säätäessäsi välineen mittasuhteita. Ennakoi ja arvioi säätäessäsi eri osien väliin jääviä rakoja, jottei sormet tai muut kehonosat voi jäädä puristuksiin käytön aikana.


5. Tuotteen osat



Yllä olevassa kuvassa on esimerkki rollaattorista, jossa on kaikki vakiokomponentit ja niiden sijoittelu. Rollaattorin tarkka ulkonäkö ja toiminnot voivat poiketa yllä esitetystä rollaattorista (tilaustiedoista riippuen).

- Ⓐ Työntökahvat
- Ⓑ Jarruvipu
- Ⓒ Istuin
- Ⓓ Laukku
- Ⓔ Jarruvaijeri
- Ⓕ Sivurunko
- Ⓖ Poikkituki
- Ⓗ Jarrukansi
- Ⓘ Korkeudensäätömekanismi
- ⓵ Taattuva kahva
- Ⓚ Pyöränhaarukka
- Ⓛ Kantokahva ja laukunpidike
- Ⓜ Selkänoja

Heijastimet: vasemmalta oikealle: rungon sivu, kahvan takaosa, rollaattorin etuosassa laukussa.

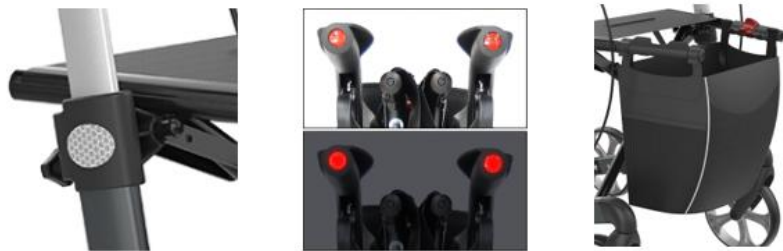

Rollaattorin etuosassa on heijastavia elementtejä laukun sivuilla

6 Käyttäminen

Lue allaoleva teksti katsoen samalla ylläolevaa kuvaa, jossa kävelytelineen eri osat on nimetty, Kävelytelineen käyttö ja säädöt on näin helppo omaksua:

Tarkastus

Tarkasta että laatikko on täysin ehjä saapuessaan. Kuljetusliike vastaa vahingoista kuljetuksen aikana. Ota tuote laatikosta ja tarkista ettei mitään yllämainituista osista puutu. Mikäli havaitset puutteita toimituksen sisällössä tai osien rikkoutumista, ota välittömästi yhteyttä myyjääsi.

Kävelytelineen avaaminen käyttökuntoon

- Paina punaista nappia, joka lukitsee istuinputket
- Pitäen molemmista istuinosan putkista kiinni paina niitä alaspäin kunnes kuulet “klik” äänen merkiksi telineen lukittumisesta käyttöasentoon.
- Kokeile nostaa istuinosan putkista ylöspäin taittuuko teline, jos ei taitu, teline on kunnolla lukittunut käyttöasentoon.



- *Varmista aina että vetokahvalukitus on kunnolla lukittunut kun kävelyteline on avattu käyttökuntoon.*
- *Varmista että molempien työntökahvojen säätö ei liiku ja että sormiruuvit on huolella kiristetty, jotteivat kahvat pääse liikkumaan kuormitettaessa.*
- *Varmistu aina ENNEN käyttöä että kävelyteline on vakaa ja kaikki lukitukset huolella lukittuneet.*
- *Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen.*

Kävelytelineen taittaminen kasaan

- Tartu istuimen vetokahvasta ja nosta ylös, jolloin ristikkorunko taittuu.
- Paina kävelytelineen runkoa kasaan kunnes se lukittuu

Työntökahvojen korkeudensäätö

- Avaa hieman työntökahvan sormiruuvia, joka lukitsee kahvan korkeuden;
- Säädä haluttu korkeus
- Kiristä sormiruuvit huolella



- *Molemmat työntökahvat tulee säätää samalle korkeudelle.*
- *Työntökahvojen korkeus on optimaalisesti säädetty, kun kahvat ovat samalla korkeudella kuin henkilön lonkat.*
- *Älä jätä kävelytelinettä lukitsematta ensin seisontajarruja.*

Käsijarrujen käyttö

- PYSÄYTÄ TELINE puristamalla jarrukahvoja ylös vasten käsikahvoja.
- PIDÄ TELINE PAIKALLAAN pitämällä jarrukahvoja puristettuna ”YLÄ” asennossa.
- LÄHDE LIIKKEELLE vapauttamalla ote jarrukahvoista. Jarru vapautuu automaattisesti.



- *Pidä jarrut aina lukittuina kun et käytä sitä kävelyssä tai et suunnittele siirtää telineettä.*
- *Kun kävelytelinettä käytetään istumiseen, pyörien jarrut on oltava lukittuina!*
- *Älä jätä kävelypöytää koskaan kaltevalle pinnalle ja lukitse aina jarrut kun poistut sen luota!*
- *Älä istu istuimelle liian taakse. Älä istu (osittain) tavarakassin päällä.*
- *Istu kävelytelineessä suorassa antaen käsien tai käsivarsien levätä työntökahvojen päällä.*
- *Älä nojaudu taaksepäin istuessasi kävelytelineen istuimella.*

Käsijarrun lukitus/vapauttaminen seisontajarruksi

- Lukitse käsijarru painamalla jarrukahvaa alaspäin kunnes kuulet lukittumisen ”klik” äänen.
- Vapauta käsijarru vetämällä kevyesti jarrukahvaa ylöspäin kunnes se vapautuu.



- *Kun kävelytelinettä käytetään seisomatelineenä, seisontajarrut on AINA oltava lukittuina*

Esteiden ylittäminen:

Takapyörän kohdalla oleva runko päättyy kippipolkimeen. Tämä elementti on tarkoitettu rollaattorin käyttäjälle. Alla oleva kuvake näyttää, miten este voidaan ylittää sitä käyttämällä.



Esteen ylittämisen kuvaus:

- aseta rollaattori esteen eteen
- paina kippipoljinta → nosta etupyörät
- siirrä rollaattoria eteenpäin
- laske etupyörät
- varoitus: älä käytä ilman apua, jos liikuntakykyysi on rajoittunut



- Suurin turvallinen kallistus

Istuimen käyttö

- Varmista ennen käyttöä, että jarrut ovat lukittuina.
- Istu aina selkä liikkeen suuntaan.

7. Puhdistaminen ja hoito

Yleispuhdistus:


- Puhdista kävelyteline säännöllisesti kaikesta irtoliasta ja pölystä.
- Irtolika ja pöly kannattaa puhdistaa heti tuoreeltaan ja se onnistuu parhaiten kostealla pyyhkeellä.
- Piintynyt lika voidaan poistaa lämpimällä pesuvedellä (mieto pesuneste, ei syövyttäviä aineita).
- Älä käytä hankaus- tai valkaisuaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa värimuutoksia.
- Kuivaa pinnat pehmeällä kankaalla.

Pyörät:

- Puhdista pyörät lämpimällä vedellä ja miedolla pesunesteellä. Kuivaa kankaalla. Karvat ja pöly kerääntyy pyörän napoihin ja haarukan väliin ja estää vapaan pyörimisen, poista ne aika-ajoin huolella. Perusteellisemman huollon yhteydessä puhdistus helpottuu irrottamalla pyörä haarukasta.
- Voitele säännöllisesti pyöränakselit monitoimiöljyllä tai kun pyörät alkavat pitää ääntä.

8. Tunnistetiedot

Tuotekilpi tunnistetietoineen löytyy rungon alaputkesta. Tuotekilvessä on tärkeää tietoa tuotteesta: nimi, sarjanumero, valmistuspäivä, tuotenumero, max. kuormitus, tavarakassin max. kuormitus, tuotteen leveys, koko ja valmistajan tiedot. Tuotekilpeä ei saa poistaa tuotteesta.

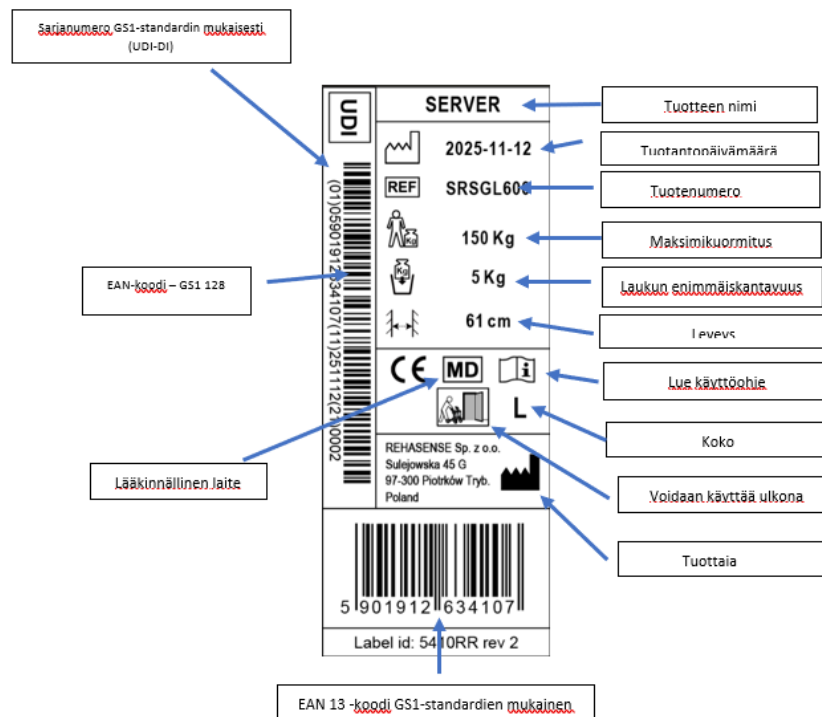

9. Tekniset tiedot

"SERVER" kevyt alumiininen kävelyjalka			
Koko	S	M	L
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg	150 kg	150 kg
Laukun enimmäiskuorma	5 kg	5 kg	5 kg
Kokonaispaino ja laukun paino	7 kg & 0,3 laukku	7 kg & 0,3 laukku	7 kg & 0,3 laukku
Pituus	66 cm	66 cm	66 cm
Kokonaiskorkeus taitettuna (alin)	72 cm	72 cm	79 cm
Leveys taitettuna	23 cm	23 cm	23 cm
Leveys avattuna	61 cm	61 cm	61 cm
Istuimen leveys	46 cm	46 cm	46 cm
Työntökahvan korkeus (säädettävä)	63-79 cm	66-86 cm	74-102 cm
Istuimen korkeus	50 cm	55 cm	62 cm
Jarrut	2 x käsijarru lukitustoiminnolla		
Vakiopyörät (halkaisija ja leveys)	Molemmat pyörät 8" 200 x 35 mm		
Pehmeät pyörät (halkaisija ja leveys)	Molemmat pyörät 8" 200 x 35 mm		

10. Kuljettaminen

Kävelyteline taittuu helposti kasaan kuljetuksen yhteydessä. Mikäli kuljetustarve ilmenee, suosittelemme taittamaan sen käyttöohjeen edellisen kappaleen ohjeistuksen mukaan. Varmista kävelytelineen paikallaanpysyminen ajoneuvossa aina asianmukaisin kiinnityksin, jottei tuote pääse liikkumaan/irtoamaan ja tällöin aiheuta vahinkoja ja loukkaantumisriskiä muille ajoneuvossa olijoille.

11. Huoltotoimet

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liikkuvat /kiristettävät osat ovat hyvin kiristettyinä KOKO AJAN.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien/muttereiden kireyksiä. Mikäli löysyyttä havaittavissa, kiristä huolella.
- Mikäli havaitset rikkoutumia, murtumia tai kulumia, vaihda vialliset uusiin osiin välittömästi
- Voitele silloin tällöin pyörän laakerit (noin kerran vuodessa) tai heti jos ne alkavat pitää ääntä. Anna voitelu asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi.

12. Uudelleenkäyttö kierrätys

Kävelyteline soveltuu erinomaisesti kierrätettäväksi seuraavalle henkilölle, kun alkuperäisen käyttäjän käyttötarve lakkaa. On kuitenkin tärkeää että hyvin laitteen tunteva huollon ammattilainen tarkistaa sen toimintakunnon ja turvallisuuden ennen luovuttamista uudelle käyttäjälle.

Tarkistuksessa on huomioitava seuraavat kohdat:

- rakenne on jäykkä ja tukeva,
- pulttien ja mutterien kireys,
- pehmusteiden kunto,
- pyörien ja laakereiden kunto,
- jarrujen toiminta ja kunto.

Mikäli tarkistuksessa havaitaan puutteita tai kulumia yllämainituissa seikoissa, tarvittavat osat on korvattava uusilla. Käyttäjän vaihtuessa suosittelemme erityisesti vaihtamaan pyörät uusiin. Kaikki ruuvit, pultit ja mutterit on kiristettävä. Tuote puhdistetaan huolella ja pinnat pyyhitään desinfektioaineella.

VAROITUS! Kävelytelineen uudelleen kierrätys on kielletty, mikäli rungossa havaitaan vääntymiä tai murtumia.

Kierrätettäessä kävelyteline uudelle käyttäjälle täytyy varmistaa, että käyttöohje seuraa mukana..

13. Tuotteen hävittäminen

Kun tulee aika poistaa kävelypöytä käytöstä ja hävittää, sitä ei saa heittää yleisjätteen sekaan. Sen kaikki valmistusmateriaalit ovat kierrätettäviä, joten se on hävitettävä kierrätysjätehuollon ohjeistuksen mukaisesti.

14. Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle 8 vuoden takuun valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Takuu ei kata tapauksia, joissa tuotetta on käytetty vastoin käyttöohjeen ohjeistuksia

Om du stöter på tekniska problem, vänligen kontakta din återförsäljare. Du kan också kontakta Rehasense® direkt.

För tekniska frågor gällande produkten, vänligen kontakta importörens kundtjänst eller serviceavdelning eller, i slutändan, tillverkaren Rehasense.

Råkar du ut för tekniska problem kontakta din återförsäljare. Du kan också kontakta Rehasense® direkt.

Tuotetta koskevissa teknisissä kysymyksissä ota yhteys maahantuojan asiakaspalveluun tai huoltoon tai viime kädessä valmistajaan Rehasense.

**Återförsäljarens stämpel:
Jälleenmyyjän leima:**

--

Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com
info@rehasense.com

